


Smith+Nephew

レナシス  
**RENASYS**◇を  
適切にお使いいただくために

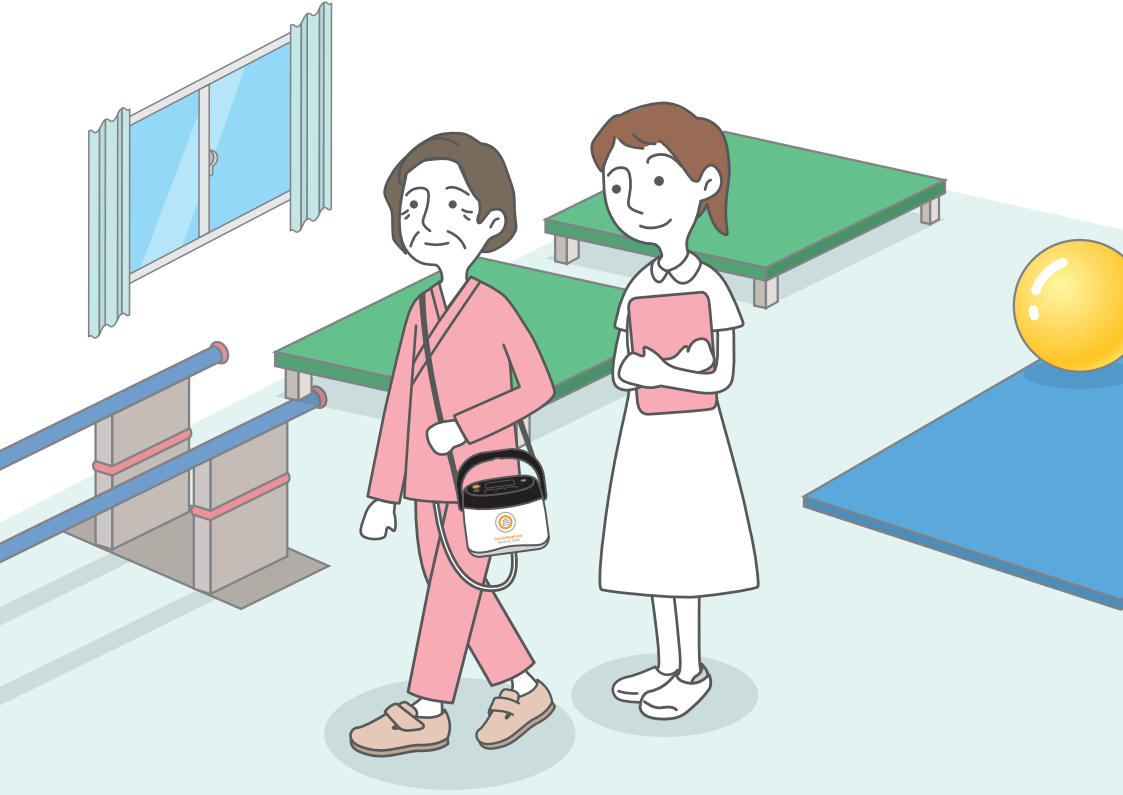



# 安全で効果的な治療のために ご理解いただきたいこと

## 目次

---

### ① レナシス RENASYS<sup>◇</sup>とは？

---

### ② よくある質問




# ① レナシス RENASYS<sup>®</sup>とは？

創傷(キズ)を密閉して、  
持続的に陰圧をかける治療に使用する器械です。  
この治療を局所陰圧閉鎖療法といいます。



## きよく しょ いん あつ へい さ りよう ほう 局所陰圧閉鎖療法の効果

創傷(キズ)に有害な老廃物や細菌を含むしんじゅつえき滲出液(キズからにじみ出てくる液体)を取り除きます。また、陰圧の刺激を受けた細胞が活発になり、同時に血流も増加し、創傷(キズ)の治りを早めます。

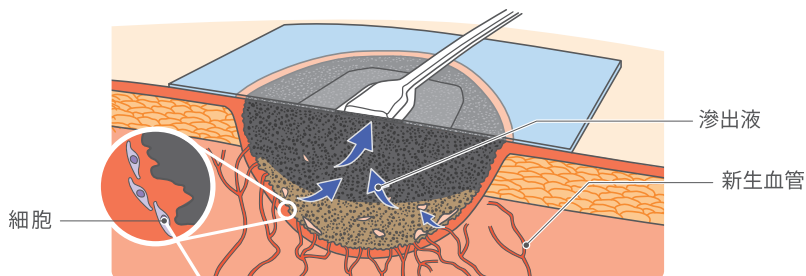

## レナシス RENASYSの適用となる創傷(キズ)

保険適用上、レナシス RENASYSが使用できる創傷(キズ)は以下のとおりです。

- 外傷性裂開創(一次閉鎖が不可能なもの)
- 四肢切断端開放創
- 外科手術後離開創 開放創
- デブリードマン後皮膚欠損創


## ② よくある質問

レナシス  
RENASYS<sup>◇</sup> を使用中によくある質問にお答えします。

**Q. 陰圧は、1日中かけ続けるのですか？**

**A. 治療が終わるまで吸引を継続し、  
陰圧状態を保ちます。**

定期的に充填材を交換する時や、  
検査やシャワー浴時などは、一時的に中断します。

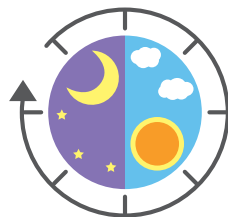

**Q. アラームが鳴ったらどうしたらいいですか？**

**A. あわてずに医療従事者(スタッフ)へ  
お知らせください。**

ご自身で器械を触らないようにしてください。



**Q. 創傷(キズ)に痛みや不快感があったら  
どうしたらいいですか？**

**A. 我慢せずに医療従事者(スタッフ)へ  
お知らせください。**

痛みや不快感がある時は、器械の調整や  
痛み止めの検討を行います。



**Q. 器械は逆さまになっても大丈夫ですか？**

**A. 器械は垂直にぶら下げるか、直立の位置に置いてください。**

斜め、上向き、下向き、逆さまにならないように気を付けてください。



直立に置く



垂直にぶら下げる



寝かせて置く

**Q. 充填材はどれくらいで交換しますか？**

**A. 通常は2～3日に1回交換します。**

創傷(キズ)のサイズ、滲出液の量などで、交換頻度を決定します。

**Q. 寝ているときにチューブが身体の下になっても大丈夫ですか？**

**A. 身体の下敷きになっても、チューブが閉塞することはありません。**

チューブが身体の下敷きになり長時間当たっていると、皮膚が赤くなることがあります。長時間下敷きになることがないように、チューブの位置にはお気を付けてください。

**Q. ベッドから動くことはできますか？**

**A. 装着したまま歩くことができます。**

患者さまの状態や創傷(キズ)の状態により  
医師が判断します。

器械の取り扱いは医療従事者(スタッフ)が行いますので、  
移動時はお知らせください。




**Q. シャワーはできますか？**

**A. シャワーを浴びることができます。**

医師の許可が必要です。

また、シャワー浴時は器械を取り外す  
必要があります。

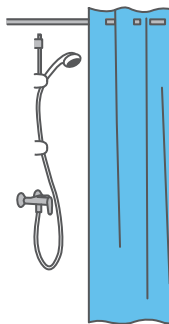

**Q. 外出・外泊することはできますか？**

**A. 外出・外泊はできません。**

入院中にご使用いただく器械です。

外出・外泊時は器械を取り外す必要がありますので、

希望される場合は医療従事者(スタッフ)と相談してください。

製造販売元

**スミス・アンド・ネフュー株式会社**  
**ウインドマネジメント事業部**

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号  
TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755  
仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652  
東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916  
名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420  
大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993  
広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325  
福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

◊Trademark of Smith+Nephew  
©2026 Smith+Nephew

販売店

RN-16  
202604-1