




## Product Overview

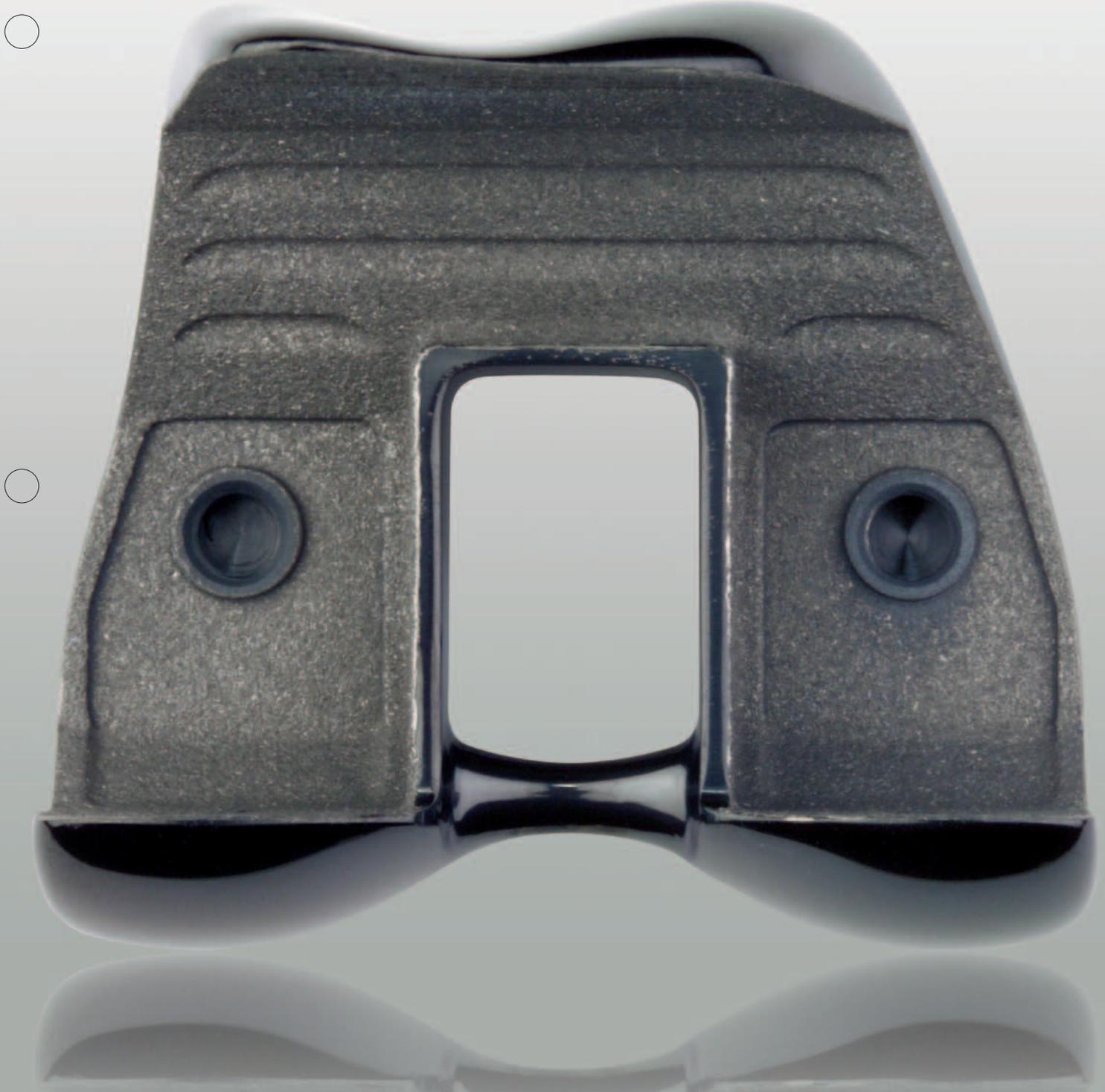

# What's Unique About LEGION<sup>◇</sup>?

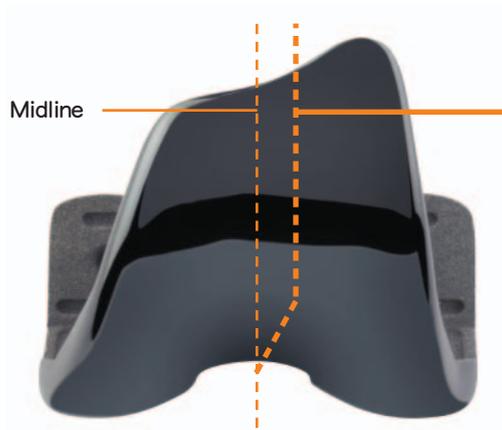

近位を外側にオフセットさせたSカーブパテラグループは良好なパテラトラッキングの獲得を支援します。また、パテラクラックシンドロームのリスクを軽減するため、後方に長くデザインしています。

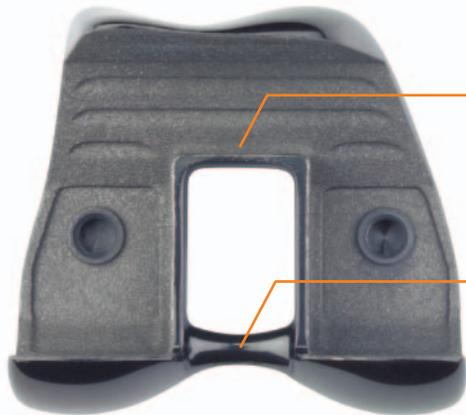


PS BOXは骨温存のため、より小さく後方にデザインされています。

砂時計型PSカムは膝関節回施時にポストとの接触面積を維持できるようにデザインされています。




小さな曲率半径を持つ後方顆部は良好な屈曲可動域の獲得を支援します。また、ティビアルインサートの後方リップをなだらかにすることにより、深屈曲時の大腿骨後方とのインピンジメントのリスクを軽減します。

3°にデザインされたベースプレートの後方傾斜は適切な量のロールバックを促進し、PSポストに過度のインピンジを避けるためにデザインされています。

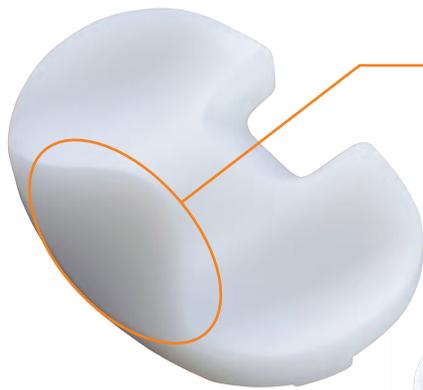

前方部分を面取りすることにより屈曲時に  
膝蓋靭帯の緊張を和らげるデザインになっています。

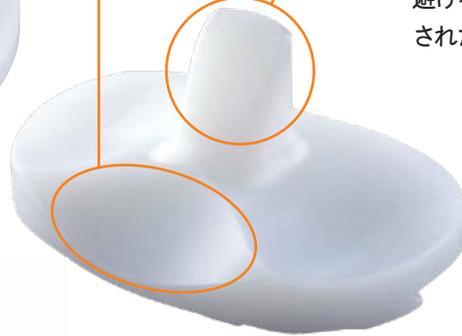

PSポストは膝蓋骨とのインピンジを  
避けるために前方がチャンファーカット  
されたデザインになっています。



内外側非対称なティビアルベースプレートは、  
良好なカバレッジと容易なAPアライメントの獲得が  
期待されます。また、外側後方を小さくすることにより、  
インプラント挿入時に大腿骨外顆とのインピンジの  
リスクを低減します。



脛骨コンポーネントのデルタ型のフィンとステムは、  
良好な固定力が期待されます。フィンとダブテール  
ロック機構をティビアルベースプレートに  
採用することにより、2.3mmの厚さで  
十分な強度を得ることが可能となります。

LEGION® Primaryの手術器械は非常にシンプルで簡便にデザインされています。メジャードリセクション手技と  
ギャップバランス手技にそれぞれ対応しています。大腿骨の骨切りはAnterior Cut First (ACF) と  
Distal Cut First (DCF) が選択できます。リームスルートライアルは手術手技のステップを大幅に削減します。



販売名:LEGION VERILAST PS ニー システム  
承認番号:22400BZX00297000

販売名:LEGION VERILAST CR ニー システム  
承認番号:22400BZX00298000

販売名:ジェネシスII トータル ニー システム  
承認番号:20900BZY00197000

販売名:LEGION リームスルートライアル手術器械  
届出番号:13B1X10222OU0026

販売名:ニーバランサー用手術器械  
届出番号:13B1X10222OU0070

販売名:GENESIS II 手術器械  
届出番号:13B1X10222OU0021

スミス・アンド・ネフュー 株式会社  
オーソペディックス事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8001  
<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith & Nephew.  
©2014-2017 Smith & Nephew KK

OK011  
201701-3  
cat1\_legion\_v3