

医療用品(4)整形用品
一般医療機器 医療用不織布 (JMDNコード:34655000)
(一般医療機器 手術用被覆・保護材(JMDNコード:34654000))
メロリン(未滅菌)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止(一度使用したものを再使用しないでください。)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は、コットン/ポリエステル繊維を多孔性ポリエステルフィルムとポリエステル不織布ではさみこんだ三層構造をもつ非固着性吸収性ドレッシングです。

2. 機能及び動作原理

創部を被覆することにより、滲出液等を吸収し、創を保護します。創接触面は、多孔性ポリエステルフィルム層で、滲出液を素早く吸収するとともに、適用部への固着を防ぎます。

吸収した滲出液はコットン/ポリエステルフィルム層からなる吸収層に保持され、漏れにくく、さらに外表面ははっ水処理が施されています。

サイズ・包装

製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
66974942	10.0×10.0	150
66974943	10.0×20.0	75
66974944	20.0×30.0	25
66974930	50.0×700.0	1巻/袋

【使用目的又は効果】

創傷、術後創傷または外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。本品においては創接触面には、創面に固着しないような加工が施されている。

【使用方法等】

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 本品は滅菌品ではありません。直接、傷へ使用するときなど、
用時滅菌を行ってから使用してください。バルク包装であり、
そのままオートクレーブ滅菌が可能です。
- 2) 貼付の際は、必ず光沢のあるテープ面を創傷・適用部にあて
てください。間違つて外表面をあてると、はっ水処理をしてあ
るため滲出液を吸収せず、浸軟、感染等の原因となることがあ
ります。
- 3) 交換時、本品が創傷面に固着しているときは、蒸留水または生
理食塩液で固着した部分を湿らせ柔らかくしてから剥がして
ください。固着したまま無理に剥がすと新生組織等を損傷する
ことがあります。
- 4) 本品はディスプレイ製品であるので、1回限りの使用のみ
で再使用できません。

＜使用方法＞

1. 貼付前処置

- 1) 創部は、必要に応じて消毒、生理食塩液等で洗浄、十分に清潔
にしてください。
- 2) 創周囲の皮膚を清拭し、十分に乾燥させます。

2. 貼付

- 1) 創の大きさに適したサイズを選択してください。
- 2) 光沢のある透明な多孔性フィルム面を創傷面にあててくださ
い。
- 3) サージカルテープ、サージカルフィルム等で固定してください。

3. 交換及び交換頻度

貼付状況を観察し、滲出液の漏れ、周囲の剥がれなどが起きたと
き、または起きそうなときは、速やかに新しい本品と交換して
ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・痛み等が生じた場合
には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 2) 本品の使用により、治癒や改善が見られない場合または悪化す
る場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 3) 重症の傷ややけど等、創面の状態により傷に固着したり損傷が
生じやすいことが予測される場合は、専門医に相談し、軟膏塗
布など適切な処置を行った後、使用してください。
特に重度熱傷(Ⅲ度熱傷等)へは、直接貼付せず、一次ドレ
ッシングや、軟膏を使用していない限り適用はしないでください。

2. 不具合・有害事象

本品使用による不具合・有害事象としては以下の症状が発現する
ことが考えられる。

- ・キズの感染症状
- ・キズ及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発
赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3. その他の注意

- 1) 使用時に包装が開封、破損または水濡れ及び汚損している場合
には使用しないでください。
- 2) 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 3) 万が一、個包装内の製品に不良が見られた場合には使用しな
いでください。
- 4) 綿の内部に黒色の斑点状のものがみつかることがありますが、
綿の実殻であるため使用上に支障はありません。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法：水漏れに注意してください。

高温多湿、直射日光および、火気を避けて、25℃以下で保管して
ください。

2. 有効期間：製造日より5年間[自己認証(当社データ)による]

3. 使用期限：製品包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

スミス・アンド・ネフュー株式会社

東京都港区芝公園二丁目4番1号

TEL：03-5403-8930

FAX：03-5403-8931



キズにつきにくく吸収性に優れたドレッシング

メロリン[®]

非固着性吸収ドレッシング

smith&nephew

【ユニークな3層構造】

【メロリンの構造と特長】

メロリン独自の3層構造でガーゼにはない機能性を発揮

① 外表面


はっ水処理加工により、不意に付着した水滴などの侵入を防ぎ、ドレッシングを清潔に維持します。

② 吸収層

自重の約10倍の吸収性があります。
ストライクスルー（上層への浸透速度）が遅く、表面にしみ出しにくい構造です。
ボリュームがあり、そのクッション性でキズを優しく保護します。

③ 創傷適用面（光沢のあるフィルム）

キズに固着しにくく、交換時の痛みを軽減します。
無数の小さな穴から、キズからの体液（滲出液）をスムーズに吸収層へ通過、吸収させます。

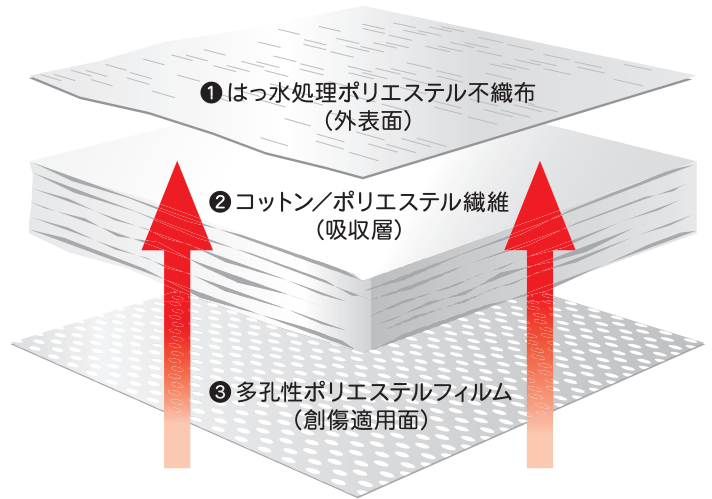

光沢のあるフィルム面を
キズにあててください

【メロリンの使い方】

使用前

キズが重症でないか、感染がないかなど確認してください。

- 感染症状が見られた場合や重症のキズ・やけど、特に重度熱傷（Ⅲ度）の場合は専門医に相談し、適切な処置を行った後に使用してください。
- メロリンの未滅菌タイプを直接キズに貼付する場合は滅菌を行ってから使用してください。


貼り方

1 キズを水道水または生理食塩液等で十分に洗浄してください。消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように水道水または生理食塩液等でよく洗浄してください。本品を交換する場合にも必ずこの操作を行ってください。

2 洗浄した後は、周囲の皮膚の余分な水分をよくふき取ってください。



創の大きさに適したサイズを選択してください。
光沢のあるポリエステルフィルム面を適用部に貼付します。
(反対に貼付すると滲出液を吸収しません。)

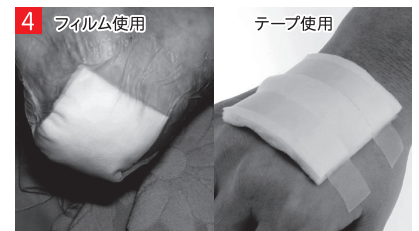

貼付した本品は、フィルムやテープなどで固定します。

交換の目安



滲出液の漏れ、周囲の剥がれ等を観察したら交換してください。濡れたまま、または汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなります。

はがし方

本品を固定しているテープ等を優しくはがし、本品を静かにキズからはがしてください。本品がキズに固着しているときは、蒸留水等で湿らせ柔らかくしてからはがしてください。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社

東京都港区芝公園二丁目4番1号 〒105-0011 TEL.03-5403-8930

<http://www.smith-nephew.jp/wound>

[®]はスミス・アンド・ネフューの登録商標です。