

Úlcera venosa de pierna

EMPIECE AQUÍ ↓

EVALUAR al paciente, el bienestar y la herida¹⁻³



Úlcera Venosa de Pierna

- Asegúrese de que un clínico debidamente calificado haya establecido un diagnóstico preciso para la úlcera venosa de la pierna.
- Asegúrese de que un clínico debidamente calificado haya identificado las comorbilidades que pueden afectar la curación
- Registre el tipo de herida, ubicación, tamaño, condición del lecho de la herida, signos de infección/inflamación, ubicación e intensidad del dolor, adherencia/concordancia con el tratamiento
- Evaluar la piel circundante
- Evaluación de extremidades: movilidad del tobillo
- Inspección visual de la piel: venas varicosas, tinción con hemosiderina, atrofia blanca, dermatitis
- Evaluación vascular:
- Diagnóstico clínico IPTB / escaneo dúplex / palpación
- Palpación de pulsos pedios

CONTAR con un equipo multidisciplinar para promover un enfoque holístico^{3,4}

- Registre la derivación al especialista en cuidado vascular / de heridas / enfermera referente/ equipo multidisciplinar

CONTROLAR o tratar las causas y las barreras para la cicatrización de heridas^{3,4}


- Registre el requisito de terapia de compresión según lo prescrito por el especialista en cuidado de heridas
- Educación del paciente: movilidad y elevación de extremidad, concordancia con la terapia

B


C

D

1. IDENTIFICAR LAS BARRERAS PARA LA CICATRIZACIÓN

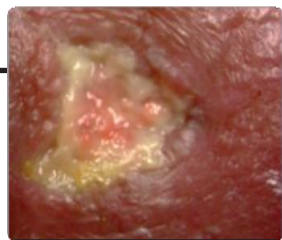

Tejido esfacelado ligero

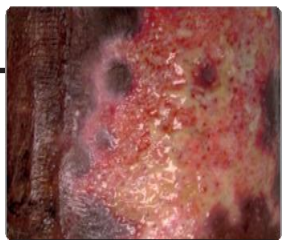

Tejido esfacelado fibroso

2. SELECCIONAR INTERVENCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Limpieza y desbridamiento

Colagenasa* y/o Hidrogel* y Cadexómero yodado*

IRUXOL^o y/o INTRASITE^o GEL

Gama IODOSORB^o

DECIDIR el tratamiento adecuado

3. OBJETIVO CLÍNICO DE LA HERIDA

Lecho de la herida sano y viable

3. OBJETIVO CLÍNICO DE LA HERIDA

Herida sin infección o inflamación

1. IDENTIFICAR LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN



Biofilm^{5,8} y/o encubierto (sutil)⁵⁻⁶



Evidente (Clásica)^{5,6}



Infección diseminada o sistémica^{5,6}

Considere usar el Algoritmo de Gestión de Infección S+N¹²

2. SELECCIONAR INTERVENCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Gestión de la carga microbiana

Cuidado de heridas con biofilm^{7,8}

Gestión local infección de heridas^{++5,6,9}

Gama IODOSORB^o Cadexómero yodado 0,9%

Gama ACTICOAT^o
Para la gestión de infección sistémica o diseminada, derivar inmediatamente al especialista apropiado y a los antibióticos sistémicos según el protocolo local.

1. IDENTIFICAR LAS BARRERAS PARA LA CICATRIZACIÓN



Sequedad



● | ●●

●●●

2. SELECCIONAR INTERVENCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Restaurar el ambiente húmedo óptimo

Hidrogel*

Espuma, fibra gelificante, TPN†

INTRASITE GEL o INTRASITE CONFORMABLE

ALLEVYN^o GENTLE BORDER, ALLEVYN GENTLE, DURAFIBER o PICO[‡]

ALLEVYN LIFE, DURAFIBER o RENASYS[§]


3. OBJETIVO CLÍNICO DE LA HERIDA

Equilibrio óptimo de la humedad

3. OBJETIVO CLÍNICO DE LA HERIDA

Avance del borde de la herida

1. IDENTIFICAR LAS BARRERAS PARA LA CICATRIZACIÓN

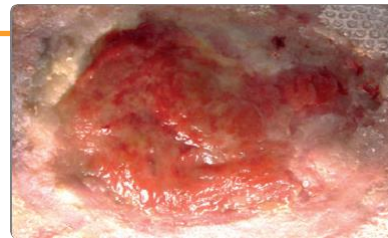

Borde de la herida que no avanza

2. SELECCIONAR INTERVENCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Promover la epitelización y una piel perilesional sana

TPN y cuidados a la piel**

PICO o RENASYS SECURA^o / Gama PROSHIELD^o §

*Usar un apósito secundario apropiado según protocolo local. **Considere si también se requiere desbridamiento del borde de la herida.

REEVALUAR el tratamiento y los resultados obtenidos de forma periódica

Evaluar: Registre la progresión de la herida dentro de los plazos establecidos. **Marcar** si no hay evolución, volver a A, B, C y cambiar el tratamiento donde esté indicado. Una vez que la herida haya cicatrizado, implemente un plan de cuidados para evitar la reaparición de la lesión.

REQUISITO PREVIO: Los no especialistas en el cuidado de heridas, deben estar capacitados sobre la Preparación del lecho de la herida T.I.M.E. y cómo realizar una evaluación integral de la herida. Desarrollado con el apoyo de Glenn Smith¹⁰ y Moore et al. 2019¹¹

†TPN: Terapia de presión negativa. ‡Nivel de exudado para heridas apto para TPN. §La gama SECURA incluye SECURA No-Sting Barrier Film, film barrera no irritante en sus diferentes presentaciones: spray, torundas y toallitas; La gama PROSHIELD incluye PROSHIELD Plus y PROSHIELD Foam & Spray. ¶Cuidado de heridas con biopelícula: desbridamiento, limpieza y uso de agente antibiopelícula. ++ Desbridamiento y limpieza y uso de un antimicrobiano tópico eficaz según el protocolo local.

Referencias 1. Schultz GS, et al. Wound Rep Reg (2003);11:1–28; 2. Leaper DJ, et al. Int Wound J 2012; 9 (Suppl. 2):1–19; 3. Kantor J, et al. Br J Dermatol 2000; 142: 960–964; 4. Gelfand JM, et al. J Invest Dermatol 2002; 119: 1420–1425; 5. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International (2016). 6. Weir D, Schultz G. Assessment and Management of Wound-Related Infections. In Doughty D & McNichol L (Eds.). Wound, Ostomy and Continence Nurses Society Core Curriculum: Wound Management (p. 156–180). 2016. Philadelphia: Wolters-Kluwer. 7. Wolcott RD, et al. J Wound Care 19(2): 45–53 (2010). 8. Schultz G, et al. Wound Repair Regen 25(5): 744–757 (2017). 9. Ayello EA, et al. Wounds Int. 1–24 (2012). 10. Smith G, et al. Journal of Wound Care 2010, vol 19, no.9; 11. Moore Z, et al. Journal of Wound Care, vol 28, no 3, March 2019: 154–161. 12. Dowsett C, et al. Wounds Int. 2020;11(3):20–27.

Los productos utilizados en el T.I.M.E. 2.0 herramienta de apoyo a la decisión clínica puede variar en diferentes mercados. No todos los productos mencionados pueden estar aprobados o disponibles para uso en todos los mercados. Consulte a su representante local de Smith + Nephew para obtener más detalles sobre los productos disponibles en su mercado. Destinado solo a profesionales de la salud fuera de los EE. UU.

Smith + Nephew no proporciona asesoramiento clínico. La información presentada no es, ni pretende ser, un consejo médico. Para obtener información detallada del dispositivo consulte las Instrucciones de uso antes de usarlo. Es responsabilidad de los profesionales de la salud determinar y utilizar los productos apropiados de acuerdo con su propio criterio clínico.

Smith & Nephew S.A.U. Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). T. 902 30 31 60 - F. 902 30 31 70. *Marca registrada de Smith+Nephew. ©Todas las marcas registradas están reconocidas. 29664-es V1 VLU TIME CDST 0423