



**Smith+Nephew**

**ENDOBUTTON  
CL BTB**

Fixation Device

エンド・ボタンCL BTB



エンド・ボタンCL BTB固定器具は強力で信頼できるACL再建を提供し、また今までのインターフェランスクリューを用いた固定方法による靭帯グラフトの裂傷、後方のBlowoutといった合併症を防ぐことができます。

CL技術のEBCL器具をCortical固定に使用すると、結び目の必要性を省き、強くて堅い再建を行うことができます。これはまた大腿骨トンネルをより後方に位置させることを可能にし、もし必要とあらば360度、骨とグラフトを接触させることができます。このようなエンド・ボタンCLの利点と共にエンド・ボタンCL BTBもACL再建術に有益であるといえます。

## グラフトへCLを取り付ける方法



図1  
エンド・ボタンCL BTB

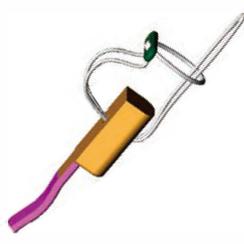


図2  
長いCLの輪をグラフトの骨片部に通す  
次にその長いCLの輪を短いCLの輪に通す

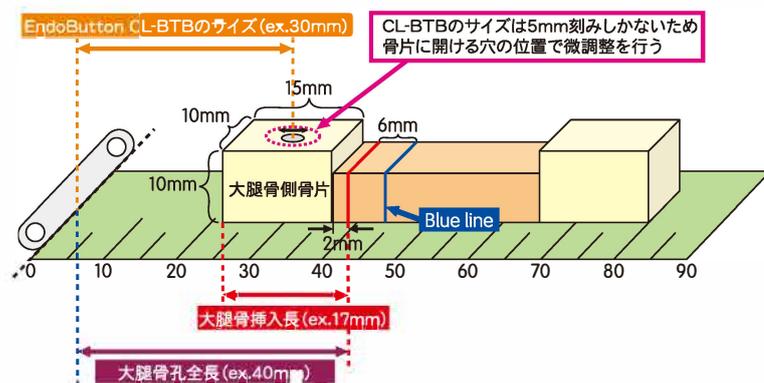


図3  
長いCLの輪をエンドボタンの上に反す



図4  
器具を強く締める

## EndoButton CL-BTB size計算表



大腿骨側の骨髄移行部を大腿骨の関節面に合わせたい場合

1. Graftをグラフトマスターの目盛りの上に置く
2. 骨髄移行部より2mm腓側のところに引いたred lineが大腿骨孔長の目盛りの上にくるようにする (大腿骨側骨片が関節内に出てこないようにする為)
3. EndoButton CL-BTBのサイズを決定する
4. サイズに合わせて、大腿骨側の骨片にCL-BTBを通す穴の位置を調節する

## オーダーインフォメーション

カタログ番号	製品名
72203330	エンド・ボタンCL BTB 15mm
7210080	エンド・ボタンCL BTB 20mm
7210081	エンド・ボタンCL BTB 25mm
7210082	エンド・ボタンCL BTB 30mm
7210083	エンド・ボタンCL BTB 35mm
7210084	エンド・ボタンCL BTB 40mm
7210085	エンド・ボタンCL BTB 45mm

スミス・アンド・ネフュー株式会社

スポーツメディスン事業部

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

承認番号:20600BZY00994000  
販売名:エンド・ボタン