

# Guía de referencia rápida del sistema **RENASYS<sup>◇</sup> EDGE**



**Smith-Nephew**

**RENASYS<sup>◇</sup> EDGE**

Sistema de Terapia de  
Presión Negativa

[smith-nephew.com/renasysedge](http://smith-nephew.com/renasysedge)

# El sistema RENASYS<sup>®</sup> EDGE



## RENASYS<sup>®</sup> EDGE

Sistema de terapia de presión negativa

# Encienda el dispositivo y comience la terapia

Pulse el botón para **iniciar/ detener** la terapia



Encienda la bomba




Cuando la bomba funciona correctamente, se enciende la **luz OK**

Seleccione el nivel de presión negativa prescrito con los botones + o -

# Instalación de un depósito nuevo



1 Asegúrese de que la terapia esté en pausa o la bomba esté **apagada**

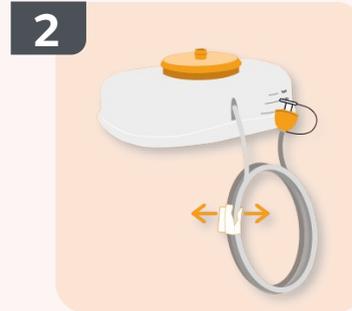


2 Quite la cinta de papel que rodea el tubo del depósito y desenrolle por completo el tubo



3 Coloque el depósito de modo que el tubo esté dirigido hacia la parte posterior de la bomba y después, alinee la bomba sobre el depósito



4 Presione sobre la bomba hasta que escuche un clic del botón de liberación

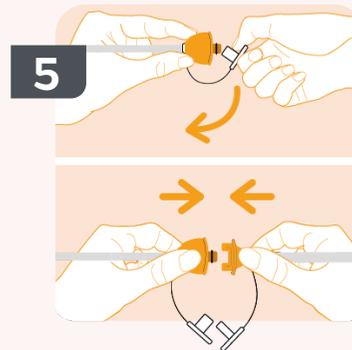

5 Quite las tapas de los dos conectores rápidos y presiónelos uno contra el otro hasta que encajen con un clic



6 Inicie la terapia pulsando el botón .

# Kit de apósitos de espuma RENASYS<sup>®</sup>-F y de gasa (-G) con aplicación de puerto blando

## Limpie y desbride




**1** Desbride todo el tejido escarificado desvitalizado o necrótico que pueda haber. Limpie la herida y séquela aplicándole brevemente varias veces un paño.



**2** Si lo desea, proteja la piel perilesional de la exposición a la humedad y el adhesivo utilizando un sellador cutáneo.

Deje que el sellador cutáneo se seque por completo antes de colocar la película transparente.

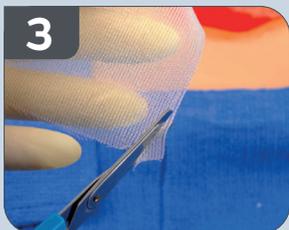

**3** Si se desea, puede aplicarse una capa de contacto con la herida no adherente. Recorte una sola capa de gasa no adherente y colóquela de un lado a otro del lecho de la herida.

## Si se va a cubrir la herida con un apósito de espuma...



Corte el apósito de espuma para adaptarlo al tamaño y la forma de la herida, y coloque la espuma cortada en la herida. Evite dejar el relleno demasiado apretado. La espuma debe llenar por completo la cavidad de la herida. En heridas profundas puede que sea necesario apilar trozos de espuma.

**Precaución:** si son necesarios varios trozos de relleno de la herida para rellenar el perfil de la herida, cuente y anote cuántos trozos hay presentes para asegurarse de retirarlos todos al cambiar el apósito y, así, reducir al mínimo el riesgo de retención y la posibilidad de infección.



La espuma debe cortarse para que encaje holgadamente en el lecho de la herida. Para evitar dañar el tejido subyacente, no fuerce ni compacte con fuerza la espuma en ninguna zona de la herida.



No coloque espuma en túneles ciegos o no explorados.

Si se presenta un túnel de profundidad conocida, corte un trozo de espuma más largo que el túnel, para asegurar el contacto directo con la espuma en la cavidad primaria de la herida.

Para evitar que caigan fragmentos de espuma en la herida, no corte la espuma directamente sobre la cavidad de la herida.

Tras el corte, retire los fragmentos de espuma sueltos frotando los bordes de la espuma para alejar estos de la herida abierta.

## Si se va a cubrir la herida con un apósito de gasa...



Aplique una capa de gasa humedecida con solución salina al lecho de la herida. Desenrolle el resto de la gasa humedecida con solución salina y llene holgadamente toda la cavidad de la herida. Evite compactar demasiado el relleno de la herida.



**Precaución:** si son necesarios varios trozos de relleno de la herida para rellenar el perfil de la herida, cuente y anote cuántos trozos hay presentes para asegurarse de retirar todos ellos al cambiar el apósito y, así, reducir al mínimo el riesgo de retención y la posibilidad de infección.

El uso de gasa como relleno en heridas situadas en lugares de carga de peso o que tengan un drenaje de moderado a abundante pueden dificultar la transferencia de líquido y vacío. En estas heridas se recomienda utilizar espuma.



Mientras sostiene la película transparente, deje al descubierto un lado del revestimiento adhesivo retirando un solo panel, y aplique el revestimiento sobre la herida.

Cubra el relleno de la herida con la película transparente, retirando los paneles adhesivos restantes para sellar y, a continuación, el panel de estabilización superior.

**Nota:** para reducir al mínimo la tensión o los traumatismos en la piel de alrededor de la herida, evite estirar la película transparente y tirar de ella. Si se utilizan varios trozos de la película transparente, solape los bordes de este un mínimo de 7,5 cm.



## Aplique el puerto blando RENASYS



Corte una abertura circular (de un diámetro no inferior a 2 cm) en el centro del film, sobre el relleno de la herida. Retire la película transparente suelto que pueda haber en la herida y deséchelo.





Retire el panel de revestimiento adhesivo del apósito con puerto blando RENASYS y alinéelo directamente sobre el orificio de la película transparente.

Presione ligeramente para fijar el puerto blando a la película transparente.



Alise el apósito mientras retira el marco de estabilización del puerto blando RENASYS.



Fije el puerto blando RENASYS al paciente siguiendo el protocolo de su centro.

Asegúrese de que el disco de aireación, situado cerca del conector de conexión rápida naranja, no quede cubierto ni ocluido de otra manera por el método utilizado para fijar el puerto blando.



Conecte el puerto blando RENASYS al tubo del depósito presionando los conectores de conexión rápida naranja para unirlos. Un chasquido indicará que la conexión es firme. Active la bomba RENASYS asegurándose de que esté funcionando al nivel de terapia prescrito. Consulte el manual de la bomba RENASYS para obtener instrucciones de uso completas. El apósito acabado deberá quedar totalmente comprimido, ser firme al tacto y no presentar fugas.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas sus indicaciones de uso, contraindicaciones, efectos, precauciones, advertencias e información de seguridad importante, consulte las instrucciones de uso del producto antes de utilizarlo.

# Alertas



Terapia demasiado tiempo en pausa



Batería baja



Fuga de aire moderada



La bomba está demasiado caliente para cargarse


# Alarmas



Bloqueo



Batería baja crítica

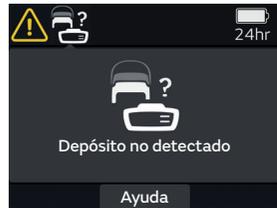

Falta el depósito



Fallo de la batería



Depósito lleno



Bomba demasiado caliente



Fuga de aire crítica



Vacío alto/Fallo del sistema

# Glosario de iconos y símbolos

## Botones de la bomba

	Reproducir/Pausa
	Silenciar
	Liberar depósito
	Bloquear/Desbloquear (encastrado)
	Tres botones multifunción

## Luces de la bomba

	Sistema OK
	Advertencia de la batería
	Alarma/Alerta
	Indicador de alimentación externa

## Iconos de la batería

	Carga completa
	Baja
	Extremadamente baja
	Cargando
	Carga completa
	Fallo de la batería

## Iconos de la pantalla de terapia

	Modo de conector en Y
	Modo intermitente
	Modo continuo

## Iconos de la barra de estado

	En pausa
	Sistema OK
	Alarma/Alerta
	Fuga de aire crítica
	Fuga de aire moderada
	Bloqueo
	Falta el depósito
	Fallo del sistema/Vacío alto
	Alerta de sobrecalentamiento de la bomba
	Alarma de sobrecalentamiento de la bomba
	Demasiado tiempo en pausa
	Depósito lleno
	Bloqueado
	Bluetooth activado
	Silenciada

¿Desea obtener más información?

Escanee el código QR para ver:

- Contactos de atención al cliente
- Vídeos de resolución de problemas
- Vídeos de funcionamiento básico



**Advanced Wound Management**  
Smith & Nephew, Inc.  
Fort Worth, TX 76109 USA

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

T: +1 800 876-1261  
F: 727 392-6914

® Marca comercial de Smith+Nephew  
Todas las marcas registradas están reconocidas  
©2024 Smith+Nephew  
RNME31 -es-42081-0524

Dar forma a lo posible en el cuidado de heridas