



1. Passer le fil de suture dans la boucle du tire-fils.

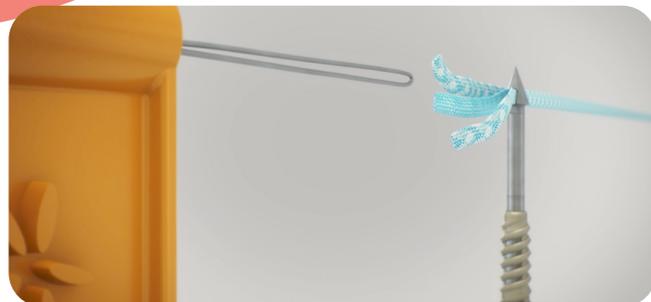

2. Tirer sur le tire-fils pour charger le fil dans l'implant. Répéter 1 + 2 jusqu'à ce que tous les fils souhaités soient chargés.



3. Localiser le site d'insertion. Préparer le trou avec le dispositif de préparation de trou recommandé dans la notice d'utilisation.

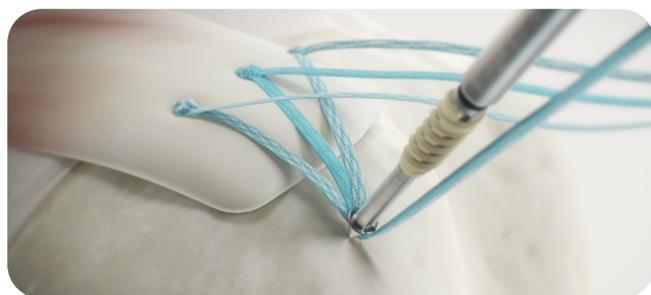

4. Introduire le dispositif dans l'articulation et tendre le mou du fil de suture avant l'insertion.




5. Insérer l'implant distal dans l'os jusqu'à ce que le premier filetage de l'implant proximal soit partiellement positionné dans l'os. Tendre les fils de suture pour garantir une compression adéquate des tissus. Fixer éventuellement les fils de suture. Vérifier que le premier filetage de l'ancre proximale est partiellement positionné dans l'os.



6. Faire descendre la vis interne en tournant la molette la plus petite et la plus proximale. Tourner dans le sens horaire jusqu'à entendre au moins un clic.



7. Tourner la molette la plus grosse et la plus distale dans le sens horaire pour avancer l'implant proximal jusqu'à ce que la marque laser soit au niveau de la surface de l'os. Pour retirer le dispositif d'insertion de l'articulation, tirer sur le manche.

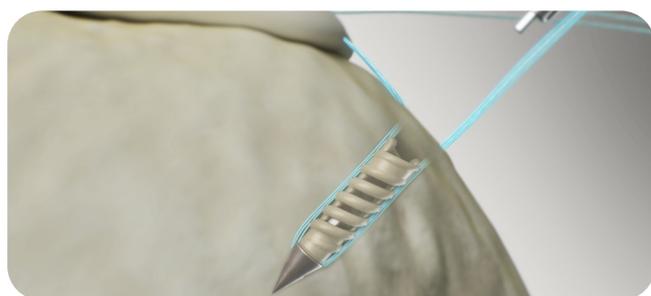

8. Tirer sur le dispositif d'insertion pour le retirer.

## Informations de commande

Ancres de suture sans nœud HEALICOIL <sup>®</sup> Knotless	
N° de référence	Description
72205137	Ancre de suture sans nœud HEALICOIL Knotless PK, 5,0 mm
72205138	Ancre de suture sans nœud HEALICOIL Knotless PK, 5,0 mm, auto-impactable
72205308	Mèche pour ancre sans nœud HEALICOIL Knotless, extrémité à langue d'aspic, 4,75 mm, réutilisable
72201915	Pointeau conique, 3,8 mm, réutilisable
72202621	Pointeau conique, 3,8 mm, jetable
72203710	Taraud réutilisable, 5,5 mm
72203952	Taraud jetable, 5,5 mm

Toutes les photos et tous les diagrammes sont exclusivement fournis à titre d'illustration. Les produits ne sont pas à l'échelle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'un des produits cités dans cette présentation et sur les indications, les contre-indications, ainsi que les informations de sécurité relatives au produit, se reporter à la notice d'utilisation du produit en question.

En savoir plus sur [www.smith-nephew.com/france](http://www.smith-nephew.com/france)

#### Distributeur en France :

Smith & Nephew, S.A.S.  
40/52 Boulevard du Parc  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
France  
T+33(0) 800 111 220  
F+33(0) 1 46 41 24 11

#### [www.smith-nephew.com/france](http://www.smith-nephew.com/france)

Smith & Nephew, S.A.S. Société  
par Actions Simplifiée au capital  
de 3.366.150 euros -577 150  
840 R.C.S. Nanterre

◇ Marque de commerce de Smith+Nephew.

©2020 Smith+Nephew. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce sont  
reconnues. Imprimé en France. 22198-fr-EMEA  
V4 09/20  
S20-093