

リムーブ 取扱説明書

【使用上の注意事項】

- ・ 健常皮膚以外には使用しないでください。粘膜・傷・腫れ物・湿疹等のある部位には使用しないでください。
- ・ 目に入らないように注意してください。
- ・ 火気をさけ、換気の良い所で使用してください。
- ・ 肌に異常があらわれた場合は、使用を中止して専門の医師に相談してください。
- ・ 使用後は使用部位を石けん等で良く洗い、すすいだ後、十分に乾燥させてください。これらが不十分な場合には皮膚かぶれや、新しく使用するストーマ用装具やテープ等の粘着が悪くなる原因となります。
- ・ 子供の手の届かない所で保管、廃棄してください。
- ・ 安全にお使いいただくため、用途以外には使用しないでください(外用のみ)。
- ・ リムーブは可燃性ですので、火気のない涼しい場所に保管、廃棄してください。着火源の付近では火のつく恐れがあります。

【製品概要】

リムーブはストーマ用装具やテープ等の粘着製品の除去用剥離材です。ハイドロコロイドやアクリル系等の粘着剤を皮膚からやさしくはがし易くし、皮膚に残った粘着剤のべとつきも除去します。

【用途】

粘着性のストーマ用装具やテープ等の除去や、皮膚に残った粘着剤のべとつきを除去します。

【使用方法】

1. 紙ナプキンタイプは、袋の一部を切って、リムーブを手で取りだしてください。
2. ボトルタイプは、図のようにバルブを開け、ガーゼやコットンにつけてご使用ください。



コットンやガーゼにつけて使用します。
使用後は必ずキャップを閉めてください。

3. 皮膚と粘着部のはじの方からしみ込ませるようにぬり、徐々にまわりからはがしてください。
4. 使用後は皮膚を石けん等でよく洗い、すすいだ後に乾いたガーゼ等で十分に拭きとり、乾燥させてください。

緊急の処置：

- ・ 目に入った場合は、直ちに大量の水で良く洗い流した後、専門の医師の手当てを受けてください。
- ・ 誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに専門の医師の手当てを受けてください。

注意：

- ・ 衣服などについた場合は、直ちに石けんとお湯でもみ洗いし、その後通常の洗濯をしてください。
- ・ じゅうたんや床にこぼすとシミになります。不要な布など敷いて使用してください。

【成分】

ジプロピレングリコールメチルエーテル、C10-11イソパラフィン、アロエエキス、ベンジルアルコール、香料

【貯法】

高温・直射日光をさけて火気のない涼しい場所で保管してください。

【製品仕様】

製品番号	規 格
403100	紙ナプキンタイプ 50枚/箱
403300	236mL/ポリ容器

スミス・アンド・ネフュー株式会社
東京都港区芝公園二丁目4番1号
TEL：03-5403-8930
FAX：03-5403-8931

W-F001-001