

Pensos ALLEVYN[®]: Guia de aplicação para áreas difíceis

Os pensos ALLEVYN[®] estão disponíveis numa variedade de formatos e tamanhos que, dependendo da ferida, podem ser utilizados em diversas zonas do corpo.^{1-16†}

ALLEVYN[®] Pensos para o calcanhar



Com um penso ALLEVYN[®] LIFE ou GENTLE BORDER Heel, retire a película protetora central e coloque o calcanhar sobre o penso, com os lóbulos superiores em ângulo reto com a perna.




Retirar a película protetora de um lóbulo superior, dobrá-la sobre o maléolo e fixá-la no lugar. Repita com o outro lóbulo superior.



Retire a película do lóbulo inferior e fixe-a. O penso deve estar agora no lugar. Certifique-se de que o penso está aderido à pele, alisando os bordos a toda a volta.

ALLEVYN[®] Pensos para as mãos

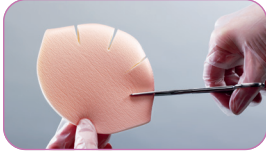

Com um penso ALLEVYN[®] HEEL, fazer 4 cortes equidistantes na curvatura. Os cortes devem ter cerca de 1,5 cm de profundidade, consoante o tamanho do dedo.



Coloque o penso sobre a mão. Introduzir os dedos através dos 4 cortes efetuados. Certifique-se de que o penso está bem ajustado.



Para fixar, aplique o rolo de película transparente OPSITE[®] FLEXIFIX na parte inferior do penso, na base da palma da mão. Isto irá fixar a parte de trás e da frente do penso. Certifique-se de que o OPSITE[®] FLEXIFIX forma um rebordo no penso e não cobre completamente o ALLEVYN[®] HEEL.

ALLEVYN[®] Pensos para os dedos da mão



Utilize um penso ALLEVYN[®] ADHESIVE ou GENTLE BORDER (ex. 7,5 cm x 7,5 cm). Assegure-se de que a pele circundante está seca. Vire o penso na diagonal e coloque o dedo no canto do penso.



Levante o penso sobre a ponta do dedo. Vire o dedo e fixe os cantos do dedo alternadamente.



Certificar-se de que o penso está aderido com a pele, sem rugas. Uniformizar os bordos em toda a volta.

ALLEVYN[®] Pensos para os dedos do pé



Use um penso quadrado ALLEVYN[®] (ex. 7,5cm x 7,5cm GENTLE BORDER ou ADHESIVE) e vire-o na diagonal. Certifique-se de que a pele circundante está seca. Coloque o dedo do pé no canto do penso.



Levante o penso sobre a ponta do dedo do pé. Vire os bordos do penso para a parte de trás do dedo do pé.



Certifique-se de que o penso fica aderido ao dedo do pé e os rebordos uniformes a toda a volta.

ALLEVYN[®] Pensos para entre os dedos dos pés



Utilize um penso ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE 5cm x 5cm. Dobre o penso ao meio. Faça 2 cortes no penso com 1cm/2cm de distância.



Introduza os dedos dos pés nos cortes efetuados. Certifique-se de que existe penso suficiente entre os dedos dos pés.



Fixe no local com OPSITE[®] FLEXIFIX. Garanta que a película OPSITE[®] FLEXIFIX forma um rebordo no penso e não cobre completamente o ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE.

ALLEVYN[®] Pensos para os cotovelos

As proeminências ósseas, como os cotovelos, são propensas a desenvolver feridas.

Os pensos ALLEVYN[®] ADHESIVE adaptam-se aos contornos do corpo e são confortáveis para o paciente.⁸⁻¹⁰

Os pensos ALLEVYN[®] GENTLE BORDER permitem flexibilidade e são adaptáveis a zonas difíceis e às áreas do corpo propensas a movimentos.³⁻⁶



ALLEVYN[®] ADHESIVE Sacrum



ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Multisite



ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Heel

ALLEVYN Pensos para a mama

A cirurgia da mama causa, com frequência, feridas que necessitam de ser cobertas com um penso.

Os pensos ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Multisite permanecem suaves na pele e são adaptáveis para se ajustarem a uma ferida em qualquer área à volta da mama.^{3,5,17,18}

Os pensos ALLEVYN[®] LIFE são adaptáveis^{1,19} e podem ser aplicados em qualquer zona difícil do corpo.^{1,2}



ALLEVYN[®] GENTLE BORDER Multisite



ALLEVYN[®] LIFE

ALLEVYN [®] LIFE		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	10
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	10
66801069	15,4 cm x 5,4 cm	10
66801070	21 cm x 21 cm	10
66801304	25 cm x 25,2 cm Heel	5
66801306	17,2 cm x 17,5 cm Sacrum	10
66801307	21,6 cm x 23 cm Sacrum	10
ALLEVYN [®] GENTLE		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66802128	5 cm x 5 cm	10
66802129	10 cm x 10 cm	10
66802130	10 cm x 20 cm	10
66802131	15 cm x 15 cm	10
66802132	20 cm x 20 cm	10
66802133	20 cm x 50 cm	2

ALLEVYN [®] GENTLE BORDER		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66800269	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800270	10 cm x 10 cm	10
66800900	10 cm x 20 cm	10
66800264	10 cm x 25 cm	10
66800265	10 cm x 30 cm	10
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	10
66800975	15 cm x 15 cm	10
66800273	17,5 cm x 17,5 cm	10
66800959	17,1 cm x 17,9 cm Multisite	10
66800897	16,8 cm x 17,1 cm Sacrum	6
66801031	21,6 cm x 23 cm Sacrum	10
66800506	23 cm x 23,2 cm Heel	5

ALLEVYN [®] GENTLE BORDER LITE		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66800833	5 cm x 5 cm	10
66800834	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800835	10 cm x 10 cm	10
66800836	5,5 cm x 12 cm	10
66800837	8 cm x 15 cm	10
66800840	15 cm x 15 cm	10
66801012	10 cm x 20 cm	10
66801013	8,6 cm x 7,7cm Oval	10
66801014	15,2 cm x 13,1 cm Oval	10
66801041	8 cm x 8,4 cm Multisite	10

ALLEVYN [®] HEEL		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66007630	10,5 cm x 13,5 cm Heel	5

ALLEVYN [®] ADHESIVE		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66000043	7,5 cm x 7,5 cm	10
66000599	10 cm x 10 cm	10
66000044	12,5 cm x 12,5 cm	10
66000801	15 cm x 15 cm	10
66000045	17,5 cm x 17,5 cm	10
66000046	22,5 cm x 22,5 cm	10
66000451	22 cm x 22 cm Sacrum	10
66000700	17 cm x 17 cm Sacrum	10

ALLEVYN [®] NON-ADHESIVE		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66007643	5 cm x 5 cm	10
66007637	10 cm x 10 cm	10
66007335	10 cm x 20 cm	10
66000093	15 cm x 15 cm	10
66007638	20 cm x 20 cm	10

ALLEVYN [®] TRACHEOSTOMY		
Referência	Tamanho	Unid./Cx.
66007640	9 cm x 9 cm Tracheostomy	10

* Pensos ALLEVYN LIFE, ALLEVYN GENTLE BORDER, ALLEVYN GENTLE BORDER LITE, ALLEVYN ADHESIVE e ALLEVYN NON-ADHESIVE.

Referências: **1.** Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK.* 2014;10(3):80–87. **2.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *Journal of Community Nursing.* 2013;27(5):50–59. **3.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S.A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK.* 2009;5(3):32–44. **4.** Smith+Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. **5.** Smith+Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. **6.** Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. *Wounds UK.* 2016;12(2):70–78. **7.** Stephen-Haynes J, Greenwood M. Clinical evaluation of Allevyn Gentle Border Lite within one health trust. *British Journal of Nursing.* 2011;20(20):S36–S42. **8.** Leonard S, McCluskey P, Long S, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK.* 2009;5(1):17–26. **9.** Bale S, Squires D, Varnon T, Walker A, Benbow M, Harding K. A comparison of two dressings in pressure sore management. *J Wound Care.* 1997;6(10):463–466. **10.** Amione P, Ricci E, Topo F, et al. Comparison of Allevyn Adhesive and Biatain Adhesive in the management of pressure ulcers. *J Wound Care.* 2005;14(8):365–370. **11.** Smith+Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN Variants. Internal Report. DS/14/318/R. **12.** Williams C, Young T. Allevyn adhesive. *Br J Nurs.* 1996;5(11):691–693. **13.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care.* 1994;3(5):224–228. **14.** Smith+Nephew 2015.Cutting of ALLEVYN Variants Internal Report DS/14/318/R. **15.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care.* 1994;3(5):224–228. **16.** Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing.* 1994;3(20):1049–1050, 1052–1043. **17.** Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Case series evaluation: The use of Allevyn gentle border multisite on chronic wounds. *Wounds UK.* 2012;8(4):110–118. **18.** Smith+Nephew 2018. Volunteer Evaluation of Wound Care Dressing Product Features. Internal Report. AWM/AWC/001/v.1. **19.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK.* 2013;9(4):91–95.

Para obter informações detalhadas sobre o produto, incluindo indicações de utilização, contraindicações, precauções e avisos, consulte as Instruções de Utilização (IFU) aplicáveis do produto antes de o utilizar.

Advanced Wound Management
Smith & Nephew Lda.
Rua do Parque Tejo, nº7
2625-437 Forte da Casa
Portugal

www.smith-nephew.com

Linha Verde Customer
Care: 800 209 135
Tel.: +351 214 460 650

♦ Marca registada de Smith+Nephew
♦ Todas as marcas reconhecidas
©Fevereiro 2025 Smith+Nephew
AWM-AWC-40359-pt V2