

# + IV3000<sup>◇</sup> 7 x 9 cm, geschlitzt

# Smith+Nephew

## IV3000<sup>◇</sup>

Kanülen- und Katheter-Fixierverband

Geeignet zur Fixierung von peripheren Kathetern



### Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäß lokalen Protokollen einschließlich möglicher Wundnähte reinigen und gründlich trocknen.

Dann Abschnitt 1 vom gerundeten Ende des Verbands entfernen.

Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



### Schritt 2

Die Fixierstreifen können zur zusätzlichen Sicherheit auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper verwendet werden, z. B. zur Stabilisierung der Katheterlumen.



### Schritt 3

Das mit 2 markierte Abdeckpapier abziehen.



### Schritt 4

Den Verband über die Punktionsstelle legen und sicherstellen, dass sich der Port in der Mitte des Verbandes (transparente Folie) befindet.

Glätten Sie die Ecken des Verbandes.

Mit Hilfe der klebefreien Griffleiste die mit 3 markierte obere Trägerfolie abziehen.



### Schritt 5 – Fortsetzung

Entfernen Sie das mit 4 markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten.

Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Befestigung des Katheters sicherzustellen.



### Schritt 6

Die Folie um den Katheter herum gut modellieren.

Dann die relevanten Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt 1 vermerken.

Das beschriftete Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband anbringen ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken.



### Entfernung

Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.

Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.



**Tipp:** Bitte beachten Sie bei der Applikation die aktuellen Hygieneanforderungen des Robert-Koch-Instituts. Die klebefreien Griffleisten von IV3000<sup>◇</sup> ermöglichen die Applikation auch mit Handschuhen. Ein vorheriges Anwärmen des Verbandes in den Handflächen aktiviert den Kleber schneller. Die Haut sollte immer trocken und fettfrei sein. Keine Bodylotion oder ähnliches vorher auftragen. Für schwierige Stellen, ist die Unterstützung von SECURA<sup>◇</sup> unseres sterilen, reizfreien Hautschutzprodukt zu empfehlen. Modellieren Sie den Verband gut an. Fixierstreifen sind individuell aufbringbar, die Abbildung ist ein Beispiel.

Dieses Poster ist hygienisch abwischbar

## Bestellinformation

Abbildung	Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)	Empfohlene Indikation
<b>Verband geschlitzt</b>						
	66004011	5cm x 6cm	0001 9399	2000 Stück (20 OP)	100 Stück	Periphere Katheter
	4006	7cm x 9cm	0749 8902	2000 Stück (20 OP)	100 Stück	Periphere Katheter

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)\*

\* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

Wundmanagement Deutschland  
Smith & Nephew GmbH.  
Friesenweg 4 / Haus 21  
D-22763 Hamburg

T +49 (0) 40 87 97 44 350  
F +49 (0) 40 87 97 44 375  
www.smith-nephew.de  
info@smith-nephew.com

© 2021 Smith & Nephew GmbH, <sup>◇</sup> Markenzeichen von Smith+Nephew  
AWM-AWC-18878; Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.