


- Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge optimal an
- Keine Sekundärfixierung nötig
- Duschfest
- Mit EXULOCK[◊]- und EXUMASK[◊]-Technologie



- + Für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation
- + Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet

Anwendung

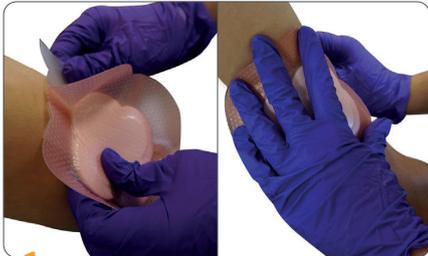

1

- Entfernen Sie die Schutzfolien von der Mitte des Verbands, ohne sie vollständig abziehen
- Positionieren Sie den Verband
- Befestigen Sie einen Teil des Randes auf der Wundumgebungshaut
- Halten Sie eine der zum Teil abgelösten Schutzfolien



2

- Formen Sie die Wundkontaktschicht sanft auf / um den Körperbereich herum, ohne den Verband zu dehnen
- Verband glatt streichen



3

- Ziehen Sie vorsichtig die anderen beiden Schutzfolien ab, während Sie den Rand an der Haut befestigen
- Dehnen Sie den Rand nicht, drücken Sie ihn leicht an
- Der Verband kann bei Bedarf repositioniert werden

Entfernung

Eine Ecke anheben und langsam vollständig abziehen.

ALLEVYN[◊] LIFE Schaumverbände kaschieren überschüssige Flüssigkeit aus der Wunde und helfen dabei, mögliche Leckagen zu vermeiden und Gerüche einzuschließen.¹⁻³

Der Verbandwechselindikator am Rand zeigt, wann der Verband gewechselt werden sollte:



INDIKATOR BEI 0%
Kein Wechsel erforderlich ✓

INDIKATOR 50% GEFÜLLT
Wechsel erwägen ✓

INDIKATOR 75% GEFÜLLT
Wechsel erforderlich ⚠

Pharmazentralnummer (PZN)	Artikelnummer	Größe in cm	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro OP†
ALLEVYN [◊] LIFE				
09634019	66801067	10,3 x 10,3	100 Stk. (10 OP)	10 Stk.
09634031	66801068	12,9 x 12,9	50 Stk. (5 OP)	10 Stk.
09634048	66801069	15,4 x 15,4	60 Stk. (6 OP)	10 Stk.
09634060	66801070	21,0 x 21,0	40 Stk. (4 OP)	10 Stk.

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*, † Originalpackung, PZN: Pharmazentralnummer Deutschland

Kontakt Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 30
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich
Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Kontakt Schweiz
Smith & Nephew Schweiz AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Pharmazentralnummer (PZN)	Artikelnummer	Größe in cm	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro OP†
ALLEVYN [◊] LIFE SACRUM				
0249 5000	66801306	17,2 x 17,5	60 Stk. (6 OP)	10 Stk.
0249 5129	66801307	21,6 x 23,0	40 Stk. (4 OP)	10 Stk.
ALLEVYN [◊] LIFE HEEL				
0711 6438	66801304	25,0 x 25,2	30 Stk. (6 OP)	5 Stk.

◊ Warenzeichen von Smith+Nephew
Alle Marken anerkannt
© September 2023 Smith+Nephew
AWM-AWC-26659 | GMC1249-de | P230226

Detaillierte Informationen zu den Produkten, einschließlich der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichts- und Warnhinweise, entnehmen Sie bitte vor der Anwendung der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts.

Hersteller: Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Rd, Hull HU3 2BN England

Referenzen: 1. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK. 2013;9(4):91-95. 2. Smith & Nephew 14 June 2012. Odour reducing properties of ALLEVYN Life. Internal Report. DS/12/127/DOF. 3. Smith & Nephew 20 June 2016. A Randomised Cross-Over Clinical Evaluation to Compare Performance of ALLEVYN Life and Mepilex® Border Dressings on Patient Wellbeing-Related Endpoints. Internal Report. CE/047/ALF

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.