

医療用品(4)整形用品
一般医療機器 液体包帯 (JMDNコード: 33584000)

ノンアルコール スキンプレップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

火気を避け、風通しの良い場所で使用してください。
開いている傷口や深い刺し傷には使用しないでください。
生後1ヶ月未満の新生児には使用しないでください。

【形状・構造及び原理】

1. 製品概要

本品は、塗布すると素早く乾燥して通気性のある無色透明な被膜を形成します。アルコールを含んでいないため、傷んだ皮膚に塗布してもひりひりしにくい被膜剤です。長時間くずれない防水性被膜により、尿や便失禁、消化液、傷口からの排液、粘着剤や摩擦による刺激から皮膚を保護します。粘着性ドレッシングの貼付部位やドレナージチューブ、体外式カテーテルの接続部位、人工肛門・人工膀胱の周囲皮膚にも使用でき、テープや粘着性物質を剥がすときの皮膚の損傷を低減します。

本品の成分

- ・アクリレートコポリマー (被膜成分)
- ・ヘキサメチルジシロキサン (溶媒成分)

2. 形状

無色透明の溶液で、塗布すると素早く乾燥して無色透明の皮膜を形成します。ナプキンやスティックに含浸させた状態で個袋に包装され、滅菌されています。

製品番号	容量	入数/箱
66800712	1 mL、ナプキンタイプ	50枚
66800787	3 mL、スティックタイプ	5本
66800711	3 mL、スティックタイプ	50本

【使用目的又は効果】

本品は、尿や便失禁、消化液、傷口からの排液、粘着剤や摩擦による刺激から、健康な皮膚または傷んだ皮膚を保護します。

【使用方法等】

本品はディスポーザブル製品であるため、1回限りの使用のみで再使用はできません。

1. 本品を塗布する前に、皮膚を洗浄し、乾燥させてください。
2. 個袋から本品を取り出し、保護したい部位全面に均一に塗布してください。
3. 本品は約30秒間で乾燥します。塗布部位が十分でなかった場合、塗布した部分が乾燥してから、再度塗布してください。保護効果を増すため、本品を重ねて塗布することもできます。
4. 本品をしわになる部位や、ほかの皮膚と接触する部位に塗布する場合、皮膚同士が接触しないようにして塗布し、完全に乾燥してから元に戻してください。
5. テープ、ドレッシング材等の粘着性製品と併用する場合には、粘着剤により本品の被膜も剥がれてしまいますので、交換するたびに塗布しなおしてください。粘着性製品を貼付する前に、必ず本品の被膜が乾燥していることを確認してください。
6. 体液や便、尿などからの保護に使用する場合や、ガーゼ等の粘着性を持たない製品と併用する場合、:(a) 洗浄する頻度により、本品を24~72時間ごとに再塗布することをお勧めします。(b) 下痢便が続いているなど頻繁に洗浄している場合、必要に応じて12~24時間ごとに行うなど、頻繁に塗布しなお

してください。

7. 一度塗布した被膜は、再塗布する前に除去する必要はありません。ただし、除去する場合、別売りの粘着剥離材である「リムーブ」を説明書にしたがって使用し、被膜を除去してください。洗浄、乾燥した後、上記のとおり新しく塗布しなおしてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用中に、発赤、炎症や過敏症(アレルギー反応)などの皮膚の異常が見られた場合には、使用を中止し、医師に相談してください。
- 2) 開いている傷口や深い刺し傷に使用しないでください。
- 3) 感染兆候(膿が出ている、発赤、発熱、腫れ、悪臭などの異常)がみられる傷には使用しないでください。
- 4) 本品の成分に対するアレルギーを有する患者に使用しないでください。
- 5) 生後1ヶ月未満の新生児には使用しないでください。
- 6) 本品は、医師や薬剤師の指導なしに、顔や目の周囲など過敏な部位に使用することはお勧めできません。目に入った場合、多量の水でよく洗い流してください。
- 7) 本品は可燃性です。火気を避け、風通しの良い場所で使用してください。本品塗布後も本品の膜が十分に乾燥する前に火気等発火の原因となるものを近づけないでください。
- 8) 軟膏、クリーム等と併用しないでください。

2. 不具合・有害事象

本品の使用中に、不具合・有害事象として以下の症状が発現することが考えられます。

- ・皮膚の感染症状
- ・皮膚障害[そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎、発赤、水泡、表皮剥離等]
- ・疼痛

3. その他の注意

- 1) 本品は、滅菌済みで、包装の破損等がない限り開封するまで無菌性は保証されていますが、開封時に包装が破損または汚損している場合には使用しないでください。
- 2) 本品を再滅菌しないでください。
- 3) 子供の手の届かないところに保管してください。
- 4) 本品は、外用にのみお使いください。
- 5) 万が一、包装内の製品に不良が見られた場合には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法: 高温多湿・直射日光を避け、25℃以下で保管すること。火気厳禁
2. 有効期間: 製造日より3年間[自己認証(当社データ)による]
3. 使用期限: 製品包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

スミス・アンド・ネフュー株式会社
東京都港区芝公園二丁目4番1号
TEL: 03-5403-8930
FAX: 03-5403-8931

