

Switching to ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE Foam Dressing from previous dressings helped to significantly reduce dressing change frequency and weekly dressing costs as well as improve treatment satisfaction in a community setting

従来型ドレッシング材から高機能フォームドレッシング（ハイドロサイト<sup>®</sup> ライフ）に切り替えることで、ドレッシングの交換頻度と費用が削減され、治療満足度も向上した

## + ハイライト ポイント

従来のドレッシング材と比較して、  
ハイドロサイト ライフの使用により  
以下の結果が示されています

**1.48**  
患者1人あたりの  
ドレッシング交換回数が減少  
(1.66回/週 vs 3.14回/週、 $p<0.001$ )

**58.7%**  
患者1人あたりの  
ドレッシング材コストが削減  
(24.10ポンド(4,579円)\*\* vs 9.95  
ポンド(1,891円)\*\*、 $p<0.001$ )  
1ポンド=190円で計算

医療従事者（HCP）と患者の  
治療満足度の向上



## 概要

- スペインのプライマリケアセンター24カ所と老人ホーム6カ所（地域設定）で実施された観察研究（後ろ向き・前向き研究）。
- ハイドロサイト ライフは、一次ドレッシング材（35.2%）または二次ドレッシング材（64.8%）として4週間使用された。  
（ハイドロサイト ライフの前に使用されていたのは、ポリウレタンフォーム材：42.0%、ハイドロファイバー材：21.0%）
- 患者数94名、128例の創傷が対象。患者のほとんどが70歳以上であった（75.8%）。
- 最も多かった創傷は下腿潰瘍（39.8%）次いで褥瘡（31.3%）であった。また、全創傷の25%が発生後12か月を超えるものであった。

## 結果

- 使用4週間後、従来型のドレッシング材と比較して、ハイドロサイト ライフは以下の項目を減少させた：
  - 1週間のドレッシング交換頻度が47.1%減少（図1  $p<0.001$ ）
    - 特に「日常的な交換」、「ドレッシング材が飽和状態」、「汚れ」によるドレッシング交換が50%減少した。
  - 1週間の平均ドレッシングコストが58.7%減少（図1  $p<0.001$ ）
- ハイドロサイト ライフにより、平均創傷面積は28.3%減少した。  
( $9.9\text{cm}^2 \rightarrow 7.1\text{cm}^2$ ,  $p<0.001$ )
  - 68.3%の創傷で創傷サイズが減少した  
(85.9%の創傷で30%以上創傷面積が減少)
- ドレッシング材の特性評価の結果、多くの医療従事者は、ハイドロサイト ライフは従来型のドレッシング材よりも優れていると回答した。（平均69%、7つの特性評価における）
- ハイドロサイト ライフは従来型のドレッシング材と比較して、創傷治療経験全体に対する患者の満足度（44.7%）、滲出液のコントロール（46.1%）、快適さ（47.0%）が改善した。  
（非常に悪い/悪い/平均の評価→良い/非常に良いの評価）

**47.1%**

患者1人あたりの  
ドレッシング材交換回数が減少  
(3.14回/週 vs 1.66回/週;  $p<0.001$ )

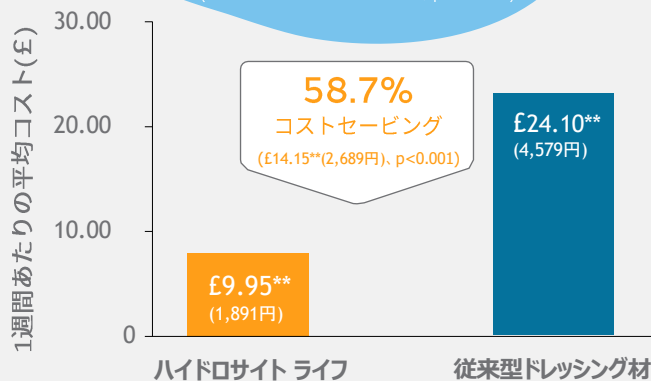


図1. ハイドロサイト ライフと従来型ドレッシング材における患者1人あたりの1週間における平均ドレッシング費用および平均ドレッシング交換頻度

1ポンド = 190円で計算

## 結論

ハイドロサイト ライフは従来型のドレッシング材と比較して、ドレッシング材の交換頻度とコストを削減し、医療従事者と患者様の満足度を向上させるのに貢献した。

## Citation

\*Tiscar-González V, Rodriguez MJM, Rabadán Sainz C, et al. Clinical and economic impact of wound care using a polyurethane foam multi-layer dressing versus standard dressings on delayed healing ulcers. *Adv Skin Wound Care*. In press (with permission).

使用目的または効果、禁忌・禁止、使用上の注意、警告など、詳細については、使用前に該当する製品の添付文書（IFU）をご参照ください。

## ハイドロサイト<sup>®</sup> ライフ



ハイドロサイト シリーズで最もパッドの吸収力が高い、高機能ドレッシング材。処置時間の短縮は患者様のQOL向上につながります。



製品情報はここから