


Use of ALLEVYN[®] LIFE Foam Dressing with a programme of wound care training and education helped to reduce dressing changes and dressing costs, as well as release nurse visits compared with prior practice

高機能フォームドレッシング材（ハイドロサイト ライフ）と創傷ケアトレーニングおよび教育プログラムを併用することで、ドレッシング材の頻回な交換と材料コストが削減され、看護師の訪問回数が減少した

+ ハイライト ポイント

従来のドレッシング材と比較して、ハイドロサイト ライフの使用により、以下の結果が示されています

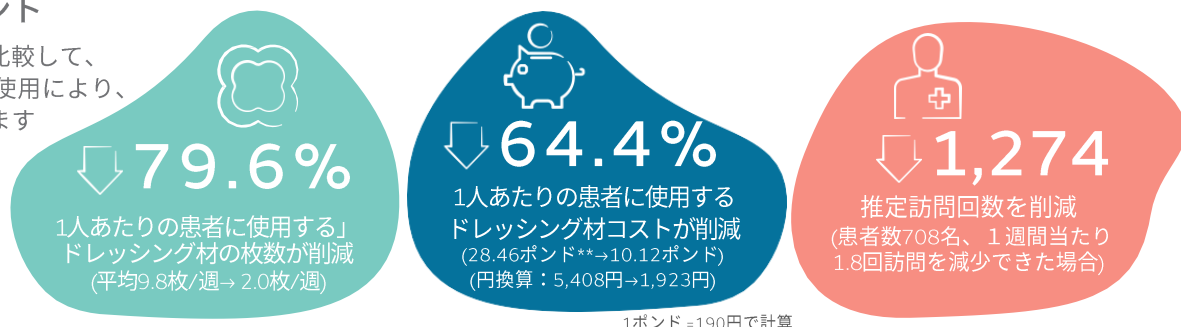


概要

- 英国における統合ケアシステムにおける創傷ケアプログラムを実施（ハイドロサイト ライフの適正使用の内容を含む）
- ケアプログラムに参加した看護師は、2週間にわたってドレッシング材の選択と交換方法・頻度を含むケアのトレーニングと教育を受け、その後1週間の実施段階を経た。
- 合計37人の患者が、主に高齢者施設（40.5%）または自宅（43.2%）で治療ケアを受けた。
- ほとんどの患者が6週間以上の慢性創傷を有しており（73.0%）、そのうちの3名（8.1%）が感染創であった。

結果

- ハイドロサイト ライフ導入後、97.3%の患者がドレッシング交換による来院回数が従来型ドレッシング使用時と比較して減少した。
- ハイドロサイト ライフにより、以下の項目が減少：
 - 1週間当たりの平均ドレッシング交換頻度が50%減少（3.6回/週から1.8回/週へ減少）
 - 患者1人あたりの1回のドレッシング交換における平均枚数が47.6%減少（2.1枚/回/人から1.1枚/回/人へ減少）
 - 患者1人あたりの平均ドレッシング枚数が79.6%減少（9.8枚/週から2.0枚/週へ減少）
 - 週に3回以上ドレッシング交換が必要な患者数の減少（図1参照）
- ハイドロサイト ライフドレッシングの平均着用日数は2.3日増加（従来型ドレッシング材使用時の2.5日から4.8日に増加）。
- ハイドロサイト ライフの使用により、患者1人当たりのドレッシング材のコストが週64.4%（18.34ポンド/3,485円**）削減された。また、708人の患者を抱える地域の訪問看護の頻度においては、週1,274回（658時間）の訪問数が削減できると推定（図1参照）。
 - 年間訪問回数：66,269回（34,239時間に相当）

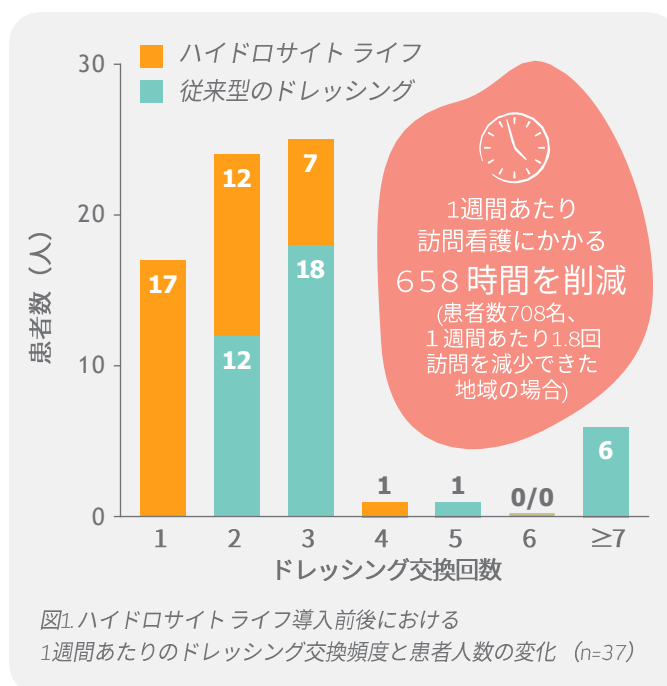

結論

創傷ケアのトレーニングおよび教育プログラムとともにハイドロサイト ライフを使用することで、患者1人当たりのドレッシング材の交換頻度、費用、看護師の訪問回数を従来と比較して減らすことができ、その結果、看護師の貴重な時間を確保することができた。

Citation

*Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *J Wound Care*. 2015;24(7):314-317. Available at: [Journal of Wound Care](https://www.journalofwoundcare.com/)

使用目的または効果、禁忌・禁止、使用上の注意、警告など、詳細については、使用前に該当する製品の添付文書（IFU）をご参照ください。

ハイドロサイト[®] ライフ



ハイドロサイト シリーズで最もパッドの吸収力が高い、高機能ドレッシング材。処置時間の短縮は患者様のQOL向上につながります。



製品情報ははこちらから

**Costs based on a conversion rate of 1.1514 (GBP to EUR) in February 2024

Smith+Nephew, Croxley Park, Building 5, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire WD18 8YE T:+44 (0)1923 477100 F:+44 (0)1923 477101
Smith+Nephew, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S, Denmark T:+45 45 80 61 00. Smith+Nephew, Krokslättis Fabrikker 39, 431 37 Mölndal, Sweden, T:+46 31 74 65 800
Smith+Nephew, Snarøyveien 36, 1364 Fornebu, Norway T:+47 66 84 20 20. Smith+Nephew, Lentäjantie 1, 01530 Vantaa, Finland T:+358 (0)207 866 333
42448-en V1 0224. Published September 2020. ©2024 Smith+Nephew. [®]Trademark of Smith+Nephew. All Trademarks acknowledged.

ハイドロサイト ライフ 承認番号 226008ZX00209000
◇はスミス・アンド・ネフューの商標です。

www.smith-nephew.com/education