

非固着性ドレッシング

## メロリン<sup>◇</sup>


MELOLIN<sup>◇</sup>

Low Adherent Absorbent  
Wound Dressing

3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。  
傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。

### 外表面: はっ水処理ポリエステル不織布

- 外部からの水分の汚れがしみ込みにくくするための工夫です。

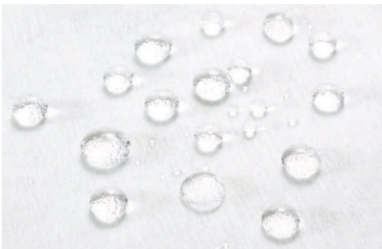

### 吸収層: コットン/ポリエステル繊維

- 自重の10倍の水分を吸収する\*ため、滲出液の多い傷にもご使用いただけます。
- これにより、交換回数の低減にも寄与します。
- クッション性を有するため、傷を外部の刺激から保護します。

\*社内資料

### 傷との接触面: 多孔性ポリエステルフィルム

- 非固着性のため傷に貼りつきにくく、交換時の痛みを軽減します。
- たくさんの小さな穴(多孔)から水分を通過させ、滲出液を吸収します。

つつつした面を  
傷にあててください

### 使用例

※傷にご使用の場合は、滅菌品をご利用ください。

※医師より指示された方法があれば、そちらに従ってください。

1. 傷を水道水または生理食塩液などで洗い、傷の周りの皮膚に付いている水分を拭き取ります。
2. 医師に処方された薬剤があれば塗った上に、傷をおおえる大きさのメロリンをのせます。この時、**つつつしている面を傷にあててください**。
3. 最後にテープなどで固定します。



傷の大きさに合わせて  
カットすることができます。



## メロリン<sup>®</sup> 滅菌タイプ

オートクレーブ滅菌されているため、傷にご使用いただけます。



製品番号	JAN CODE	サイズ	入数 / 箱
66974932	4582111150646	5×5cm	25 枚
66974933	4582111150653	10×10cm	10 枚
66974940	4582111150677	5×5cm	100 枚
66974941	4582111150684	10×10cm	100 枚
66974939	4582111150660	10×20cm	100 枚

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード:34655000

一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード:34654000 届出番号:13B1X10222WC0006

滅菌済

## メロリン(未滅菌) 未滅菌タイプ

滅菌処理されていないため、傷にはご利用いただけません。

「傷のない、軟膏を塗った皮膚の保護」や「傷ができそうな皮膚の保護」にご利用ください。



製品番号	JAN CODE	サイズ	入数 / 箱
66974942	4582111150691	10×10cm	150 枚
66974943	4582111150707	10×20cm	75 枚
66974944	4582111150714	20×30cm	25 枚
66974930	4582111150639	50×700cm (ロールタイプ)	1 巻

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード:34655000

一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード:34654000 届出番号:13B1X10222WC0005

未滅菌

未滅菌タイプを傷に直接貼付する場合には、滅菌を行なってからご使用ください。

医療機関にてオートクレーブ滅菌いただくことが可能です。滅菌条件については日本薬局方をご参照ください。

ご使用にあたっては添付文書をよく読み「使用方法」「使用上の注意」を守り正しくお使いください。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/ja-jp>

°Trademark of Smith+Nephew

© 2020-2023 Smith+Nephew

ML-1  
202303-2