

## El apósito de espuma ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER Heel demostró una gestión eficaz del exudado, comodidad para el paciente durante el uso, y facilidad de retirada en pacientes con heridas en el talón

Hampton, S. An evaluation of a silicone adhesive shaped heel dressing. *Br J Nurs.* 2010;19(6):S30–33.

Disponible en: [British Journal of Nursing](#)

### Puntos clave

**100 %**  
de calificación para el control del exudado y la comodidad del paciente en la retirada del apósito (excelente, muy buena o buena)




Adecuado para pacientes con **heridas en el talón** o heridas con riesgo de **maceración**

### Descripción general

- Evaluación clínica no comparativa del uso, aceptabilidad y desempeño del apósito ALLEVYN GENTLE BORDER Heel para la gestión de heridas en el talón
- Los clínicos evaluaron 20 pacientes adultos (edad media 78,4 años, 70 % mujeres) con heridas en el talón en siete centros de Reino Unido
- Los apósitos se aplicaron y cambiaron en función de las necesidades del paciente y de acuerdo con la práctica convencional de cada centro
- La mayoría de heridas en el talón eran lesiones por presión (80 %)
- La duración media de las heridas fue de 41,4 días. La superficie media de las heridas fue de 13,1 cm<sup>2</sup>
- Más de la mitad de los pacientes tenían niveles de exudado moderados al inicio de la evaluación (55 %). Un paciente tenía niveles de exudado abundantes (5 %)

### Resultados

- Los clínicos calificaron la capacidad del apósito ALLEVYN GENTLE BORDER Heel de absorber y retener el exudado como excelente, muy buena o buena para todos los pacientes
- Todos los pacientes encontraron la comodidad en la retirada del apósito como buena, muy buena o excelente
- La proporción de pacientes con piel perilesional sana aumentó del 25 % desde el inicio de la evaluación hasta el 70 % en la evaluación final del clínico (figura)
  - La piel circundante que estaba inflamada (n=2) y no blanqueante (n=1) se resolvió antes del final del estudio
  - La piel circundante se clasificó como «otra» al final de estudio para dos pacientes
- Se identificó una conexión entre la cantidad de exudado retenido en el apósito, la comodidad del paciente durante el uso, y la capacidad del apósito para mantener su posición en la piel sin deslizamiento

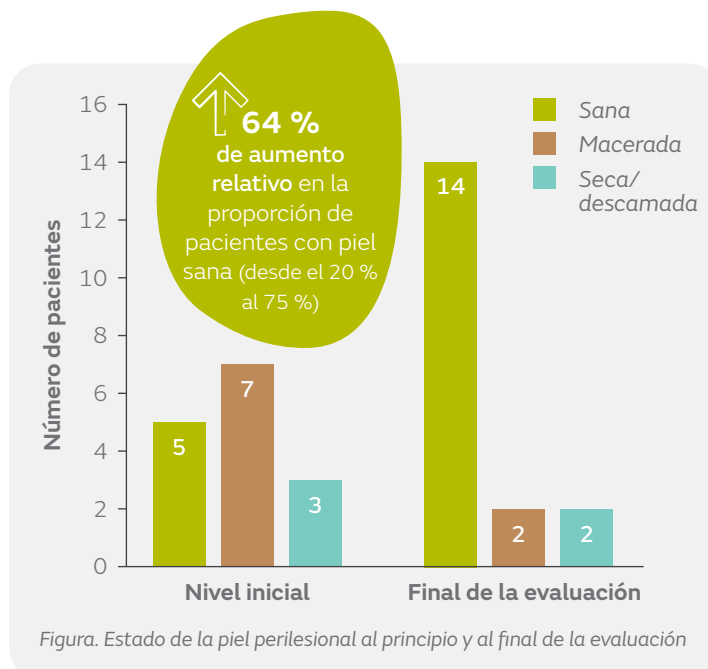

### Conclusiones

El apósito ALLEVYN GENTLE BORDER Heel recibió calificaciones positivas por parte de los clínicos en cuanto a desempeño, comodidad del paciente durante el uso y dolor en la retirada, y era adecuado para pacientes con heridas en el talón o aquellos con riesgo de maceración.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso aplicables al producto antes de utilizarlo.