

InterTAN Nailing System 260mm Distal Targeting Device



260mm Distal Targeting Device Design Features


InterTAN Nailing System Distal Targeting Deviceは、簡単な操作方法でInterTAN 260mmの遠位横止めを行う事ができます。

Distal Targeting Deviceの使用によって、遠位スクリューホールを正確にターゲティングし、術中の放射線被曝量を低減し、手術時間の短縮を期待できます^{1,2)}。


Middle SizeのNailは不安定性の高い大腿骨転子部骨折（Jensen分類:Type IV/V、3D-CTによる分類:Type I-3part-B/D、Type I-4part、Type II）におけるSwing Motionの低減、安定性の獲得を期待できます。



ターゲティングデバイス（正面）

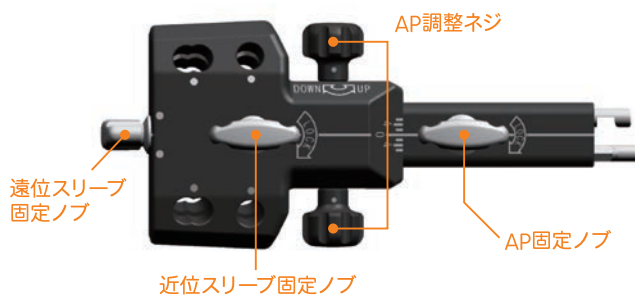

ターゲティングデバイス（側面）

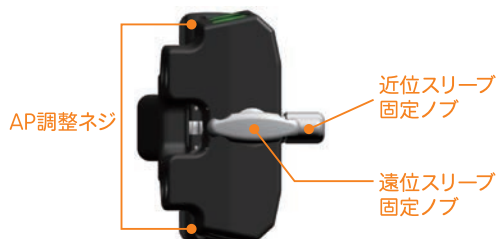

ターゲットホール：ロッキングパターン



スタティック/
スタティック
固定



スタティック/
ダイナミック
固定



スタティック
固定



ダイナミック
固定




製品概要

ネイル全長	260mm LEFT⇒LIME Color、RIGHT⇒ROSE Color
ネイル径	近位:15.25mm×16.25mm 遠位:φ10mm、φ11.5mm
頸体角	125°、130°
外反角	4°
ネイルキャップ	0mm
遠位スクリューホール	スタティック、またはダイナミック固定の選択が可能です
ネイル前湾曲率	1,500mm
前捻角	12°

InterTAN 260mm Nail


- 高度な外弯を有する症例や前弯の強い症例において、髓内釘とのインピンジメントの軽減が期待できます¹⁾。
- 大腿骨最狭部を越える長さで、遠位横止めを2本挿入する事ができる為、後壁骨折におけるSagittal swing motionの軽減が期待できます¹⁾。
- 髓腔径が大きい症例や小転子の大きな骨折を有する症例に対して、安定性の獲得が期待できます¹⁾。

Sagittal swing motionの1例

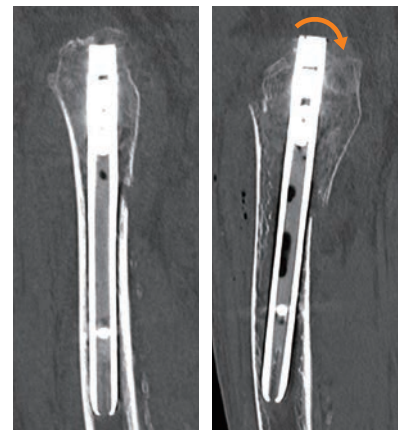

94歳/女性

大転子小転子一体型 (中野分類3-part GL) / 宇都宮分類 髓内型

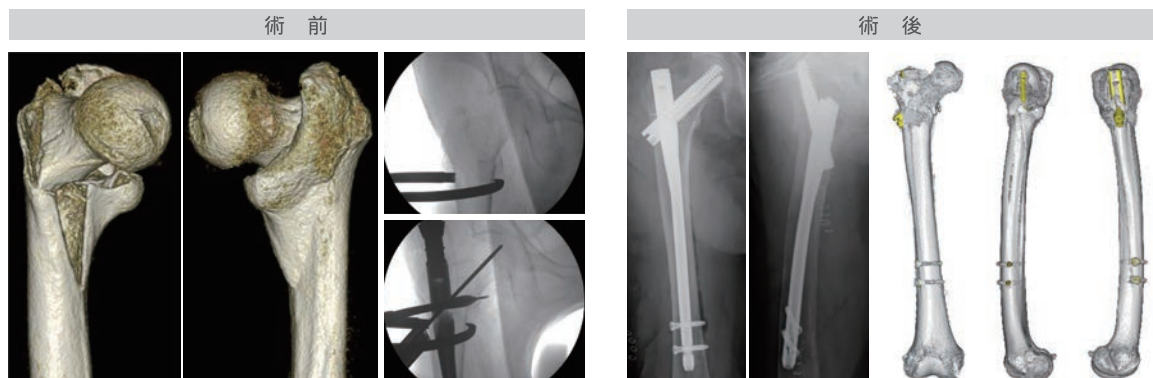

写真提供: 福山市民病院 寺田 忠司 先生

1) 高齢者大腿骨転子部不安定型骨折における髓内釘長の選択基準-InterTAN middle nail 260mmの意義- smith&nephew News Letter Vol.37
 2) smith & nephew社内調査データ

Ordering Information

インプラント

InterTAN ロングネイル (右 : Rose)

頸体角	カタログNO.	規格
125°	7167 - 5523	φ10mm×26cm
	7167 - 6546	φ11.5mm×26cm
130°	7167 - 5524	φ10mm×26cm
	7167 - 6568	φ11.5mm×26cm

InterTAN ロングネイル (左 : Lime)

頸体角	カタログNO.	規格
125°	7167 - 5501	φ10mm×26cm
	7167 - 6545	φ11.5mm×26cm
130°	7167 - 5502	φ10mm×26cm
	7167 - 6567	φ11.5mm×26cm

InterTAN ラグ/コンプレッションスクリューキット

カタログNO.	規格
7167 - 7075	75mm/70mm
7167 - 7080	80mm/75mm
7167 - 7085	85mm/80mm
7167 - 7090	90mm/85mm
7167 - 7095	95mm/90mm
7167 - 7100	100mm/95mm

InterTAN コンプレッション スクリュー

カタログNO.	規格
7167 - 2030	Φ7mm×30mm

InterTAN エンドキャップ

カタログNO.	規格
7651 - 5310	0mm (ロングノーズ)

ラグスクリューとコンプレッションスクリューは同梱包されています。
※表示以外のサイズが必要な場合は、弊社営業担当者にお問い合わせください。

ロープロファイル キャプチャードスクリュー

カタログNO.	規格
7164 - 5025	Φ5.0mm×25mm
7164 - 5027	Φ5.0mm×27.5mm
7164 - 5030	Φ5.0mm×30mm
7164 - 5032	Φ5.0mm×32.5mm
7164 - 5035	Φ5.0mm×35mm
7164 - 5037	Φ5.0mm×37.5mm
7164 - 5040	Φ5.0mm×40mm

※表示以外のサイズが必要な場合は、弊社営業担当者にお問い合わせください。

販売名: InterTAN ネイリング システム
承認番号: 22100BZX00714000

販売名: トライジェン ロープロファイルスクリュー
承認番号: 22400BZX00409000

販売名: InterTAN 手術器械
届出番号: 13B1X10222OT0005

販売名: InterTAN 手術器械 (1)
届出番号: 13B1X10222OT0006

販売名: TRIGEN ネイル 手術器械
届出番号: 13B1X10222OT0023

スミス・アンド・ネフュー株式会社 オーソペディックス事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8001

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith & Nephew.

© 2016-2017 Smith & Nephew KK

OT101
201701-3
cat_intertan_dtd_v3