

So wird's weiterhin  
**HYDROGELINGEN**



INTRASITE<sup>◇</sup> CONFORMABLE:  
**ERSTATTUNGSFÄHIG** –  
AUCH NACH DEM 02.12.2024\*

\* INTRASITE<sup>◇</sup> CONFORMABLE ist verordnungs- und erstattungsfähig gemäß der Verbandmittelformdefinition nach § 31 Abs. 1a SGB V – auch über den 02.12.2024 hinaus (Ende der Übergangsfrist).



# + Der einfach anzuwendende Hydrogel-Wundverband

zur Rehydrierung und Wundreinigung von oberflächlichen  
wie auch tiefen Wundkavitäten


Kombiniert die Vorteile von INTRASITE<sup>◊</sup> Hydrogel mit einer Polyester-Viskose-Gaze

- ✓ Rehydriert, debridiert sanft und fördert die Wundheilung durch Schaffung einer feuchten Wundumgebung
- ✓ Passt sich dem Wundbett an und ist einfach anzuwenden
- ✓ Hilft, Bakterienwachstum zu stoppen – durch bakterio-statische Eigenschaften des Gels

**Smith+Nephew**

INTRASITE<sup>◊</sup>  
CONFORMABLE  
Hydrogel-Wundverband

Die Hydrogel-  
Alternative

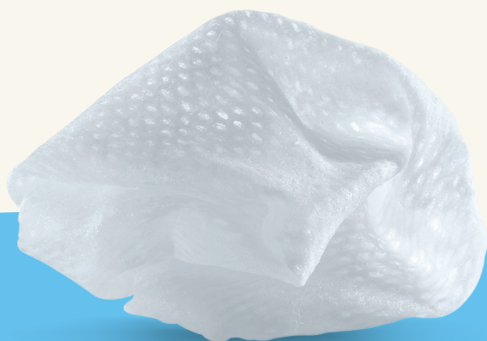

## Wirkungsweise

- Nekrotischem Gewebe wird behutsam Wasser zugeführt, gleichzeitig werden Schorf und Wundexsudat gelöst und absorbiert.
- Herstellung eines feuchten Wundmilieus, das die Reepithelisierung und den Aufbau von Granulationsgewebe unterstützen kann.



## Indikationen

**INTRASITE<sup>o</sup> CONFORMABLE** ist indiziert für die Verwendung bei sekundär heilenden offenen Wunden (z. B. Dekubitus, chirurgische Wunden, maligne Wunden). Darüber hinaus eignet sich **INTRASITE<sup>o</sup> CONFORMABLE** zur feuchtigkeitsspendenden Behandlung granulierender und epithelisierender Wunden.

## Verfügbare Größen und Artikelnummern

PZN*	Artikelnummer	Gel-Menge (mind.)	Größe	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
<b>0865 3115</b>	66000324	7,5 g	10 cm x 10 cm	120 Stück (12 OP)	10 Stück
<b>0865 3121</b>	66000325	15 g	10 cm x 20 cm	80 Stück (8 OP)	10 Stück
<b>0865 3138</b>	66000326	30 g	10 cm x 40 cm	60 Stück (6 OP)	10 Stück

\* Pharmazentralnummer; erstattungsfähig; Sprechstundenbedarf (regionsabhängig).



Abonnieren Sie  
jetzt den Smith+Nephew  
Newsletter!

# Anwendungsleitfaden

Der **INTRASITE<sup>◊</sup> CONFORMABLE** Hydrogel-Wundverband ist ein Vliesverband mit einem klaren, amorphen Hydrogel. Das Produkt erleichtert die Versorgung offener Wunden und passt sich dem Wundbett an.


## Anlegen des INTRASITE<sup>◊</sup> CONFORMABLE Wundverbands



- 1 Reinigen Sie die Wunde mit steriler Kochsalzlösung



- 2 Die Wunde je nach Tiefe mit dem Verband locker füllen oder abdecken

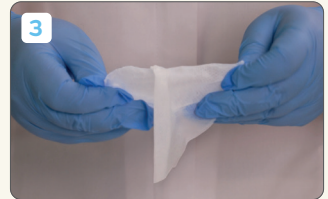

- 3 Bei flachen Wunden mindestens zwei Lagen des Verbands aufbringen

4 Mit einem Sekundärverband abdecken, z. B. einem Film- oder absorbierenden Verband

## Wechseln des INTRASITE<sup>◊</sup> CONFORMABLE Wundverbands



- 1 Verband vorsichtig mit einer Pinzette entfernen und die Wunde mit steriler Kochsalzlösung spülen



- 2 Überprüfen Sie, ob alle Verbände entfernt sind
- 3 Der Verband kann bis zu 3 Tagen auf der Wunde verbleiben

Bei Verwendung auf infizierten Wunden sollte die Infektion gemäß dem lokalen klinischen Protokoll behandelt werden.