


1. Legen Sie die Enden des Nahtmaterials durch die Schlaufe der Einfädelhilfe.

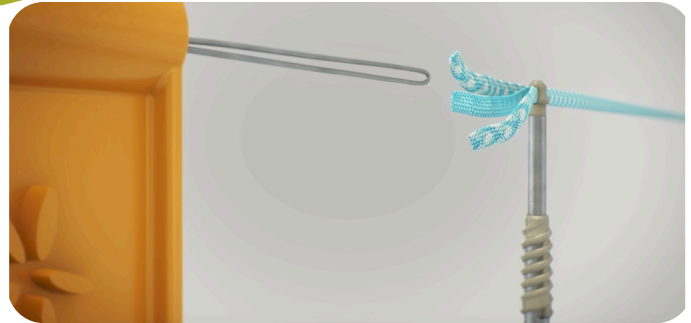

2. Ziehen Sie die Einfädelhilfe ab, um das Nahtmaterial in die Öse des Implantates zu fädeln. Wiederholen Sie Schritte 1 + 2, bis das gesamte gewünschte Nahtmaterial eingefädelt ist.




3. Identifizieren Sie die Insertionsstelle. Präparieren Sie das Loch mit dem in der Gebrauchsanweisung aufgeführten empfohlenen Präparationsinstrument.




4. Bringen Sie den Anker in das Gelenk ein und halten Sie dabei das Nahtmaterial gestrafft.




5. Führen Sie die beladene Ankeröse in den Knochen ein, bis der distale Gewindegang der Implantatschraube kurz vor dem Knochen positioniert ist. Spannen Sie das Nahtmaterial an, bis die entsprechende Gewebekompression erreicht ist. Klemmen Sie das Nahtmaterial fest, wenn gewünscht.

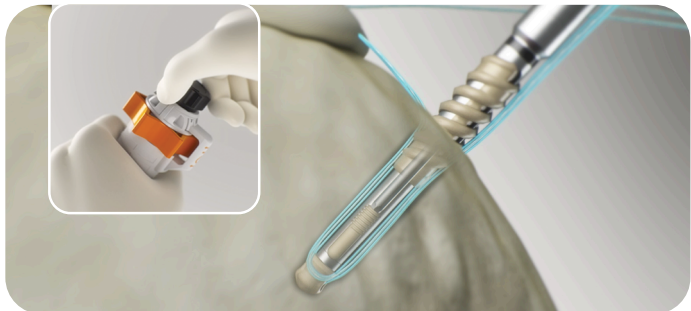

6. Stellen Sie sicher, dass der erste Gewindegang des Ankers sicher im Knochen positioniert ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten weitermachen. Drehen Sie den inneren Plug nach unten, indem Sie den kleineren, schwarzen Knopf im Uhrzeigersinn drehen, bis mindestens ein Klick zu hören ist.

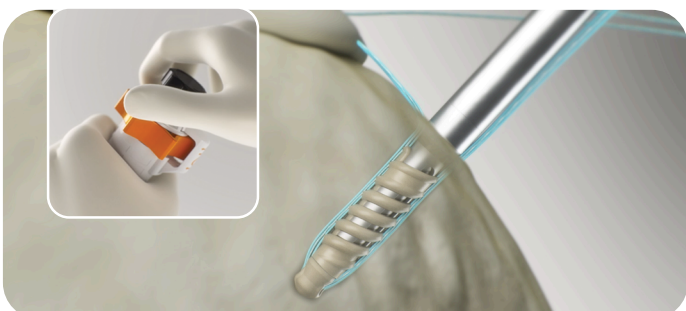

7. Drehen Sie den größeren, orangenen Knopf im Uhrzeigersinn, um die Implantatschraube in den Knochen zu drehen, bis die Lasermarkierung mit der Oberfläche des Knochens bündig ist.

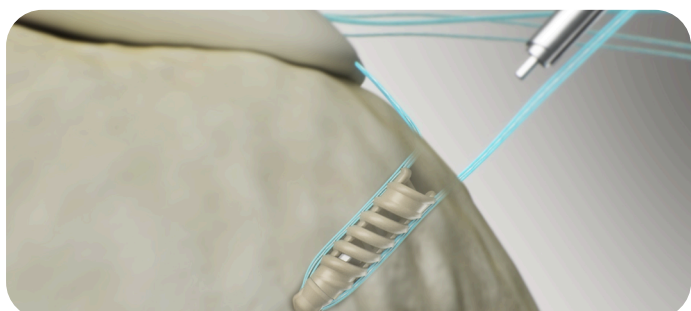

8. Ziehen Sie das Setzinstrument zurück und entfernen Sie es aus dem Gelenk.

# Bestellinformationen

HEALICOIL® Knotless Fadenanker	
Artikel-Nr.	Beschreibung
72205137	HEALICOIL knotenloser PK Fadenanker, 5,0 mm, steril
72205138	HEALICOIL knotenloser PK Fadenanker, 5,0 mm, selbstschneidend, steril
72205308	Bohrer, 4,75 mm, für HEALICOIL knotenlosen Fadenanker
72203710	5,5 mm Gewindeschneider, wiederverwendbar
72203952	5,5 mm Gewindeschneider, steril
72201915	Konische Ahle, 3,8 mm, wiederverwendbar
72202621	Konische Ahle, 3,8 mm, steril

Alle Fotos und Diagramme dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht maßstabsgetreu dargestellt.

Für weitere Informationen zur Anwendung der in dieser Präsentation beschriebenen Produkte sowie Indikationen für den Gebrauch, Kontraindikationen und Produktsicherheitsinformationen beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung (IFU) des jeweiligen Produkts.

Weitere Informationen auf [smith-nephew.com](http://smith-nephew.com)

#### Kontakt Deutschland

Smith & Nephew GmbH  
Friesenweg 4, Haus 21  
22763 Hamburg  
T +49 (0)40 87 97 44-0 F  
+49 (0)40 87 97 44-375  
info@smith-nephew.com  
[www.smith-nephew.de](http://www.smith-nephew.de)

#### Kontakt Österreich

Smith & Nephew GmbH  
Concorde Business Park 1/C/3  
2320 Schwechat  
Österreich  
T +43 1 70 79102  
F +43 1 70 79101  
Info.austria@smith-nephew.com  
[www.smith-nephew.de](http://www.smith-nephew.de)

#### Kontakt Schweiz

Smith & Nephew Schweiz AG  
Theilerstrasse 1A  
6300 Zug  
Schweiz  
T +41 41 766 22 66  
F +41 41 766 39 93  
CustomerService.CH@smith-nephew.com  
[www.smith-nephew.de](http://www.smith-nephew.de)

◇Marke von Smith+Nephew.  
©September 2020 Smith+Nephew.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Alle Marken anerkannt.  
22200-de-EMEA V4 09/20