


El uso del apósito ALLEVYN[®] LIFE en una variedad de tipos de heridas, niveles de exudado y entornos de atención tuvo altos índices de satisfacción, lo que podría tener un impacto positivo en la cicatrización de heridas y el bienestar del paciente

+ Puntos adicionales

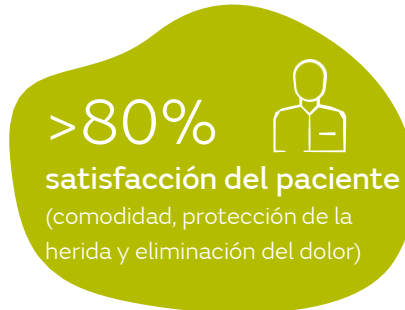


Resumen

- Una evaluación prospectiva y no comparativa del rendimiento del apósito ALLEVYN LIFE en una variedad de entornos de atención
- El médico completó un cuestionario para cada paciente al inicio, al cambiar el apósito y al suspenderlo.
- El médico acumuló un cuestionario para cada paciente al inicio, al cambiar el apósito y al suspenderlo.
- Se incluyeron heridas no infectadas de diversos tipos y niveles de exudado (n=148); la mayoría estaban localizadas en extremidades inferiores (79,6%).

Resultados

- En comparación con el valor inicial, el área, la profundidad y el volumen de la herida disminuyeron significativamente después del uso del apósito ALLEVYN LIFE ($p < 0,001$)
- La mayoría de los médicos (86%) estaban satisfechos con el uso del apósito ALLEVYN LIFE
 - La facilidad de aplicación/remoción (98%) y la adaptabilidad (91%) obtuvieron las calificaciones más altas
 - Más del 50% calificó a ALLEVYN LIFE como un apósito mejor que el apósito habitual
- La mayoría de los pacientes (83%) estaban satisfechos con el uso de ALLEVYN LIFE
 - La comodidad, la protección de la herida y el dolor al retirarlo tuvieron las calificaciones de satisfacción más altas (Figura)
 - Más del 55% calificó las características del Apósito ALLEVYN LIFE mejor que las del apósito habitual (48% para enmascarar el olor)
- El uso del apósito ALLEVYN LIFE tuvo un efecto positivo en la convivencia con una herida en el 45 % de las evaluaciones

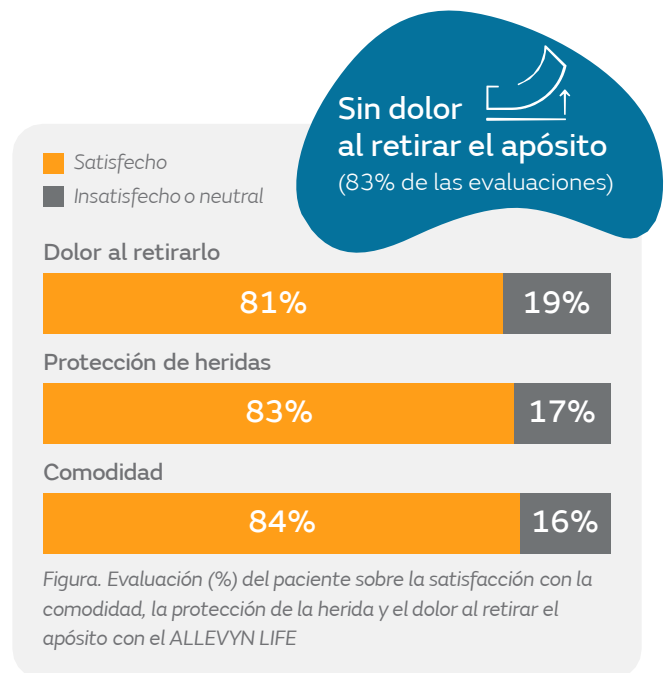

Conclusiones

La satisfacción de los médicos y los pacientes con el apósito ALLEVYN LIFE fue alta, lo que puede tener un impacto positivo en la cicatrización de heridas y el bienestar del paciente.

Citación

*Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN[®] LIFE. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95.

Disponible en: [Wounds UK](https://www.wounds-uk.com)

Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de usarlo.