

✦ 思いやりの気持ちを
絆創膏に。

Smith+Nephew

傷を  優しく守る

ハイドロ
ジェントルエイド◇




浅い傷



皮膚裂傷
(スキン-テア)



保護

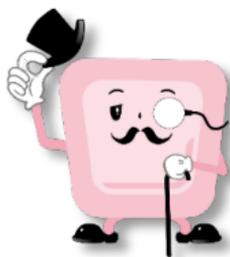




痛みやわらぐふんわりパッド

キズにあてるパッド部分がスポンジ状の絆創膏です。
クッション性のあるふんわりパッドが
肌によくなじみ、傷を守ります。

防水仕様

水仕事やシャワー浴でも
はがれにくい防水フィルムを
採用しました。

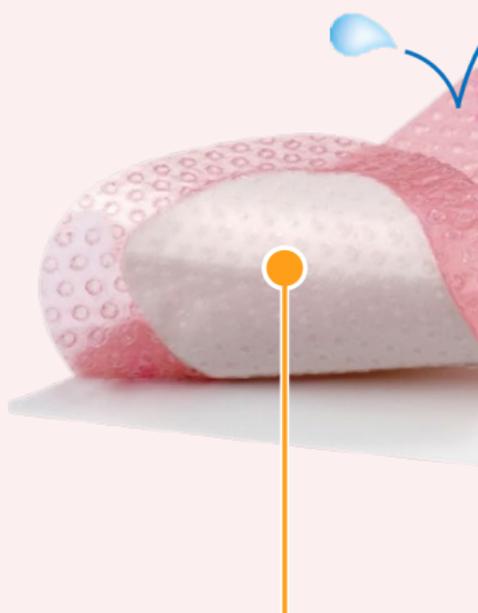


最長7日間*

ポリウレタンフォームが
滲出液を吸収し、最長で
7日間継続して使用できます。

イメージ図

過剰な
滲出液を素早く蒸散

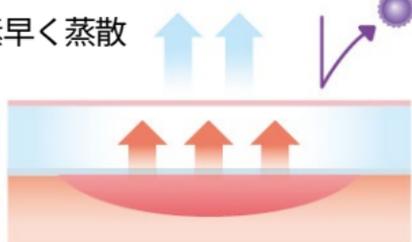

細菌の侵入を
防ぎます

滲出液を
吸収・保持

*傷を観察し、滲出液の量に応じて適宜交換をしてください。

使用例

擦り傷・切り傷・刺し傷・掻き傷・

浅い傷の保護

腕



脛



指






はがす時の痛みが少ない

シリコン粘着剤がソフトに肌に密着し、
はがす時の痛みを軽減します。
敏感肌の方にも配慮した低アレルギー粘着剤です。

イメージ図

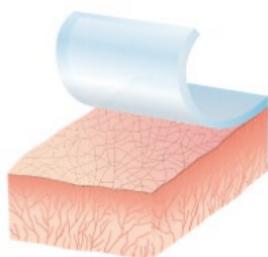


シリコン粘着剤



従来の
アクリル系粘着剤



肌に優しい
一般的な粘着剤

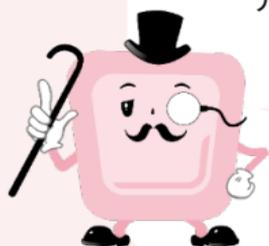

粘着力が落ちにくいいため、ずれた
時などに貼り直しができます。

(感じ方には個人差があります)

靴ずれなど、浅い傷の保護に適しています。

小児のすり傷や切傷など

膝



顔



肘



使用方法 ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

- 必要に応じて貼付部位の除毛をしてください。
- 貼付部を洗浄、または必要に応じて消毒します。消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように十分洗浄し、余分な水分はよく拭き取ってください。



1

透明の裏紙を剥がします。



2

粘着剤がついている
パッド部分を
創傷部に密着させ、
残りの裏紙も剥がします。



3

しわにならないように
傷と周囲全体に
密着させます。

しわになった部分は、一度
剥がして貼り直しが可能です。

剥がし方




ジェントルエイドの隅を
そっと持ち上げ、ゆっくり
創傷部から剥がします。

よくあるご質問

Q. どのサイズを選べば良いですか？

周囲の健常皮膚も十分に覆えるパッドサイズをご選択ください。

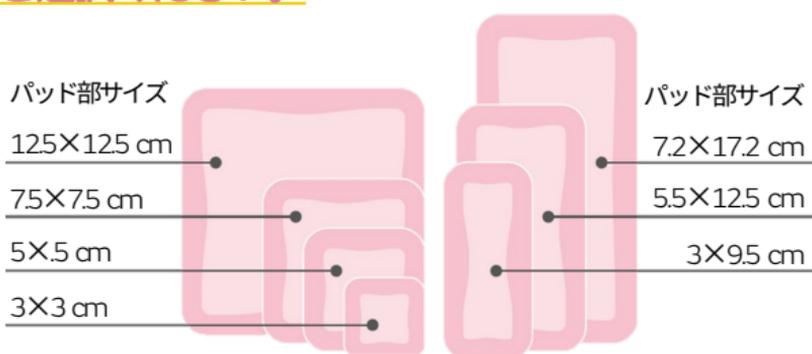

とくに滲出液が多い場合、小さいサイズでは吸収パッドも小さいため、交換が早まります。


Q. 貼付中にシャワー浴はできますか？

剥がれにくい防水フィルムのため、シャワー浴程度であれば可能です。



周囲のテープ部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換してください。

Q. 何日ごとに交換したら良いですか？

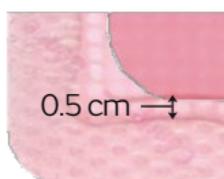

滲出液がパッドの端から0.5cmまで到達した場合や、漏れ出した場合は交換してください。

最長は7日間ですが、使用開始して初めの時期は、傷を観察する目的で早めの交換をお勧めします。
※吸収状態に関わらず7日間を限度に交換してください。

ハイドロジェントルエイド[®]

一般医療機器 救急絆創膏
届出番号：13B1X10222WC0016

サイズ	パッド部サイズ	枚/箱	標準価格
5×5 cm	3×3 cm	10	¥1,749
7.5×7.5 cm	5×5 cm	10	¥2,145
10×10 cm	7.5×7.5 cm	10	¥2,640
15×15 cm	12.5×12.5 cm	10	¥5,929
5.5×12 cm	3×9.5 cm	10	¥2,563
8×15 cm	5.5×12.5 cm	10	¥3,927
10×20 cm	7.2×17.2 cm	10	¥4,774

使用目的又は効果

傷及び周囲皮膚の被覆及び保護

禁忌・禁止*

再使用禁止 *詳細は添付文書をご参照ください。

(実物大)



製品の箱及びパッケージは、英語表記を採用しています。箱の前面には製品名のシールが添付してあります。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号

TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

[®]Trademark of Smith+Nephew

©2019 Smith+Nephew

HS-6

201912-2-MU