

+ Un apósito con adhesivo de silicona suave, que proporciona un medio ambiente húmedo para la curación, disponible en una variedad de formas, tamaños y áreas de difícil manejo.¹⁻⁷

Smith+Nephew

ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Apósito de espuma

Aplicación



1 Limpie el sitio de aplicación, asegúrese que la piel perilesional se encuentra limpia, seca y libre de exceso de vello.

Seleccione el tamaño de apósito adecuado (asegúrese que la almohadilla absorbente cubre toda la herida).




2 Retire la primera parte del material protector, y coloque el lado adhesivo sobre la piel.




3 Si es necesario el apósito se puede reposicionar.


Las siguientes imágenes le indican cuando **ALLEVYN GENTLE BORDER** debe ser cambiado

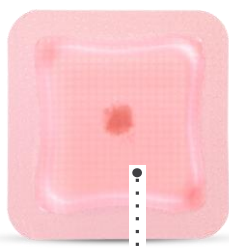

NO ES NECESARIO CAMBIARLO

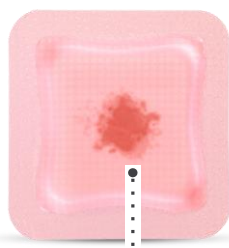

NO ES NECESARIO CAMBIARLO

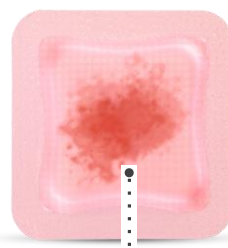

CAMBIE EL APÓSITO

Se puede mantener hasta 7 días (5 días en la región sacra), a menos que el exudado este a 0.5cm del área absorbente o lo que suceda primero.⁸⁻¹⁰

Tenga siempre en consideración el protocolo local de cambio de apósito.

Retirada

Para retirar el apósito, levante una esquina del apósito y retírelo lentamente hasta quitarlo completamente de la herida



Códigos ALLEVYN GENTLE BORDER

Tamaño (cm)	Código S+N	Unidades
7.5cm x 7.5cm	66800269	10
10cm x 10cm	66800270	10
10cm x 20cm	66800900	10
12.5cm x 12.5cm	66800272	10
15cm x 15cm	66800975	10
17.5cm x 17.5cm	66800273	10
23cm x 23.2cm Heel	66800506	5
16.8cm x 17.1cm Sacrum	66800898	10
21.6cm x 23cm Sacrum	66801031	10

Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) aplicables al producto antes de usarlo.

Referencias 1. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN GentleBorder. Wounds UK. 2009;5(3):32-44. 2. Smith & Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. 3. Smith & Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/RV3. 4. Smith & Nephew 2019. Use of Moisture Vapour Permeability (MVP) and Moisture Vapour Transmission Rate (MVTR) data to support product claims referring to moist wound healing. Internal Report. EO.AWM.PCSgen.001.v2. 5. Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. Wounds UK. 2016;12(2):70-78. 6. Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Case series evaluation: The use of Allevyn gentle border multisite on chronic wounds. Wounds UK. 2012;8(4):110-118. 7. Hampton S. An evaluation of a silicone adhesive shaped heel dressing. Br J Nurs. 2010;19(6):S30-33. 8. Smith & Nephew 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 9. Smith & Nephew 2017. An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. Internal Report. GMCA-DOF-09. 10. Smith & Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border wound model - 10 x 10. Internal Report. DS/17/491/R.

Smith & Nephew S.A.U. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona T. +34 902 30 31 60, F. +34 902 30 31 70

*Marca registrada de Smith+Nephew Todas las marcas registradas ©Diciembre 2020 Smith+Nephew AWM-AWC 25303-es V1 Allevyn Gentle Border application sheet 1220 www.smith-nephew.com/es