


Guide de référence pour épaule




1. Passer la suture à travers le tissu mou dans la configuration de points souhaitée. Enfiler les fils de suture à travers l'œillet de l'ancre à l'aide du tire-fils.

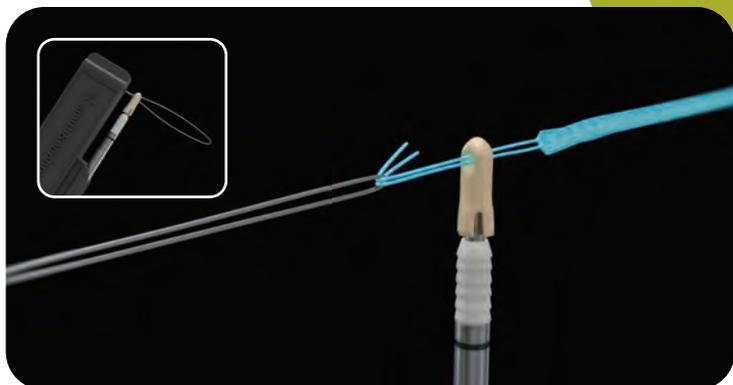


2. Insérer le guide de perçage et le mandrin appropriés. Retirer le mandrin. Tout en maintenant fermement le guide sur l'os au niveau du site d'implantation souhaité, utiliser les mèches recommandées pour préparer le site d'insertion. En cas d'os dense, il peut être nécessaire d'effectuer un mouvement de va-et-vient avec la mèche au niveau du site d'implantation. S'assurer que la mèche est toujours en rotation pendant le retrait.




3. Retirer la mèche et le guide de perçage. Avancer l'ancre de suture chargée dans la canule opératoire. Tendre le mou en excès du ruban de suture, rapprocher l'ancre du site de l'os préparé, et s'assurer que les rubans de suture ne sont pas entortillés autour de l'ancre.

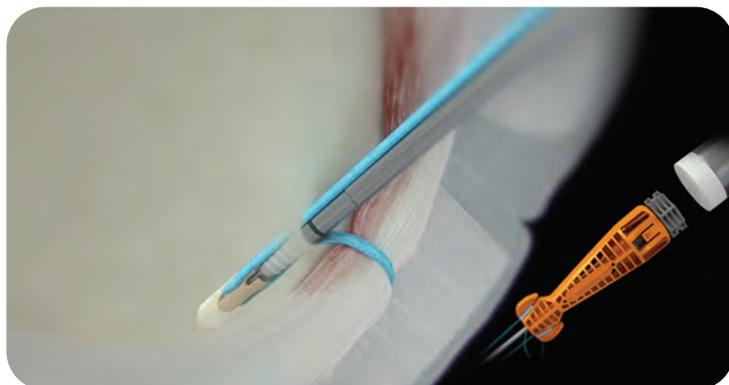

4. Établir et maintenir l'alignement axial de l'ancre de suture avec le site d'insertion préparé. Placer l'extrémité de l'ancre dans le pré-trou. Appliquer une tension sur les brins du ruban de suture pour réduire le labrum à l'emplacement souhaité. Utiliser un maillet pour taper sur la poignée du dispositif d'insertion jusqu'à ce que la marque laser se trouve au ras de l'os cortical.

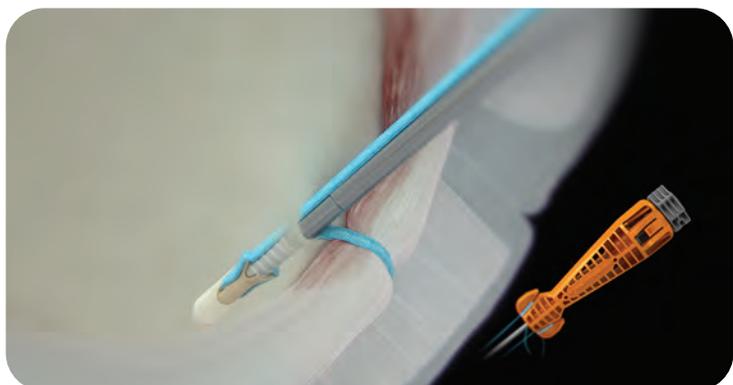

5. Tout en maintenant une légère pression descendante sur l'inserteur, tourner le bouton dans le sens horaire pour déployer l'ancre jusqu'à ce qu'au moins cinq (5) clics soient émis. Ne pas tourner le bouton dans le sens antihoraire pendant et après le déploiement de l'ancre.

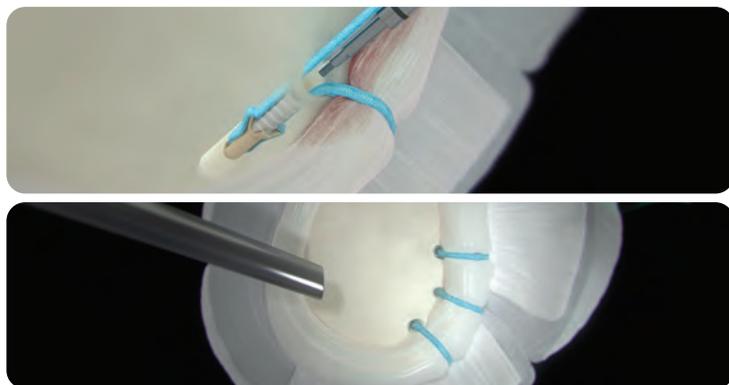

6. Retirer lentement le dispositif d'insertion en tirant dessus tout droit vers l'arrière ou en tapant sur l'extrémité distale de la poignée avec un maillet. Ne pas remuer la poignée pour désengager l'ancre. Jeter le dispositif d'insertion et couper l'excès de ruban de suture.

Informations de commande

Système de guide et d'ancre de suture MICRORAPTOR® Knotless	
N° de référence	Description
Implants MICRORAPTOR KNOTLESS	
Système de guide et d'ancre de suture MICRORAPTOR® Knotless	
72205020	MICRORAPTOR KNOTLESS REGENESORB®
72205021	MICRORAPTOR KNOTLESS PEEK
Mèches MICRORAPTOR KNOTLESS	
72205022	Mèche pour épaule MICRORAPTOR KNOTLESS, 2,2 mm
72205169	Mèche pour hanche MICRORAPTOR KNOTLESS, 2,6 mm
Ruban de suture MICRORAPTOR KNOTLESS	
72205129	MINITAPE® COBRAID blanc
72205128	MINITAPE COBRAID bleu
72205127	MINITAPE bleu
Guides de perçage MICRORAPTOR KNOTLESS	
72204991	Guide de perçage MICRORAPTOR, Extrémité en couronne
72204992	Guide de perçage MICRORAPTOR, Extrémité en pointe
72204995	Guide de perçage MICRORAPTOR, Extrémité bouche de poisson
Obturateurs MICRORAPTOR KNOTLESS	
72204999	Obturateur MICRORAPTOR, Extrémité mousse
72205000	Obturateur MICRORAPTOR, Extrémité mousse, canulée
72205001	Obturateur MICRORAPTOR, Extrémité trocart

Toutes les photos et tous les diagrammes sont exclusivement fournis à titre d'illustration. Les produits ne sont pas à l'échelle.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'un des produits cités dans cette présentation et sur les indications, les contre-indications, ainsi que les informations de sécurité relatives au produit, se reporter à la notice d'utilisation du produit en question. Pour commander ces instruments, contacter un délégué commercial agréé Smith+Nephew.

Pour en savoir plus, consulter le site smith-nephew.fr

Distributeur en France :
Smith & Nephew, S.A.S.
40/52 Boulevard du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France
T+33(0) 800 111 220
F+33(0) 1 46 41 24 11

www.smith-nephew.fr
Smith & Nephew, S.A.S.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.366.150 euros -
577 150 840 R.C.S. Nanterre

◊ Marque de commerce de Smith & Nephew.
©2020 Smith & Nephew. Tous droits réservés.
Toutes les marques de commerce sont reconnues.
Imprimé en France. 16882-fr V1 07/20 - S20-079v