


## オプサイト<sup>◇</sup> POST-OP ビジブル

吸収フォーム付トランスペアレントドレッシング

 smith&nephew

## OPSITE<sup>◇</sup> POST-OP VISIBLE

Waterproof, Bacteria-proof  
Dressing with See-through  
Absorbent Pad

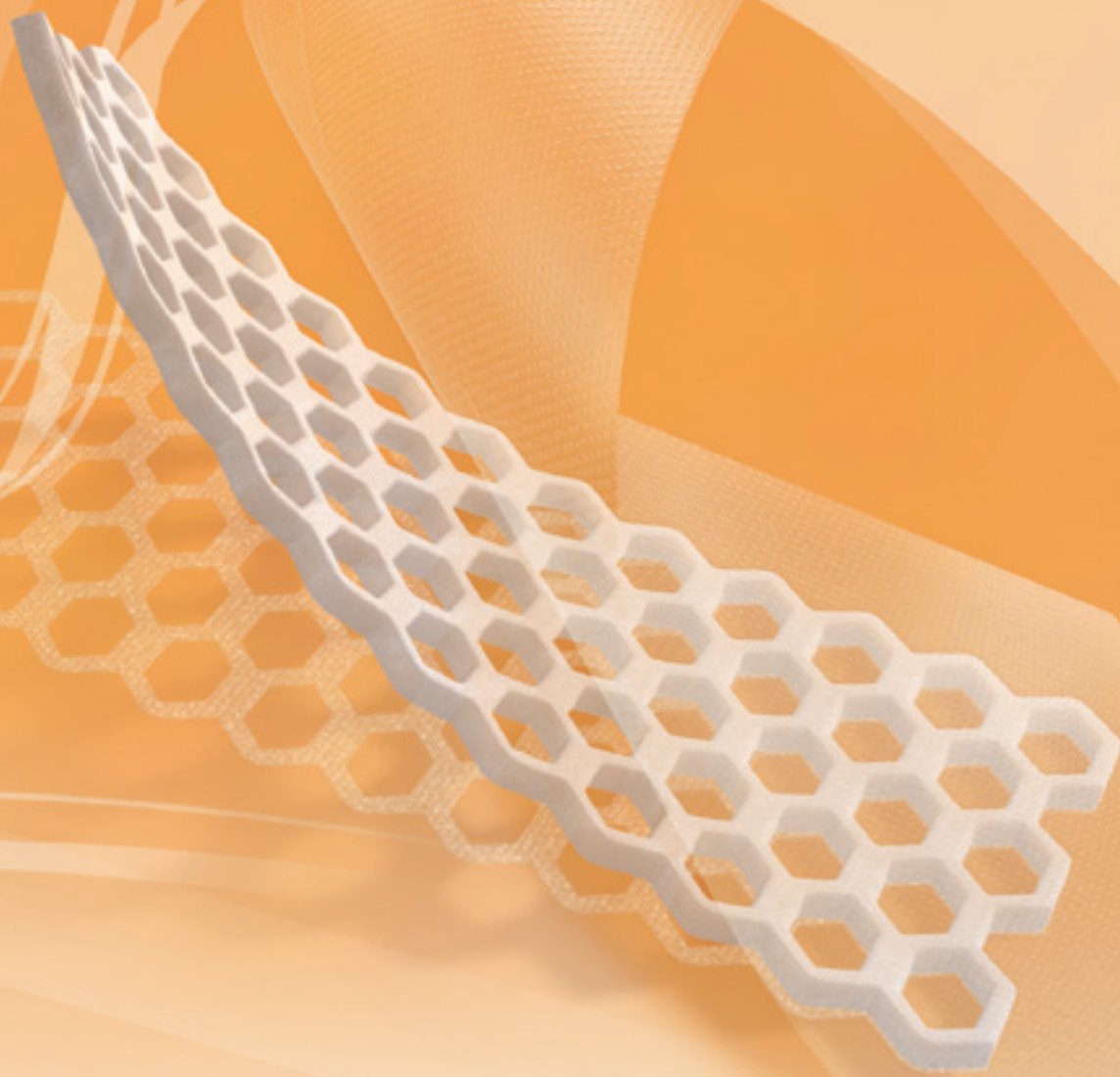


# 創の観察が可能で吸収性にも優れた 縫合創用ドレッシングです。

吸収性と伸縮性に優れ、創を観察しやすいハニカム構造。  
豊富なサイズでさらに使いやすくなりました。


## ムレにくい

トップフィルムに使用されているIV3000ドレッシングは、独自のポリウレタンフィルム(REACTIC<sup>®</sup>)を採用。通常のトランスペアレントドレッシングの15倍もの水蒸気透過性(約14,000g/m<sup>2</sup>/日/37°C)\*<sup>1</sup>を発揮し、汗などを素早く外へ蒸散させることで、確実な固定が可能となります。

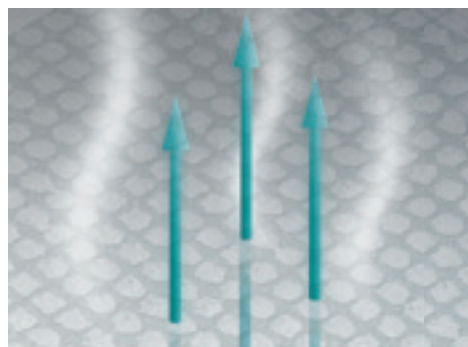

## 優れた吸収性\*<sup>2</sup>

滲出液はパッドの中で横方向に広がり、パッド全体で素早く吸収されます。優れた吸収性によって、ドレッシング交換の回数を軽減できます。

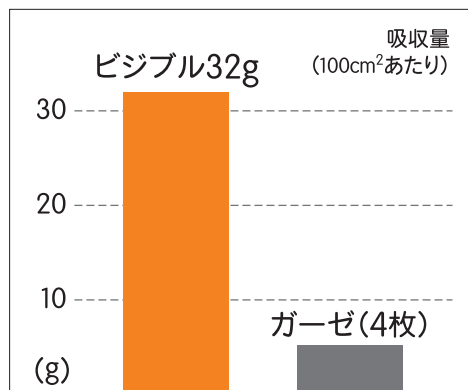


## ゲル化しない

パッド部にポリウレタンフォームを使用することで、滲出液を吸収してもゲル化することがなく、交換時の処置を手間をかけず簡単に行えます。

## 創面の観察が可能

網の目状にカットしたパッドにより貼付したまま創面が観察できます。

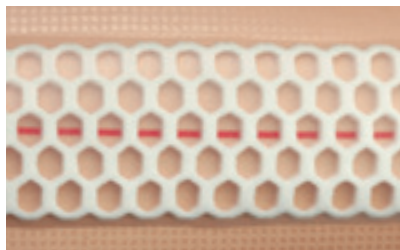

## 優れた伸縮性

関節部などの可動部に貼付しても高い安定性を発揮します。



## 貼り方



① 「1」と書かれた大きい方の裏紙をはがします。



② 小さい方の裏紙と非粘着部分を持ち、パッドが縫合創を覆うようにフィルムを貼付します。



③ フィルムを皮膚になじませながら、残りの小さい方の裏紙をはがします。



④ 「2」と書かれているキャリアーをはがします。

〈トップフィルム〉

水蒸気透過性の高いV3000ドレッシング

〈パッド部〉

吸収力の高いポリウレタンフォーム

〈創接触面〉

非固着性のポリウレタンフィルム

## はがし方



貼付面を軽く押さえ、もう片方の手でフィルムの端を持って、貼付面とできるだけ平行に引っ張りながらはがします。

## 交換時期の目安

しみだした滲出液がパッド側部まで広がったら、交換してください。

## ＜使用目的、効能又は効果＞

裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護

製品番号	サイズ(cm)		枚/箱
	フィルム部	パッド部	
66800143	10.5 × 9	5 × 3.5	20
66800144	16 × 11	10.5 × 5.7	20
66800145	21 × 11	15.5 × 5.7	20
66800146	26 × 11	21 × 5.7	20
66800147	31 × 11	26 × 5.7	20
66800148	35 × 11	30 × 5.7	20

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード：34864000


一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDNコード：70444000

届出番号：13B1X10222WC0009

EOG 滅菌済み

## 防水性・バクテリアバリア

外部からの水や排泄物、細菌の侵入などを防ぎます。

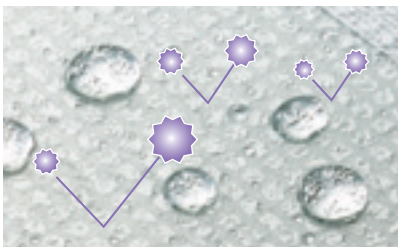

製造販売元

**スミス・アンド・ネフュー株式会社**  
**ウンドマネジメント事業部**

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号  
TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755  
仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652  
東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916  
名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420  
大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993  
広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325  
福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith & Nephew.  
© 2010-2017 Smith & Nephew KK

販売店

