

Aktive Therapieoption für schwer heilende Wunden:

Vakuumversiegelungstherapie ist Standardverbänden überlegen. Jetzt auch für niedergelassene ÄrztInnen abrechenbar.

Ein langwieriger Wundverschluss belastet alle Beteiligten. Durch die AIRLOCK®-Technologie des kanisterlosen NPWT-Systems PICO® 14 wird auch bei tieferen Wunden ein konstanter Unterdruck in der Wunde und Wundumgebung erzeugt. Die Vorteile: weniger Ödeme, Förderung der Durchblutung und von Granulationsgewebe.

Herr Sentschuk, welche Vorteile gegenüber der Standardversorgung bietet die NPWT mit PICO® 14 für BehandlerInnen und PatientInnen?
Die NPWT mit PICO® 14 bietet klare Vorteile im Vergleich zu konventionellen Verbandstechniken wie den selteneren Verbandwechsel, das Exsudatmanagement und die Bequemlichkeit für die PatientInnen. Ein weiterer Vorteil gegenüber der klassischen NPWT-Versorgung ist das Exsudatmanagement mit Wundauflagen.

Lassen sich mit diesem System Praxisabläufe optimieren?
Natürlich, denn die PatientInnen müssen mit diesem System seltener in die Praxis zum Verbandwechsel kommen, dadurch haben wir mehr Zeit für die anderen PatientInnen. Gleichzeitig werden weniger Verbandmaterialien zur Versorgung der Wunde benötigt.

Welche Patientengruppen profitieren aus Ihrer Sicht besonders von PICO® 14? Und was hören Sie von PatientInnen, die damit behandelt werden?

Von der Behandlung mit PICO® 14 profitieren alle Patientengruppen. Denn durch die einfache und verständliche Bedienung des Systems steigt die Sicherheit der AnwenderInnen und auch PatientInnen* im Umgang mit PICO® 14 und damit natürlich auch die Zufriedenheit bei der Behandlung. Bei der Nutzung von PICO® 14 nach einer Spalthauttransplantation wird die stationäre Aufenthaltsdauer bei meinen PatientInnen um 3–5 Tage verkürzt, da sie mit PICO® 14 nach Hause entlassen werden können.

Wie ist Ihre Erfahrung mit der ambulanten Erstattung und was sollte man dabei beachten?
Die letzten Quartalsabrechnungen haben uns gezeigt, dass die EBM-Erstattung erfolgt ist und die Kosten der NPWT abdecken.



Aufgezeichnete Webinare zur ambulanten Erstattung und viele weitere Informationen zu PICO® sNPWT finden Sie auf :


www.vakuumversiegelungstherapie.de

* Nach entsprechender Einweisung durch den Arzt.

Smith+Nephew



Oleg Sentschuk ist Facharzt für Gefäßchirurgie mit eigener gefäßchirurgischer Praxis in Kösching. Im Interview berichtet er von seinen Erfahrungen mit der ambulanten Versorgung von WundpatientInnen mit der kanisterlosen Vakuumversiegelungstherapie.

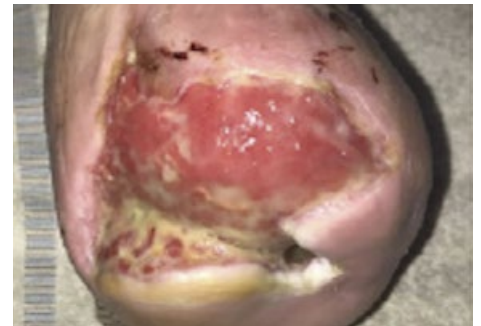

Tag 1
Therapiestart mit PICO® 14 System



Woche 11
Wunde deutlich verkleinert, Wundgrund frei von Belägen



Woche 19
Ergebnis nach Weiterversorgung mit DURAFIBER® Wundauflage und ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE Verband