

型崩れしにくく交換が容易 出血している創、滲出液が多い創、ポケットがある創に

海藻の茎から抽出されたアルギン酸塩から作られた植物由来の創傷被覆材です。
滲出液を吸収しゲル化することにより、創部を適度な湿潤環境に維持します。
ゲル化しても型崩れしにくく、交換が容易です。



亜鉛、マンガンを含む*




〈アルゴダームトリオニックが提供する4つの特性〉


独自の星型繊維と型崩れしにくい繊維構造

表面積の大きい星型形状繊維の優れた吸収性により、創傷治癒を促進します。また、ニードリング工程により繊維が均一に絡み合い、破れや引っ張りに強く、ゲル化しても型崩れしにくいいため、創部に繊維を残しません。

アルゴダームトリオニックの繊維

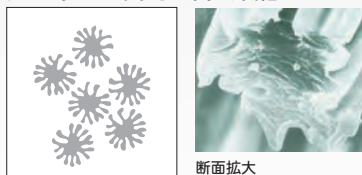

通常の繊維

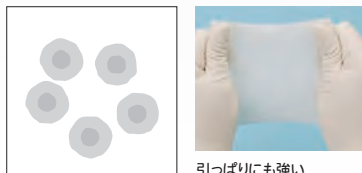

高い吸収効果とドレナージ効果

アルゴダームトリオニックの星型形状繊維に由来する毛細管現象により、多量の浸出液を吸収します。

止血作用の促進

アルゴダームトリオニックは純度が高いアルギン酸カルシウムです。血液と接触すると、カルシウムイオンを創内に放出します。凝固因子IVとして、カルシウムイオンは血小板の凝集を加速し、凝固カスケードに作用して止血を促します。

治癒の促進

滲出液を吸収しゲル化することにより、創部を適度な湿潤環境に維持し治癒を促進します。

*アルゴダームトリオニックは、主成分であるアルギン酸カルシウム(99%)の他、添加剤としてグルコン酸亜鉛、グルコン酸マンガン、水溶性クロロフィリン、ポロキサマー188を含む。

適用方法

ポケットの状態により、ドレッシングのタイプ(シート/ロープ)を選んでください。
カットする場合は、繊維を残さないようハサミなどをご使用ください。



1 奥行きに合わせてロープタイプを挿入します。滲出液が少ない場合は、生理食塩液で事前に湿らせます。



2 ポケットの中に詰めすぎないように挿入します。



3 フィルム、ガーゼなどを貼付します。

〈滲出液が多い場合〉



吸収パッド(メロリンなど)を貼付し、過剰な滲出液を吸収します。

〈シートタイプの場合〉



傷のサイズに応じてシートのサイズを選択します。

交換時期の目安

感染の疑いがない場合、二次ドレッシングに滲出液の広がりが見られた時点で交換します(感染のリスクがある場合は毎日交換します)。



アルゴダーム トリオニック

警告

〈適用対象(患者)〉

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。[感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること]

禁忌・禁止

〈使用方法〉

1) 再使用禁止

〈適用対象(患者)〉

2) 以下の場合は使用しないこと。
本品に対してアレルギーを有する患者

〈併用禁忌〉

3) アルカリ性剤、クローロヘキシジン、放射線治療を併用しないこと。

■保険適用

種 類 : 特定保険医療材料

保 険 請 求 名 : 皮膚欠損用創傷被覆材 アルゴダーム トリオニック

保 険 適 用 範 囲 : 皮下組織に至る創傷用 ①標準型

適 用 期 間 : 2週間を標準として特に必要と認められた場合については3週間を限度とする。

保 険 請 求 : 償還価格による。

■使用目的・効能効果

皮下脂肪組織までの創傷(III度熱傷を除く。)に対する「創の保護」、「湿润環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

■貯法

高温多湿を避け、室温で保存すること。

■有効期限

製品の表示にてご確認ください。

「使用上の注意」等の詳細については添付文書を参照ください。

製品番号	サイズ(cm)	タイプ	保険算定面積(cm ²)	枚/箱
66929362	5 X 5	シートタイプ	25	10
66929361	9.5 X 9.5	シートタイプ	90.25	10
66929360	10 X 20	シートタイプ	200	10
66929363	30cm, 2g	ロープタイプ	158	6

高度管理医療機器

承認番号:22500BZI00009A02

一般的名称:二次治癒親水性ゲル化創傷被覆・保護材

電子線滅菌済



スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号

TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755

仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652

東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916

名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420

大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993

広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325

福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

http://www.smith-nephew.com/japan/

販売店

© 2014-2020 Smith+Nephew KK

※ALGODERM TRIONIC®はLes Laboratoires BROTHIERの登録商標です。

AG-11
202005-1