


+ IV3000[◇] 6 x 7 cm

Smith+Nephew

IV3000[◇]

Kanülen- und Katheter-Fixierverband

Geeignet für periphere Katheter

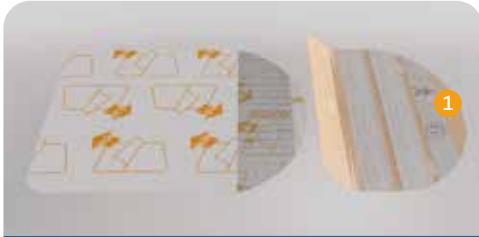

Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocken.

Dann orangen Abschnitt **1** vom abgerundeten Ende des Verbands entfernen.

Dieser enthält zwei Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln oder Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z.B. zur Fixierung von Schläuchen oder Stabilisierung des Katheterlumens.



Schritt 3

Ziehen Sie das mit **2** markierte Abdeckpapier ab.



Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.

Den Verband auf den Katheterkörper platzieren und ihn auf der Haut des Patienten fixieren.

Das mit **3** markierte Abdeckpapier entfernen.



Schritt 5

Den Verband glätten.

Die mit **4** markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.



Schritt 6

Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.

Nun das Datumsetikett aus Abschnitt **1** auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter des Patienten stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.



Tipp: Bitte beachten Sie bei der Applikation die aktuellen Hygieneanforderungen des Robert-Koch-Instituts. Die klebefreien Griffleisten von IV3000[◇] ermöglichen die Applikation auch mit Handschuhen. Ein vorheriges Anwärmen des Verbandes in den Handflächen aktiviert den Kleber schneller. Die Haut sollte immer trocken und fettfrei sein. Keine Bodylotion oder ähnliches vorher auftragen. Für schwierige Stellen, ist die Unterstützung von SECURA[◇] unseres sterilen, reizfreien Hautschutzprodukt zu empfehlen. Modellieren Sie den Verband gut an. Fixierstreifen sind individuell aufbringbar, die Abbildung ist ein Beispiel.

Bestellinformation

Dieses Poster ist hygienisch abwischbar

Abbildung	Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)	Empfohlene Indikation
	4007	6cm x 7cm	0747 8153	1800 Stück (18 OP)	100 Stück	Periphere Katheter

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

Wundmanagement Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4 / Haus 21
D-22763 Hamburg

T +49 (0) 40 87 97 44 350
F +49 (0) 40 87 97 44 375
www.smith-nephew.de
info@smith-nephew.com

© 2021 Smith & Nephew GmbH, [◇] Markenzeichen von Smith+Nephew
AWM-AWC-18875; Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.