



療養中の方やご家族のみなさまへ
スキンケアや傷のケアなどに
ご使用いただける製品をご紹介します。

もくじ

新発売

少量パック(コンシューマー)製品

ハイドロ ジェントルエイド◇	P1
オブサイト◇ ポスト-オブ	P3
メロリン◇	P5

スキンケア製品

セキュラ◇ CL	P8
セキュラ PO	P10
セキュラ ML	P12
セキュラ DC	P13
セキュラ ノンアルコール被膜	P17
リムーブ	P18

傷あとや皮膚の保護

シカケア	P19
------	-----

保護パッド・高機能ガーゼ

アレビン◇ ライフ	P21
メロリン	P23

絆創膏・テープ類

ハイドロ ジェントルエイド	P25
オブサイト Post-Op II	P27
キュティポア◇	P29
キュティポア プラス	P29
プリマポア	P30
オブサイト フレキシフィックス	P31
オブサイト クイックロール	P32
オブサイト クイックロール2way	P32
プリマフィックス◇	P32
オブサイト ジェントルロール	P33



少量パック

肌にやさしい粘着剤のふんわりパッド絆創膏
ハイドロ ジェントルエイド◇

✦ 高齢の方や肌の弱い方 ✦ 体液が出るキズ

✦ キズと周囲皮膚の保護

など、浅いキズ全般に使用できます。

最長
7日間
貼れる



原寸大

10×10cm
(パッド部 7.5×7.5cm)

7.5×7.5cm
(パッド部 5×5cm)

5×5cm
(パッド部 3×3cm)

製品の詳細情報は、P21を参照ください。

製品番号	JANコード	サイズ (パッド部面積)	希望小売 価格(税込)	入数/パック
33000157	4582111157317	5cm×5cm (3cm×3cm)	924円	3枚
33000158	4582111157324	7.5cm×7.5cm (5cm×5cm)	1,100円	3枚
33000159	4582111157331	10cm×10cm (7.5cm×7.5cm)	1,430円	3枚

ハイドロ ジェントルエイド 一般医療機器:救急絆創膏
医療機器届出番号:13B1X10222WC0016

使い方



1 使用前後に手を洗ってください。
キズとその周囲の皮膚を水道水等で洗浄し清潔にした後、乾燥させてください。



2 片方のうら紙をはがし、粘着剤がついているパッド面をキズに直接貼ってください。
端がしわにならないように本品をキズに密着させ、もう片方のうら紙もはがして貼ってください。



3 キズ全体に確実に貼られているか確認してください。使用開始して初めの時期は頻繁にキズを観察してください。少しはがしてキズを確認し、また貼ることもできます。本品の外側からキズから出る液の吸収状態が黒っぽい模様のように観察できるので、パッドの端から約0.5cmのところまでキズから出る液が広がった時を目安に交換してください。


※キズから出る液の吸収状態に関わらず7日間を限度として交換してください。

よくあるご質問

Q.

貼付中にシャワー浴はできますか？

はがれにくい防水フィルムのため、シャワー浴程度であれば可能です。

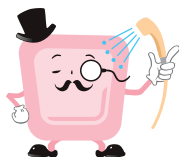


テープ部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換してください。

Q.

何日ごとに交換したら良いですか？

滲出液がパッドの端から0.5cmまで到達した場合や、漏れ出した場合は交換してください。

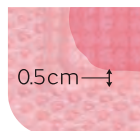

最長は7日間ですが、使用開始して初めの時期は、傷を観察する目的で早めの交換をお勧めします。

※吸収状態に関わらず7日間を限度に交換してください。



少量パック

関節にフィットするはがれにくい絆創膏

オプサイト◇ポスト-オプ

- + 濡らしたくないキズ + 切りキズ、すりキズ
- + 術後のキズ など、浅いキズ全般に使用できます。



最長
7日間
貼れる

原寸大

6.5×5cm
(パッド部 4×2.5cm)

9.5×8.5cm
(パッド部 7.3×3.7cm)

製品の詳細情報は、P23を参照ください。


製品番号	JANコード	サイズ (パッド部面積)	希望小売 価格(税込)	入数/パック
33000160	4582111157348	6.5cm×5cm (4cm×2.5cm)	594円	5枚
33000161	4582111157355	9.5cm×8.5cm (7.3cm×3.7cm)	781円	3枚

オプサイト ポスト-オプ 一般医療機器:救急絆創膏
医療機器届出番号:13B1X10222WC0018

使い方



1 使用前後に手を洗ってください。キズ及びその周辺皮膚を必要に応じて水道水等で洗浄し、十分に清潔にしたのち乾燥させてください。

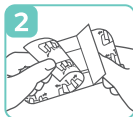

2 うら紙(1)をはがし、軽く押さえながら、キズに貼り付け、周囲となじませてください。



3 背面のシート(2)をはがしてください。

よくあるご質問

Q.

貼付中に入浴や
シャワー浴はできますか？

**防水フィルムのため、
入浴やシャワー浴が可能です。**

フィルム部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換してください。

Q.

何日ごとに交換したら良いですか？

**フィルムが破れたり、フィルムの周囲や
カテーテルラインにそって浮いてしまったり、
はがれた場合には、交換してください。**

最長は7日間ですが、使用開始して初めの時期は、傷を観察する目的で早めの交換をお勧めします。

※吸収状態に関わらず7日間を限度に交換してください。



少量パック

粘着剤なしの高機能傷あて材

メロリン◇

- + ガーゼの代わりに + 軽いやけどに
- + キズ薬と一緒に など、浅いキズ全般に使用できます。



原寸大

5×5cm

10×10cm



製品の詳細情報は、P19を参照ください。

製品番号	JANコード	サイズ (パッド部面積)	希望小売 価格(税込)	入数/パック
33000162	4582111157362	5cm×5cm	462円	5枚
33000163	4582111157379	10cm×10cm	561円	3枚

メロリン Home care 一般医療機器:医療用不織布
医療機器届出番号:13B1X10222WC0017

キズができたときに最初にすべきこと

初期対応



1. 水道水やシャワーで傷を洗う

水道水やシャワーで洗います。砂や小石、汚れなど傷口や傷口の周りについた異物を取り除きましょう。

※消毒薬で消毒をする場合にも、まずは汚れを落としからにしましょう。



2. 水気をふきとる

傷口を強くこすらないように注意しながら、清潔なガーゼやティッシュなどで水気をふきとりましょう。

※水ぶくれができている場合は、無理につぶしたり皮膚をはがさないようにします。



3. 血が出ているときは止血

出血している場合は、清潔なガーゼやタオルなどで傷口を2～3分軽く押さえて止血します。浅いキズの場合、しばらく押さえていると止まります。

消毒薬について

赤く腫れていない、膿のついていないきれいな傷口の場合は、消毒薬を使う必要はなく、シャワーや水道水で洗った後に絆創膏で保護します。

交換の目安について

絆創膏、傷あて材は、使用開始して初めの時期は、1～2日を目安に早めに交換して、キズを観察しましょう。キズから出る液がパッドからもれ出たり、汚れた場合は早めに交換します。

世界の医療で使われて170年
高機能・確かな品質で早めの手あてよりよい暮らし

キズのケア あなたのケア

Smith+Nephew




スキンケア製品

おしりやドライスキンのケアに、
お使いいただける製品をご紹介します。

皮膚の構造・機能について

全身をおおっている皮膚は、私たちの体を守る大切な役割を担っており、
皮膚の健康を維持することはとても大切です。

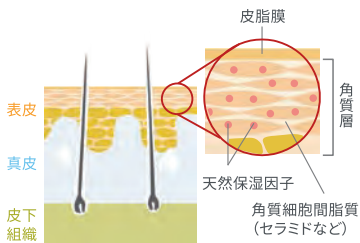

皮膚は、表皮・真皮・皮下組織の3層からなっており、様々な機能を果たしています。その中でもスキンケアで特に重要となるのが「表皮」です。

この表皮の最上層に「角質層」があり、健康な皮膚の生理機能を担っています。角質層は角質細胞間脂質（セラミドなど）、天然保湿因子、皮脂膜などで構成されており、これら成分の働きが皮膚の大切な役割を担っています。

スキンケアにおける大切な役割

皮膚の乾燥を防いで保湿


皮膚の外側をおおっている皮脂膜は、体からの水分の蒸発を抑え皮膚の乾燥を防ぎます。また、角質層は水分を保持して保湿します。

微生物の侵入や繁殖を抑制

皮脂膜によって皮膚表面はpH4～6の弱酸性に保たれていて、細菌などの侵入を防ぎ抗菌作用を発揮します。

角質層の表面をおおう
皮脂膜が水分の蒸散を
コントロール

しっとりした潤いのある
皮膚を保持

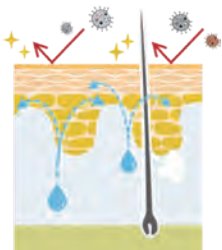


アレルゲン、細菌や
微生物、化学物質など
外からの刺激物質を
ブロック

皮膚障害を引き起こす
リスクを軽減

皮脂膜ってなに？

皮脂膜は、毛穴から出る汗や脂がまじりあってできるうるおいの膜です。この膜が外からの刺激をバリアしています。

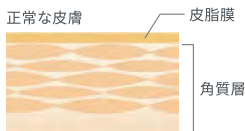

皮脂膜がなくなると、角質層で保持している水分が蒸発して皮膚は乾燥してしまいます。これではバリアが破綻し、ひび割れた皮膚のすき間から細菌などの刺激物質が侵入しやすくなります。





弱酸性洗浄料

セキユーラ[◇]CL

泡立てが不要なため
手早く洗浄でき、労力を軽減
保湿効果も備えた洗浄料



● 泡立て不要

セキユーラCLそのものが洗浄効果を持っています。
スプレーして汚れを浮き上がらせ、ガーゼなどで
拭き取ります(泡立て不要)。

● 素早い洗浄

ケアされる側・ケアする側双方の労力を軽減します。

● 洗浄後もしっとり

保湿成分を含む洗浄剤のため、洗浄後もしっとり。
皮膚を清潔にしつつ、保湿します。



汚れている部位に、セキユーラCLを適量
(2〜4プッシュ)吹きかけます。



吹きかけてから約5〜10秒間そのままにし、
汚れとなじませた後にガーゼなどで優しく
拭き取ります。



または、水かぬるま湯で洗い流し、ガーゼなどで
優しく拭き取ります。

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
59430900	4582111180261	236mL	2,090円	1本

刺激が感じられやすいエチルアルコールは配合していません。
沁(し)みの不安がある方にもご使用いただけます。

化粧品

セキユーラ CL / 精製水、ポリソルベート20、グリセリン、ポリクオタニウム-10、ベンジルアルコール、
塩化ベンゼトニウム、香料、エデト酸ナトリウム、アロエベラ葉、青色1号

おしりのスキントラブルを防ぐケア

おむつの中の皮膚、泣いていませんか？

おむつを使用していると、尿や便、汗がおしりに触れている時間が長く続いてしまいます。そうになると、蒸れて皮膚がふやけてしまいます。ふやけている皮膚は刺激を受けやすく、傷ついたり赤くなったり、細菌が繁殖しやすくなり、様々なトラブルのもととなります。おむつをはじめたら、おしりのスキンケアいかがでしょうか。



洗う時は強くこすらない

おむつの中の皮膚はデリケートで刺激に敏感です。強くこすることで赤くなったり細かな傷ができて、そこから炎症や感染を起こしてしまいます。

ケア方法

洗浄剤をしっかりと泡立てて、泡で優しくなでるように洗います。泡立てなくても使用できる洗浄剤もあります。



洗浄剤はしっかり泡立てましょう



泡立て不要の洗浄剤

石鹸やボディソープなどの洗浄剤で洗いすぎない

石鹸などで何度も洗ってしまうと、洗浄成分で皮脂膜が落ちてしまいます。皮脂膜がなくなると皮膚は乾燥し、刺激に敏感となり傷つきやすくなります。

ケア方法

保護クリームを皮膚に塗っておくことで、尿や便の汚れから皮膚を守ってくれます。洗浄剤での洗浄は1日1～2回を目安とし、頻回な洗浄はできるだけ避けましょう。



下痢便を長時間皮膚につけたままにしない

下痢便は消化酵素がたくさん含まれているので、皮膚に触れている時間が長いと、赤くなって皮膚がただれてしまいます。便の中にいる腸内細菌が、そのただれた皮膚に接触すると感染が起こりやすくなってしまいます。

ケア方法

おしりを洗った後に、保護クリームやはっ水クリームを使用して、下痢便の刺激が直接皮膚に触れないようにしましょう。





スキンケア製品

はっ水 / 保湿

はっ水性ジェル

セキューラ PO

はっ水、保湿で皮膚を守り、
芳香成分で臭いを包み込むジェル

● 皮膚を汚れから保護

はっ水性の高い被膜をつくり、
刺激性の強い汚れから皮膚を保護します。

● 皮膚のうるおいを保つ

はっ水性の被膜が水分の蒸発を防いで皮膚を保湿し、
しっとりなめらかなうるおいをキープします。

● 塗りやすいジェルタイプ

べたつきが少なく、少量でもよくのびる、塗りやすいジェルタイプです。



皮膚を洗浄した後、よく乾かします。



セキューラ POを適量(約1~2cm)指先に取ります。



使用部位に均一に塗ってください。

便や尿などの強いアルカリ性の刺激による皮膚のダメージが予測される部位へ、あらかじめ塗布することをおすすめします。はっ水性の被膜により、皮膚を汚れや刺激から保護します。




製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
59431500	4582111180278	70g	2,024円	1本
59431600	4582111180285	159g	2,651円	1本

刺激が感じられやすいエチルアルコールは配合していません。
沁(し)みの不安がある方にもご使用いただけます。

化粧品

セキューラ PO / ワセリン、ベンジルアルコール、チョウジ油、酢酸トコフェロール、ブチルパラベン、コーン油、
パルミチン酸レチノール、コレカルシフェロール、緑色202号

オムツかぶれをケアされる皆様に

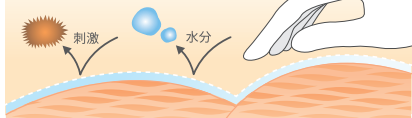

はっ水性のある被膜により
皮膚を保護

保湿成分配合で、皮膚を
しっとりなめらかに

芳香成分で臭いを包み込む

- はっ水性の被膜をつくり、おむつの中の便や尿を直接皮膚に触れさせません。
- また、保湿成分配合で、皮膚をしっとりなめらかにします。
- オムツかぶれの起きにくい、すこやかな皮膚を保ちます。


乾燥によるスキントラブルを防ぐケア

季節を問わず、乾燥から皮膚を守りませんか？


アルコール消毒や頻回な手洗いなど、様々な要因で皮膚が乾燥していませんか？さらに、年齢を重ねることで皮脂や汗の出る量が減ってしまい、皮膚の潤いがなくなります。ハリや潤いを失い乾燥した皮膚は傷つきやすくデリケート。皮膚への優しさとして、保湿ケアはいかがでしょうか。



正常な皮膚

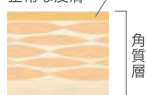

乾燥した皮膚

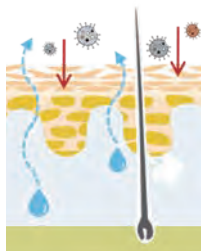

皮脂膜がなくなると、角質の水分が蒸発して皮膚は乾燥してしまいます。乾燥してひび割れた皮膚のすき間から、細菌などの刺激物質が侵入しやすくなります。

掻きすぎない

皮脂や汗の出る量が少なくなったり、角質の水分量が減ることで皮膚が乾燥し浅いひびわれを起こします。皮膚が弱っていると、外界の温度や湿度の変化に敏感となり、刺激となって痒みを感じます。掻くことで湿疹や掻き傷ができて、細菌が侵入し感染のもとになることも。

ケア方法

保湿をして乾燥を防ぎましょう。痒みがあってつらい場合や湿疹ができていいる場合には、皮膚科など専門医の受診をお勧めします。

熱いお湯をさける

皮膚の表面をおおっている皮脂は熱さに弱いのです。手洗いやお風呂で熱いお湯を使うと皮脂が取れすぎてしまい、皮膚が乾燥しやすくなってしまいます。

ケア方法

熱すぎない温度、約36～39℃ にしましょう。タオルで拭く場合にも熱くしすぎないように気をつけましょう。

洗いすぎない、こすりすぎない

頻繁に洗剤を使って洗うことや、アルカリ性の洗剤を使うこと、入浴やシャワーの時にナイロン性のタオルでゴシゴシ強くこすることは、皮脂が落ちて皮膚が乾燥する原因になりえます。

ケア方法

弱酸性の洗剤を選びましょう。体を洗う時は柔らかい布やタオルを使って、洗剤をしっかりと泡立てて強くこすらないように洗いましょう。泡で出るタイプや泡立てなくても使用できる洗剤を選ぶこともお勧めです。



保湿ローション

セキューラ[◇]ML

全身にお使いいただける
皮膚に優しい保湿ローション

● **のびがよく、使い心地はしっとり、さらさら**

のびがよいので、乾燥しやすい方やご高齢の方の皮膚にもよくなじみます。さらりとした使い心地で、保湿パールの上から医療用テープを貼付できます。

● **べとつかず、無香料**

べとつかないので、仕事や家事、介護などの合間にもご使用いただけます。無香料なので、使用場面を選びません。

● **保湿が持続**

保湿が持続する親水性ローションです(目安:約5~6時間)*。
入浴後、シャワー浴後、清拭後などにお使いいただくことをおすすめします。

※洗浄方法・洗浄回数などにより短縮されます。目安としてお考えください。



無香料・無着色・低刺激性の保湿剤です。



日ごろの手のお手入りに。



入浴後の保湿ケアに。



少量でもよくのびるので、全身の保湿ケアにお使いいただけます。

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66800015	4582111180315	60mL	616円	1本
59433400	4582111180308	236mL (ポンプ付)	1,518円	1本

刺激が感じられやすいエチルアルコールは配合していません。
沁(し)みの不安がある方にもご使用いただけます。

化粧品

セキューラ ML / 精製水、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリン酸、セテアリルアルコール、セテアレス-20、ステアリン酸グリセリル、アミノメチルプロパノール、(アクリル酸/アクリル酸アルキル(C10-30))コポリマー、メチルパラベン、プロピルパラベン

メディカルスマイル
専用キャンペーン

セキューラ MLお試しキャンペーン中



+



= 本体価格
のみ

価格:616円(税込)



キャップ付きで
ポケットの中・バッグの中へ
いつでもスキンケア

セキューラ ML60ml
価格:616円(税込)

セキューラ ML60ml
専用ミニ・ポンプ

フリーダイヤルメディカルスマイル <http://www.medical-smile.com>

0120-3816-54

お支払いは、到着後のコンビニ支払いか代引き(代金引換受け取り)ですのでも便利です。
光洋メディカルスマイルおすすめキャンペーンは在庫が無くなり次第終了させていただきます。



保湿クリーム

セキューラ DC

はっ水効果で汚れから皮膚を守り、 うるおいを長時間キープする保湿クリーム

● 皮膚のうるおいを保つ

手指・足脚・全身の保湿にお使いいただける
クリームタイプの保湿剤です。

● しっとり保湿が長続き

うるおいが長時間続くクリームタイプ。
(目安:約12~24時間)*。

● はっ水性が高く、皮膚を汚れから守る

ジメチコン含有によりはっ水性が高く、汚れから皮膚を守りながら
乾燥しやすい皮膚のコンディションを整えます。



※洗浄方法・洗浄回数などにより短縮されます。目安としてお考えください。



セキューラ DCを適量(約1
~2cm) 指先に取ります。



使用部位に均一に塗ってくだ
さい。



無香料・無着色・低刺激性の
保湿剤です。



日ごろの手のお手入れに。



全身の保湿にお使いいただけ
ます。



“かかと”などの、乾燥しやすい
部分にもお使いいただけます。

製品番号	JAN コード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
59432200	4582111180292	114g	2,893 円	1 本

刺激が感じられやすいエチルアルコールは配合していません。
沁(し)みの不安がある方にもご使用いただけます。

化粧品

セキューラ DC / 精製水、ワセリン、ジメチコン、パルミチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、セチルジメチコンコポリオール、ラウリン酸ヘキシル、イソステアリン酸ポリグリセリル-4、塩化ナトリウム、パラフィン、水添ヒマシ油、ミツロウ、メチルパラベン、エデト酸二ナトリウム、プロピルパラベン

ハンドケアとしての使用

両手を保湿する量の目安

※乾燥の程度やお好みによりご調整ください。



セキューラ^oMLはワンプッシュ
のびがよくさらっとした使い心地の保湿剤。こまめに塗布します。

セキューラDCは第1関節分
保湿だけでなく、はっ水効果があり、しっかり水をはじいて皮膚を守ります。

ご使用いただくシーンに応じてご選択ください。



1 手のひらの体温でローションやクリームを温めます。



2 手を包み込むように、ゆっくり両手の甲にのばし、やさしく塗っていきます。



3 手のひらにも塗ります。しわに滞っているクリームものばします。



4 指の外側にも1本1本のばします。



5 指と指の間も丁寧に塗ります。



6 最後に爪の外側にも塗り残さないようにのばします。

乳児への使用



乳児へご使用の際は、生後2週間～4週間を経過し、皮膚が満期産児の表皮様に変化してからご使用ください。使用中に赤み、腫れ、かゆみ等の異常が現れた場合には、使用を中止し医師にご相談ください。

- アレルギーの有無を考慮する必要がある場合には、主治医・産科医へご相談の上でご使用ください。
- 満37週未満の出生時の場合には、表皮の層が極めて薄い状態であり、皮膚の機能も未熟であるため、ご使用はお勧めしておりません。主治医・産科医へご相談ください。

使い分けガイド 目的別

あなたはどのタイプ？



洗浄

水を使わずに
汚れを落としたい



保湿

しっとり保湿して、皮膚を
コンディショニングしたい



セキュラ CL Cleansing Lotion

- 汚れを拭き取るタイプ
- 外出先でも使える
- 汚れを浮き上がらせる

保湿

しっとり保湿して、
皮膚をコンディショニングしたい

保湿

保護

汚れや水分をはじく膜で
皮膚をコーティングしたい

広範囲にサッと
塗りたい
クリームのかた
つきを避けたい
手作業をすぐに
したい

下痢便や失禁などの
強い刺激や汚れから
保護したい

うるおいを長時間
(12時間～24時間)
保ちたい



セキュラ PO Protective Ointment

- ジェルタイプ
- 高いはっ水性



セキュラ DC Dimethicone Cream

- クリームタイプ
- べとつかず、
さわやかな使用感
- 無香料



セキュラ ML Moisture Lotion

- ローションタイプ
- さらっとした使用感
- 無香料

使い分けガイド 使用場面別

上手く使い分けてみませんか？




セキューラ PO はっ水性ジェル

Protective Ointment

- ✓ ジェルタイプ
- ✓ 高いはっ水性



はっ水被膜で下痢便などの
便失禁から皮膚を守りたいときに

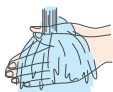

水仕事など頻繁な手洗いによる
スキントラブル(手荒れ)ケアに



尿失禁やオムツのムレから
皮膚を守りたいときに


セキューラ DC 保湿クリーム

Dimethicone Cream

- ✓ クリームタイプ
- ✓ べとつかず、さわやかな使用感
- ✓ 無香料



足部分・下肢・かかとへの
スキンケアや保湿に

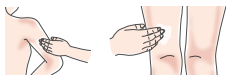

デリケートな皮膚の
方の保湿ケアに



治療の影響による皮膚の乾燥ケアに
無香料なので、においに敏感な方でも
使いやすい



手洗い後など
日頃のお手入れに

セキューラ ML 保湿ローション

Moisture Lotion

- ✓ ローションタイプ
- ✓ さらっとした使用感
- ✓ 無香料



塗った上からでもテープなど粘着するものも貼れる
ストーマ用装具等による皮膚ダメージから
守りたい場合に



スマホやタブレットの
操作もしやすい



手洗い時の
ぬるつき感が少ない



手洗い後など
日頃のお手入れに



被膜剤

セキューラ[®]ノンアルコール被膜

皮膚の上にはっ水性の無色透明の薄い膜をつくります。
水分や外からの刺激物を通さないため、
これらの刺激から皮膚を守ります。

はっ水性ですが酸素や水蒸気は通すので、
皮膚呼吸や汗をかくことを妨げません。

便や尿などの排泄物が付いてしまったり起こる
皮膚トラブルや、テープなどを剥がすときの刺激で起こる
皮膚トラブルから皮膚を守ります。

また、傷からしみ出る滲出液が多くて皮膚がふやけてしまう
場合にも、傷の周りの皮膚を守るために使用することができます。



● 被膜をつくって皮膚を保護

テープや絆創膏、ストーマ用装具など粘着性のあるものを皮膚から剥がす時に
うける刺激から皮膚を保護します。

被膜剤を塗ったうえからテープなどを貼っても粘着力が落ちません。

● 刺激が少ない

アルコールフリーなため、傷んだ皮膚に塗っても刺激の少ない製品です。

● 使い勝手が便利

塗ってからの乾燥が早いいため、ケアにかかる時間の効率化に貢献します。
3種類のタイプがあり、用途に応じて使い分けができます。


セキューラ ノンアルコール 被膜スプレー

(販売名:ノンアルコール スキンプレップ スプレー)

さっとスプレーでき皮膚を保護



スプレー式で、広範囲の患部
にも素早く塗布することがで
きます。

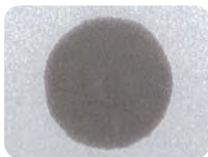

液剤が薄く均一に広がり、
ムラなく被膜を形成します。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66800872	4582111180322	28mL	2,222円	1本

一般医療機器 液体包帯 JMDNコード:33584000 届出番号:13B1X10222WC0014

セキュラ[®] ノンアルコール 被膜

(販売名:ノンアルコール スキンプレップ)

スティックタイプ

手が汚れず、
狭い部位でも塗りやすい



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66800787	4582111180377	3mL	1,782円	5本
66800711	4582111180339	3mL	11,704円	50本

一般医療機器 液体包帯 JMDNコード:33584000 届出番号:13B1X10222WC0013

滅菌済

ナプキンタイプ

ピンポイントに塗れて、
携帯にも便利



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66800712	4582111180346	1mL	6,776円	50枚

一般医療機器 液体包帯 JMDNコード:33584000 届出番号:13B1X10222WC0013

滅菌済

使用上の注意:禁忌・禁止について

火気を避け、風通しの良い場所で使用してください。開いている傷や深い刺し傷には使用しないでください。

生後1か月未満の新生児には使用しないでください。

※その他、ご使用にあたっては添付文書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。



スキンケア製品

保護

剥離剤

リムーブ

皮膚への影響を考慮し、アロエ抽出液を配合

ストーマ用装具やテープの粘着剤・ハイドロコロイド材を剥がしやすくして、皮膚への物理的刺激を軽減する剥離剤です。皮膚に残った粘着剤のべとつきも除去します。



皮膚への刺激を低減しストーマ用装具の粘着剤を剥がしやすくします。



ドレッシング材の粘着剤のべとつきも除去します。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
403100	4582111180018	紙ナプキンタイプ	2,772円	50枚/箱
403379	4582111180384	236mL/ポリ容器タイプ	4,400円	1本

未滅菌 衛生材料



傷あとや皮膚の保護


ケロイドなどの傷あとケアや健常皮膚の保護

シカケア

シカケアは、やわらかく粘着性のあるシリコンジェルシートです。

けが(外傷)、熱傷(やけど)、手術の抜糸後など傷あとが赤くなったり、盛り上がった部位(肥厚性瘢痕やケロイド)を保護します。

- 透明なため、貼ったまま皮膚や傷あとの観察ができます。
- 柔軟性があるため、曲面にも貼りやすくフィットしやすいシートです。
- 耐久性があるため、伸ばしても型くずれしにくい製品です。
- 皮膚と接する面は剥離刺激の少ないシリコンジェルを採用しています。
- 自由なサイズにカットして使用できます。
- 洗って繰り返し使うことができるので、衛生的でかつ経済的です。

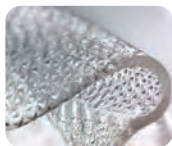

柔軟性と粘着性



柔軟性があるので、曲面にも貼りやすくフィットします。皮膚と接する面には剥離刺激の少ない粘着性があります。

耐久性



粘着性のない面はシリコン膜で覆われ耐久性があるため、伸ばしても型くずれしにくくなっています。

再使用可能



洗って繰り返し使うことができます。

カットして使用可能



貼付部位のサイズに合わせて自由にカットして使用できます。

医療従事者のみなさまへ

圧迫部位を保護することで、非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)や呼気呼吸気変換方式経鼻的持続陽圧呼吸法(N-CPAP)などのマスク装着による皮膚損傷を防ぎます。



マスク装着によるスキントラブルへの保護



こちらは、ハイドロ ジェントル エイド[®]を使用した保護

※これは保護方法の一例です。密着や圧迫による損傷を保護するためには、マスクの選択や装着位置の調整が必要になります。

使用方法に関連する使用上の注意


- 1) 酸素マスク等と併用し、口や鼻の周囲に使用する場合は、シカケアやハイドロ ジェントル エイドが口の中に入らないように大きめのサイズに切って、気道を閉塞しないように注意してください。
- 2) 口や鼻の周囲に使用する場合は、最初に貼付した場所からずれていないことを定期的を確認してください。

その他詳細につきましては、添付文書をご参照ください。

装着時間

シカケアは、1日12時間以上（可能であれば洗浄のタイミングを考慮しつつ24時間）、2ヶ月以上継続して使用してください。皮膚とシカケアを順応させるため、最初の2日間は1日4時間、次の2日間は1日8時間、ついで1日2時間ずつ使用時間を増やし、最適な時間（1日24時間迄）まで増やしてください（下図参照）。

(時間)

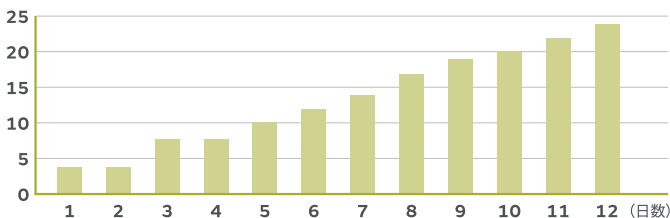

洗浄

皮脂などの汚れによって粘着力が弱くなった際は、ボディークリームやハンドソープなどの人体を洗う非刺激性の液体石けんで洗ってください。その後、清潔なぬるま湯で良くすすぎ、軽くたたいて乾かしてから、清潔にした傷あとに使用してください。

- 洗浄の際、人体以外に使用する洗剤は用いないでください。
- 洗浄後は、タオルや紙製品などで粘着面を拭かないでください。

使用上の注意

- シカケアの衛生状態が悪いか、製品に圧力がかかりすぎていることが原因と考えられる発疹が皮膚に確認された報告があります。発疹が現れた場合はシカケアの使用時間を12時間に短縮し、その後12時間は使用せず、使用した箇所を休ませてください。発疹が続く場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 外科的切開部では、縫合糸が除去され、その部位が完全に治癒した後にのみシカケアを使用してください。
- シカケアの皮膚への順応と洗浄の手順を、注意しながら行ってください。
- シカケアの幼児への使用は、適切な二次ドレッシングと組み合わせて行ってください。
- 製品の性能を損なう恐れがありますので、シカケアの下に軟膏やクリームを使用しないでください。
- 刺激、浸軟、過顆粒の形成または過敏症の兆候が現れた場合には注意が必要です。もし発症した場合は、使用を中止することを検討してください。

次の場合は直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- ・ 貼付部位周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、かゆみ、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・ 疼痛

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数/小箱
66250704	4582111150387	6cm×12cm	5,412円	1枚
66250706	4582111150394	12cm×15cm	9,053円	1枚



保護パッド

ポリウレタンフォーム保護パッド

アレビン[◇]ライフ

アレビン ライフは、ポリウレタンフォーム保護パッド材です。
独自の多層構造により、ズレや摩擦から皮膚を守ります。

皮膚のズレを軽減

独自の5層構造が皮膚にかかるズレのチカラを吸収し、皮膚を保護します。

摩擦を軽減

外表面にはフィルムを採用。すべりがよいため、着衣やシートなどの摩擦のチカラを軽減します。

剥がす時の痛みを軽減

皮膚との接触面には、敏感肌の方にも配慮しシリコーンゲルを採用しています。

トランスペアレントフィルム

シリコーンゲル粘着剤



シリコーンゲル粘着

使用例



おしりの骨が出ている方



太ももの横の骨が出ている方



座っている時間が長い方



寝ている時間が長い方
踵(かかと)や
踝(くるぶし)を保護



パッドの中央部に踵部を合わせます。



左右の透明フィルムを剥がし、内(外)果部を覆います。



最後に踵部を包み込むように貼付します。



貼付完了です。
※ シリコーンテープのしわが多い部分は、一度剥がして貼り直しが可能です。


※ 傷や皮膚疾患、または皮膚疾患の疑いのある部位などには使用しないこと。

※ 本品は使い捨てのため、使用は1回限りとし、再使用しないこと



クッション性

高齢で寝たきりの方、麻痺や拘縮があり寝ている時間が長い方、痩せていて骨が突出している方などの皮膚の保護にお役立ていただけます。

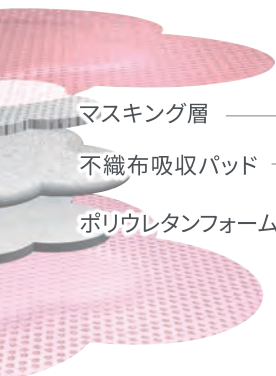

マスキング層

不織布吸収パッド

ポリウレタンフォーム

圧力を分散

5層構造によりクッション性を有するとともに、広いマスキング層で1点にかかる圧力を分散します。

過湿潤の防止

ポリウレタンフォームと不織布吸収パッドが汗などの水分を吸収し、水蒸気透過性を有する外表面のフィルム(トランスペアレントフィルム)から水分が蒸散します。

● 使用箇所に合わせて選べる3つの形



標準型



仙骨用



かかと用

※肘にもお使いいただけます。

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数/小箱	規格
66801068	4582111154934	12.9cm×12.9cm (7.6cm×7.6cm)	6,354円	10枚	標準型
66801069	4582111154941	15.4cm×15.4cm (10.2cm×10.2cm)	11,444円	10枚	
66801070	4582111154958	21cm×21cm (15.4cm×15.4cm)	26,088円	10枚	
66801306	4582111154965	17.2cm×17.5cm (96.33cm ²)	10,596円	10枚	仙骨用
66801307	4582111154972	21.6cm×23cm (182.25cm ²)	20,048円	10枚	
66801304	4582111154989	25cm×25.2cm (242.73cm ²)	13,351円	5枚	かかと用

※ご使用にあたっては取扱説明書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。

滅菌済 衛生材料



高機能ガーゼ

非固着性ドレッシング

メロリン[◇]

3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。
傷に貼りつきにくく、滲出液※を吸収しながら傷を保護します。

※ 滲出液(しんじゅつえき)：傷からしみ出る液

吸収層：コットン/ポリエステル繊維

- 自重の10倍の水分を吸収する※ため、滲出液の多い傷にもご使用いただけます。
- これにより、交換回数の低減にも寄与します。
- クッション性を有するため、傷を外部の刺激から保護します。

※社内資料

傷との接触面：多孔性ポリエステルフィルム

- 非固着性のため傷に貼りつきにくく、交換時の痛みを軽減します。
- たくさんの小さな穴(多孔)から水分を通過させ、滲出液を吸収します。

つつるした面を傷にあててください

〈 滅菌済みと未滅菌の2つのタイプ 〉

メロリン 滅菌タイプ

オートクレーブにて滅菌処理されているため、傷にご使用いただけます。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数/小箱	1枚換算(税込)
66974932	4582111150646	5cm×5cm	1,166円	25枚	47円
66974933	4582111150653	10cm×10cm	979円	10枚	98円
66974940	4582111150677	5cm×5cm	4,149円	100枚	41円
66974941	4582111150684	10cm×10cm	8,298円	100枚	83円
66974939	4582111150660	10cm×20cm	14,117円	100枚	141円

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード：34655000

一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード：34654000 届出番号：13B1X10222WC0006

滅菌済

※少量パックは、3ページをご覧ください。

使用例

- ※傷にご使用の場合は、滅菌済みタイプをご使用ください。
- ※医師より指示された方法があれば、そちらに従ってください。

1. 傷を水道水または生理食塩液などで洗い、傷の周りの皮膚に付いている水分を拭き取ります。
2. 医師に処方された薬剤があれば塗った上に、傷をおおえる大きさのメロリン^oをのせます。
この時、**つつつしている面を傷にあててください。**
3. 最後にテープなどで固定します。



外表面：はっ水処理ポリエステル不織布

- 外部からの水分や汚れが浸み込みにくくするための工夫です。



傷の大きさに合わせてカットすることができます。

メロリン(未滅菌) 未滅菌タイプ

滅菌処理されていないため、傷にはご使用いただけません。「傷のない、軟膏を塗った皮膚の保護」や「傷ができそうな皮膚の保護」にご使用ください。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格 (税込)	入数/小箱	1枚換算 (税込)
66974942	4582111150691	10cm×10cm	8,729円	150枚	58円
66974943	4582111150707	10cm×20cm	8,729円	75枚	116円
66974944	4582111150714	20cm×30cm	7,216円	25枚	289円
66974930	4582111150639	50cm×7m (ロールタイプ)	14,902円	1巻	—

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード:34655000

一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード:34654000 届出番号:13B1X10222WC0005

未滅菌

医療従事者の皆様

未滅菌タイプを傷に直接貼付する場合は、滅菌を行ってからご使用ください。
医療機関にてオートクレーブ滅菌いただくことが可能です。
滅菌条件については日本薬局方をご参照ください。

※ご使用にあたっては添付文書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。



絆創膏・テープ類

救急絆創膏

ハイドロ ジェントル エイド



痛みやわらぐふんわりパッド

傷にあてるパッド部分がスポンジ状の絆創膏です。

クッション性のあるふんわりパッドが皮膚によくなじみ、傷を保護します。



防水仕様

水仕事やシャワー浴でも剥がれにくい
防水フィルムを採用しました。


最長7日間*

ポリウレタンフォームが滲出液を
吸収し、最長で7日間継続して
使用できます。



イメージ図

過剰な
滲出液を
素早く蒸散

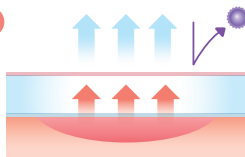


細菌の侵入を
防ぎます

滲出液を
吸収・保持

※傷を観察し、滲出液の量に応じて適宜交換をしてください。

使用例

すり傷・きり傷・刺し傷・かき傷・靴ずれ など、浅い傷の保護に適しています。

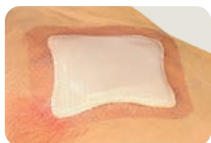

※ お尻モデルに貼っています



剥がす時の痛みが少ない


低刺激性で、剥がす時に感じる痛みが少なく※、しわになっても貼り直しができます。

敏感肌の方にも配慮した低アレルギー粘着剤です。


※感じ方には個人差があります




イメージ図

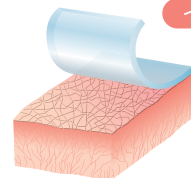

シリコンゲル粘着剤

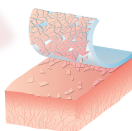

従来の
アクリル系粘着剤

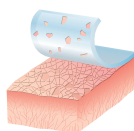

皮膚への影響が少ない
一般的な粘着剤

粘着力が落ちにくいいため、ずれた時などに貼り直しができ、皮膚への影響も少ない。



ハイドロ ジェントルエイド◇

製品番号	JANコード	サイズ(パッド部面積)	標準価格(税込)	入数/小箱
66800833	4582111156471	5cm×5cm (3cm×3cm)	1,958円	10枚
66800834	4582111156488	7.5cm×7.5cm (5cm×5cm)	2,398円	10枚
66800835	4582111156501	10cm×10cm (7.5cm×7.5cm)	2,959円	10枚
66800840	4582111156518	15cm×15cm (12.5cm×12.5cm)	6,644円	10枚
66800836	4582111156495	5.5cm×12cm (3cm×9.5cm)	2,871円	10枚
66800837	4582111156525	8cm×15cm (5.5cm×12.5cm)	4,400円	10枚
66801012	4582111156532	10cm×20cm (7.2cm×17.2cm)	5,346円	10枚

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード:34864000
届出番号:13B1X10222WC0016

滅菌済

※ご使用にあたっては添付文書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。

※少量パックは、3ページをご覧ください。



絆創膏・テープ類

救急絆創膏

オプサイト◇Post-Op II


ムレにくい防水絆創膏

水蒸気を透過するポリウレタンフィルム


汗や傷からの滲出液などの水分が溜まらず、ムレにくく快適です。

防水性で水仕事や入浴が可能です。

細菌を透過させず二次感染を防止します。

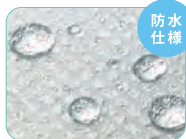

防水仕様

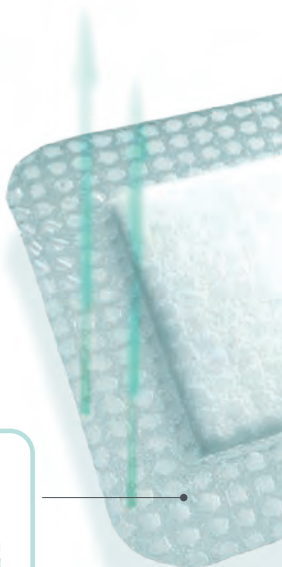

イメージ図



REACTIC◇フィルムは水となじみやすい構造で、フィルム面に水分子がすばやく染み込み、多くの水分を速やかに蒸散させます。

使用例

すり傷・きり傷・かき傷など、浅い傷の保護、手術後の縫合創の保護に適しています。さらに、注射針やカテーテルなどの穿刺部の固定や保護にも適しています。



傷にくっつきにくい高吸収パッド


メロリンと同じ多孔性ポリエチレンフィルム

パッドはツルツルで傷に固着しにくく、はがすときの痛みや不快感を減らします。通常のガーゼに比べて吸収量の多い素材です。



低刺激の粘着剤

低アレルギー性のアクリル系粘着剤

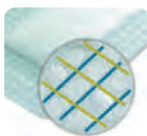

粘着剤を網目状に塗布しており、皮膚への刺激を軽減しています。アレルギー性のかぶれが起きにくいです。

最長7日間※

水蒸気透過性が高くムレにくいいため、絆創膏の固定性が向上します。関節にもフィットし最長で7日間継続して貼付できます。

※傷を観察し、滲出液の量に応じて適宜交換してください。

オプサイト[◇] Post-Op II

製品番号	JANコード	サイズ(パッド部面積)	標準価格(税込)	入数/小箱
66000708	4582111150899	6.5×5cm (4×2.5cm)	10,098円	100枚
66000709	4582111150905	9.5×8.5cm (7.3×3.7cm)	4,268円	20枚
66000710	4582111150912	12×10cm (7.5×5cm)	3,146円	10枚
66000712	4582111150929	15.5×8.5cm (12×3.7cm)	7,183円	20枚
66000713	4582111150936	20×10cm (15×5.5cm)	8,305円	20枚
66000714	4582111150943	25×10cm (20×5.7cm)	9,427円	20枚
66000715	4582111150950	30×10cm (25×5.7cm)	10,098円	20枚
66000716	4582111150967	35×10cm (30×5.7cm)	11,220円	20枚

販売名オプサイト Post-Op II 一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000
(一般医療機器 カテーテル被覆・保護剤 JMDNコード 70444000)
届出番号:13B1X10222WC0002

滅菌済

※少量パックは、3ページをご覧ください。



絆創膏・テープ類

救急絆創膏

キュティシリーズ

テープと吸収パッドが一体型になった救急絆創膏です。
傷に貼りつきにくい非固着性吸収パッドを使用。
交換する時の"剥がす痛み"をやわらげます。生活様式や傷の大きさに合わせて選ぶことができる豊富なラインナップです。

キュティポア[◇]

- キュティプラスト ステライルに、
はっ水効果をプラス。家事などの
水仕事をする方におすすめです。
- 通気性があり、
皮膚のムレを防ぎます。



製品番号	JAN コード	サイズ(パッド部面積)	標準価格 (税込)	入数/ 小箱
3726150372	4582111152763	SS 5cm×7.2cm(2.7×4)cm	8,283円	100枚
3726150373	4582111152770	S 6cm×10cm(2.7×6)cm	8,635円	50枚
3726150374	4582111152787	M 8cm×10cm(4×6)cm	10,208円	50枚
3726150375	4582111152794	L 10cm×16cm(5.5×10)cm	12,969円	50枚
3726150376	4582111152800	LL 10cm×25cm(5.5×20)cm	22,352円	50枚

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード:34864000 届出番号:37B2X10003000015

※ご使用にあたっては添付文書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。

滅菌済

製造販売元:新タック化成株式会社

キュティポア[◇] プラス

- テープ部分はポリウレタンフィルムを
採用。バクテリアを通しません。
- 水を通さないで、シャワーが可能[※]です。

※ シャワー浴の際は、皮膚とフィルムの間に
隙間がないかご確認ください。



製品番号	JAN コード	サイズ(パッド部面積)	標準価格 (税込)	入数/ 小箱
3726120140	4582111152626	SS 5cm×7.5cm(2.7×4)cm	4,961円	50枚
3726120141	4582111152633	S 8cm×10cm(4×6.5)cm	6,138円	25枚
3726120142	4582111152640	Sロング 8cm×15cm(4×11)cm	7,799円	25枚
3726120143	4582111152657	M 10cm×12.5cm(5.5×8.5)cm	8,074円	25枚
3726120144	4582111152664	L 10cm×20cm(5.5×16)cm	10,351円	25枚
3726120157	4582111152671	Lロング 10cm×30cm(5.5×24)cm	13,794円	25枚
3726120158	4582111152688	マル φ7.5cm(2.7×2.7)cm	8,074円	25枚
3726120159	4582111152695	カテ 10cm×12.5cm(2.7×2.7)cm	8,074円	25枚

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード:34864000 届出番号:37B2X10003000009

※ご使用にあたっては添付文書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。

滅菌済

製造販売元:新タック化成株式会社



絆創膏・テープ類


救急絆創膏

プリマポア



非固着性の吸収パッドとメッシュ状の不織布テープを組み合わせた救急絆創膏です。

- 在宅治療中の方の、カテーテルなどの穿刺部位の固定や保護にご使用いただけます。
- 不織布のためしなやかで、メッシュ構造のため伸縮性を有しています。
- 通気性があり、ムレにくい製品です。
- 傷に貼りつきにくい非固着性吸収パッドを使用。交換する時の"剥がす痛み"をやわらげます。

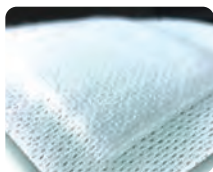

製品番号	JANコード	サイズ(パッド部面積)	標準価格(税込)	入数 / 小箱
7133	4582111150868	7.2cm×5cm(4×2.5)cm	4,400円	100枚
7135	4582111150875	8.3cm×6cm(5.7×3.5)cm	2,651円	50枚
66000317	4582111150813	10cm×8cm(5.3×4.5)cm	2,024円	20枚
66000318	4582111150820	15cm×8cm(11×4)cm	2,651円	20枚
66000319	4582111150837	20cm×10cm(15.5×5.3)cm	3,278円	20枚
66000320	4582111150844	25cm×10cm(20×5.3)cm	4,026円	20枚
66000321	4582111150851	30cm×10cm(25×5.3)cm	4,785円	20枚
66007140	4582111151704	35cm×10cm(29.5×5.3)cm	7,535円	20枚

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード:34864000(一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDNコード:70444000) 届出番号:13B1X10222WC0004

※ご使用にあたっては添付文書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。

滅菌済



絆創膏・テープ類

ロール状透明フィルム

オプサイト[®]フレキシフィックス

オプサイト クイックロール

クイックロール2WAY

低アレルギー性のアクリル系粘着剤を使用した、薄いフィルム状のテープです。皮膚の保護やガーゼの固定などにご使用いただけます。厚みと長さが異なる3種類。必要な長さに切ってご使用いただけます。



● 低アレルギー性粘着剤

デリケートな皮膚の方にもお使いいただけるアクリル系粘着剤を使用。剥がす時に感じる刺激を軽減します。

● 伸縮性があり、体の動きを妨げない

● ムレにくい

汗などの水分を逃がして、皮膚のムレ・ふやけを抑えます。



● 薄くてなめらか

- ・薄くつくられているため、関節などのよく動く部位でも皮膚になじみます。
- ・衣服や寝具にこすれても剥がれにくい、なめらかな表面と滑りのよいフィルムです。
- ・重ねて貼っても、違和感の少ない薄さです。



● 水をはじく

水仕事やシャワーを浴びても剥がれにくい防水フィルム。排泄物や細菌の侵入も防ぎます。



ガーゼの固定



寝たきりの方などの




赤くなっている皮膚や傷



傷あとの保護

オプサイト フレキシフィックス

厚さ 30 μ m

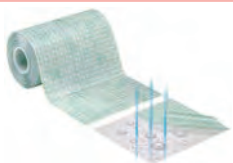


製品番号	JAN コード	サイズ(パッド部面積)	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66000040	4582111150158	5cm×10m	3,773円	1巻
66000041	4582111150165	10cm×10m	6,545円	1巻
66000375	4582111150172	15cm×10m	8,800円	1巻

未滅菌

衛生材料

オプサイト◇クイックロール オプサイトクイックロール2way

厚さ 15 μ m

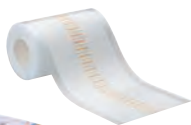

ロール長3m オプサイトクイックロール



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66000960	4582111151865	5cm×3m	2,112円	1巻
66000961	4582111151872	10cm×3m	4,224円	1巻

未滅菌 衛生材料

ロール長12m オプサイトクイックロール 2way



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66800339	4582111151988	5cm×12m	4,224円	1巻
66800340	4582111151995	10cm×12m	7,326円	1巻
66800341	4582111152008	15cm×12m	9,856円	1巻

未滅菌 衛生材料

使用例 薄い透明フィルムなら、こんな使い方も!

頻繁に水に触れる
美容師さんの指先
の保護に。



透明フィルムを適切な大きさにカットします。



指先を挟み込むようにして透明フィルムで覆います。



トップフィルムを剥がしたあと、指先に透明フィルムをよくなじませます。



絆創膏・テープ類

ロール状不織布テープ

プリマフィックス◇

メッシュ状の不織布を用いた
通気性・伸縮性のあるロールテープです。
必要な長さに切ってご使用いただけます。

- ひじ・ひざ・手首・肩など、屈伸する部位へもご使用いただけます。
- 離れ紙をウェーブ状にカットし、本体(テープ)を剥がしやすくしています。
- 低アレルギー性の粘着剤*を使用しています。



製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数 / 小箱
66800151	4582111153043	5cm×10m	495円	1巻
66800152	4582111153050	10cm×10m	990円	1巻

*合成ゴム系のホットメルト粘着剤

未滅菌 衛生材料



絆創膏・テープ類


シリコーンゲル粘着剤使用ロール状透明テープ

オプサイト◇ジェントルロール


シリコーンゲル粘着剤のロールフィルムです。

シリコーンゲルはやわらかく皮膚に密着します。剥がす時の刺激が少ないため、皮膚がデリケートな方にもおすすめ。

3種類のサイズ幅から選択し、必要な長さに切ってご使用ください。

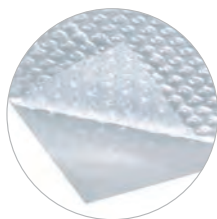

イメージ図

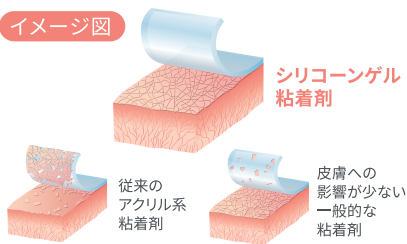

● 皮膚への刺激に考慮したシリコーンゲル粘着により、剥がすときの痛みや皮膚のトラブルを軽減

皮膚に密着しますが、皮膚を傷めることなく、剥がすことができます。皮膚が弱い方などの交換時の痛みや皮膚のトラブルを軽減することができます。

● しっかり密着

関節などのよく動く場所でもめくれにくいテープです。粘着力が落ちにくいので、ずれたときなどに貼り直しができます。


● 水をはじくフィルム

水仕事やシャワーを浴びても剥がれにくい防水フィルムです。排泄物や細菌の侵入を防ぎます。




使用例

ガーゼなどの固定や皮膚の保護にお使いいただけます。

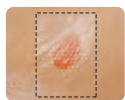

創治後の保護に

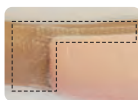

ドレッシング材の固定に



ガーゼの固定に



摩擦を受ける部位の保護に



ルート固定の補助に



ストーマ製品のパOUCH周囲への補助固定に

製品番号	JANコード	サイズ	標準価格(税込)	入数/小箱
66801195	4582111153326	2.5cm×5m	2,090円	1巻
66801196	4582111153333	5cm×5m	4,070円	1巻
66801197	4582111153340	10cm×5m	4,807円	1巻

本品は低粘着性のため、気管内挿管チューブ固定等の強い粘着性を要求される用途には使用しないでください。

未滅菌

衛生材料

ご施設・医療機関様をご購入いただけるウェブサイト

ASKUL

<https://www.askul.co.jp>

個人のお客様をご購入いただけるウェブサイト

ヨドバシカメラ

www.yodobashi.com

くらしをかるくする

LOHACO

by ASKUL

<https://lohaco.jp>

医療材料商社直営の通販サイト

Heart Plus

ハートプラス

<https://heart-p.jp>



Amazon店、楽天市場店でも販売中

個人向け医療品専門オンラインショップ



- ・ 5,400円以上で送料無料
- ・ 15時までの注文で即日配送(特定品のみ)
- ・ 1個から購入可能(一部商品を除く)
- ・ 配達日時指定可能(一部地域を除く)

※医療用品ご購入の際は、医師の指示に基づきご購入・使用下さい。

送料・支払方法・受け取り方法などは、
各ウェブサイトでご確認ください。

製品をお買い求めの場合には、院内売店をご確認ください。
お取り扱いがない場合には、インターネットやフリーダイヤルでご注文ください。



医療材料の小売り通販

光洋メディカルスマイル

お電話でご注文

フリーダイヤル

0120-3816-54 (無料でんわ)

受付時間 月～金 9:00-17:00

インターネットで
ご注文

MEDICALS♡ILE

光洋メディカルスマイル

検索



こちらのショップさんからお求めいただけます。

製品に関する
お問い合わせはこちら

TEL.03-5403-8661

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

札幌営業所 TEL.011-736-9596
仙台営業所 TEL.022-276-6726
東京営業所 TEL.03-5403-8915
名古屋営業所 TEL.052-221-1407
大阪営業所 TEL.06-6399-3303
広島営業所 TEL.082-502-7322
福岡営業所 TEL.092-452-0142

スミス・アンド・ネフュー
ホームページ



※使用上の注意等の詳細は、製品添付文書をご参照ください。
ASKUL・アスクルは各会社様の商標または登録商標です。

®Trademark of Smith+Nephew
© 2016-2026 Smith+Nephew

GS-25
202605-37