


Il passaggio alla medicazione in schiuma ALLEVYN[®] LIFE ha contribuito alla riduzione di cambi e dei costi settimanali delle medicazioni. Inoltre ha migliorato la soddisfazione generale del trattamento.

+ Vantaggi

Rispetto alle medicazioni precedenti, ALLEVYN LIFE:

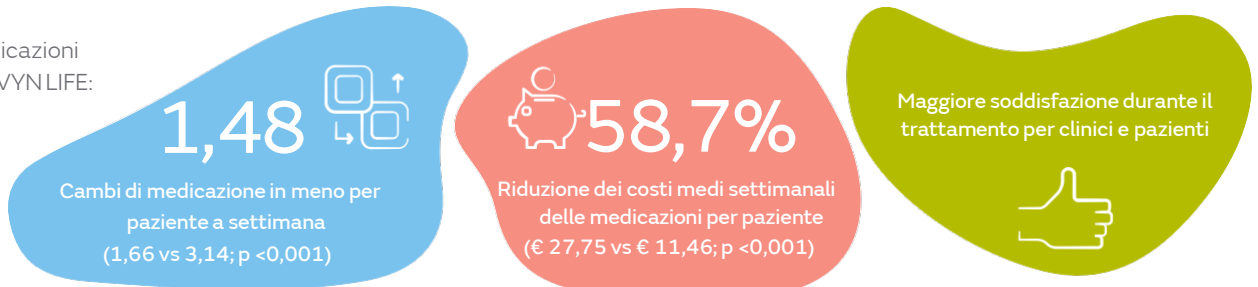


Sommario

- Uno studio osservazionale (retrospettivo e prospettico) condotto in 24 centri di assistenza primaria e 6 centri sanitari in Spagna
- La medicazione ALLEVYN LIFE è stata utilizzata come medicazione primaria (35,2%) o secondaria (64,8%) per 4 settimane al posto delle precedenti medicazioni (schiume, 42,0%; fibre gelificanti, 21,0%)
- Sono stati inclusi 94 pazienti con 128 ferite e la maggior parte aveva un'età >70 anni (75,8%)
- Le lesioni più frequenti sono state ulcere degli arti inferiori (39,8%) o lesioni da pressione (31,3%)
Il 25% di tutte le ferite aveva una durata >12 mesi.

Risultati

- Alla 4^a settimana, rispetto alle medicazioni precedenti, la medicazione ALLEVYN LIFE ha contribuito a ridurre significativamente:
 - La frequenza media di cambio medicazione settimanale del 47,1% (Figura; p < 0,001)
 - I cambi di medicazione di routine delle 'medicazioni sature' o 'sporche' sono stati ridotti del 50%
 - Il costo settimanale medio delle medicazioni del 58,7% (Figura; p < 0,001)
- Riduzione dell'area della ferita del 28,3% mediante l'uso di ALLEVYN LIFE; da 9,9cm² fino a 7,1cm² (p < 0,001)
 - Nel 68,3% delle ferite l'area è stata ridotta (>30% per l'85,9% delle ferite)
- In base alle caratteristiche valutate, la maggior parte dei clinici concorda nel reputare ALLEVYN LIFE più efficace rispetto a quanto precedentemente utilizzato (media 69%; 7 caratteristiche)
- La soddisfazione dei pazienti, rispetto alla valutazione iniziale basata sull'uso della medicazione precedentemente utilizzata, ha visto un aumento dei valori buono-molto buono del 44,7% per la gestione complessiva, del 46,1% per la gestione dell'essudato e del 47% per il confort in seguito all'utilizzo di ALLEVYN LIFE.

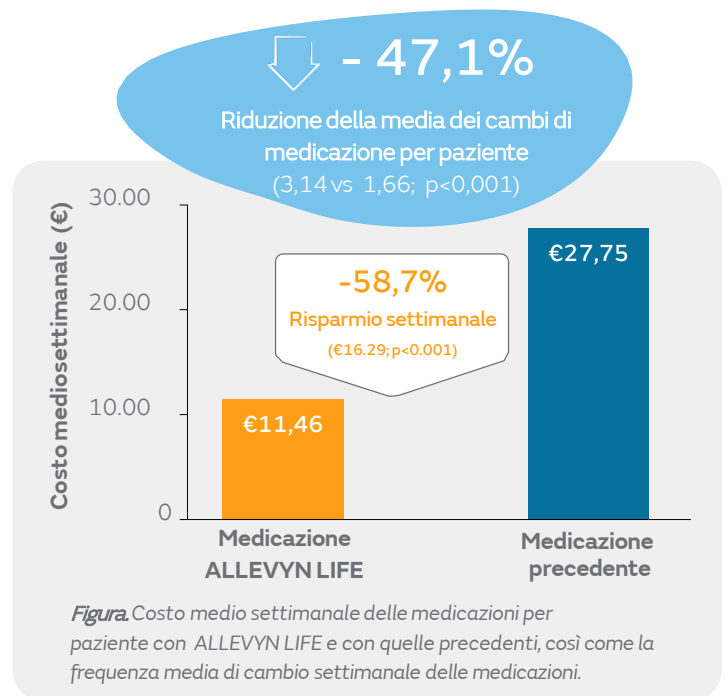

Conclusioni

Se comparato alle medicazioni precedentemente utilizzate, l'uso di ALLEVYN LIFE in un contesto di assistenza domiciliare ha contribuito a ridurre significativamente sia la frequenza di cambio delle medicazioni sia i costi e ha migliorato la soddisfazione dei clinici e dei pazienti.

Per ottenere informazioni dettagliate sul prodotto, incluse le indicazioni d'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, consultare le istruzioni d'uso (IFU) relative al prodotto prima dell'utilizzo.

Referenze

* Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and economic impact of wound care using a polyurethane foam multi-layer dressing versus standard dressings on delayed healing ulcers. Adv Skin Wound Care. 2021;34(1):23-30.

Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani 2A, 20864 Agrate Brianza (MB) | © Marchio di Smith+Nephew. Tutti i marchi registrati e riconosciuti. | ©October 2020 Smith+Nephew 25615-it V1 1020 | GMC 1150