

# Step-by-step guide

**Smith+Nephew**  
Q-FIX  
All-Suture Anchor

## + Drill



ドリルガイドを骨表面に設置します。ドリルはドリルガイド底部に当たるまで確実に押進めてください。

注意：ドリルガイドを骨に埋没させないでください。骨の皮質表面が損傷し、インプラントの保持力が低下する可能性があります。

## + Insert



作成した下孔に Q-FIX シャフト先端を挿入します。その際、ドリルガイドと Q-FIX ハンドルがしっかりと結合することを確認してください。※凹凸を確実に合わせます

## + Deploy1



ドリルガイドと Q-FIX の結合部をしっかりと握り、1回目のクリック音が鳴るまでアクティベーションノブを時計回りに回します。


※1回目のクリック音で Q-FIX シャフトから Q-FIX アンカーが表れます。

## + Deploy2




2回目のクリック音が鳴るまで、更にアクティベーションノブを回します。ドリルガイド先端から 2mm 下方にアンカーが形成されます。※2回目のクリック音で Q-FIX アンカーが丸く形成されません。

## + Eject

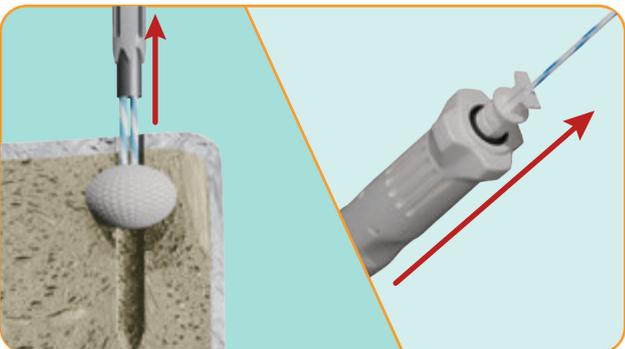

糸留めから糸（又はテープ）を解き、ドリルガイドと Q-FIX インサーターを抜き、Q-FIX アンカーの留置が完了します。※Q-FIX インサーターを引き抜く際、糸留めの中央部に糸を集中させます。

## + Finish

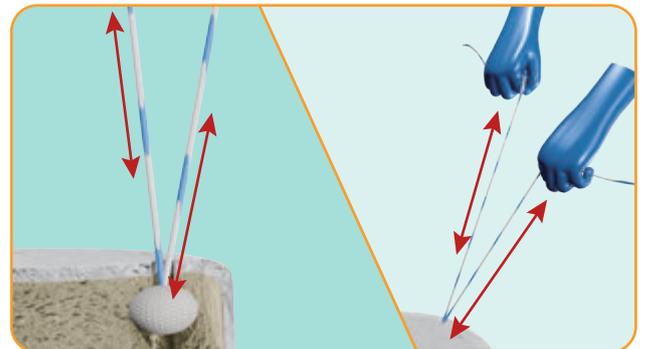

最後に糸（またはテープ）を交互に引っ張り、スムーズにスライド出来ていることを確認します。

# Step-by-step guide

**Smith+Nephew**  
Q-FIX KNOTLESS  
All-Suture Anchor


## + Drill



ドリルガイドを骨表面に設置します。ドリルはドリルガイド底部に当たるまで確実に押進めてください。


注意：ドリルガイドを骨に埋没させないでください。骨の皮質表面が損傷し、インプラントの保持力が低下する可能性があります。

## + Deploy

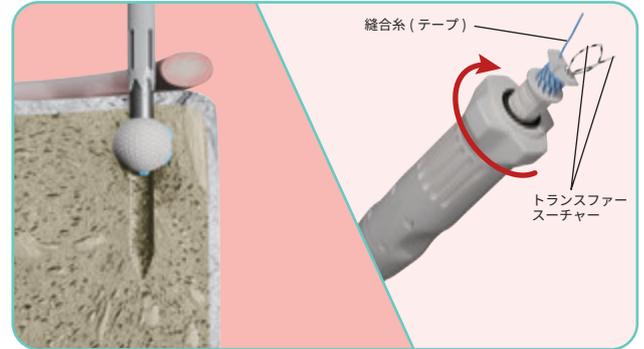


アンカーをドリルガイドに挿入し、アクティベーションノブを糸留めが露出するまで計回りに回します (2回目のクリック音が鳴るまで)。糸留めから縫合糸を巻き戻し、アンカーインサーターを外します。縫合糸またはテープとトランスフェラスーチャーが出てきます。

## + Pass

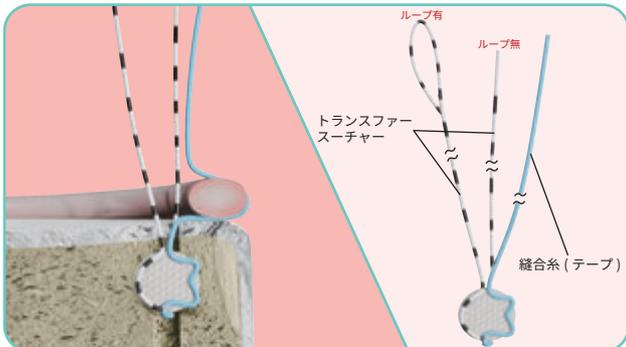


Passer を使用して、縫合糸またはテープを軟部組織に通します。

## + Shuttle

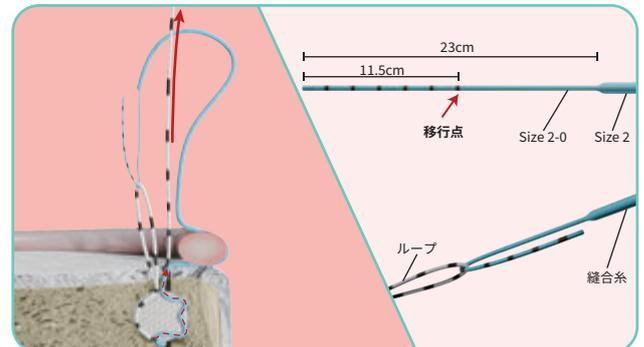

縫合糸またはテープをトランスフェラスーチャーのループに通し、移行点で折り曲げます。ループしていない方のトランスフェラスーチャーの端を引っ張り、縫合糸またはテープをアンカー内に通します。

## + Tension & Suture Lock

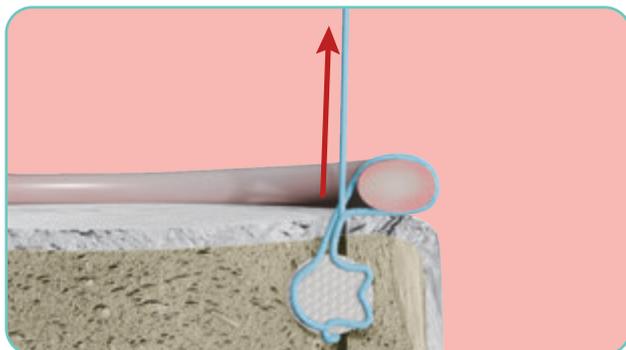

希望する張力が得られるまで縫合糸またはテープをゆっくりと引っ張ります。



## + Order Information

### Q-FIX KNOTLESS

72205882	Q-FIX Knotless アンカー 1.8mm R-UB 青
72205883	Q-FIX Knotless アンカー 1.8mm R-UB 青白
72205884	Q-FIX Knotless アンカー 1.8mm R-MT 青
72205885	Q-FIX Knotless アンカー 1.8mm R-MT 青白

### Q-FIX MINITAPE<sup>®</sup>

72205858	Q-FIX アンカー 1.8mm MT 白青
72205859	Q-FIX アンカー 1.8mm MT 青
72205860	Q-FIX アンカー 2.8mm MT 青 MT 白青

### Q-FIX MAGNUMWIRE

72290123	Q-FIX アンカー ミニ 1.8mm
25-1800	Q-FIX アンカー 1.8mm
25-2800	Q-FIX アンカー 2.8mm

### Q-FIX Reusable Accessories

72290120	Q-FIX アンカーカーブ リューザブルドリルガイド 1.8mm カーブ用
72290119	Q-FIX アンカーカーブ リューザブルドリルガイド 1.8mmXL カーブ用
72290033	Q-FIX アンカー リューザブルオブチュレーター 1.8mm アンカー用
72290035	Q-FIX アンカーカーブ リューザブルドリルガイド 2.8mm カーブ用
72290036	Q-FIX アンカー リューザブルオブチュレーター 2.8mm アンカー用

### Q-FIX Disposable Kits

25-1811	Q-FIX アンカー ディスポキット 1.8mm ヒップ
25-2810	Q-FIX アンカー ディスポキット 2.8mm
72290126	Q-FIX アンカー ミニディスポキット XL

### Q-FIX Disposable Accessories

72290118	Q-FIX 1.8mm カーブ ディスポドリル
72290034	Q-FIX アンカー リューザブルドリルガイド 1.8mmXL 用
72290030	Q-FIX 1.8mm ディスポドリル
72290031	Q-FIX 2.8mm ディスポドリル
72290124	Q-FIX 1.8mm ミニディスポドリル