

## イントラサイト ジェル システム

 smith&nephew  
**INTRASITE<sup>®</sup> GEL**  
HYDROGEL

ハイドロジェルドレッシング

## 適度な湿潤環境の提供により創傷治癒を促進。

イントラサイト ジェル システムは、乾燥した壊死組織や黄色い壊死組織(スラフ)に適度な湿潤環境を提供し、壊死組織の自己融解を促進するハイドロジェルドレッシングです。



# アプリパック

さらに使いやすくなった新形状のノズル付き容器を採用。  
容器の底部を押すだけで、片手で簡単に塗布できます。

## ノズル付き容器のアプリパック

・取扱いが簡単なため、ドレッシング交換時間が短縮できます。

## 適度な粘性のあるハイドロジェル ドレッシング

・適度な粘性があるため、側臥位での処置時にも液垂れしません。  
・壊死組織と肉芽組織の混在している創でも使用できます。



### <使用方法>



1 保護キャップをノズルからはずして、ノズルの回りを消毒綿等で拭ってください。



2 ノズルの先端を折り取ってください。



3 容器の底部を軽く押しながら直接創部に塗布します。ジェルが創周囲の皮膚に広がらないよう注意してください。



4 ジェルを塗布した創の上からフィルムドレッシング\*で被覆します。

## 交換時期の目安

より効果的な湿润環境を維持するために、漏れが生じる前に適宜交換してください。少なくとも、3日ごとの交換をお勧めします。

## イントラサイトジェル システム適用例

乾燥した壊死組織のある創



★写真提供:大阪府済生会吹田病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 関宮 直子先生

## イントラサイト ジェル システム アプリパック

### ■保険適用

種 類: 特定保険医療材料  
保 険 請 求 名: 皮膚欠損用創傷被覆材 イントラサイト ジェル システム  
保 険 適 用 範 囲: 皮下組織に至る創傷用 ②異形型  
適 用 期 間: 2週間を標準として特に必要と認められた 場合については3週間を限度とする。  
保 険 請 求: 償還価格による。

### ■使用目的・効能効果

皮下脂肪組織までの創傷(Ⅲ度熱傷を除く。)に対する「創の保護」、「湿润環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

### ■貯法

高温多湿を避け、室温で保管すること。

### ■有効期限

製品の表示にてご確認ください。

### ■オートクレーブ滅菌済

「使用方法」及び「使用上の注意」等の詳細については添付文書を参照ください。

製品番号	サイズ	個/箱
7308	8g	10
7311	15g	10
7313	25g	10

高度管理医療機器 医療機器承認番号 21000BZY00358000  
二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材JMDNコード:34082003

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社  
ウインドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号  
TEL.03-5403-8830

札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755  
仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652  
東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916  
名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420  
大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993  
広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325  
福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

http://www.smith-nephew.jp/japan  
© 2012-2021 Smith&Nephew KK