


Anleitung zur Handhabung



1. Nadel einlegen: Nadel durch die hintere Öffnung des Instrumentes führen. Achten Sie darauf, dass der Nadelhaken nach rechts zeigt und im proximalen Schlitz des Handgriffs positioniert ist.



2. Maulteil öffnen: Feststellknopf am Handgriff drücken; Maulteil schließen: Fingerring am ringförmigen Griff drücken.

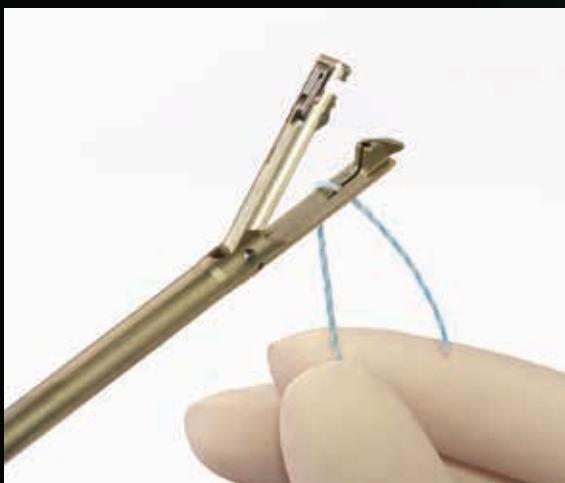

3. Faden einlegen: Fadenschlinge legen, dabei ein etwa 5 cm langes Fadenende belassen. Fadenschlinge über Fadenkanal legen und komplett in den Kanal einführen. Achten Sie darauf, dass das Fadenende nach UNTEN durch den Schlitz eingefädelt wird.



Leistung, die Sie sich wünschen.
Zuverlässigkeit, die Sie erwarten.

 **smith&nephew**
TRUEPASS[®]
Fadenshuttle

Erfolgreiche Eingriffe setzen sachkundige Hände und zuverlässige Instrumente voraus.


Der TRUEPASS®-Fadenshuttle wurde speziell für Eingriffe an der Rotatorenmanschette entwickelt und bietet Operateuren die zuverlässige Performance, für die unsere legendären Handinstrumente stehen. Die einfache Bedienbarkeit mit einer Hand ermöglicht Ihnen eine reibungslose Durchführung des Eingriffs. Das gleichzeitige Shutteln und Zurückholen des Fadens vereinfacht das Fadenmanagement. Wahlweise steht das Instrument auch ohne Rückholfunktion zur Verfügung.

Zuverlässiges Shutteln und Fangen von #2 ULTRABRAID®-Fäden in einem Arbeitsschritt.*

Einfaches Einlegen, Shutteln und Handhaben der Fäden.

Ergonomisches Design für die Bedienung mit einer Hand, optimale Steuerbarkeit und problemloses Fadenshutteln durch Manschettengewebe bis zu 10 mm Dicke.

*Daten in den Akten des Berichts 15002182 von Smith & Nephew.

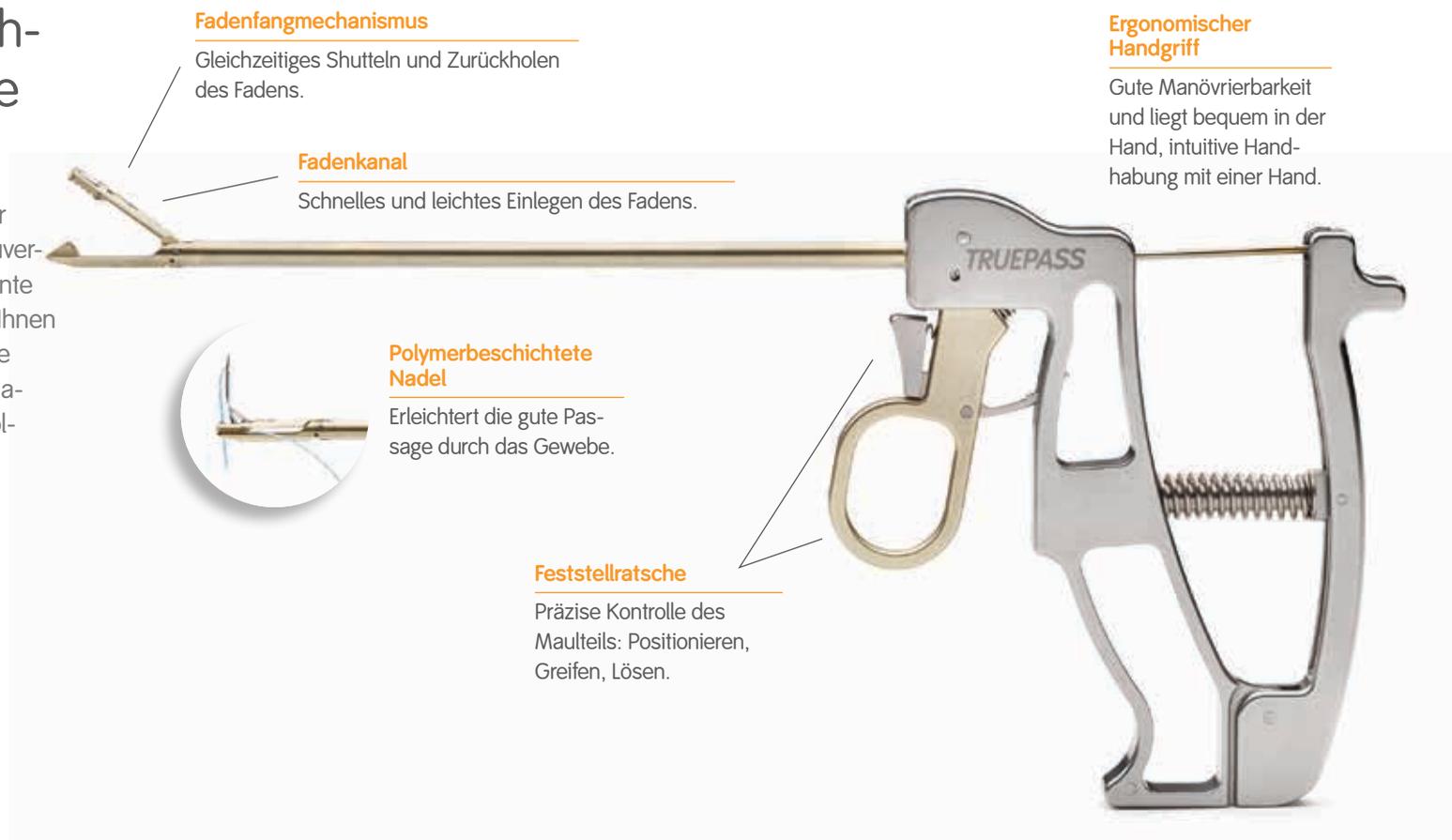

Fadenfangmechanismus

Gleichzeitiges Shutteln und Zurückholen des Fadens.

Fadenkanal

Schnelles und leichtes Einlegen des Fadens.

Polymerbeschichtete Nadel

Erleichtert die gute Passage durch das Gewebe.

Feststellratsche

Präzise Kontrolle des Maulteils: Positionieren, Greifen, Lösen.

Ergonomischer Handgriff

Gute Manövrierbarkeit und liegt bequem in der Hand, intuitive Handhabung mit einer Hand.

Technik



1. Maulteil an gewünschter Stelle der Rotatorenmanschette positionieren und schließen.



2. Handgriff zusammendrücken, um Nadel und Faden durch das Gewebe zu führen. Handgriff lösen, um Nadel zurückzuziehen; die Fadenschlinge wurde durch die Sehne geschuttelt.



3. Feststellknopf drücken, um Maul zu öffnen (Faden wird durch den Fadenfangmechanismus festgehalten); Instrument aus dem Gelenkraum entfernen.



4. Festgehaltene Fadenschlinge nach oben rechts herausziehen. Dadurch wird der Fadenfangmechanismus angehoben und der Faden kann durch das Seitenfenster herausgenommen werden.

Bestellinformationen

TRUEPASS-Fadenshuttle

Bestell-Nr.	Beschreibung
72203791	TRUEPASS-Fadenshuttle, selbst-arretierend
72203792	TRUEPASS-Fadenshuttle, Standard
72203793	TRUEPASS-Einwegnadeln (5 Stück)

Ihr Ansprechpartner:
Smith & Nephew GmbH
 Mainstraße 2
 D-45768 Marl
 T +49 (0)2365 91 81 - 0
 F +49 (0)2365 91 81 - 10
 info.marl@smith-nephew.com
 www.smith-nephew.de

Hersteller:
Smith & Nephew, Inc.
 150 Minuteman Road
 Andover
 Massachusetts 01810
 USA

®Markenzeichen von Smith & Nephew. Bestimmte Marken sind beim United States Patent & Trademark Office registriert. ©2013 Smith & Nephew. Alle Rechte vorbehalten. 01077-D V1 04/14