


Guía de referencia para hombro

Guía paso a paso



1. Deje expuesto el hueso en el lugar de inserción deseado para el implante. Acople la broca adecuada a un taladro ortopédico estándar. Asegúrese de no introducir la broca más allá de las caras planas del extremo proximal de la broca.

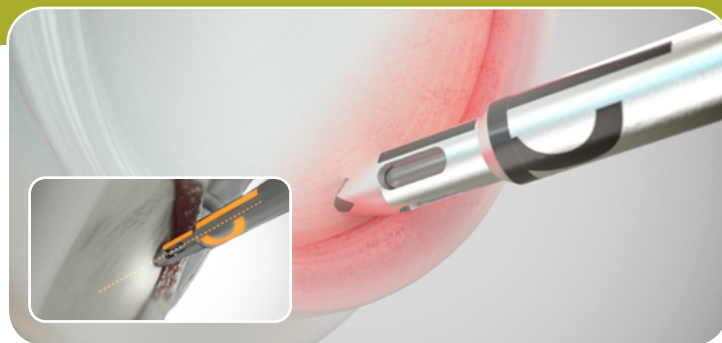

2. Coloque la punta de la guía de la broca con el obturador contra la superficie ósea en la posición deseada y después retire el obturador. Si utiliza la guía curva, la marca láser en forma de C indica la dirección de la curva, mientras que la marca láser vertical ayuda a proyectar la trayectoria de la broca.




3. Inserte la broca en la guía de broca y perfore el orificio en el hueso. Haga avanzar la broca hasta que llegue al tope en la guía de broca.

PRECAUCIÓN: no utilice la broca sin la guía de broca, ya que podría dañarse la superficie del hueso. Compruebe que el orificio del hueso esté limpio de residuos óseos.



4. Retire la broca e inserte el implante a través de la guía de broca en el orificio realizado en el hueso. Asegúrese de que el mango del implante esté completamente acoplado a la guía de broca durante el despliegue del anclaje.

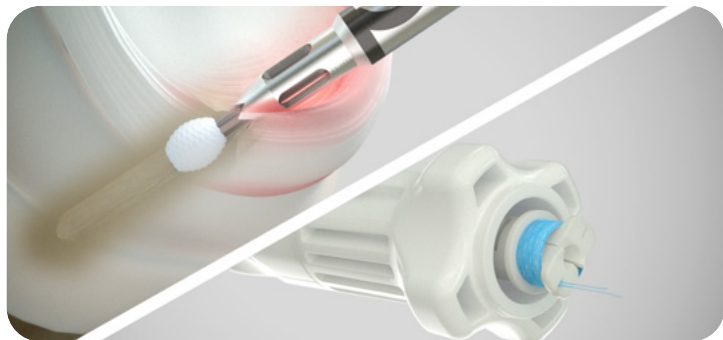

5. Gire la parte superior del mango del anclaje (a modo de pimentero) en el sentido de las agujas del reloj. Gire la parte superior del mango hasta que se alcance un tope firme y la pieza donde está la sutura enrollada esté plenamente expuesta.



6. Libere las suturas de la pieza donde están enrolladas y retire el insertador y la guía de broca. Si se va a colocar más de un implante, repita los pasos del 2 al 5 para completar la reparación.

Información para pedidos

Anclajes todo sutura Q-FIX® precargados con cinta de sutura MINITAPE®

Referencia	Descripción
72205858	Anclaje todo sutura Q-FIX, 1,8 mm, con una cinta de sutura MINITAPE, blanca-cobraid
72205859	Anclaje todo sutura Q-FIX, 1,8 mm, con una cinta de sutura MINITAPE, azul

Anclajes todo sutura Q-FIX precargados con sutura MAGNUMWIRE

Referencia	Descripción
72290123	Anclaje todo sutura Q-FIX MINI, 1,8 mm, con una sutura MAGNUMWIRE, azul-cobraid
25-1800	Anclaje todo sutura Q-FIX, 1,8 mm, con una sutura MAGNUMWIRE, azul-cobraid

Kits desechables Q-FIX

Referencia	Descripción
72290125	Kit desechable de anclaje todo sutura Q-FIX MINI, 1,8 mm, incluye broca, guía de broca con punta de boca de pez y obturador tipo trocar
25-1810	Kit desechable de anclaje todo sutura Q-FIX, 1,8 mm, incluye broca, guía de broca con punta de boca de pez y obturador tipo trocar

Accesorios reutilizables Q-FIX

Referencia	Descripción
72290032	Guía de broca de anclaje todo sutura Q-FIX, punta de boca de pez, 1,8 mm, no estéril, reutilizable
72290120	Guía de broca curva de anclaje todo sutura Q-FIX, punta de corona, 1,8 mm, no estéril, reutilizable
72290033	Obturador de anclaje todo sutura Q-FIX, 1,8 mm, estéril, reutilizable

Accesorios desechables Q-FIX

Referencia	Descripción
72290124	Broca espiral de anclaje todo sutura Q-FIX MINI, 1,8 mm, estéril, reutilizable
72290030	Broca recta de anclaje todo sutura Q-FIX, 1,8 mm, estéril, desechable
72290118	Broca flexible de anclaje todo sutura Q-FIX, 1,8 mm, estéril, desechable

Instrucción adicional

Todas las fotos y diagramas se proporcionan solo con fines ilustrativos. Los productos no están a escala.

Para obtener más información sobre la aplicación de cualquiera de los productos mencionados en esta presentación, incluidas sus indicaciones de uso, contraindicaciones e información de seguridad del producto, consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente. Para pedir estos instrumentos póngase en contacto con un representante autorizado de Smith+Nephew.

Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas médicas y las normativas de cada mercado. Si tiene cualquier pregunta sobre la disponibilidad de los productos de Smith+Nephew en su localidad, póngase en contacto con su representante o distribuidor de Smith+Nephew.

Más información en [smith-nephew.com](https://www.smith-nephew.com)

Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810
USA
www.smith-nephew.com

Smith & Nephew S.A.U
Fructuós Gelabert 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
España
Telf: + 34 933 737 301
Fax: + 34 933 737 453
www.smith-nephew.es

®Marca comercial de Smith+Nephew.
©2023 Smith+Nephew.
Reservados todos los derechos.
Todas las marcas comerciales han sido reconocidas.
11907-es V3 06/23

