

+ Conçu pour
assurer fiabilité¹,
polyvalence et
l'accessibilité¹


Smith+Nephew

FIRSTPASS[◇] MINI
Gamme de passe-sutures



Faites confiance à la gamme de passe-sutures FIRSTPASS[®] MINI

Dans le but de fournir un système fiable, polyvalent et facile à utiliser, ces passe-sutures sont conçus pour faciliter les interventions exécutées dans des espaces réduits.

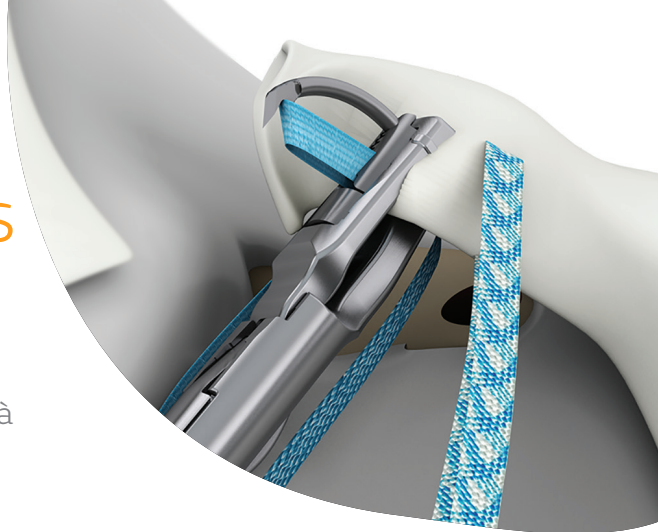

+ Fiabilité

grâce à un système entièrement à usage unique doté d'une aiguille préchargée¹

+ Polyvalence

pour faire passer un fil de suture ULTRABRAID[®] ou ULTRATAPE #2

+ Accessibilité

grâce à des options de mâchoires droites et incurvées de 17° à gauche et à droite

Étapes de chargement du passe-suture FIRSTPASS MINI



1. Charger le fil de suture dans la fente



2. Déployer le fil de suture d'un seul coup de gâchette



3. Tirer le fil de suture vers le bas et vers l'arrière pour l'enlever.

Ordering information

Passe-suture FIRSTPASS MINI	
N° de référence	Description
72290128	FIRSTPASS MINI, passe-suture droit
72290129	FIRSTPASS MINI, passe-suture incurvé à gauche
72290130	FIRSTPASS MINI, passe-suture incurvé à droite

Kit à usage unique de réparation de racine méniscale	
71935360	Instruments de réparation de racine méniscale
71935068	Pack de réparation de racine méniscale avec fil plat de suture ULTRATAPE
71935070	Pack de réparation de racine méniscale avec fil de suture ULTRABRAID

Sutures ULTRATAPE	
N° de référence	Description
72203896	Fil plat de suture ULTRATAPE (bleu, 6 par boîte)
72203897	Fil plat de suture ULTRATAPE (Cobraid bleu, 6 par boîte)

FIRSTPASS[™] MINI Passe-suture – Destination : destiné à la manipulation de tissus en chirurgie orthopédique. Classe IIa. Organisme notifié : TÜV SÜD n° 0123 Mandataire : Smith & Nephew Orthopaedics GmbH - Tuttlingen – Allemagne. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation qui accompagne ce dispositif médical.

En savoir plus sur smith-nephew.com/fr-FR/

Distributeur en France :
Smith & Nephew, S.A.S.
40/52 Boulevard du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE - France
T+33(0) 800 111 220
F+33(0) 1 46 41 24 11

www.smith-nephew.com/fr-FR/
Smith & Nephew, S.A.S. Société
par Actions Simplifiée au capital
de 3.366.150 euros -577 150
840 R.C.S. Nanterre

«Marque de commerce de Smith+Nephew.
©2020 Smith+Nephew. Tous droits réservés.
Imprimé en France.
11332 V5 05/20
S19-188 V2 - Juillet 2020

References

1. Données archivées chez Smith & Nephew, rapport 96344-01, 2018.