

- Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge optimal an
- Keine Sekundärfixierung nötig
- Duschfest
- Mit EXULOCK<sup>◇</sup>- und EXUMASK<sup>◇</sup>-Technologie



- + Für Wunden mit schwacher bis starker Exsudation im Fersenbereich
- + Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet

## Anwendung



1

- Entfernen Sie die mittlere Schutzfolie und befestigen Sie die haftende Seite des Verbandes an der Rückseite des Knöchels



2

- Entfernen Sie eine der oberen Schutzfolien und befestigen Sie den oberen Lappen des Verbandes am Knöchel
- Verband glatt streichen
- Den Vorgang mit der anderen Seite des Verbandes wiederholen



3

- Entfernen Sie die verbleibenden Schutzfolien am unteren Rand des Verbandes
- Heben Sie den unteren Teil des Verbandes an die Fersenunterseite an



4


- Befestigen Sie die Ränder auf dem bereits befestigten oberen Abschnitt des Verbandes
- Ränder glatt streichen und dabei Falten vermeiden, die die Abdichtung beeinträchtigen können
- Der Verband kann bei Bedarf repositioniert werden

## Entfernung

Eine Ecke anheben und langsam vollständig abziehen.

## Wechselhäufigkeit

- Während der frühen Stadien der Behandlung den Verband häufig kontrollieren
- Verbände können bis zu 7 Tage angelegt bleiben
- Verbände sollten je nach Zustand der Wunde und der umliegenden Haut gewechselt werden oder wenn das Exsudat 75 % des Wechselindikators bedeckt
- Verbandwechsel erwägen, wenn das Exsudat mehr als 50 % des Wechselindikators bedeckt

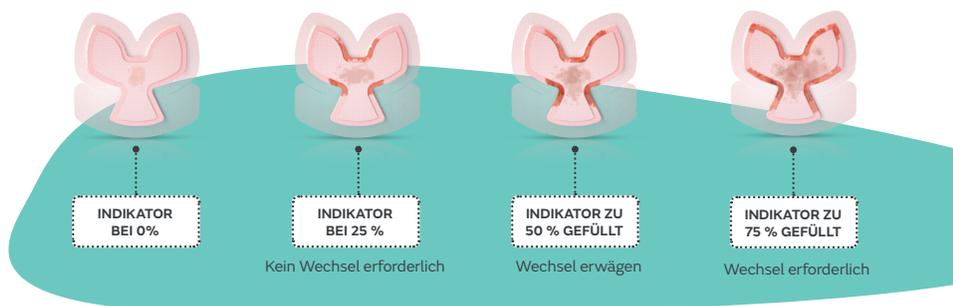

Die Grafik dient zur Orientierung. Die Entscheidung über den Zeitpunkt des Wechsels sollte je nach klinischer Beurteilung und vor Ort geltenden Protokollen getroffen werden.

Pharmazentralnummer (PZN)	Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
0711 6438	66801304	25,0 cm x 25,2 cm	20,0 cm x 20,2 cm	30 Stück (6 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)\*, PZN: Pharmazentralnummer Deutschland

**Kontakt Deutschland**  
Smith & Nephew GmbH  
Friesenweg 30  
22763 Hamburg  
T +49 (0)40 87 97 44-0  
F +49 (0)40 87 97 44-375  
info@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.de

**Kontakt Österreich**  
Smith & Nephew GmbH  
Concorde Business Park 1/C/3  
2320 Schwechat  
Österreich  
T +43 1 70 79102  
F +43 1 70 79101  
Info.austria@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.com

**Kontakt Schweiz**  
Smith & Nephew Schweiz AG  
Theilerstrasse 1A  
CH-6300 Zug  
Schweiz  
T +41 41 766 22 66  
F +41 41 766 39 93  
CustomerService.CH@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.com

◇ Warenzeichen von Smith+Nephew  
Alle Marken anerkannt  
© Mai 2024 Smith+Nephew  
AWM-AWC-26662v2 | GMC1209-de | P240116

Detaillierte Informationen zu den Produkten, einschließlich der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichts- und Warnhinweise, entnehmen Sie bitte vor der Anwendung der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts.