

オプサイト[◇] クイックガード

水蒸気透過性トランスペアレント ドレッシング

smith&nephew

OPSITE[◇]
QUICK GUARD

Transparent Film Dressing

Supporting healthcare
professionals for over 150 years

肌の弱い患者様にも優しくしっかり貼れる フィルムドレッシング



肌に優しい粘着剤

低刺激のアクリル系の粘着剤で脆弱な皮膚の患者様にも優しい貼付が可能です。



透明性があり、貼付する位置を見ながら貼れる上、操作性にも優れているため、簡単に貼付ができます。外部からの細菌の侵入を防ぎます。



肌になじむ薄さ

フィルムの厚さは15 μ mで肌になじみ違和感を感じることなく快適です。

【使用目的又は効果】

裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護、外科切開部位の隔離及び手術野の確保。

オプサイト クイックガード

製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
66800781	4 × 5	100
66800363	5 × 7.2	100
66800782	8 × 10	100
66800364	10 × 12.5	50



高水蒸気透過性

不感蒸泄をさまたげない高い水蒸気透過性があり、蒸れにくいので長期固定が可能です。

EOG滅菌済

一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード:34864000

(一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDNコード:70444000)

(一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード:35531000)

届出番号:13B1X10222WC0015

貼り方 (標準タイプ)



「REMOVE FIRST」と書かれた裏紙をはがします。



ドレッシングの中心をカテーテル刺入部に合わせて貼付します。



残りの小さな裏紙をはがします。



緑の▶のついたテープをはがすと保護フィルムも同時にはがれます。
※緑のテープは左右どちらからでもはがせます。



緑の▶のついた保護フィルムをはがします。



カテーテルラインに沿ってドレッシングを密着させます。

はがし方

フィルムの端を持ち、貼付面とできるだけ平行に引っ張りながらはがします。



「使用方法」及び「使用上の注意」の詳細は添付文書をご参照ください。

製造販売元

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith & Nephew.

© 2017-2019 Smith & Nephew KK

QG-1
201907-3