

+ IODOSORB[◊] Cadexomer-Iod Dressing

Anwendungshinweise


Smith+Nephew



IODOSORB[◊] Dressing auftragen



- 1
- Waschen Sie sich Ihre Hände vor und nach der Anwendung gründlich.
 - Verwenden Sie sterile Handschuhe und reinigen Sie die Wunde und die Wundumgebung entweder mit Wasser- oder Kochsalzlösung.
 - Die Wundoberfläche **NICHT ABTROCKNEN**.

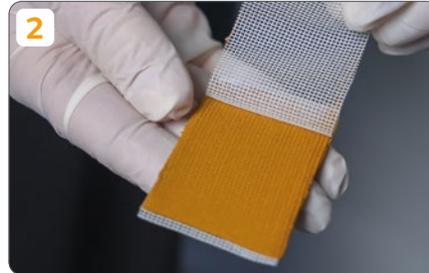

- 2
- Entfernen Sie die Netzstruktur auf beiden Seiten des Wundverbandes.



- 3
- Modellieren Sie den Verband entsprechend der Wundgröße.
 - Die Wunde vollständig mit einem geeigneten Sekundärverband abdecken (z. B. ALLEVYN[◊] LIFE). Falls erforderlich, einen Kompressionsverband anlegen.
 - Eventuell verbleibende Reste des IODOSORB[◊] Dressing müssen wegen Verlusts der Sterilität entsorgt werden.

IODOSORB[◊] Dressing wechseln



- 1
- IODOSORB[◊] Dressing sollte gewechselt werden, wenn es mit Wundsekret durchtränkt ist und wenn das Iod vollständig freigesetzt wurde. Zu erkennen ist das am Verblässen der Farbe.
 - Wenn die Wunde stark nässt, kann ein täglicher Verbandwechsel notwendig sein.



- 2
- IODOSORB[◊] Dressing vorsichtig unter Verwendung von Wasser- oder Kochsalzlösung entfernen.
 - Den Verband ggf. einige Minuten durchtränken und dann entfernen.



- 3
- Vor dem erneuten Auftragen von IODOSORB[◊] Dressing überschüssige Flüssigkeit vorsichtig abtupfen und die Wundoberfläche etwas feucht belassen.

Artikelnummer	Inhalt (Größe)	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001290	5 g (4,0 cm x 6,0 cm)	0022 2516	590 Stück (118 OP)	5 Stück
66001291	10 g (6,0 cm x 8,0 cm)	0022 2522	306 Stück (102 OP)	3 Stück
66001292	10 g (6,0 cm x 8,0 cm)	0022 2539	390 Stück (78 OP)	5 Stück
66001293	17 g (8,0 cm x 10,0 cm)	0022 2545	160 Stück (80 OP)	2 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

Kontakt Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 30
22763 Hamburg

T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Für detaillierte Produktinformationen, einschließlich Indikationen für den Gebrauch, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise und wichtige Sicherheitsinformationen konsultieren Sie bitte immer die Gebrauchsanweisung (IFU) des jeweiligen Produkts, bevor Sie es verwenden.

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

Hersteller: Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hesse Rd, Hull HU3 2BN England

◊ Warenzeichen von Smith+Nephew; Alle Marken anerkannt; © September 2023 Smith+Nephew; AWM-AWC-39438; GMC1705; P230209