

# T.I.M.E. klinische beslishulp

## ANAMNESE van de patiënt, welzijn en wond

Stel diagnose en kenmerken voor de nulmeting vast voor gepaste ondersteuning alsook comorbiditeiten die de genezing kunnen beïnvloeden. Registreer het type, de locatie en de grootte van de wond, de conditie van het wondbed, tekenen van maceratie en infectie, pijnvaring, relevante systemische problemen, voorafgaande medische geschiedenis, naleving van de behandeling


## BETREK een multidisciplinair team en mantelzorgers om holistische patiëntenzorg te bevorderen

Rapporteer doorverwijzingen naar anderen zoals: chirurgisch team, transfer verpleegkundige, wondverpleegkundige, diëtist, pijnbestrijdingsteam, vasculair- en diabetesteam, podotherapeut, psycholoog, mantelzorgers en adviseurs

## CONTROLEER of behandel onderliggende oorzaken en belemmeringen voor wondgenezing

Maak een behandelplan voor: systemische infectie, diabetes, voedingsproblemen, oedeem, continentie, mobiliteit, vaataandoeningen, pijn, stress en angst, niet naleven of oneens zijn met offloading en compressie, keuzes in levensstijl

## DEFINIEER de juiste behandeling

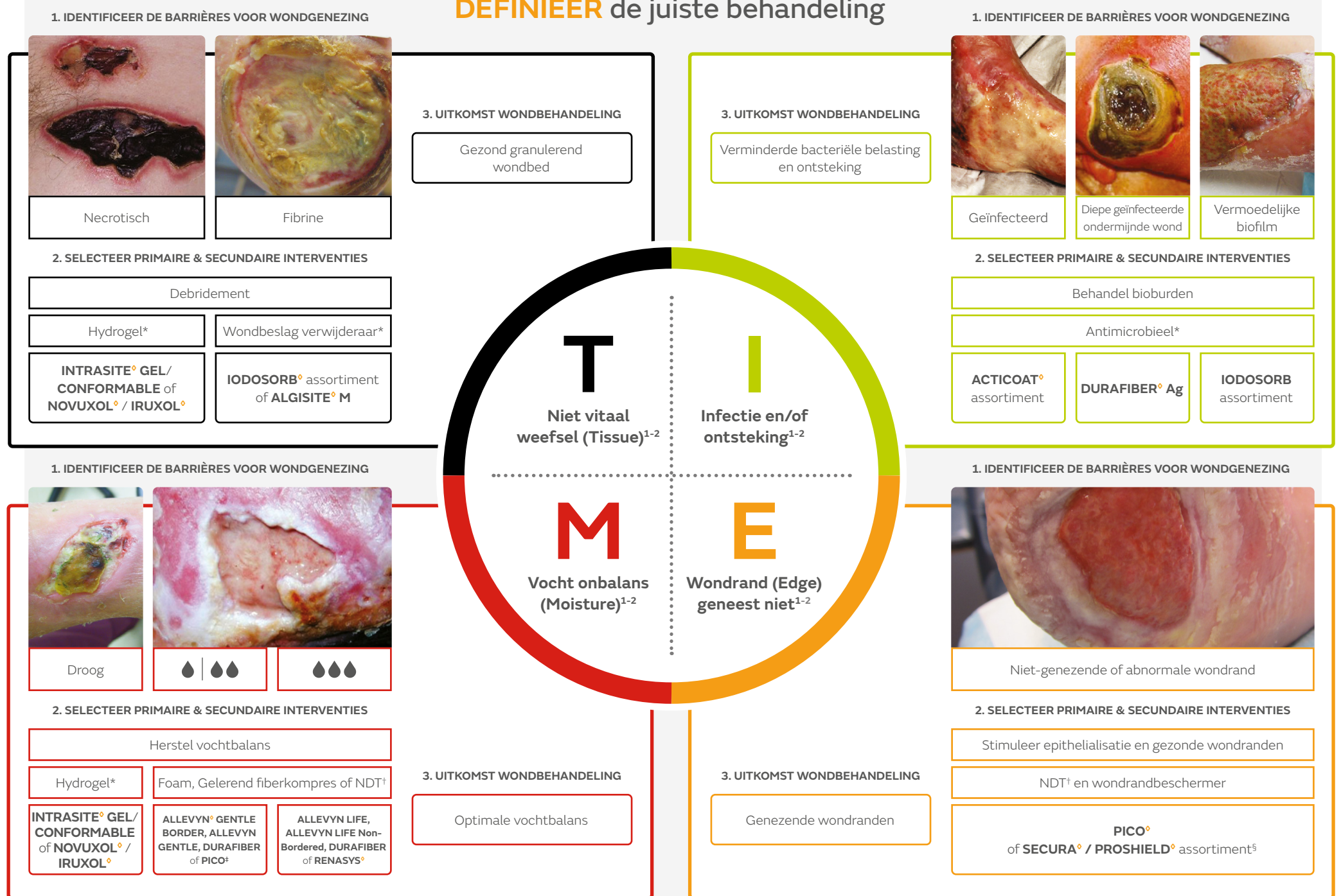

## EVALUEER en herbeoordeel de behandeling en de uitkomst van de wondverzorging

Documenteer op vaste tijden de wondvoortgang. Signaleer wanneer er geen verandering is opgetreden. Als het beoogde resultaat niet bereikt is, ga dan terug naar het begin van dit proces en doorloop A,B,C,D opnieuw.

Ontwikkeld met de hulp van Glenn Smith<sup>3</sup>

\* Gebruik een geschikt secundair verband volgens lokaal protocol. Bijvoorbeeld een verband uit het ALLEVYN of OPSITE assortiment.  
† NDT: Negatieve druktherapie. ‡Mate van exsudaat geschikt voor NDT.

<sup>§</sup> SECURA assortiment bestaat uit SECURA No-Sting barriere film SECURA No-Sting Spray 28 ml en SECURA No-Sting Swab 1 ml; PROSHIELD assortiment bestaat uit PROSHIELD Plus en PROSHIELD Foam & Spray.

**Referenties:** 1. Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V et al., Wound bed preparation: a systematic approach to wound management. Wound Rep Reg (2003);11:1-28. 2. Leaper DJ, Schultz G, Carville K, Fletcher J, Swanson T, Drake R. Extending the TIME concept: what have we learned in the past 10 years? Int Wound J 2012; 9 (Suppl. 2):1-19. 3. Smith G, Greenwood M, Searle R. Ward nurse's use of wound dressings before and after a bespoke educational programme. Journal of Wound Care 2010, vol 19, no. 9

**Smith & Nephew Nederland C.V.**  
Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp  
[www.smith-nephew.nl](http://www.smith-nephew.nl)  
® Handelsmerk van Smith+Nephew

**Smith & Nephew N.V./S.A.**  
Ikaroslaan 45, 1930 Zaventem  
[www.smith-nephew.be](http://www.smith-nephew.be)  
Alle handelsmerken erkend

**Smith+Nephew**