




FasT-Fix 360 簡易手技書

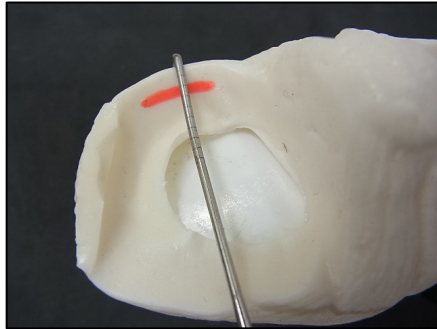


長さの計測を行います

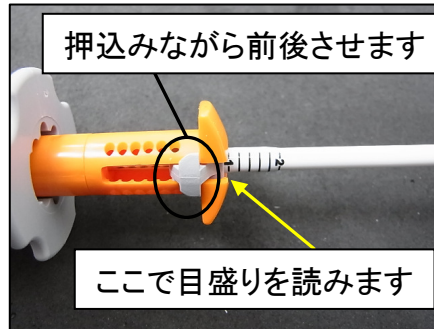

計測した長さを元にデプスリミッターを調節します

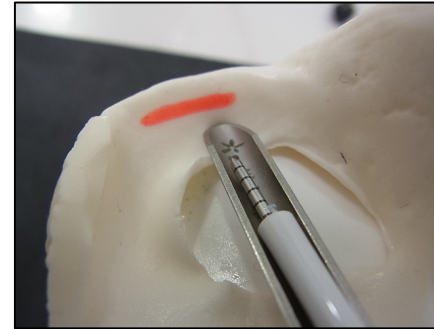


金属製のカニューラを用いてニードルを刺入位置まで進めます(※)

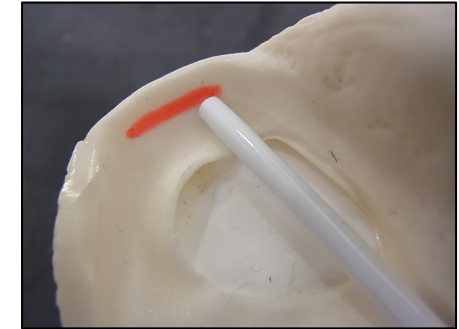


ニードルを刺入します




ノブを一番前まで押し出します
(一気に押出し、戻してください)

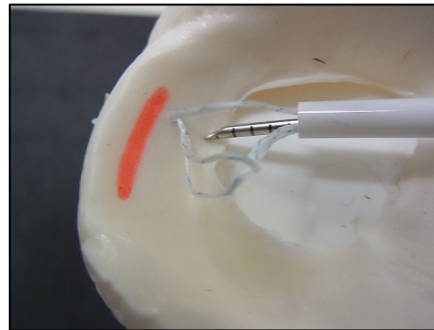


ニードルを関節内まで引き戻します

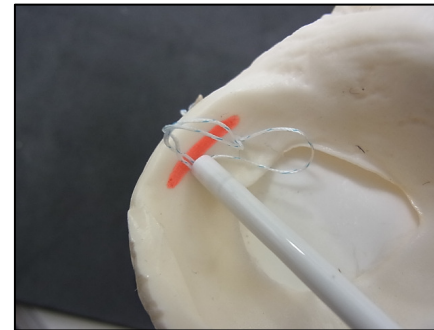


再度ニードルを刺入します

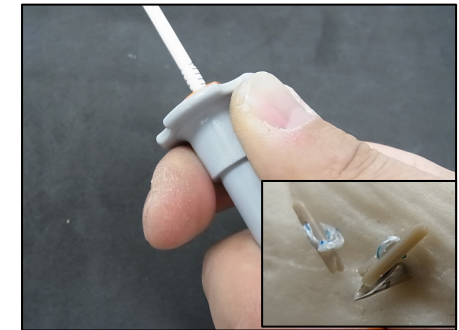


ノブを押し出します

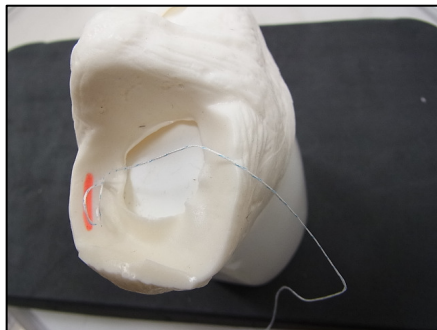

ニードルを体外まで引き戻します

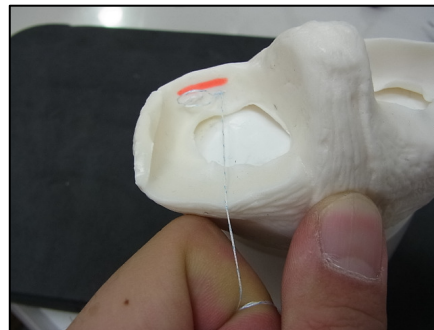

糸をゆっくりと、たるみがなくなるまで引っ張ります

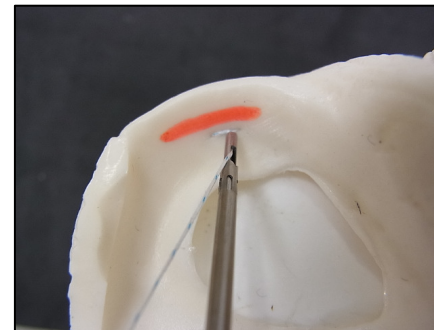

ホットプッシャー・スーチャーカッターを用い糸を切除します。



できあがり

※水色のカニューラはありません