

+ O formato único quadrilobular com um rebordo alargado, permite permanecer mais tempo aplicado*¹ e um indicador de mudança para saber quando mudar o penso.²⁻⁴

Smith+Nephew

ALLEVYN[®] LIFE

Penso de espuma

Aplicação



- Retire os materiais protetores do centro, sem remover completamente
- Centrar o penso
- Fixar parte do rebordo do penso na zona perilesional
- Pode usar os dedos para ajudar a fixar o rebordo
- Segure um dos materiais protetores parcialmente retirado




- Remover o restante material protetor
- Alisar
- Se está sobre uma ferida, assegurar de que a área absorvente cobre a ferida.
- Não esticar o penso




- Aplicar suavemente o penso sobre o corpo, sem esticar o penso
- Retirar suavemente os outros dois lóbulos do material protetor, enquanto posiciona o rebordo
- Não esticar o rebordo, alisar suavemente


Os pensos **ALLEVYN LIFE** mascaram o excesso de fluido da ferida e também ajudam a manter possíveis fugas ou odores bloqueados.⁵⁻⁷
Aqui está um diagrama útil para mostrar quando se deve mudar o penso:

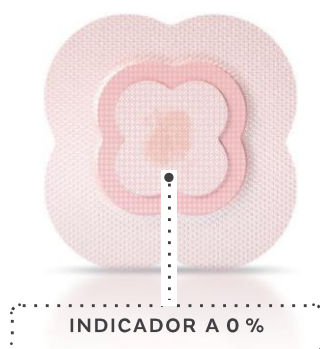

O penso pode permanecer aplicado com o exsudado camuflado.

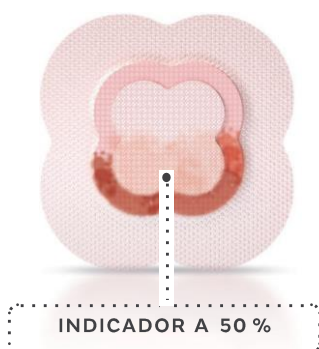

Considere programar a mudança de penso nos próximos dias.

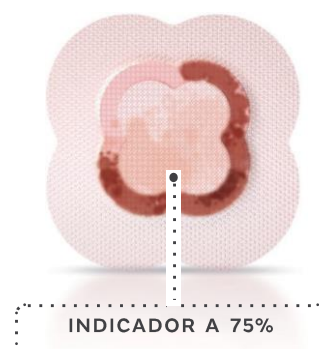

É o momento de mudar o penso.

Códigos ALLEVYN LIFE



Tamanho (cm)	Código S+N	Unid./Cx
10.3cm x 10.3cm	66801067	10
12.9cm x 12.9cm	66801068	10
15.4cm x 15.4cm	66801069	10
21cm x 21cm	66801070	10



Tamanho (cm)	Código S+N	Unid./Cx
17.2cm x 17.5cm Sacrum	66801306	10
21.6cm x 23cm Sacrum	66801307	10
25cm x 25.2cm Heel	66801304	5

Para obter informações detalhadas de produto, incluindo indicações de uso, contra-indicações, precauções e advertências, consulte as Instruções de Uso (IFU) aplicáveis do produto antes da aplicação.

*ALLEVYN LIFE pode ser usado quase o dobro do tempo que outros pensos convencionais. n=37; os pensos duram 1.92x vezes mais que outros pensos de espuma

Referências 1. Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. J Wound Care. 2015 Jul;24(7):312,314-7. 2. Stephen-Haynes JB, A., and Searle, R., The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. Journal of Community Nursing. 2013;27(5):50-59. 3. Simon D, Biel A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. Wounds UK. 2014;10(3):80-87. 4. Smith & Nephew February 2016 2016. Subjective comparison of masking ability of the New ALLEVYN LIFE versus Current ALLEVYN LIFE by Healthcare Professionals. Internal Report. DS/16/061/R. 5. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK. 2013;9(4):91-95. 6. Smith & Nephew 14 June 2012. Odour reducing properties of ALLEVYN Life. Internal Report. DS/12/127/DOF. 7. Smith & Nephew 20 June 2016. A Randomised Cross-Over Clinical Evaluation to Compare Performance of ALLEVYN Life and Mepilex® Border Dressing on Patient Wellbeing-Related Endpoints. Internal Report. CE/047/ALF

Advanced Wound Management, Smith & Nephew Lda., Rua do Parque Tejo, nº7, 2625-437 Forte da Casa, Portugal; Linha Customer Care: 800 209 135
www.smith-nephew.com/allewyn Marca registada da Smith+Nephew. Todas as marcas reconhecidas. ©Outubro 2024 Smith+Nephew 25197-pt V3 ALLEVYN Life Application Sheet 1024