

Smith+Nephew



NEU



+ Produktkatalog

WUNDMANAGEMENT



Stand 2026

Unsere Geschichte

1856
Smith+Nephew
wurde gegründet

1856-1896
Thomas James Smith eröffnete eine Apotheke in Hull, Großbritannien, und entwickelte ein neues Verfahren zur Veredelung von Lebertran. Im Jahr 1896 ging Horatio Smith eine Partnerschaft mit seinem Onkel ein und gründete das Unternehmen TJ Smith & Nephew

1914
Nur wenige Tage nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs erhielten wir den Auftrag, innerhalb von fünf Monaten chirurgisches Material und Verbandsmaterial für die französische Armee zu liefern

Von 50
bis 1200

Während des Ersten Weltkriegs stieg die Zahl unserer Mitarbeiter von 50 auf 1.200

1953
Für die Everest-Bergsteiger der Expedition von 1953 haben wir einen speziellen Kaltgips entwickelt. Damit konnten sie ihre Kamerafilme versiegelt und luftdicht nach Hause schicken!

1937
Wir wurden an der Londoner Börse gelistet

1928
Wir haben einen experimentellen Verband namens Elastoplast™ entwickelt

1986
Bedeutende Akquisitionen von Richards Medical in Memphis, einem Spezialisten für orthopädische Produkte, und DVONICS, einem auf Arthroskopie spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Andover

1995
Wir haben Acufex Microsurgical Inc. akquiriert und sind damit zum Marktführer im Bereich arthroskopischer chirurgischer Instrumente geworden

1995
Wir wurden an der New Yorker Börse notiert und sind seit 2001 Bestandteil des britischen FTSE-100-Index

2013
JOURNEY® II BCS setzt neue Maßstäbe bei der Leistungsfähigkeit von Knieimplantaten und verbessert die Lebensqualität der Patienten

2012
ALLEVYN® LIFE ein neuer Meilenstein in der modernen Wundversorgung

2011
PICO®, das erste Einwegsystem im Taschenformat, revolutioniert den Markt für Unterdruck-Wundtherapie

2001
Einführung von OXINIUM®, einem neuen Material, das die Leistungsfähigkeit verbessert und die Lebensdauer von Gelenkersatzsystemen verlängert

2014
Wir haben die Arthrocare Corp. akquiriert, um unser Portfolio im Bereich Sportmedizin zu erweitern

2015
Akquisition von Blue Belt. Technologies sichert eine führende Position in der robotergestützten orthopädischen Chirurgie

2017
Akquisition von Rotation Medical, ein Entwickler für Lösungen, die geschädigtes Gewebe im Körper reparieren bzw. nachwachsen lassen

2020
Einführung von „Real Intelligence“ und des CORI®-Chirurgiesystems; handgeführte Roboterplattform der nächsten Generation

2020
Akquisition von Tusker Medical Inc. zur gezielten Erweiterung unseres Portfolios im Bereich der HNO-Medizin

2019
Im Rahmen unserer Expansion in Zukunftstechnologien haben wir folgende Unternehmen übernommen:
• Osiris Therapeutics
• Ceterix Orthopaedics
• Leaf Patient Monitoring System
• Brainlab Orthopaedic Joint Reconstruction Business

2021
Einführung des SMART TSF-Zirkularfixateurs; WEREWOLF® FASTSEAL® 6.0 und LEGION CONCELOC; FAST-FIX FLEX Meniskus-Reparatursystem; INTELLIO Connected Tower

2024
Akquisition von CartiHeal, einem Entwickler neuartiger Technologien zur Knorpelregeneration

2026
ALLEVYN® COMPLETE CARE ein Silikon-Schaumverband der nächsten Generation

Über 19.000
Mitarbeiter in
mehr als 100
Ländern

Heute

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit und das Selbstvertrauen der Menschen wiederherzustellen, indem wir Technologien einsetzen, die den Alltag erleichtern. Dieses Ziel nennen wir „Life Unlimited“

Aufgrund unterschiedlicher behördlicher Auflagen und/oder medizinischer Praktiken sind manche Produkte eventuell nicht in allen Regionen erhältlich. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit von Smith+Nephew Produkten in Ihrer Region bitte an Ihren Smith+Nephew Außendienst oder Händler

+ Es ist unser Ziel, durch Leistung, Innovation und Vertrauen das Leben der Patienten zu verbessern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Smith+Nephew ist in **über 100 Ländern** präsent und beschäftigt **über 19.000 Mitarbeiter** weltweit.

Alle Smith+Nephew Geschäftsbereiche im Überblick:



Wundmanagement

Smith+Nephew ist ein führender Anbieter von Produkten zur Wundbehandlung. Wir bieten Lösungen für chronische Wunden wie Bein-ulzera, Druckgeschwüre und diabetische Fußulzera sowie Verbrennungen und postoperative Wunden.



Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden bieten wir Unterdruck-Wundtherapiesysteme an – wie RENASYS® und PICO®, das kanisterlose Unterdruck-Wundtherapiesystem.



Traumatologie

Zu unseren innovativen Produktlösungen in der Traumatologie gehört ein umfangreiches Portfolio für die interne und externe Fixation. Unser Nagel- und Plattensystem ermöglicht die Versorgung der unteren und oberen Extremitäten. Unsere Fixateursysteme bieten Möglichkeiten der akuten Frakturversorgung bis hin zur Korrektur von komplizierten Deformitäten.



Sportmedizin

Smith+Nephew ist der weltweit führende Hersteller in der arthroskopischen bzw. minimalinvasiven Gelenkchirurgie für Knie, Schulter, Hüfte, Handgelenk und Knöchel.



Orthopädie

Gemeinsam mit renommierten Ärzten und Wissenschaftlern forschen wir nach Produktlösungen für die individuelle Versorgung der Patienten. Die kontinuierliche Entwicklung neuer Materialien und Technologien für langlebige Implantate ist uns dabei besonders wichtig.



Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Mit der Coblation Technologie bieten wir ein besonders schonendes Verfahren bei operativen Eingriffen an den Tonsillen, der Nasenmuscheln, dem Weichgaumen und Larynx an. Mit dem Sortiment der Rapid Rhino® Nasentamponaden bieten wir effektive Lösungen bei Epistaxis an (mit oder ohne Atemtubus). Entfernbare oder selbstauflösende Gel-Tamponaden für die Nasen-/NNH-Chirurgie runden das Sortiment ab.



Den Grundstein für das Unternehmen legte 1856 Thomas J. Smith mit einem Fachgeschäft für Verbandstoffe und pharmazeutische Produkte in Hull, England. 1896 wurde sein Neffe Horatio N. Smith sein Geschäftspartner, er begann mit der Entwicklung von eigenen Verbandstoffen. Heute ist Smith+Nephew ein globales Medizintechnikunternehmen.

Moderne Wundversorgung

Ein feuchtes, warmes Wundmilieu bietet im Allgemeinen die besten Voraussetzungen für eine rasche und problemlose Wundheilung. Die Stoffe für den Zellaufbau gelangen unter diesen Bedingungen schnell in die Wunde und begünstigen Zellaufbau und -migration. Moderne Wundverbände fördern die Bildung dieses feuchten, warmen Milieus, das den optimalen Ablauf der Phasen Gefäßreaktion / Blutgerinnung, Exsudation, Granulation und Epithelisierung der Wundheilung sichert.

Weitere Informationen zur Wundtherapie und dem **T.I.M.E.-Prinzip** finden Sie auf der **Seite 8**.



Wundbettkonditionierung

Das Ziel dieser Maßnahme ist die Bildung eines guten Granulationsgewebes als Basis für einen vollständigen Wundverschluss. Nur nach angemessener Wundbettkonditionierung wird der Einsatz von modernen Verbänden erfolgreich sein. Wundbeläge und nekrotisches Gewebe können mit **INTRASITE^o GEL** oder **INTRASITE^o CONFORMABLE** angefeuchtet und autolytisch entfernt werden. Stärkere Beläge können **VERSAJET^o II** (Hydrochirurgie-System) chirurgisch beseitigt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 39, 64 und 70**.

Unterdruck-Wundtherapie

Zur Behandlung größerer Defektwunden mit großen Exsudatmengen ist das aktive **RENASYS^o** Unterdruck-Wundtherapiesystem besonders geeignet. Mit **PICO^o**, dem kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapiesystem, können schwach bis mäßig exsudierende chronische Wunden einfach und effizient behandelt werden. Zugleich kann PICO bei Risikopatienten präventiv eingesetzt werden und post-operative Wundheilungsstörungen, sowie damit verbundene verlängerte Liegedauer reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 30–35 und 36–37**.

Infektionsbekämpfung

Im Vergleich zu intakter Haut besitzt jede Wunde ein erhöhtes Infektionsrisiko durch pathogene Keime. Zur Bekämpfung von Wundinfektionen oder Vermeidung von Keimwachstum bietet Smith & Nephew eine Reihe von antimikrobiellen Verbänden an. Die **ACTICOAT^o** Verbände bieten dank einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung eine hohe bakterizide Wirkung auch gegen resistente Keime. Die absorbierenden **ALLEVYN^o** Schaumverbände mit Silber sowie die gelbildende Wundaufgabe **DURAFIBER^o Ag** mit Silber verfügen ebenfalls über einen hohen antimikrobiellen Effekt.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 22–27, 24–26, 27**.

Exsudatmanagement

Zur Förderung eines feuchten, warmen Wundmilieus speziell bei der Behandlung chronischer Wunden wie Dekubitus, diabetischer Fuß oder Ulcus cruris sind die **ALLEVYN^o** Schaumverbände am besten geeignet. Durch ihre hohe Aufnahmefähigkeit und lange Tragedauer sind sie zudem kosteneffizient. Daneben bieten die Alginateverbände **ALGISTE^o M** oder gelbildende Wundaufgaben wie **DURAFIBER^o** die optimale Unterstützung bei tieferen Wunden. Neben den bewährten Verbänden wird das Sortiment um das gesamte Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT) **RENASYS^o** und **PICO^o** ergänzt.

Weitere Informationen finden Sie auf den **10–19, 21, 27–29, 32–35 und 36–37**.

Kompressionstherapie

Venenerkrankungen wie Ulcus cruris, auch „offenes Bein“ genannt, werden am besten mit Kompressionsverbänden behandelt, um das Ödem abzubauen und die Versorgung des Gewebes zu verbessern, sodass die Wunde heilen kann. Das Mehrlagen-Kompressionssystem **PROFORE^o** bietet eine lang anhaltende Wirkung, wodurch die Verbände bis zu 7 Tage durchgehend getragen werden können.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 62 und 63**.

OP-Bedarf und postoperative Verbände

Während und nach Operationen werden wasserdampfdurchlässige und keimdichte **IV3000^o** Folienverbände zur Kanülen- und Katheterfixierung, **LEUKOSTRIP^o** Wundnahtstreifen für den schnellen Wundverschluss sowie postoperative Verbände wie **CUTIPLAST^o PLUS STERIL / CUTIPLAST^o STERIL** und **OPSITE^o POST-OP / VISIBLE** eingesetzt. Zur Fixierung von Verbänden und Versorgung kleiner Wunden bieten außerdem **OPSITE^o** Folien und Spray sicheren Schutz.

Weitere Informationen finden Sie auf den **Seiten 48, 51–52, 53–54 und 60**.

T.I.M.E. 2.0 – Leitfaden zur Versorgung chronischer Wunden 8

Exsudatmanagement

SCHAUMVERBÄNDE

ALLEVYN® COMPLETE CARE	12
ALLEVYN® COMPLETE CARE MULTISITE	12
ALLEVYN® COMPLETE CARE SACRUM	12
ALLEVYN® COMPLETE CARE HEEL	12
ALLEVYN® LIFE	14
ALLEVYN® LIFE SACRUM	14
ALLEVYN® LIFE HEEL	14
ALLEVYN® GENTLE BORDER	14
ALLEVYN® GENTLE BORDER HEEL	15
ALLEVYN® GENTLE BORDER MULTISITE	15
ALLEVYN® GENTLE BORDER SACRUM.....	15
ALLEVYN® GENTLE	16
ALLEVYN® Schaumverband Ferse nicht haftend	16
ALLEVYN® Schaumverband nicht haftend	17
ALLEVYN® TRACHEOSTOMY	17
ALLEVYN® Schaumverband haftend	18
ALLEVYN® SACRUM	18
ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE	19
ALLEVYN® THIN	19

SUPERABSORBER

DURAMAX® S	20
DURAMAX® N.....	20

GELBILDENDER FASERVERBAND

DURAFIBER®	21
------------------	----

ALGINAT

ALGISITE® M	21
-------------------	----

Infektionsmanagement

SILBER-WUNDAUFLAGEN

ACTICOAT® FLEX 3, ACTICOAT® FLEX 7	23
ACTICOAT®, ACTICOAT® 7	24

SILBER-SCHAUMVERBÄNDE

ALLEVYN® Ag GENTLE BORDER	24
ALLEVYN® SILBER Schaumverband nicht haftend.....	25
ALLEVYN® SILBER Schaumverband Ferse nicht haftend	25
ALLEVYN® SILBER Schaumverband haftend	26
ALLEVYN® Ag SACRUM	26

GELBILDENDER FASERVERBAND MIT SILBER

DURAFIBER® Ag	27
---------------------	----

CADEXOMER JOD

IODOSORB® Dressing	28
IODOSORB® Salbe	28

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapie-system (sNPWT)

PICO® 14, PICO® Zubehör.....	33
PICO® 7, PICO® Zubehör, PICO® 7Y.....	34
PICO® Multipacks.....	35
PICO® Wundfüllmaterialien	35

Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

RENASYS® EDGE, RENASYS® TOUCH, RENASYS® Soft Port RENASYS® Therapieeinheiten, RENASYS® -F, RENASYS® -F/AB, RENASYS® -G Wundversorgungs-Kits, Zubehör.....	37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Hydrogele

INTRASITE® GEL	39
INTRASITE® CONFORMABLE	39

Wundschutz und Barrierefilm

SECURA®	41
SKIN-PREP®	42
REMOVE®	42
PROSHIELD® Sprüh-Schaumreiniger	43
PROSHIELD® Plus	43

Fettgazeverbände

BACTIGRAS®	44
CUTICERIN®	45
JELONET®	45

OP-Bedarf

OPSITE® Inzisionsfolie	47
APPLICA® OP-Folie.....	47
LEUKOSTRIP®	48
LEUKOSTRIP® S.....	48

Klebende und nicht klebende Wundverbände

OPSITE® POST-OP	51
OPSITE® POST-OP VISIBLE	52
PRIMAPORE®	52
CUTIPLAST® Meterware.....	53
CUTIPLAST® STERIL.....	53
CUTIPLAST® PLUS STERIL	54
CUTIFIX® STRETCH.....	54
MELOLIN®	55

Wund- und Fixierfolien

OPSITE® FLEXIGRID®	57
OPSITE® FLEXIFIX	57
OPSITE® FLEXIFIX GENTLE	58
OPSITE® SPRAY	58

Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen

IV3000®	60
APPLICA® I.V. 100	61
OPSITE® VISIBLE DRAIN DRESSING	61

Kompressionssysteme

PROFORE®	62
PROFORE® LITE.....	63

Salbe

ENZYMATISCH

IRUXOL® N	64
-----------------	----

Biosynthetischer Hautersatz

BIOBRANE®	67
-----------------	----

Verbrennungsbehandlung

EXU-DRY®	68
----------------	----

Narbenbehandlung

CICA-CARE®	69
------------------	----

Hydrochirurgie-System

VERSAJET® II	71
--------------------	----

Applikationstechniken

ALLEVYN®	72
IV3000®	74
OPSITE® POST-OP VISIBLE	78

Treffen Sie eine klare Entscheidung.

Mit unserer klinischen Entscheidungshilfe T.I.M.E. 2.0 und dem bewährten Portfolio zur richtigen Zeit das richtige Produkt für die richtige Wunde wählen.

T.I.M.E. 2.0 (Clinical Decision Support Tool, CDST)*
Fünf Schritte, um eine Vereinfachung und systematische Vereinheitlichung in der Praxis leichter zu erreichen:

Assessment: Wundbeurteilung und Lebensqualität

Die Entscheidungshilfe beginnt mit der Einschätzung des Patienten. Es ist wichtig, dass das medizinische Fachpersonal eine ganzheitliche Sicht auf das Wohlbefinden des Patienten hat. Diese bezieht die Entscheidungshilfe mit ein.

Build: Bildung eines multidisziplinären Behandlungsteams unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Patientenansatzes

Das medizinische Fachpersonal muss, bevor es fortfährt, erwägen, ob es den Patienten behandeln kann und ihn, falls nötig, überweisen. Pflegekräfte müssen miteinbezogen werden.

Control: Kontrolle und Beseitigung von Wundheilungsstörungen

Die ganzheitliche Betrachtung des Zustands des Patienten ist in die Entscheidungshilfe integriert. Daher muss das medizinische Fachpersonal auch andere zugrunde liegende Probleme berücksichtigen.

Decide: Entscheidung über angemessene Therapie

Die Einschätzung der Wunde sollte anhand der gut fundierten T.I.M.E.-Prinzipien erfolgen.

T issue Nekrosen/ Fibrinbeläge	I nfection Infektion	M oisture Feuchtigkeits- ungleichgewicht	E dge Verzögerte Reepithelisierung
---------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------


Evaluation: Evaluierung und Re-Assessment von Therapie und Fortschritt

Es ist für die Sicherstellung des Wundverlaufs von entscheidender Bedeutung, dass dieser Schritt einheitlich und regelmäßig durchgeführt wird.

Kehren Sie zu A, B, C, D zurück, wenn der Wundverlauf nicht gut ist.

*Die Entscheidungshilfe wurde mit Unterstützung von Glenn Smith¹ and Moore et al. 2019² entwickelt. **MolecuLight Headquarter, 425 University Avenue, Suite 700, Toronto, ON M5G 1T6, Canada
Referenzen: 1. Smith G, Greenwood M, Searle R. Ward nurses' use of wound dressings before and after a bespoke educational programme. Journal of Wound Care Vol. 19., no. 9, Sept 2010

T.I.M.E. 2.0 Leitfaden – Clinical Decision Support Tool (CDST)

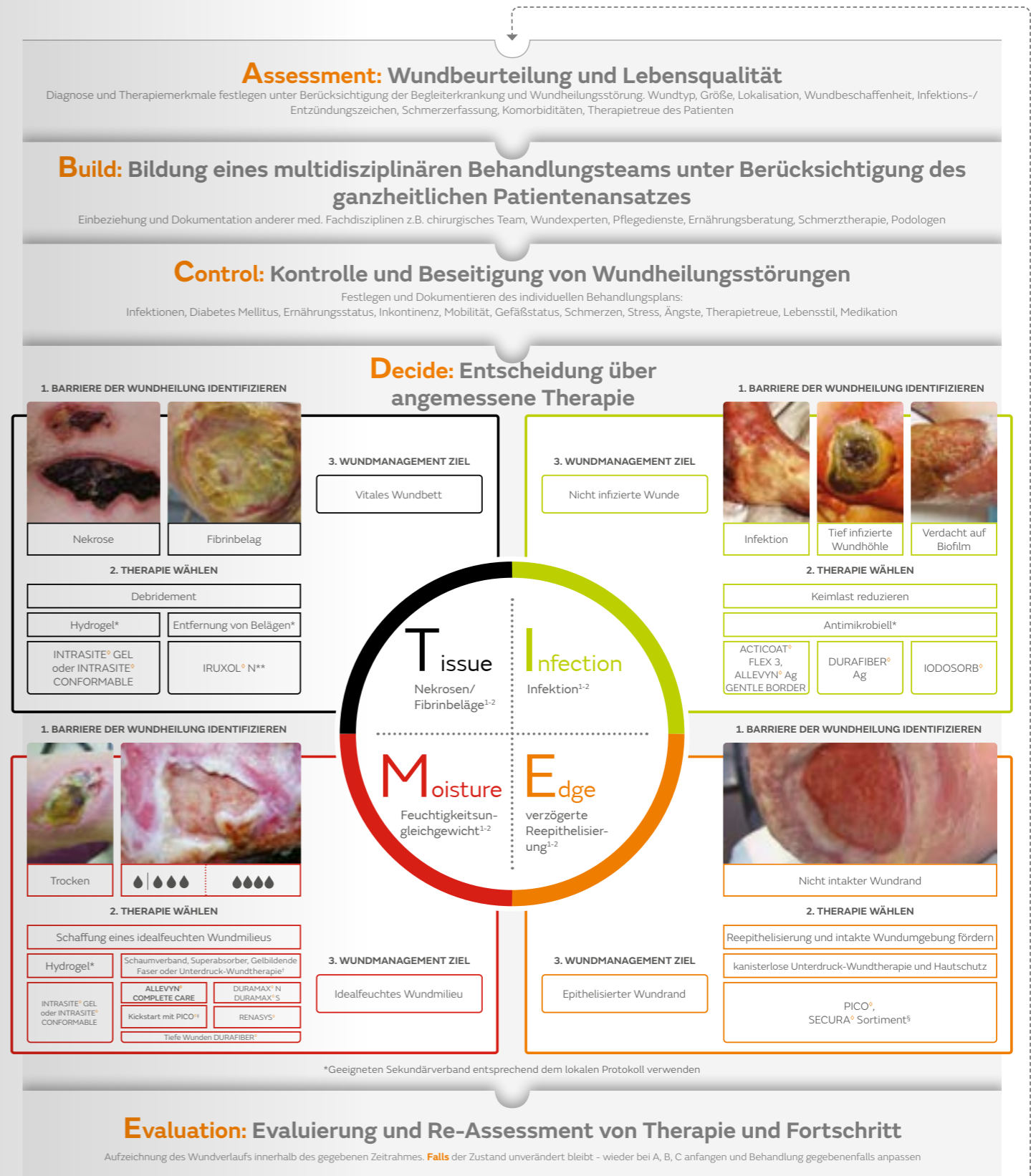


+ Das ALLEVYN[®]-Sortiment

Passende Lösungen für ein breites Spektrum akuter und chronischer Wunden unterschiedlicher Größe, Exsudatmenge und Lokalisation

Unsere ALLEVYN[®] Schaumverbände verfügen über eine langjährige Historie. Seit der Einführung des allerersten Schaumverbandes im Jahre 1987 haben wir unser Portfolio stetig erweitert und bieten verschiedenste Varianten an – verschiedene Haftarten, Absorptionsvermögen, Größen und Formen – es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.

All unsere ALLEVYN[®] Schaumverbände zeichnen sich durch ihren weichen Produktaufbau aus. Atmungsaktive Außenfolien sorgen dafür, dass Flüssigkeit nach oben abdampfen kann und dienen zugleich als Feuchtigkeits- und Bakterienbarriere. Sie sind klinisch erprobt und ermöglichen eine optimale feuchte Wundversorgung.

Eine Vielzahl unserer Produkte ist mit Silikon beschichtet. Silikon haftet auf trockener Haut, verklebt jedoch nicht mit der Wunde und kann Schmerzen beim Verbandwechsel reduzieren. Es hat ein geringes Potential von Hautirritationen und kann auch bei empfindlicher Haut eingesetzt werden.

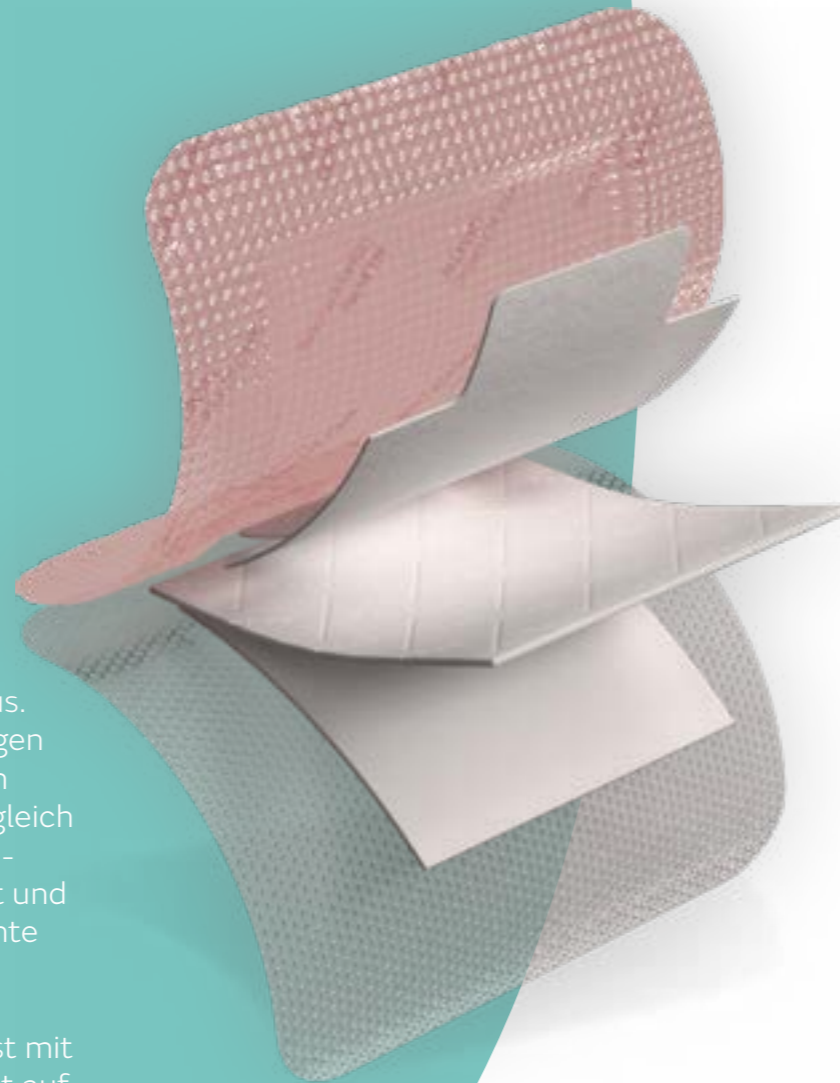

+ Der **Kurzüberblick** fasst die wichtigsten Besonderheiten der Verbände zusammen. Weitere Details zum jeweiligen Produkt folgen **auf den nächsten Seiten**.

Unser ALLEVYN[®]-Portfolio

	Mit Haftrand	Ohne Haftrand
	Die neue Allrounder Generation	
SCHWACH BIS STARK	ALLEVYN[®] COMPLETE CARE <ul style="list-style-type: none"> • ExuLOCK[®] fortschrittliche Lock-in-Technologie • ExuMASK[®] Technologie des Wechselindikators • ComfortSTAY[®] Technologie mit Haftschiicht aus weichem Silikon • HighFLEX Multidirektionale Stretch-Technologie • ShearDEFENSE[®] Technologie mit unverbundenen Schichten <p>Auch als Multisite, Sakral- und Fersenverband erhältlich</p>	
	Der anpassungsfähige Allrounder	
MÄSSIG BIS STARK	ALLEVYN[®] LIFE <ul style="list-style-type: none"> • Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge an • XL-Haftrand für zuverlässigen Halt <p>Auch als Sakral- und Fersenverband erhältlich</p>	ALLEVYN[®] GENTLE <p>Weich und anschmiegsam</p>
	Der Anschmiegsame	
	ALLEVYN[®] GENTLE BORDER <p>Weich und dehnbar, längs- und querelastisch</p> <p>Auch als Sakral-, Fersen- und Multisite-Verband erhältlich</p> <p>Antimikrobielle Variante: ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER</p>	Der Sensible ALLEVYN[®] Schaumverband nicht haftend <p>Besonders für geschädigte Haut geeignet</p> <p>Auch als Fersen- und Tracheostomie-Verband erhältlich</p> <p>Antimikrobielle Variante: ALLEVYN[®] Silber Schaumverband nicht haftend (inkl. Ferse)</p>
	Der stark Haftende	
	ALLEVYN[®] Schaumverband haftend <p>Besonders hohe Haftkraft, bei intakter Umgebungshaut</p> <p>Auch als Sakralverband erhältlich</p> <p>Antimikrobielle Variante: ALLEVYN[®] Silber Schaumverband haftend, ALLEVYN[®] Ag SACRUM</p>	
	Der besonders Flexible	
SCHWACH BIS MÄSSIG	ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE <p>Dünn und flexibel</p> <p>Auch in besonders kleinen und länglichen Größen verfügbar</p>	ALLEVYN[®] THIN <p>Besonders dünn und flexibel</p>



ALLEVYN® COMPLETE CARE – Die nächste Generation

Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit schwacher bis starker Exsudation – steril.


- Zuverlässiges Exsudatmanagement^{1,5,9,10} mit effektivem Bakterien-⁸, Proteasen-²⁵ und Geruchseinschluss^{2,3}
- Mit Haftrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



ALLEVYN® COMPLETE CARE ist auch als Sakral-, Fersen- und Multisite-Variante erhältlich.

Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundaufgabe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ALLEVYN® COMPLETE CARE					
66807695	7,5 cm x 7,5 cm	4,5 cm x 4,5 cm	2017 8421	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66807696	10,0 cm x 10,0 cm	6,5 cm x 6,5 cm	2017 8438	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66807697	12,5 cm x 12,5 cm	8,5 cm x 8,5 cm	2017 8450	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66807698	15,0 cm x 15,0 cm	11,0 cm x 11,0 cm	2017 8467	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66807699	17,5 cm x 17,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm	2017 8473	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66807700	10,0 cm x 20,0 cm	5,0 cm x 15,0 cm	2017 8527	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66807701	10,0 cm x 30,0 cm	5,0 cm x 25,0 cm	2017 8533	60 Stück (6 OP)	10 Stück
ALLEVYN® COMPLETE CARE MULTISITE					
66807702	17,1 cm x 17,8 cm	11,5 cm x 12,3 cm	2017 8556	60 Stück (6 OP)	10 Stück
ALLEVYN® COMPLETE CARE SACRUM ¹ Verbandszeit bis zu 5 Tage					
66807703	17,2 cm x 17,4 cm	8,4 cm x 12,4 cm	2017 8504	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66807704	21,5 cm x 23,0 cm	12,3 cm x 16,9 cm	2017 8510	60 Stück (6 OP)	10 Stück
ALLEVYN® COMPLETE CARE HEEL ²					
66807705	25,0 cm x 25,2 cm	20,0 cm x 20,2 cm	2017 8496	60 Stück (6 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)¹

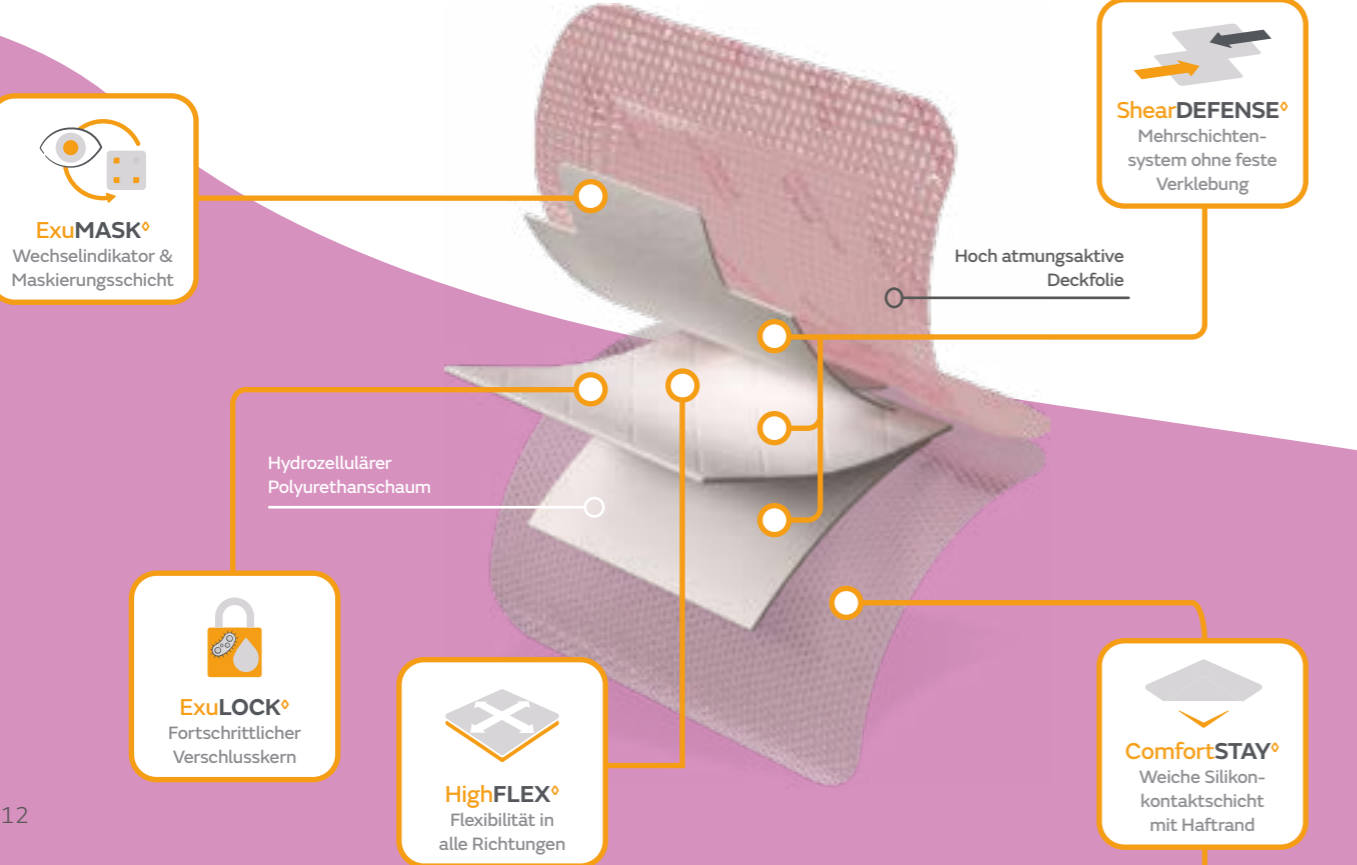

Exsudatmanagement

ExuLOCK® fortschrittliche Lock-in-Technologie

- Einschließen von Exsudat und Bakterien selbst unter Kompression^{1,8}
- Ermöglicht eine horizontale Verteilung des Exsudats über die gesamte Verbandfläche⁹ und hilft so, Leckagen zu verhindern^{2,3}
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu[†] zur Förderung der Heilung^{3,5,9,10}

ExuMASK® Technologie des Wechselindikators

- Reduziert die Sichtbarkeit der Wundflüssigkeit, so dass der Verband länger frisch aussieht.^{2,3,9,11-14}
- Zeigt optisch an, wann der Verband zu wechseln ist¹¹



ComfortSTAY® Technologie mit Haftschiene aus weichem Silikon

- Sorgt für eine sanfte und sichere Haftung¹⁵⁻¹⁷
- Ist atraumatisch für Wunde und umliegende Haut und minimiert Schmerzen bei der Entfernung^{3,16-18}

ALLEVYN hochabsorbierende Schaumschicht

- Langanhaltende vertikale Absorption, um Flüssigkeitsansammlungen und Mazeration zu minimieren^{1,3,9}
- Die Porengröße des Schaums ermöglicht das Management von Exsudat mit niedriger bis hoher Viskosität⁹

Atmungsaktive Außenfolie

- Schutz vor äußerem Bakterieneintritt^{†19}
- Duschfest²⁰

[†]Wie in vitro nachgewiesen. ^{††}Wie in silico und in vitro nachgewiesen. ^{†††}Während der Tragedauer des Verbands. ^{††††}ALLEVYN 5-lagige Verbände. ^{†††††}Wie in silico nachgewiesen.

Prävention & Behandlung von Druckverletzungen

HighFLEX® Multidirektionale Stretch-Technologie

- Anschmiegsam und flexibel^{7,21}
- Passt sich gut an die Körperkonturen an^{3,22}
- Hilft bei der Anwendung an problematischen Bereichen^{3,12,22}

ShearDEFENSE® Technologie mit unverbundenen Schichten

- Durch das firmeneigene, verbundfreie Design können die Schichten reibungsbedingt innerhalb des Verbandes gleiten⁴
- Absorbiert Scherkräfte und reduziert die Weichteilbelastung,^{4,23} um das Risiko von Druckverletzungen zu minimieren²⁴
- Hochwirksame Absorption von Scher- und Reibungskräften¹⁴

ComfortSTAY® Technologie mit Haftschiene aus weichem Silikon

- Kann bei gleichbleibender Haftung repositioniert werden, um die Hautkontrolle während der Tragedauer des Verbandes zu erleichtern^{*15}

Atmungsaktive Außenfolie

- Begünstigt ein optimales Mikroklima^{5,10}

Umverteilung des Drucks

- sorgt dafür, dass äußerer Druck besser verteilt wird^{*6}



Referenzen: 1. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. 2. Tiscar-González V, et al. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23–30. 3. Rossington A, et al. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95. 4. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. 5. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. 6. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. 7. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. 8. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.019 V2. 9. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. 10. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.010. 11. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. 12. Simon D, Bielby A. *Wounds UK*. 2014;10(3):80–87. 13. Joy H, et al. *J Wound Care*. 2015;24(7):312, 314–317. 14. Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023. 15. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.015 V2. 16. Vowden K, et al. Paper presented at: EWMA; 2011. 17. Smith+Nephew. Internal report: EA/AWM/GENERAL/001/V2. 18. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN® Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. 19. Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.014. 20. Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.017. 21. Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.013. 22. Stephen-Haynes J, et al. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50–59. 23. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.058 V2. 24. Atkinson L, Costa B. Poster presented at: EWMA; 2024. 25. Internal report CSD.AWM.25.020. Geri C, et al. *J Wound Care*. 2025; 34(1): 9 – 16.

+ Exsudatmanagement

+ Exsudatmanagement



Auch als Sakral- und Fersenverband erhältlich

ALLEVYN° LIFE – Der anpassungsfähige Allrounder

Silikonschaumverband mit Haftrand für die Versorgung von Wunden mit schwacher bis starker Exsudation – steril.

- Passt sich Körperkontur und Exsudatmenge optimal an
- Keine Sekundärfixierung nötig
- Sanft haftende, perforierte Wundkontaktschicht aus Silikon
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ALLEVYN° LIFE					
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	5,1 cm x 5,1 cm	0963 4019	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	7,6 cm x 7,6 cm	0963 4031	50 Stück (5 OP)	10 Stück
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10,2 cm x 10,2 cm	0963 4048	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801070	21,0 cm x 21,0 cm	15,4 cm x 15,4 cm	0963 4060	40 Stück (4 OP)	10 Stück
ALLEVYN° LIFE SACRUM Verbandszeit bis zu 5 Tage					
66801306	17,2 cm x 17,5 cm	12,4 cm x 8,5 cm	0249 5000	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66801307	21,6 cm x 23,0 cm	17,0 cm x 12,3 cm	0249 5129	40 Stück (4 OP)	10 Stück
ALLEVYN° LIFE HEEL					
66801304	25,0 cm x 25,2 cm	20,0 cm x 20,2 cm	0711 6438	30 Stück (6 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*




ALLEVYN° GENTLE BORDER ist auch als Sakral-, Fersen- und Multisite-Variante erhältlich.

ALLEVYN° GENTLE BORDER – Der Anschmiegsame

Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Mit Haftrand, hält ohne Sekundärfixierung
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Längs- und Querelastizität für gute Anpassung
- Duschfest
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet

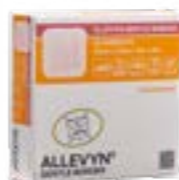

Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken					
66800259	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	0608 7427	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66800260	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	0608 7456	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66800901	10,0 cm x 20,0 cm	7,2 cm x 17,2 cm	0775 1904	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66800265	10,0 cm x 30,0 cm	6,5 cm x 26,5 cm	1291 1327	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800262	12,5 cm x 12,5 cm	10,0 cm x 10,0 cm	0608 7433	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66800263	17,5 cm x 17,5 cm	15,0 cm x 15,0 cm	0608 7462	30 Stück (6 OP)	5 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich					
66800269	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	-	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66800270	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	-	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800900	10,0 cm x 20,0 cm	7,2 cm x 17,2 cm	-	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800265	10,0 cm x 30,0 cm	6,5 cm x 26,5 cm	-	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	10,0 cm x 10,0 cm	-	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800273	17,5 cm x 17,5 cm	15,0 cm x 15,0 cm	-	80 Stück (8 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN° GENTLE BORDER HEEL

Anatomisch geformt für Wunden an der Ferse – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800506	23,0 cm x 23,2 cm	20,0 cm x 20,2 cm	0269 1416	35 Stück (7 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN° GENTLE BORDER SACRUM

Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich. Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandszeit bis zu 5 Tage



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken					
66800899	16,8 cm x 17,1 cm	8,5 cm x 12,5 cm	0775 1910	30 Stück (6 OP)	5 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich					
66800897	16,8 cm x 17,1 cm	8,5 cm x 12,4 cm	-	36 Stück (6 OP)	6 Stück

Erstattungsfähig



ALLEVYN° GENTLE BORDER MULTISITE

Anatomisch geformt für eine Vielzahl von schwierigen und konturierten Körperstellen wie Knie, Ferse, Schulter etc. – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken					
66800960	17,1 cm x 17,9 cm	11,6 cm x 12,3 cm	0886 1078	30 Stück (6 OP)	5 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich					
66800959	17,1 cm x 17,9 cm	11,6 cm x 12,3 cm	-	60 Stück (6 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® GENTLE – Der Anschmiegsame

Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation. Die sanfte Haftung erleichtert die Sekundärfixierung – steril.

- Ohne Hafttrand
- Sekundärfixierung notwendig
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und anschmiegsam, zuschneidbar
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66802135	5,0 cm x 5,0 cm	0608 7367	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66802136	10,0 cm x 10,0 cm	0608 7373	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66802137	10,0 cm x 20,0 cm	0608 7396	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66802138	15,0 cm x 15,0 cm	0608 7404	30 Stück (6 OP)	5 Stück
66802139	20,0 cm x 20,0 cm	0608 7410	30 Stück (6 OP)	5 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich				
66802128	5,0 cm x 5,0 cm	–	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66802129	10,0 cm x 10,0 cm	–	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66802130	10,0 cm x 20,0 cm	–	40 Stück (4 OP)	10 Stück
66802131	15,0 cm x 15,0 cm	–	40 Stück (4 OP)	10 Stück
66802132	20,0 cm x 20,0 cm	–	20 Stück (2 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® Schaumverband Ferse nicht haftend

Anatomisch geformt für die einfache Versorgung von Problemzonen wie Ferse, Ellbogen, Amputationsstümpfen, Zehen, Hoden – steril.

- Verbandszeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66801121	10,5 cm x 13,5 cm	0968 6648	42 Stück (6 OP)	7 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich				
66801150	10,5 cm x 13,5 cm	–	30 Stück (3 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® Schaumverband nicht haftend – Der Sensible

Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Nicht haftende Wundkontaktschicht
- Fixierung notwendig
- Zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Besonders gut für geschädigte, aber natürlich auch für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66801116	4,5 cm x 5,5 cm	0968 6594	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801117	9,0 cm x 11,0 cm	0968 6602	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801118	9,0 cm x 21,0 cm	0968 6619	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801119	14,0 cm x 16,0 cm	0968 6625	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801120	19,0 cm x 21,0 cm	0968 6631	72 Stück (6 OP)	12 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich				
66801145	4,5 cm x 5,5 cm	–	120 Stück (6 OP)	20 Stück
66801146	9,0 cm x 11,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück
66801147	9,0 cm x 21,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück
66801148	14,0 cm x 16,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück
66801149	19,0 cm x 21,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück

Sondergröße – ALLEVYN® NON-ADHESIVE

66000663	40 cm x 70 cm	0141 2710	–	2 Stück
----------	---------------	-----------	---	---------

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® TRACHEOSTOMY

Mit runder Ausstanzung für die Versorgung mit Tracheostoma-Kanülen – steril.



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66007640†	9,0 cm x 9,0 cm	0752 4640	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66010674	6,0 cm x 4,0 cm	–	80 Stück (8 OP)	10 Stück

† Erstattungsfähig



ALLEVYN° Schaumverband haftend – Der stark Haftende

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Mit Haftrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Duschfest
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Bei intakter Umgebungshaut



Unser stark haftender Wundverband ist auch als Sakral-Variante erhältlich.

Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken					
66801111	7,0 cm x 8,0 cm	5,0 cm x 5,0 cm	0968 6542	144 Stück (12 OP)	12 Stück
66801112	12,0 cm x 13,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	0968 6559	144 Stück (12 OP)	12 Stück
66801113	13,0 cm x 22,0 cm	10,0 cm x 20,0 cm	0968 6565	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801114	17,0 cm x 18,0 cm	15,0 cm x 15,0 cm	0968 6571	96 Stück (8 OP)	12 Stück
66801115	22,0 cm x 23,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	0968 6588	72 Stück (6 OP)	12 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich					
66801140	7,0 cm x 8,0 cm	5,0 cm x 5,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück
66801141	12,0 cm x 13,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück
66801142	13,0 cm x 22,0 cm	10,0 cm x 20,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück
66801143	17,0 cm x 18,0 cm	15,0 cm x 15,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück
66801144	22,0 cm x 23,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	–	80 Stück (4 OP)	20 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN° SACRUM


Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich. Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandszeit bis zu 5 Tage



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66012593	17,0 cm x 17,0 cm	13,5 cm x 13,2 cm	0131 3221	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66000451	22,0 cm x 22,0 cm	18,0 cm x 18,0 cm	0889 1607	80 Stück (8 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig

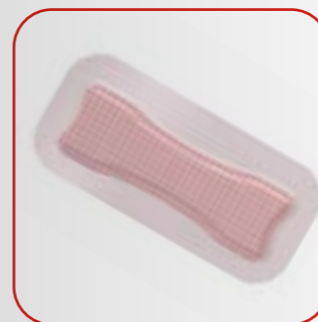

ALLEVYN° GENTLE BORDER LITE – Der besonders Flexible

Dünnere, sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation – steril.

- Mit Haftrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Besonders anschmiegsam und flexibel dank des 2 mm dünnen PU-Schaums
- Duschfest
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800833	5,0 cm x 5,0 cm	3,0 cm x 3,0 cm	0943 1196	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800834	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	0943 1210	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800835	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	0943 1227	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800836	5,5 cm x 12,0 cm	3,0 cm x 9,5 cm	0943 1233	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800837	8,0 cm x 15,0 cm	5,5 cm x 12,5 cm	0943 1256	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66800840	15,0 cm x 15,0 cm	12,5 cm x 12,5 cm	0943 1204	60 Stück (6 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN° THIN

Dünnere, selbsthaftender Wundverband aus einer Polyurethanmatrix mit eingebetteten Superabsorbentien für die Versorgung von Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation – steril.

- Besonders dünn und flexibel
- Selbsthaftend, anschmiegsam und zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen, beim Verbandwechsel
- Optimal für schwierige Körperkonturen
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66012615	5,0 cm x 6,0 cm	0312 6902	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66012616	10,0 cm x 10,0 cm	0312 6919	100 Stück (20 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



DURAMAX° S

Superabsorber mit Silikon-Wundkontaktschicht und einer atmungsaktiven, wasserundurchlässigen Deckschicht zur Behandlung von sehr stark exsudierenden Wunden – steril.

- Hohe Absorptions- und Rückhaltekapazität
- Die vernetzte Silikon-Wundkontaktschicht verklebt nicht mit dem Wundbett
- Schließt Exsudat und >99% der Bakterien* im superabsorbierenden Kern ein – auch unter Kompression
- Kann helfen, die Wundumgebungshaut vor Wundexsudat und Feuchtigkeit zu schützen



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66803131	10,0 cm x 10,0 cm	7,0 cm x 7,0 cm	1794 4461	400 Stück (40 OP)	10 Stück
66803132	15,0 cm x 20,0 cm	12,0 cm x 17,0 cm	1794 4478	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66803133	20,0 cm x 20,0 cm	17,0 cm x 17,0 cm	1794 4484	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66803134	20,0 cm x 25,0 cm	17,0 cm x 22,0 cm	1794 4490	160 Stück (16 OP)	10 Stück
66803135	20,0 cm x 40,0 cm	17,0 cm x 37,0 cm	1794 4509	100 Stück (10 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



DURAMAX° N

Nicht-haftender superabsorbierender Wundverband mit einer atmungsaktiven, wasserundurchlässigen Deckschicht zur Behandlung von sehr stark exsudierenden Wunden – steril.

- Hohe Absorptions- und Rückhaltekapazität
- Schließt Exsudat und >99% der Bakterien* im Verband ein, auch unter Kompression
- Minimiert das Risiko einer Mazeration und Irritation der Wunde sowie der Wundumgebung durch überschüssiges Exsudat



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66807730	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	1979 3291	400 Stück (40 OP)	10 Stück
66807731	15,0 cm x 20,0 cm	12,5 cm x 17,5 cm	1979 3316	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66807732	20,0 cm x 20,0 cm	17,5 cm x 17,5 cm	1979 3322	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66807733	20,0 cm x 25,0 cm	17,5 cm x 22,5 cm	1979 3339	160 Stück (16 OP)	10 Stück
66807734	20,0 cm x 40,0 cm	17,5 cm x 37,5 cm	1979 3345	100 Stück (10 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

*Sobald sich die Bakterien im DURAMAX° S Verband befinden, werden über 99% innerhalb des Verbandes eingeschlossen und von der Wunde ferngehalten.

Hersteller: Winner Medical Co., Ltd., Winner Industrial Park, No.660 Bulong Road, Longhua District, 518109 Shenzhen, China; EC Rep: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg



DURAFIBER°

Absorbierender, gelbildender Faserverband aus Cellulose-Ethylsulfonat-Fasern – steril.


- Sanfte, anpassungsfähige Gelmatrix
- Dauerhaft intakte Wundauflage und Gelfestigkeit – leichtes Entfernen in einem Stück
- Vertikale Exsudataufnahme, die das Mazerationsrisiko der umliegenden Haut reduziert
- Schließt >99% der Bakterien im Verband ein*
- Reduziert den Totraum, in dem sich Bakterien vermehren können



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800029	5,0 cm x 5,0 cm	0028 3015	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66800030	10,0 cm x 10,0 cm	0028 3156	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66800031	15,0 cm x 15,0 cm	0028 3185	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800033	2,0 cm x 45,0 cm	0342 5993	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800546	4,0 cm x 10,0 cm	0342 6024	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800547	4,0 cm x 20,0 cm	0342 6047	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800548	4,0 cm x 30,0 cm	0342 6053	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800551	10,0 cm x 12,0 cm	0614 1055	120 Stück (12 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

ALGINAT

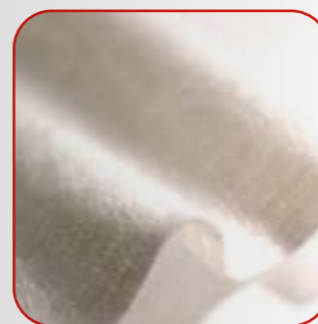

ALGISITE° M

Kalziumalginat-Wundauflage für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Durch die Exsudataufnahme wird ALGISITE M zu einem weichen, strukturstabilen Gel
- Wirkt blutstillend
- Hohe Faserstabilität durch spezielle Verbundtechnik – erleichtert das Entfernen in einem Stück
- Anpassungsfähig an alle Wundkonturen
- Zuschneidbar
- Granulationsfördernd durch Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tagen



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000519	5,0 cm x 5,0 cm	0879 8664	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66000520	10,0 cm x 10,0 cm	0879 8670	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66000521	15,0 cm x 20,0 cm	0881 8533	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66000522	2,0 cm x 30,0 cm	0881 8556	100 Stück (20 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.
* Sobald sich die Bakterien im DURAFIBER° Verband befinden, werden über 99% innerhalb des Verbandes eingeschlossen und von der Wunde ferngehalten.

+ ACTICOAT[◊] FLEX

Für eine effiziente Infektionsbekämpfung

ACTICOAT[◊] FLEX ist ein antimikrobieller Wundverband mit einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung.



- + ACTICOAT FLEX ist dehnbar, flexibel, anpassungsfähig und weich. Er bewegt sich mit dem Patienten und bietet einen hohen Tragekomfort. So ist der Verband auch für komplexe Wundsituationen geeignet.



Kann mit dem RENASYS[◊]- / PICO[◊]-System verwendet werden, Verbandwechsel dann alle 3 Tage notwendig

ACTICOAT[◊] FLEX 3, ACTICOAT[◊] FLEX 7

Antimikrobielle Wundauflage mit Silber zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden, wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantationsareale – steril.

- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Verbandliegezeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT[◊] FLEX 7)
- Minimiert Schmerzen beim Verbandwechsel
- Einfache Applikation
- Als Tamponade geeignet



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ACTICOAT[◊] FLEX 3				
66800396	5,0 cm x 5,0 cm	0537 2835	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66801290	4,0 cm x 15,0 cm	0264 5787	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800398	10,0 cm x 10,0 cm	0537 2841	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800399	10,0 cm x 10,0 cm	0537 2858	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66800409	10,0 cm x 20,0 cm	0537 2864	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66801291	4,0 cm x 25,0 cm	0264 6634	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66801293	20,0 cm x 20,0 cm	0264 6657	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800419	20,0 cm x 40,0 cm	0537 2870	120 Stück (20 OP)	6 Stück
66801292	4,0 cm x 35,0 cm	0264 6640	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800432	40,0 cm x 40,0 cm	0537 2887	30 Stück (5 OP)	6 Stück
66800435	10,0 cm x 120,0 cm	0537 2893	24 Stück (4 OP)	6 Stück
ACTICOAT[◊] FLEX 7				
66800395	5,0 cm x 5,0 cm	0537 2806	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800397	10,0 cm x 12,5 cm	0537 2812	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66800420	15,0 cm x 15,0 cm	0537 2829	50 Stück (10 OP)	5 Stück


Erstattungsfähig

Applikation von ACTICOAT[◊] FLEX 3 und FLEX 7

- Bei trockenen oder nur geringfügig nässenden Wunden mit z. B. Aqua dest. oder **INTRASITE[◊] GEL** anfeuchten
- Gegebenenfalls auf die entsprechende Wundgröße zuschneiden
- Einen geeigneten Sekundärverband anlegen (z. B. **ALLEVYN[◊]**)
- Nicht mit öligen Substanzen kombinieren
- Nicht direkt auf freiliegenden Sehnen, Knochen oder Organen anwenden



Oberflächenstruktur von normalem Silber

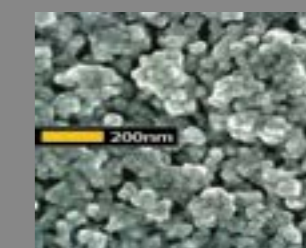

Oberflächenstruktur von ACTICOAT[◊]

Langanhaltende bakterizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von wundpathogenen Keimen



ACTICOAT[®], ACTICOAT[®] 7

Antimikrobielle, mehrlagige Wundauflage mit Silberbeschichtung zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden, wie z. B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Ulcus, Verbrennungen, Explantations- und Transplantationsareale – steril.

- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Verbandliegezeiten bis zu 7 Tage möglich (ACTICOAT[®] 7)



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
ACTICOAT[®]				
66000808	5,0 cm x 5,0 cm	0167 5562	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66000789	10,0 cm x 10,0 cm	0276 0703	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66000791	10,0 cm x 10,0 cm	0188 5650	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66000792	10,0 cm x 20,0 cm	0188 5667	240 Stück (20 OP)	12 Stück
66000793	20,0 cm x 40,0 cm	0188 5710	120 Stück (20 OP)	6 Stück
66000794	40,0 cm x 40,0 cm	0188 5727	30 Stück (5 OP)	6 Stück
66000795	10,0 cm x 120,0 cm	0188 5733	24 Stück (4 OP)	6 Stück
ACTICOAT[®] 7				
66000809	5,0 cm x 5,0 cm	0167 5533	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66000796	10,0 cm x 12,5 cm	0188 5756	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66000797	15,0 cm x 15,0 cm	0188 5762	50 Stück (10 OP)	5 Stück
Erstattungsfähig				

SILBER-SCHAUMVERBÄNDE



ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER

Sanft haftender Silikon-Schaumverband mit Silber für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum an Erregern
- Mit Haftrand
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und dehnbar
- Längs- und Querelastizität für gute Anpassung
- Duschfest
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800436	7,5 cm x 7,5 cm	5,0 cm x 5,0 cm	0329 6142	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66800437	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	0329 6159	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800438	12,5 cm x 12,5 cm	10,0 cm x 10,0 cm	0329 6194	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800439	17,5 cm x 17,5 cm	15,0 cm x 15,0 cm	0329 6202	80 Stück (8 OP)	10 Stück
Erstattungsfähig					



Ist auch als Fersen-Variante erhältlich

ALLEVYN[®] SILBER Schaumverband nicht haftend

Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche und effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum von Erregern inkl. MRSA (*in vitro*)
- Hohe Absorptionsfähigkeit und schnelle Exsudataufnahme
- Fixierung z. B. durch OPSITE[®] FLEXIFIX oder Bandagen
- Zuschneidbar
- Anschmiegsam und polsternd für hohen Patientenkomfort
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Sekundärfixierung notwendig



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66801126	4,5 cm x 5,5 cm	0968 6708	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801127	9,0 cm x 11,0 cm	0968 6714	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801128	14,0 cm x 16,0 cm	0968 6720	72 Stück (6 OP)	12 Stück
66801129	19,0 cm x 21,0 cm	0968 6737	72 Stück (6 OP)	12 Stück
Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*				



ALLEVYN[®] SILBER Schaumverband Ferse nicht haftend

Anatomisch geformt für die einfache Versorgung von Problemzonen wie Ferse, Ellbogen, Amputationsstümpfen, Zehen, Hoden – steril.

- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66801130	10,5 cm x 13,5 cm	0968 6743	42 Stück (6 OP)	7 Stück
Erstattungsfähig				

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



Unser stark haftender Wundverband ist auch als Sakral-Variante erhältlich.

ALLEVYN® SILBER Schaumverband haftend

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril.

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum von Erregern inkl. MRSA (*in vitro*)
- Mit Haftrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Bakterien- und wasserdichter, atmungsaktiver Topfilm
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken					
66801122	7,0 cm x 8,0 cm	5,0 cm x 5,0 cm	0968 6654	144 Stück (12 OP)	12 Stück
66801123	9,5 cm x 11,0 cm	7,5 cm x 7,5 cm	0968 6660	144 Stück (12 OP)	12 Stück
66801124	12,0 cm x 13,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	0968 6677	144 Stück (12 OP)	12 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



ALLEVYN® Ag SACRUM


Anatomisch geformt für Wunden im Sakralbereich. Ideal zur Dekubitusversorgung – steril.

- Verbandliegezeit bis zu 5 Tage



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800092	17,0 cm x 17,0 cm	13,5 cm x 13,2 cm	0370 6634	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66800095	22,0 cm x 22,0 cm	18,0 cm x 18,0 cm	0370 6700	80 Stück (8 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig

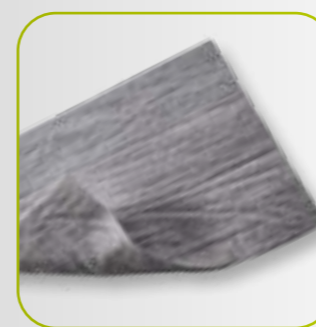

DURAFIBER® Ag

Antimikrobieller, gelbildender Faserverband mit Silber für eine effiziente Behandlung infizierter und exsudierender Wunden – steril.

- Wirkt bis zu 7 Tage antimikrobiell gegen ein breites Spektrum pathogener Keime inkl. MRSA und VRE (*in vitro*)
- Sicherer Einschluss von Bakterien und Förderung der Wundreinigung
- Effektives Exsudatmanagement durch Vergelung innerhalb von Sekunden und Aufrechterhaltung eines heilungsfördernden Wundmilieus
- Einfache Entfernung in einem Stück dank der besonderen Mischung aus Zellulose- und Zellstoff-Fasern
- Zuschneidbar




Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66800034	5,0 cm x 5,0 cm	0342 6159	200 Stück (20 OP)	10 Stück
66800035	10,0 cm x 10,0 cm	0412 0899	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66800036	15,0 cm x 15,0 cm	0342 6202	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800037	20,0 cm x 30,0 cm	0342 6219	40 Stück (8 OP)	5 Stück
66800038	2,0 cm x 45,0 cm	0342 6314	60 Stück (12 OP)	5 Stück
66800583	4,0 cm x 10,0 cm	0342 6320	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800584	4,0 cm x 20,0 cm	0342 6337	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800585	4,0 cm x 30,0 cm	0342 6343	50 Stück (10 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

+ Für eine effiziente Behandlung infizierter und exsudierender Wunden



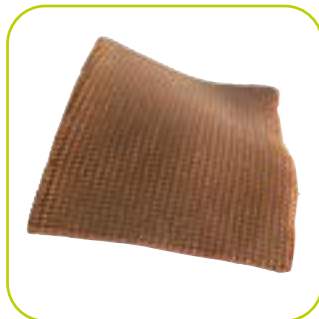

IODOSORB[®] Dressing

Antimikrobieller Wundverband mit 0,9% elementarem Jod zur wirksamen Behandlung von Wunden mit Biofilm.

- Antiseptische Langzeitwirkung von bis zu 72 Stunden, die das Potenzial für Zytotoxizität innerhalb der Wunde reduziert
- Wirksam gegen ein breites Spektrum wundpathogener Keime, z. B. MRSA oder *Pseudomonas aeruginosa*
- Hohe Absorptionskapazität (absorbiert bis zu 6 ml Wundexsudat pro g Cadexomer Jod)
- Kann bis zu 3 Tage auf der Wunde verbleiben



Artikelnummer	Inhalt (Größe)	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001290	5 g (4,0 cm x 6,0 cm)	0022 2516	590 Stück (118 OP)	5 Stück
66001291	10 g (6,0 cm x 8,0 cm)	0022 2522	306 Stück (102 OP)	3 Stück
66001292	10 g (6,0 cm x 8,0 cm)	0022 2539	390 Stück (78 OP)	5 Stück
66001293	17 g (8,0 cm x 10,0 cm)	0022 2545	160 Stück (80 OP)	2 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



IODOSORB[®] Salbe

Antimikrobieller Wundverband mit 0,9% elementarem Jod zur wirksamen Behandlung von Wunden mit Biofilm.

- Antiseptische Langzeitwirkung von bis zu 72 Stunden, die das Potenzial für Zytotoxizität innerhalb der Wunde reduziert
- Wirksam gegen ein breites Spektrum wundpathogener Keime, z. B. MRSA oder *Pseudomonas aeruginosa*
- Hohe Absorptionskapazität (absorbiert bis zu 6ml Wundexsudat pro g Cadexomer Jod)
- Kann bis zu 3 Tage auf der Wunde verbleiben



Artikelnummer	Inhalt	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001295	2 x 20 g	0123 7158	140 Stück (70 OP)	2 Stück
66001296	1 x 40 g	0745 0002	225 Stück (225 OP)	1 Stück

Erstattungsfähig

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk.

IODOSORB[®]: DER BIOFILM BRECHER



Biofilm ist schwer zu diagnostizieren, da er möglicherweise nicht einheitlich über die gesamte Wunde hinweg verteilt ist und sich auf der Oberfläche der Wunde als auch in tieferen Gewebeschichten befindet.

+ PICO[◊] Wundversorgung 2.0

PICO[◊] kombiniert die Vakuumversiegelung mit einem einzigartigen Wundverband und firmeneigener AIRLOCK[◊]-Technologie.

Die Vakuumversiegelung mit PICO[◊] hilft, Wunden schneller zu schließen, sowie Wundheilungsstörungen bei Risikopatienten vorzubeugen. Und ist dabei so einfach zu handhaben wie ein Verband.



reddot winner 2021

Gewicht:
<108 g

Abbildung in Originalgröße

3




- 1 Besonders einfache Handhabung dank 1-Knopf-Bedienung
- 2 Gürtel-Clip für Tragekomfort
- 3 Kleiner als ein Mobiltelefon



PICO[◊] Soft Port – kombinierbar mit Kompressionstherapie¹

Wasser- und bakteriedichte Folie^{2,3}

Superabsorbierender Kern – Sobald sich Bakterien im Verband befinden, werden über 99 % im Verband eingeschlossen und von der Wunde ferngehalten.[#]

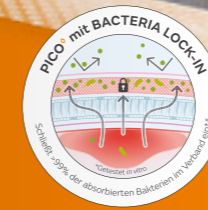


SEM des aufgeschnittenen Verbandes




Sanft haftende Silikonbeschichtung

Zukunftsweisende AIRLOCK[◊]-Technologie überträgt den Unterdruck gleichmäßig über das gesamte Wundkissen.^{4,5,6,7}

PICO[◊] mit Bacteria Lock-in

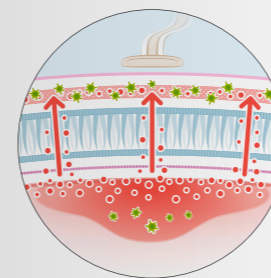

Exsudat wird durch die AIRLOCK[◊]-Schicht hindurch in den superabsorbierenden Kern aufgenommen⁸

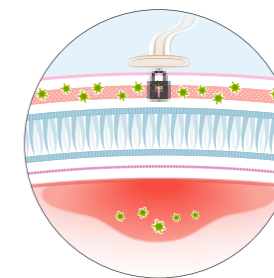

Sobald sich Bakterien im Verband befinden, werden über 99% im Verband gebunden und von der Wunde ferngehalten.^{#*}

PICO[◊] sNPWT mit AIRLOCK[◊]-Technologie
zerstört reifen Biofilm und reduziert darin die Bakterienbelastung** signifikant um >97 % (p< 0,05)


Referenzen: * In vitro. Sobald sich Bakterien im Verband befinden, werden über 99 % im Verband und von der Wunde ferngehalten.
1. Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, Jaimes H. A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial on the Efficacy of a Single-use Negative Pressure Wound Therapy System, Compared to Traditional Negative Pressure Wound Therapy in the Treatment of Chronic Ulcers of the Lower Extremities. Wound Repair Regen. 2019;27(5):519–529. 2. Smith+Nephew 2020. Bacterial barrier testing of the PICO[◊] dressing. Internal Report. 2001002. 3. Smith+Nephew April 2018. PICO[◊] 7Y - Waterproofness of dressings. Internal Report. DS/18/134/R. 4. Casey C. Consistent delivery of therapeutic negative pressure levels by a single use negative pressure wound therapy system (sNPWT)* in a wound model. Paper presented at: EWMA; 2019; Gothenburg, Sweden. 5. Smith+Nephew January 2019. Air Leak Tolerance Report: A comparison of PICO[◊] v2 (PICO[◊] 7 and PICO[◊] 14) Devices to PICO[◊] v1.6 (PICO) Devices. Internal Report. RD/19/006. 6. Smith & Nephew 2019. PICO[◊] Biomechanical Study. Internal Report. DS/19/211/R. 7. Smith+Nephew 2021. PICO[◊] Pressure Mapping Study. Internal Report. DS/19/211/R – Part B. 8. Smith+Nephew July 2018. PICO[◊] 7Y Non-NPWT Wound Model Summary. Internal Report. DS.18.260.R. # Mcmanus H, Woodmansey E, Bacterial retention within a multi-layered absorbent AIRLOCK™ Technology Single Use Negative Pressure Wound Therapy (sNPWT) dressing. Paper presented at: EWMA; 2018; Krakow, Poland

+ PICO^o - der Kickstart für die Wundheilung

Erhöht die Effizienz der funktionalen Lymphgefäße, dies hilft, **Ödeme zu reduzieren**⁹⁻¹¹

Reduziert laterale Spannung an der geschlossenen Inzision¹²

Erhält eine effiziente Blutzufuhr zur Wunde (Perfusion), was zur **Unterstützung der Immunreaktion** beiträgt¹³⁻¹⁵

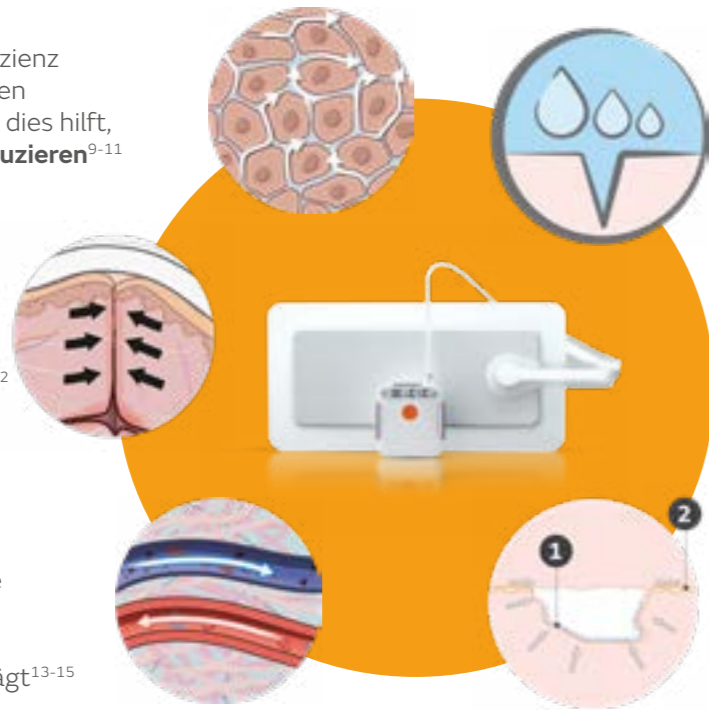

Erhält eine feuchtes Wundmilieu, welches die Wundheilung unterstützt^{1,16-18}

Die Kombination von **2** Makro- und **1** Mikrodeformation (Wundkontraktion und Füllung von Gewebefekten mit neuem Granulationsgewebe) führt zur **Reduktion der Wundgröße und -tiefe**¹⁸⁻²⁰



Kann mit **ACTICOAT^o FLEX** verwendet werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

PICO^o 14

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die Behandlung chronischer und akuter Wunden.


- Therapiedauer von bis zu 14 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mäßig exsudierende Wunden




Artikelnummer	Größe Verband (mit Soft Port)	Größe Wundkissen	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Die PICO ^o 14 Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive vier Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung und zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen).					
66802042	10,0 cm x 20,0 cm	5,0 cm x 15,0 cm	1526 1491	3 Stück	1 Stück
66802043	10,0 cm x 30,0 cm	5,0 cm x 25,0 cm	1526 1522	3 Stück	1 Stück
66802044	10,0 cm x 40,0 cm	5,0 cm x 35,0 cm	1526 1545	3 Stück	1 Stück
66802045	15,0 cm x 15,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	1526 1551	3 Stück	1 Stück
66802046	15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	1526 1574	3 Stück	1 Stück
66802047	15,0 cm x 30,0 cm	10,0 cm x 25,0 cm	1526 1597	3 Stück	1 Stück
66802048	20,0 cm x 20,0 cm	15,0 cm x 15,0 cm	1526 1628	3 Stück	1 Stück
66802049	25,0 cm x 25,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	1526 1640	3 Stück	1 Stück
66802040	Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	1526 1657	3 Stück	1 Stück
66802041	Multisite groß 20,0 cm x 25,0 cm	15,0 cm x 20,0 cm	1526 1686	3 Stück	1 Stück

AIRLOCK^o Technologie: die smarte Schicht, die PICO^o anders macht

- Die firmeneigene **AIRLOCK^o-Technologie** hat ein halbstarres, wabenförmiges Design und **behält seine Form** auch unter Druck bei – für ein erweitertes Therapieareal.
- Der Unterdruck wird so gleichmäßig^{4,6,°} auf die Wunde und Wundumgebung übertragen^{12,10,11} – Für ein erweitertes Therapieareal der Vakuumversiegelung.

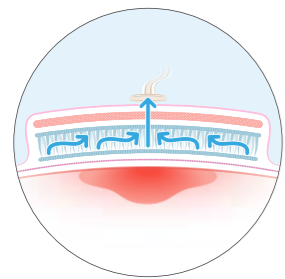

Die stabile AIRLOCK^o-Schicht **sorgt für eine konstante**^{4,6,°} **Verteilung des Unterdrucks** über die gesamte Wundauflage.^{4,6,7,†}


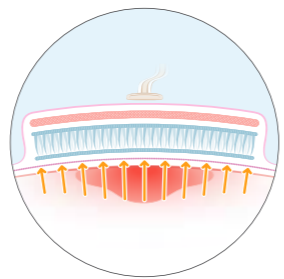


Dies **erweitert das Therapieareal** über die Wunde hinaus auf das wundumgebende Gewebe.^{4,6,7,†}

AIRLOCK^o-Technologie in Aktion



Vollflächige Verteilung. Konstanter Druck. Optimale Ergebnisse.

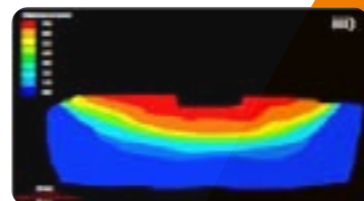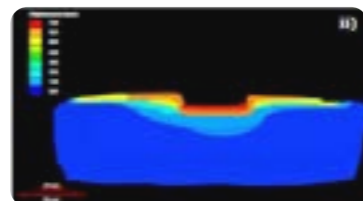

CT-Scan der Gewebeverlagerung unter PICO^o über 24 Stunden in einem Schweinemodell.

+ Dank EBM-Ziffer für die Vakuumversiegelungstherapie auch ambulant abrechenbar!



Sehen Sie hier ein Video zur **Wirkweise von PICO^o** und erfahren mehr über die **ambulanten Einsatzmöglichkeiten**

www.vakuumversiegelungstherapie.de



Referenzen: 1. Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, James H. A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial on the Efficacy of a Single-use Negative Pressure Wound Therapy System, Compared to Traditional Negative Pressure Wound Therapy in the Treatment of Chronic Ulcers of the Lower Extremities. Wound Repair Regen. 2019;27(5):519–529. 9. Birke-Sorensen H, et al. Evidencebased recommendations for Negative Pressure Wound Therapy: Treatment variables (pressure levels, wound filler and contact layer) - Steps towards an international consensus. Journal of plastic, reconstructive and aesthetic surgery. JRRAS 64 Suppl. 51–516 (2011) 10. Sealise A, Calamita R, Tartaglione C, et al. Improving wound healing and preventing surgical site complications of closed surgical incisions: a possible role of Incisional Negative Pressure Wound Therapy. A systematic review of the literature. Int Wound J. 2016;13(12):60–1281. 11. Shim HS, Choi JS, Kim SW. A role for postoperative negative pressure wound therapy in multitissue hand injuries. Biomed Res Int. 2018;2018. 12. Kilpadi DV, Cunningham MR. Evaluation of closed incision management with negative pressure wound therapy (CIM): hematoma/seroma and involvement of the lymphatic system. Wound Repair Regen. 2011;19:588–596. 13. Malmisjo M, Huddleston E, Martin R. Biological effects of a disposable, canisterless negative pressure wound therapy system. ePlasty. 2014;14:e15. 14. Ma Z, Shou K, Li Z, et al. Negative pressure wound therapy promotes vessel destabilization and maturation at various stages of wound healing and thus influences wound prognosis. Exp Ther Med. 2016;11(4):1307–1317 15. Xia CY, Yu AX, Qi B, et al. Analysis of blood flow and local expression of angiogenesis associated growth factors in infected wounds treated with negative pressure wound therapy. Mol Med Rep. 2014;9(5):1749–1754. 16. Smith+Nephew 2018. Summary of routine QA testing on MVP of PICO^o dressings. 2018. Internal Report. DS/18/153/R. 17. Hudson DA, Adams KG, Van Huyssteen A, Martin R, Huddleston EM. Simplified negative pressure wound therapy: clinical evaluation of an ultraportable, no-canister system. Int Wound J. 2015;12(2):195–201 18. Smith+Nephew 2019. Use of Moisture Vapour Permeability* (MVP) and Moisture Vapour Transmission rate** (MVTR) data to support product claims referring to moist wound healing. Internal Report. EO.AWM.PCSgen.001.v2. 18. Saxena V, et al. Vacuum-assisted closure: microdeformations of wounds and cell proliferation. Plast Reconstr Surg. 114:1086–96. 19. Borquist O, et al. Micro and macromechanical effects on the wound bed of negative pressure wound therapy using foam and gauze. Annals of Plastic Surgery. 64: 789–93. 20. Ichioka S, et al. A technique to visualise wound bed microcirculation and the acute effect of negative pressure. Wound Rep Regen. 16(3): 460–465. * Nachgewiesen in Benchtop Tests. † Nachgewiesen ex-vivo



PICO^o 7

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die Behandlung geschlossener Inzisionen, chronischer und akuter Wunden.

Kann mit ACTICOAT^o FLEX verwendet werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

- Therapiedauer von bis zu 7 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mäßig exsudierende Wunden



Artikelnummer	Größe Verband (mit Soft Port)	Größe Wundkissen	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Die PICO ^o 7 Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive zwei Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung und zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen).				
6680202	10,0 cm x 20,0 cm	5,0 cm x 15,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680203	10,0 cm x 30,0 cm	5,0 cm x 25,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680204	10,0 cm x 40,0 cm	5,0 cm x 35,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680205	15,0 cm x 15,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680206	15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680207	15,0 cm x 30,0 cm	10,0 cm x 25,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680208	20,0 cm x 20,0 cm	15,0 cm x 15,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680209	25,0 cm x 25,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	3 Stück	1 Stück
6680200	Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	5 Stück	1 Stück
6680201	Multisite groß 20,0 cm x 25,0 cm	15,0 cm x 20,0 cm	3 Stück	1 Stück



PICO^o 7Y

Kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (sNPWT) für die gleichzeitige Behandlung von zwei Wunden mit einer Therapieeinheit.

Kann mit ACTICOAT^o FLEX verwendet werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

- Therapiedauer von bis zu 7 Tagen
- Batteriebetrieben
- Praktischer Verbandwechselindikator für Optimierung der Liegezeit
- Für tiefere Wunden mit Wundfüller kombinierbar
- Für schwach bis mäßig exsudierende Wunden



Artikelnummer	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Die PICO ^o 7Y Verpackung enthält eine sterile Therapieeinheit (inklusive zwei Batterien, Verlängerungsschlauch und transparentem Gürtel-Clip, einer Gebrauchsanweisung, zwei einzeln steril verpackten Wundauflagen mit je sechs Fixierstreifen).		
66802031	3 Stück	1 Stück



PICO^o Multipack

5 Wundauflagen, einzeln steril verpackt in einer Packung.

- Wundauflagen sind steril verpackt und können somit einzeln an mehreren Patienten angewendet werden

Kann mit ACTICOAT^o FLEX kombiniert werden*.

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

Artikelnummer	Größe Verband (mit Soft Port)	Größe Wundkissen	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66802022	10,0 cm x 20,0 cm	5,0 cm x 15,0 cm	1335 5242	25 Stück	5 Stück
66802023	10,0 cm x 30,0 cm	5,0 cm x 25,0 cm	1335 5259	25 Stück	5 Stück
66802024	10,0 cm x 40,0 cm	5,0 cm x 35,0 cm	1335 5271	25 Stück	5 Stück
66802025	15,0 cm x 15,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	1335 5288	25 Stück	5 Stück
66802026	15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	1335 5294	25 Stück	5 Stück
66802027	15,0 cm x 30,0 cm	10,0 cm x 25,0 cm	1335 5325	25 Stück	5 Stück
66802028	20,0 cm x 20,0 cm	15,0 cm x 15,0 cm	1335 5331	25 Stück	5 Stück
66802029	25,0 cm x 25,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	1335 5348	25 Stück	5 Stück
66802020	Multisite klein 15,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	1335 5213	25 Stück	5 Stück
66802021	Multisite groß 20,0 cm x 25,0 cm	15,0 cm x 20,0 cm	1335 5236	25 Stück	5 Stück



PICO^o-Wundfüllmaterialien für die Unterdrucktherapie

Zum Einsatz bei tieferen Wunden. Auch in Verbindung mit RENASYS^o einsetzbar.

Artikelnummer	Größe	Beschreibung	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66802127	11,4 cm x 3,7 m	Antimikrobielle Gazerolle	0545 2221	50 Stück	5 Stück
66801021	10,0 cm x 12,5 cm x 1,5 cm	Schaumstoff	0007 4955	5 Stück	1 Stück

+ Kombinationsmöglichkeiten

- bei empfindlicher Haut kann SECURA^o reizfreier Barrierefilm unter PICO^o eingesetzt werden (S. 41)
- bei schwierig zu versorgenden Arealen kann PICO^o mit RENASYS^o Gelstreifen kombiniert werden (S. 37)

+ RENASYS[◊] EDGE

Effizienz auf Schritt und Tritt



Kann mit ACTICOAT[◊] Flex kombiniert werden.*

*Verbandwechsel alle 3 Tage notwendig

RENASYS[◊] EDGE ist die neueste Evolutionsstufe unseres leistungsstarken RENASYS[◊] tNPWT Portfolios. Die robuste und langlebige Therapieeinheit ist für wartungsfreien Betrieb konzipiert¹⁻³ und verfügt über eine verbesserte Benutzeroberfläche für eine intuitive Nutzung.

Für einfache Handhabung entwickelt

- Keine jährliche Geräterwartung erforderlich
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Anleitungsanimationen erleichtert die Bedienung
- Akkulaufzeit von mehr als 24 Stunden⁴
- Die Selbsttest-Funktion ermöglicht jederzeit die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Geräts
- Der im Kanister integrierte Kohlefilter minimiert die Entwicklung von Gerüchen und wird bei jedem Wechsel erneuert
- Reagiert automatisch auf Druckveränderungen, um potenzielle Leckagen zu kompensieren⁵

RENASYS[◊] Soft Port

Entwickelt für vereinfachte Applikation und hohe Resistenz gegenüber Blockaden.

- Liefert Unterdruck, auch wenn Soft Port verdreht oder geknickt wird
- Kann helfen, den Bedarf an Bridging zu reduzieren
- Auch an schwierigen Körperstellen einsetzbar
- Erhöhter Patientenkomfort und -toleranz

+ Sehen Sie in einem kurzen Video die Vorteile des RENASYS[◊] Soft Port:



Artikelnummer	Beschreibung / Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
RENASYS[◊] – Therapieeinheit				
66803126	RENASYS [◊] EDGE	–	–	1 Stück
66802134	RENASYS [◊] TOUCH	–	–	1 Stück
RENASYS[◊] – Kanister				
66803139	RENASYS [◊] EDGE Kanister, 300 ml	–	5 Stück	1 Stück
66803140	RENASYS [◊] EDGE Kanister, 800 ml	–	5 Stück	1 Stück
66801273	RENASYS [◊] TOUCH Kanister, 300 ml	–	5 Stück	1 Stück
66801274	RENASYS [◊] TOUCH Kanister, 800 ml	–	5 Stück	1 Stück
RENASYS[◊] -F (Schaum) Wundversorgungs-Kits mit Soft Port				
66800794	Schaumstoff, klein, 10,0 cm x 8,0 cm x 3,0 cm	0937 3613	5 Stück	1 Stück
66800795	Schaumstoff, mittel, 20,0 cm x 13,0 cm x 3,0 cm	0937 3636	5 Stück	1 Stück
66800796	Schaumstoff, groß, 25,0 cm x 15,0 cm x 3,0 cm	0937 3659	5 Stück	1 Stück
66800797	Schaumstoff, x-groß, 48 cm x 41 cm x 1,5 cm	0937 3665	5 Stück	1 Stück
RENASYS[◊] -F/AB Abdominal Wundversorgungs-Kit mit Soft Port				
66800980	Abdominal-Kit, Schaumstoff	0937 3748	5 Stück	1 Stück
RENASYS[◊] -G (Gaze) Wundversorgungs-Kits mit Soft Port				
66800933	Gaze, klein (15,0 cm x 17,0 cm; 1 Pckg. à 2 Tupfer)	0937 3694	5 Stück	1 Stück
66800934	Gaze, mittel (15,0 cm x 17,0 cm; 2 Pckg. à 2 Tupfer)	0937 3702	5 Stück	1 Stück
66800935	Gaze, groß (1 Gaze Rolle; 11,0 cm x 3,7 m)	0937 3719	5 Stück	1 Stück
66800936	Gaze, x-groß (2 Gaze Rollen; 11,0 cm x 3,7 m)	0937 3725	5 Stück	1 Stück
Einzelkomponenten				
66800394	Transparente NPWT Folie, groß, 20,0 cm x 30,0 cm	0545 2304	10 Stück	10 Stück
66800853	Transparente NPWT Folie, X-groß, 38,0 cm x 60,0 cm	0937 3808	25 Stück	5 Stück
66800971	RENASYS [◊] Y-Konnektor	0937 3866	10 Stück	1 Stück
66801082	RENASYS [◊] Gelstreifen, 10,0 x 7,0 cm	0439 7052	50 Stück	10 Stück
66800799	Soft Port-Kit	0937 3814	5 Stück	1 Stück
66802127	Antimikrobielle Gazerolle	0545 2221	50 Stück	5 Stück
66801021	Schaumstoff, 10,0 cm x 12,5 cm x 1,5 cm	0007 4955	5 Stück	1 Stück
66801787	Weißer PVA-Schaum, klein, 7,5 x 10,0 cm	–	40 Stück	10 Stück
66801788	Weißer PVA-Schaum, groß, 10,0 x 15,0 cm	–	60 Stück	10 Stück
RENASYS[◊] -G (Gaze) Wundversorgungs-Kits mit Drainage				
66802256	Gaze 10 mm Flach Drainage-Kit	1002 7170	5 Stück	1 Stück
66802257	Gaze 15 CH Kanal Drainage-Kit	1002 7187	5 Stück	1 Stück
66802258	Gaze 19 CH Rund Drainage-Kit	1002 7193	5 Stück	1 Stück
RENASYS[◊] Drainage-Zubehör-Kits				
66802252	10 mm Flach Drainage	1002 7307	10 Stück	1 Stück
66802253	15 CH Kanal Drainage	1002 7313	10 Stück	1 Stück
66802254	19 CH Rund Drainage	1002 7336	10 Stück	1 Stück
Zubehör				
66807720	RENASYS [◊] EDGE Tragegurt	–	–	1 Stück
66803136	RENASYS [◊] EDGE Tragetasche	–	–	1 Stück
66803150	RENASYS [◊] EDGE Netzteil	–	–	1 Stück
66801276	RENASYS [◊] TOUCH Tragegurt	–	–	1 Stück
66801277	RENASYS [◊] TOUCH Tragetasche	–	–	1 Stück
66801278	RENASYS [◊] TOUCH Bett- und IV-Halterung	–	–	1 Stück
66801286	RENASYS [◊] TOUCH Netzteil Klasse 2	–	–	1 Stück
66801566	RENASYS [◊] TOUCH Netzkabel	–	–	1 Stück



+ RENASYS[◊] Applikationstechniken finden Sie hier:



+ Hydrogele zur Rehydrierung und Wundreinigung

Hydrogele bestehen zu einem Großteil aus Wasser und werden von uns sowohl als Gel als auch in Form von Kompressen angeboten. Sie unterstützen das autolytische Débridement, also die Reinigung der Wunde durch Übersättigen mit Feuchtigkeit, was zum Auf- und Ablösen haftender Gewebsreste oder Beläge führt.



INTRASITE® GEL

Klares, amorphes Hydrogel aus modifiziertem Carboxymethylcellulosepolymer, Propylenglycol und Wasser. Zur raschen und schmerzarmen Wundreinigung im Applikationsspender – steril.

- Rasche Rehydrierung und sanftes Débridement nekrotischen Gewebes
- Absorption von überschüssigem Exsudat und gelösten Bestandteilen von totem Gewebe
- Unterstützt das idealfeuchte Wundmilieu
- Effektive, aber sanfte Wirkung – beeinträchtigt nicht das Granulationsgewebe
- Fördert eine schnelle Wundheilung und Autolyse

Das Gel sollte in Verbindung mit einem Sekundär-Wundverband verwendet werden. Der Zustand der Wunde bestimmt die Wahl des Sekundär-Verbandes und die Häufigkeit des Wechsels.



Artikelnummer	Inhalt	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7308	8 g	0753 7252	40 Stück (4 OP)	10 Stück
7311	15 g	0753 7269	40 Stück (4 OP)	10 Stück
7313	25 g	0753 7275	40 Stück (4 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

Bleibt auch nach dem Ende der Übergangsfrist 31.12.2026 erstattungsfähig



INTRASITE® CONFORMABLE – Der einfach anzuwendende Hydrogelverband

Hydrogel-beschichtete Polyester-Viskose-Gaze zur Rehydrierung und Wundreinigung oberflächiger oder tiefer Wundkavitäten – steril.

- Rehydriert, debridiert sanft und fördert die Wundheilung durch Schaffung einer feuchten Wundumgebung
- Absorption von überschüssigem Exsudat und gelösten Bestandteilen von totem Gewebe
- Weich und anschmiegsam
- Passt sich dem Wundbett an und ist einfach anzuwenden
- Hilft, Bakterienwachstum zu stoppen – durch bakteriostatische Eigenschaften des Gels



Artikelnummer	Größe	Gel-Menge (mind.)	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000324	10,0 cm x 10,0 cm	7,5 g	0865 3115	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66000325	10,0 cm x 20,0 cm	15 g	0865 3121	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66000326	10,0 cm x 40,0 cm	30 g	0865 3138	60 Stück (6 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

+ Wundschutz und Barrierefilm

Wundschutz ist eine wichtige pflegerische Maßnahme bei Patienten mit chronischen Wunden. Sie dient dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der Hautschutzbarriere und der Vermeidung von Komplikationen.



SECURA[®]

SECURA[®] reizfreier Barrierefilm ist eine Flüssigkeit zur Verwendung als filmbildendes Produkt, das bei der Anwendung auf intakter oder geschädigter Haut, eine langanhaltende wasserdichte Barriere bildet.

- Langanhaltende, wasserfete Barriere von bis zu 4 Tagen, d. h. zuverlässiger Schutz auch bei längeren Verbandliegezeiten
- Wasserdicht für eine sichere Barriere gegenüber Flüssigkeiten, z. B. Verdauungssäfte, Inkontinenz oder Wundexsudat
- Alkoholfreie Formulierung reduziert die Wahrscheinlichkeit des Brennens bei Applikation auf geschädigter Haut
- Kurze Trocknungszeit von unter 30 Sekunden
- Anwendbar bei Erwachsenen, Kindern und reifgeborenen Säuglingen ab dem ersten Lebensmonat

Artikelnummer	Inhalt	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800789	1 ml Applikator	0938 4858	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800790	1 ml Applikator	0938 4864	100 Stück (4 OP)	25 Stück
66800787	3 ml Applikator	0938 4769	100 Stück (20 OP)	5 Stück
66800788	3 ml Applikator	0938 4835	100 Stück (4 OP)	25 Stück
66800711	3 ml Applikator	0938 4841	600 Stück (12 OP)	50 Stück
66807692	28 ml Spray	0938 4870	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66800712	1 ml Tücher	0938 4887	1.000 Stück (20 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig



SECURA[®] REIZFREIER BARRIEREFILM ist ein flüssiges, filmbildendes Produkt, das ein reizfreies, nicht brennendes Lösungsmittel enthält und schnell trocknet. Es ist so konzipiert, dass es bei der Anwendung auf intakter oder geschädigter Haut einen Schutzfilm bildet.

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



SKIN-PREP^o

Hautschutttücher mit Isopropylalkohol, die einen dünnen Film bilden, der die Haut z. B. vor Schäden durch klebende Verbände bewahrt – unsteril.

- Verbessert die Hafteigenschaften von klebenden Verbänden
- Bildet einen Schutzfilm zwischen Haut und Kleber
- Unterstützt einen schmerzarmen Verbandwechsel
- Hilft, Schäden oder Verletzungen der Haut beim Entfernen klebender Verbände zu vermeiden
- Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
59420425	7,0 cm x 3,0 cm	0083 7318	1.000 Stück (20 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig



REMOVE^o

Universelle Kleberentfernungstücher mit feuchtigkeitsspendender Aloe, Isopropylalkohol und Isoparaffin zur schmerzarmen, sanften Entfernung von klebenden Verbänden und Kleberrückständen auf Hydrokolloid-, Acryl- oder Kautschukbasis – unsteril.

- Praktische Einmal-Tücher
- Hautschonend
- Nicht irritierend und nicht sensibilisierend
- Einfache und schnelle Anwendung

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
59403125	6,0 cm x 6,0 cm	0083 7376	1.000 Stück (20 OP)	50 Stück



PROSHIELD^o Sprüh-Schaumreiniger

Sprüh-Schaumreiniger bei Inkontinenz.

- Trägt zur Vorbeugung von Druckgeschwüren und Inkontinenz assoziierter Dermatitis (IAD) bei
- pH-hautneutral
- Formel zur Verhinderung von Gerüchen
- Schaum- und Sprühmodi
- Zur Entfernung von Urin und Fäkalien, getrocknetem Blut, post-operativen Desinfektionslösungen und anderen schwer zu entfernenden Verschmutzungen von Patienten

Produktcode	Beschreibung	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
8213-0150-08	PROSHIELD ^o Sprüh-Schaumreiniger für die Haut, Inhalt: 235ml	1030 1263	12 Stück (12 OP)	1 Stück



PROSHIELD^o PLUS

Hautschutzsalbe für eine glatte, viskose und duftneutrale Feuchtigkeitsbarriere.


- Schützt die Haut vor IAD und Feuchtigkeitsläsionen
- Sicher und wirksam bei der Behandlung von feuchtigkeitsbedingten Hautschäden
- Pflegt die Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit
- Einfach aufzutragen, zu entfernen und anzuwenden
- Schützt die Haut in der Wundumgebung



Produktcode	Beschreibung	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
8213-0300-04	PROSHIELD ^o PLUS Hautschutzmittel, Inhalt: 115g	1030 1257	12 Stück (12 OP)	1 Stück

+ Fettgazeverbände

Sind mit einer dünnen Paraffinschicht oder Salbenbeschichtung überzogen, die die Haftung am Wundgrund weitestgehend verhindert.

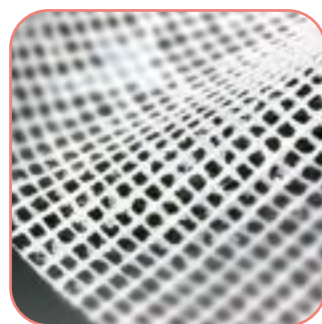

BACTIGRAS^o

Antiseptischer Paraffingazeverband mit Chlorhexidinacetat – steril. Zur Infektionsbehandlung bzw. -prophylaxe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen, Risswunden und Hautabschürfungen.

- Antiseptikum mit breitem Wirkungsspektrum, enthält Chlorhexidinacetat
- Reduziert das Infektionsrisiko
- Verklebungsarm
- Luftdurchlässig
- Exsudat kann ungehindert in darüberliegende Verbände drainieren


Zusammensetzung: Sterile Baumwollgaze mit weicher Weißparaffinbasis BP und 0,5 % Chlorhexidinacetat BP. 10 cm² enthalten 5 mg Chlorhexidinacetat.



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7456	5,0 cm x 5,0 cm	0840 7362	600 Stück (12 OP)	50 Stück
7457	10,0 cm x 10,0 cm	0840 7379	120 Stück (12 OP)	10 Stück
7461	15,0 cm x 20,0 cm	0840 7385	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66007505	15,0 cm x 1,0 m	0875 2679	48 Stück (4 OP)	12 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.
 ** Eucerit ist ein eingetragenes Warenzeichen der Beiersdorf AG
 *** Mindestbestellmenge 10 Stück

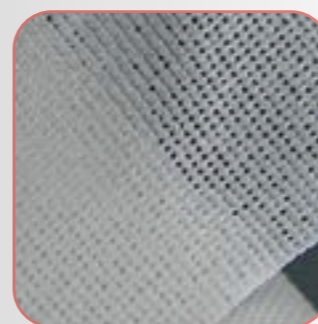

CUTICERIN^o

Acetatgewebe mit neutraler, Eucerit^o-haltiger** hydrophober Salbenbeschichtung für flächige, sezernierende Wunden – steril.

- Verklebungsarme Salbenkompressen
- Reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Luft- und exsudatdurchlässig



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66045560	7,5 cm x 7,5 cm	0318 2384	300 Stück (6 OP)	50 Stück
66045561	7,5 cm x 20,0 cm	0318 2390	300 Stück (6 OP)	50 Stück
66045562	7,5 cm x 7,5 cm	0374 4758 (OP) 0333 2010 (Stk.)***	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66045563	7,5 cm x 20,0 cm	0374 4735 (OP) 0333 2027 (Stk.)***	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66045502	20,0 cm x 40,0 cm	0870 6892	150 Stück (6 OP)	25 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



JELONET^o

Paraffinbeschichtete Baumwollgaze – steril.

- Schmerzlindernd durch Weichparaffin-Beschichtung
- Verklebungsarme Salbenkompressen
- Ungehindertes Abfließen des Exsudats in einen Sekundärverband möglich



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7403	5,0 cm x 5,0 cm	0303 9534	600 Stück (12 OP)	50 Stück
7404	10,0 cm x 10,0 cm	0278 2432	120 Stück (12 OP)	10 Stück
7409	10,0 cm x 10,0 cm	0278 2449	900 Stück (12 OP)	100 Stück
7459	10,0 cm x 40,0 cm	0278 2426	60 Stück (6 OP)	10 Stück


JELONET^o auf der Rolle im Beutel einzeln verpackt

7415	15,0 cm x 2,0 m	0303 9540	48 Rollen (4 OP)	12 Stück
------	-----------------	-----------	------------------	----------


Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

+ OP-Bedarf

Während und nach Operationen werden wasserdampfdurchlässige und keimdichte Folienverbände, Kanülen- und Katheterfixierungen oder Wundnahtstreifen für einen schnellen Wundverschluss benötigt.

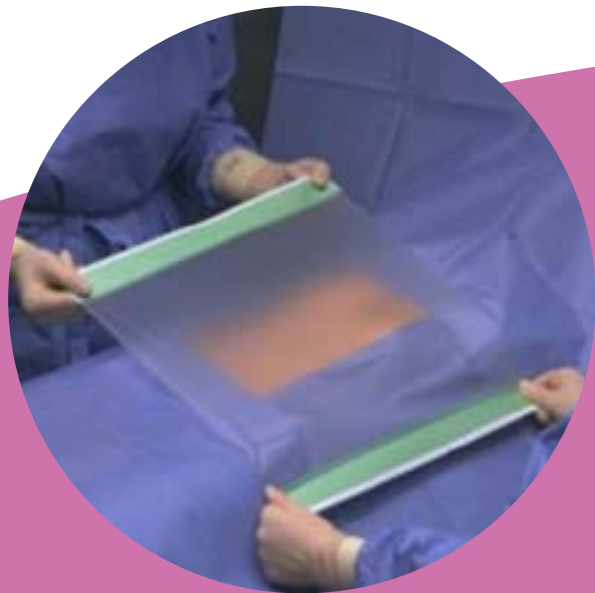

Wählen Sie aus unserem Sortiment Wundverschluss und Inzisionsfolien das für Sie passende Produkt aus.

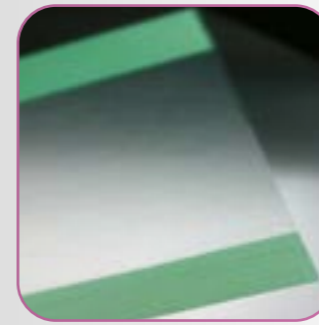

OPSITE[®] Inzisionsfolie

Klebende, transparente Polyurethan-Inzisionsfolie – steril.

- Hervorragende Klebeeigenschaften bis zum Wundrand
- Hochelastisch – gute Fixierung bei langandauernden OPs
- Bietet bakterielle Barriere und ist wasserundurchlässig
- Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Risiko von Hautmazerationen



Die Inzisionsfolie kann während der OP abgewischt werden, das OP-Feld bleibt sauber.

Artikelnummer	Größe	Klebefläche	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
4975	10,0 cm x 14,0 cm	10,0 cm x 10,0 cm	0840 8574	200 Stück (4 OP)	50 Stück
4967	25,0 cm x 14,0 cm	25,0 cm x 10,0 cm	0886 9157	120 Stück (6 OP)	20 Stück
4986	15,0 cm x 28,0 cm	15,0 cm x 20,0 cm	0886 9163	60 Stück (6 OP)	10 Stück
4987	30,0 cm x 28,0 cm	30,0 cm x 20,0 cm	0886 9186	60 Stück (6 OP)	10 Stück
4988	45,0 cm x 28,0 cm	45,0 cm x 20,0 cm	0214 2106	60 Stück (6 OP)	10 Stück
4995	40,0 cm x 42,0 cm	40,0 cm x 34,0 cm	0214 2112	40 Stück (4 OP)	10 Stück
4989	45,0 cm x 55,0 cm	45,0 cm x 48,0 cm	0214 2129	40 Stück (4 OP)	10 Stück
4994	56,0 cm x 84,0 cm	56,0 cm x 76,0 cm	0214 2135	40 Stück (4 OP)	10 Stück



APPLICA[®] OP-Folie

Sicher klebende Abdeckung des Operationsgebietes – steril.

- Bietet bakterielle Barriere und ist wasserundurchlässig
- Selbstklebend
- Transparent
- Atmungsaktiv

Artikelnummer	Größe	Klebefläche	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001217	10,0 cm x 20,0 cm	10,0 cm x 15,0 cm	0145 9433 (OP) 0300 2850 (Stk.)*	160 Stück (16 OP)	10 Stück
66001218	20,0 cm x 30,0 cm	20,0 cm x 20,0 cm	0145 9456 (OP) 0300 2867 (Stk.)*	80 Stück (8 OP)	10 Stück
66001219	30,0 cm x 28,0 cm	30,0 cm x 20,0 cm	0091 9128 (OP) 0300 2873 (Stk.)*	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66001220	45,0 cm x 35,0 cm	45,0 cm x 25,0 cm	0145 6446 (OP) 0300 2896 (Stk.)*	60 Stück (6 OP)	10 Stück
66001221	45,0 cm x 60,0 cm	45,0 cm x 50,0 cm	0145 6475 (OP) 0300 2904 (Stk.)*	40 Stück (4 OP)	10 Stück
66001222	56,0 cm x 84,0 cm	56,0 cm x 76,0 cm	0921 4665 (OP) 0300 2910 (Stk.)*	40 Stück (4 OP)	10 Stück

* Mindestbestellmenge 10 Stück



LEUKOSTRIP^o

Sterile Wundnahtstreifen aus elastischem Polyamidgewebe für kosmetisch gute Narbenergebnisse, weiß.

LEUKOSTRIP^o reduziert die Narbenbildung im Vergleich zur Standardversorgung. Es eignet sich für den primären und sekundären Wundverschluss.

- Kann zum Wundverschluss beitragen, indem es vor Zugkräften schützt
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- Zuverlässige Klebekraft



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Faltschachtel				
66072954	38,0 mm x 4,0 mm	0761 0374	1.600 Stück (20 OP)	10 x 8 Stück
66002952	76,0 mm x 6,4 mm	0761 0380	600 Stück (20 OP)	10 x 3 Stück
66072955	102,0 mm x 6,4 mm	0761 0397	1.000 Stück (20 OP)	10 x 5 Stück
66002953	102,0 mm x 13,0 mm	0761 0405	1.200 Stück (20 OP)	10 x 6 Stück
Nahtmaterialbox				
66002876	38,0 mm x 4,0 mm	0337 4362	1.600 Stück (4 OP)	50 x 8 Stück
66002878	76,0 mm x 6,4 mm	0337 4379	600 Stück (4 OP)	50 x 3 Stück
66002879	102,0 mm x 6,4 mm	0337 4385	1.000 Stück (4 OP)	50 x 5 Stück
66002880	102,0 mm x 13,0 mm	0337 4391	1.200 Stück (4 OP)	50 x 6 Stück
66002881	102,0 mm x 26,0 mm	0337 4416	400 Stück (4 OP)	25 x 4 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



LEUKOSTRIP^o S


Identische Eigenschaften wie LEUKOSTRIP^o – jedoch hautfarben.



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Nahtmaterialbox				
66002882	38,0 mm x 4,0 mm	0882 8253	200 Stück (4 OP)	50 x 4 Stück
66002883	76,0 mm x 6,4 mm	0882 8276	200 Stück (4 OP)	50 x 3 Stück
Kleinpackung** (beinhaltet 20 Peelbeutel mit je 4 Streifen 4,0 mm x 38,0 mm und 3 Streifen 6,4 mm x 76,0 mm)				
66102872	4 Streifen à 38,0 x 4,0 mm 3 Streifen à 76,0 x 6,4 mm	1767 0041 (20 Kleinpackungen) 0882 8247 (7 Streifen)	80 Stück (4 OP)	20 Kleinpackg.

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

** Mindestbestellmenge 20 Stk. (Kleinpackg.); beinhaltet 20 Peelbeutel mit je 4 Streifen 4 mm x 38 mm und 3 Streifen 6,4 mm x 76 mm

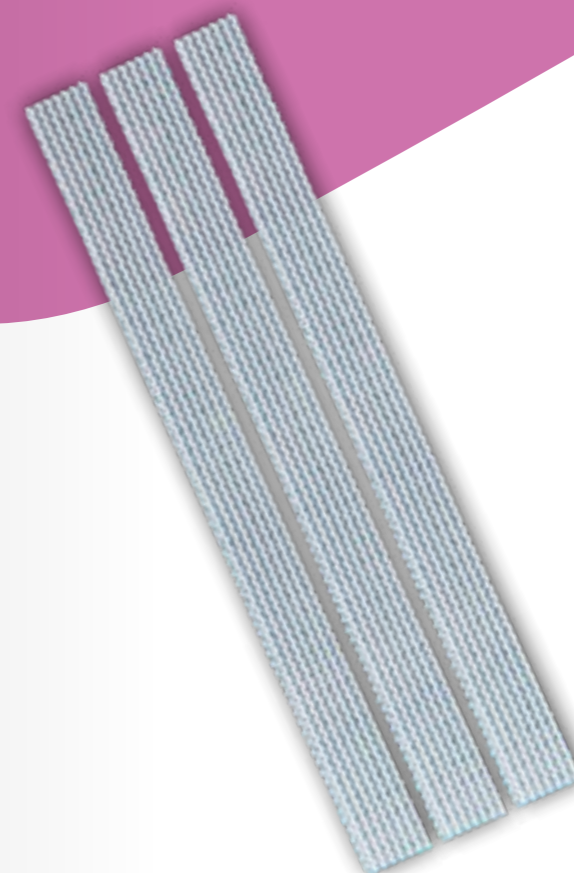


+ LEUKOSTRIP^o Wundnahtstreifen für den primären und sekundären Wundverschluss

+ Postoperative Wundverbände

Schützen die Wunde vor Kontamination von außen und nehmen Wundexsudat im absorbierenden Wundkissen auf.



OPSITE POST-OP[®] und OPSITE POST-OP[®] VISIBLE

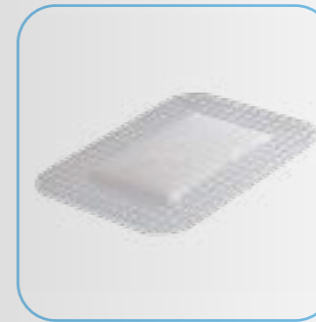

OPSITE[®] POST-OP

Folienverband mit Wundkissen zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril.

- Bakterien- und wasserundurchlässige Folie ermöglicht Duschen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Hochabsorptionsfähiges Wundkissen
- Wundauflage mit Verklebungsschutz
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000708	6,5 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	0144 7424	1.800 Stück (18 OP)	100 Stück
66000709	9,5 cm x 8,5 cm	7,3 cm x 3,7 cm	0144 7430	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000710	12,0 cm x 10,0 cm	7,5 cm x 5,8 cm	0144 7453	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66000712	15,5 cm x 8,5 cm	12,0 cm x 3,7 cm	0144 7447	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000713	20,0 cm x 10,0 cm	15,0 cm x 5,5 cm	0144 7482	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000714	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,7 cm	0144 7499	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000715	30,0 cm x 10,0 cm	25,0 cm x 5,7 cm	0144 7507	160 Stück (8 OP)	20 Stück
66000716	35,0 cm x 10,0 cm	30,0 cm x 5,7 cm	0144 7513	160 Stück (8 OP)	20 Stück
„Mini-Display“-Verpackung					
66030313	6,5 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	0411 0412 (OP) 0008 1702 (5 Stk.)**	360 Stück (12 OP)	6 x 5 Stück
66030314	9,5 cm x 8,5 cm	7,3 cm x 3,7 cm	0411 0429 (OP) 0008 1719 (5 Stk.)**	360 Stück (12 OP)	6 x 5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.
 ** Mindestbestellmenge 6 x 5 Stück



OPSITE® POST-OP VISIBLE

Der OPSITE® POST-OP VISIBLE Folienverband besteht aus einem einzigartigen wabenförmigen Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie – steril.


Ein Applikationsbeispiel finden Sie auf der Seite 78.

- Sicherheit durch Sichtbarkeit der Wunde
- Wabenförmiges Schaumstoffwundkissen ermöglicht ständige Wundkontrolle ohne Verbandwechsel
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Elastisch und anpassungsfähig
- Bakterien- und wasserdichte Folie ermöglicht Duschen



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800136	10,0 cm x 8,0 cm	5,0 cm x 3,5 cm	0372 5117	240 Stück (12 OP)	20 Stück
66800137	15,0 cm x 10,0 cm	10,0 cm x 5,5 cm	0091 9306	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66800138	20,0 cm x 10,0 cm	15,0 cm x 5,5 cm	0091 9329	120 Stück (6 OP)	20 Stück
66800139	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,5 cm	0091 9335	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66800140	30,0 cm x 10,0 cm	26,0 cm x 5,5 cm	0372 6424	120 Stück (6 OP)	20 Stück
66800141	35,0 cm x 10,0 cm	30,0 cm x 5,5 cm	0372 6447	120 Stück (6 OP)	20 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

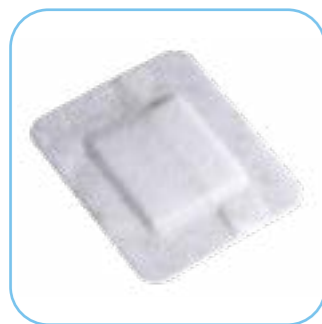

PRIMAPORE®

Vliesstoffverband mit hoher Aufnahmefähigkeit zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril.

- Sicherer, anschmiegsamer Sitz
- Hohe Saugfähigkeit
- Wundauflage mit Verklebungsschutz für schmerzarmen Verbandwechsel
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Abgerundete Ecken vermeiden Aufrollen des Verbandes



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
7133	7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	0747 8124	1.800 Stück (18 OP)	100 Stück
7135	8,3 cm x 6,0 cm	5,0 cm x 3,5 cm	0278 3006	600 Stück (12 OP)	50 Stück
66000317	10,0 cm x 8,0 cm	5,3 cm x 4,5 cm	0773 8855	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000318	15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	0773 8861	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000319	20,0 cm x 10,0 cm	15,5 cm x 5,3 cm	0773 8878	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000320	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,3 cm	0773 8884	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66000321	30,0 cm x 10,0 cm	25,0 cm x 5,3 cm	0773 8890	200 Stück (10 OP)	20 Stück
66007140	35,0 cm x 10,0 cm	29,5 cm x 5,3 cm	0435 0688	200 Stück (10 OP)	20 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



CUTIPLAST® Meterware

Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung kleiner akuter Wunden – unsteril.

- Entwickelt mit einer verklebungsarmen Wundauflage
- Atmungsaktiv
- Individuell zuschneidbar
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66001464	4,0 cm x 5,0 m	1,8 cm	0203 3015	18 Stück (18 OP)	1 Stück
66001466	6,0 cm x 5,0 m	2,5 cm	0203 3021	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66001468	8,0 cm x 5,0 m	4,0 cm	0203 3038	9 Stück (9 OP)	1 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



CUTIPLAST® STERIL

Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril.

- Weich und anschmiegsam
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Entwickelt, um das Verkleben mit der Wunde zu minimieren
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment im Klinik-Bereich					
66001478	7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	–	1.000 Stück (10 OP)	100 Stück
66001473	10,0 cm x 8,0 cm	5,3 cm x 4,5 cm	–	400 Stück (8 OP)	50 Stück
66001474	15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	–	400 Stück (8 OP)	50 Stück
66001475	20,0 cm x 10,0 cm	15,5 cm x 5,3 cm	–	350 Stück (7 OP)	50 Stück
66001476	25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,3 cm	–	350 Stück (7 OP)	50 Stück
66001477	30,0 cm x 10,0 cm	25,0 cm x 5,3 cm	–	350 Stück (7 OP)	50 Stück

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



CUTIPLAST^o PLUS STERIL


Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril.

- Weich und anschmiegsam
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken					
66801160	7,0 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	0973 2561 (OP) 0975 5734 (Stk.)**	1.100 Stück (10 OP)	110 Stück
66801161	10,0 cm x 7,8 cm	5,3 cm x 4,5 cm	0973 2578 (OP) 0975 5579 (Stk.)***	440 Stück (8 OP)	55 Stück
66801162	15,0 cm x 7,8 cm	11,0 cm x 4,0 cm	0973 2590 (OP) 0975 5639 (Stk.)***	440 Stück (8 OP)	55 Stück
66801163	19,8 cm x 10,0 cm	15,5 cm x 5,3 cm	0973 2609 (OP) 0975 5651 (Stk.)***	385 Stück (7 OP)	55 Stück
66801164	24,8 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,3 cm	0973 2615 (OP) 0975 5697 (Stk.)***	385 Stück (7 OP)	55 Stück
66801165	29,8 cm x 10,0 cm	25,0 cm x 5,3 cm	0973 2621 (OP) 0975 5728 (Stk.)***	385 Stück (7 OP)	55 Stück
66801166	7,0 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,5 cm	0973 2638	150 Stück (30 OP)	5 Stück
66801167	10,0 cm x 7,8 cm	5,3 cm x 4,5 cm	0973 2644	150 Stück (30 OP)	5 Stück
66801599	15,0 cm x 7,8 cm	11,0 cm x 4,0 cm	1032 5430	150 Stück (30 OP)	5 Stück
66801600	19,8 cm x 10,0 cm	15,5 cm x 5,3 cm	1032 5447	150 Stück (30 OP)	5 Stück
66801601	24,8 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,3 cm	1032 5482	150 Stück (30 OP)	5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

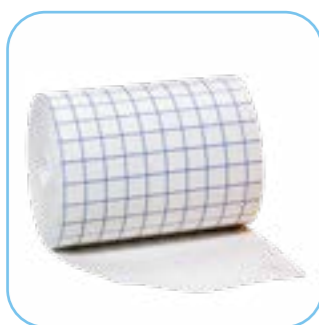

CUTIFIX^o STRETCH


Hautfreundliches Klebevlies von der Rolle zur vollflächigen Verbandfixierung – unsteril.

- Elastisches Vlies
- Ermöglicht Fixierung auch an Gelenken ohne Bewegungseinschränkung
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Individuell zuschneidbar



Artikelnummer	Größe Verband	Größe Wundauflage	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000950	5,0 cm x 10,0 m	–	0496 8750	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66000951	10,0 cm x 10,0 m	–	0496 8773	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66000952	15,0 cm x 10,0 m	–	0496 8827	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66000953	20,0 cm x 10,0 m	–	0501 8217	12 Stück (12 OP)	1 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

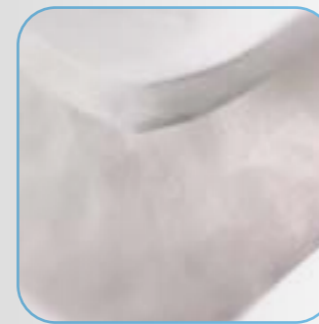

MELOLIN^o

Verklebungsarme Auflage aus Baumwoll-Polyester-Gemisch für gering bis moderat exsudierende Wunden in der Wundversorgung und Ersten Hilfe, z. B. saubere Nahtwunden, Schürf- und Risswunden – steril und unsteril.

- Perforierte Polyesterfolie reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Exzellente Saugfähigkeit, polsternd für Patientenkomfort
- Zuschneidbar
- Die Seite mit der perforierten Polyesterfolie wird auf die Wunde gelegt



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
MELOLIN^o steril				
66974940	5,0 cm x 5,0 cm	0278 2337	2.400 Stück (24 OP)	100 Stück
66974932	5,0 cm x 5,0 cm	0317 0731	300 Stück (12 OP)	25 Stück
66974941	10,0 cm x 10,0 cm	0278 2343	1.200 Stück (12 OP)	100 Stück
66974933	10,0 cm x 10,0 cm	0317 0748	120 Stück (12 OP)	10 Stück
66974939	10,0 cm x 20,0 cm	0278 2366	600 Stück (6 OP)	100 Stück
MELOLIN^o unsteril				
66974930	50,0 cm x 7,0 m	0278 2372	6 Stück (6OP)	1 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Mindestbestellmenge 110 Stück

*** Mindestbestellmenge 55 Stück

+ Wund- und Fixierfolien

Verschiedene wasserdichte Wund- und Fixierverbände

Die wasserdichten Verbände bieten den Vorteil, dass Verbände bei entsprechender Applikation die tägliche Körperhygiene ermöglichen. Einige Verbände bieten zudem eine bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen.



Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden.



OPSITE[®] FLEXIGRID[®]

Wasserdichter, transparenter Wundverband aus Polyurethanfolie mit Applikationshilfe. Zur Wundversorgung, Fixierung von Wundauflagen oder als Hautschutz – steril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen
- Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbandes
- Exakte Wunddokumentation durch Folienträger mit Gitterstruktur
- Förderung eines idealfeuchten Wundmilieus
- Minimiert Reibung und Scherkräfte
- Zuverlässige Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften

Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
4628	6,0 cm x 7,0 cm	0383 3539	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
66004633	10,0 cm x 8,0 cm	0357 5729	1.000 Stück (10 OP)	100 Stück
4629	10,0 cm x 12,0 cm	0372 2283	100 Stück (10 OP)	10 Stück
4630	10,0 cm x 12,0 cm	0372 2308	500 Stück (10 OP)	50 Stück
4631	15,0 cm x 20,0 cm	0372 2314	100 Stück (10 OP)	10 Stück
4632	12,0 cm x 25,0 cm	0372 2320	200 Stück (10 OP)	20 Stück
„Mini-Display“-Verpackung				
66030333	6,0 cm x 7,0 cm	0206 3571 (OP) 0008 1725 (5 Stk.)**	360 Stück (12 OP)	6 x 5 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



OPSITE[®] FLEXIFIX

Transparente Folie von der Rolle zur sicheren Fixierung von Primärverbänden oder als Hautschutz – unsteril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Minimiert Reibung und Scherkräfte



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66000040	5,0 cm x 10,0 m	0747 8012	24 Rollen (24 OP)	1 Stück
66000041	10,0 cm x 10,0 m	0747 8029	12 Rollen (12 OP)	1 Stück
66000375	15,0 cm x 10,0 m	0865 3144	12 Rollen (12 OP)	1 Stück
66030569	5,0 cm x 1,0 m	1767 0058 (OP) 0068 0325***	72 Rollen (12 OP)	6 Stück
66030570	10,0 cm x 1,0 m	1767 0064 (OP) 0068 0331***	72 Rollen (12 OP)	6 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

** Mindestbestellmenge 6 x 5 Stück

*** Gilt für 1 Stück, Mindestbestellmenge 6 Stk.



OPSITE° FLEXIFIX GENTLE

Sanft haftende transparente Fixierfolie von der Rolle mit Silikongel-Beschichtung – unsteril.

- Atmungsaktiv und duschfest
- Bakterielle Barriere zum Schutz vor Kontamination von außen
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Minimiert Reibung und Scherkräfte
- Zur Fixierung von Primärverbänden
- Zur Zusatzfixierung von Tuben oder als Hautschutz
- Für empfindliche Haut geeignet



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66801195	2,5 cm x 5,0 m	0989 7121	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66801196	5,0 cm x 5,0 m	0989 7138	24 Stück (24 OP)	1 Stück
66801197	10,0 cm x 5,0 m	0989 7144	12 Stück (12 OP)	1 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



OPSITE° Spray

Wasserdampfdurchlässiger, transparenter Sprühverband für trockene, oberflächliche Wunden und kleinere Operationsnähte.

- Einfach anzuwenden
- Wasserresistent
- Atmungsaktiv
- Anpassungsfähigkeit ermöglicht freie Beweglichkeit



Artikelnummer	Inhalt	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66004978	100 ml	0074 4516 (OP) 0206 3507 (Stk.)**	12 Stück (1 OP)	12 Stück
66004980	240 ml	0074 4539	12 Stück (1 OP)	12 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.
** Gilt für 1 Stück



IV3000° Kanülen- und Katheterfixierung

+ Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen

Eine zuverlässige Fixierung ist in diesem Anwendungsbereich besonders wichtig.



IV3000° Applikationsbeispiele finden Sie auf den Seiten 74–77

IV3000°

Feuchtigkeitsaktive, transparente Polyurethanfolie zur Kanülen- und Katheterfixierung – steril.

- MVTR bis 14.000 g/m²/24 h bei 37°C
- Mit zwei Extrastreifen zur sicheren Fixierung der Kanülen und einem Dokumentationsetikett
- Bakterien- und wasserundurchlässig
- Kontrolle der Punktionsstelle durch transparente Folie möglich
- Tragedauer von bis zu 7 Tagen
- Hochatmungsaktive Folie vermindert die Ansammlung von Feuchtigkeit

Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden. Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett				
66004011 – Kinder (geschlitzt)	5,0 cm x 6,0 cm	0001 9399	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
4007	6,0 cm x 7,0 cm	0747 8153	1.800 Stück (18 OP)	100 Stück
4006 – geschlitzt	7,0 cm x 9,0 cm	0749 8902	2.000 Stück (20 OP)	100 Stück
66004009 – geschlitzt	9,0 cm x 12,0 cm	0023 2615	500 Stück (10 OP)	50 Stück
4008	10,0 cm x 12,0 cm	0747 8176	400 Stück (8 OP)	50 Stück
66004005	10,0 cm x 12,0 cm	0341 2329	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800512	11,0 cm x 14,0 cm	0777 6459	125 Stück (5 OP)	25 Stück
Window Frame, mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett				
59410082 – ohne Kanülenflügel, mit Applikationsrahmen	6,0 cm x 7,0 cm	0134 6309	1.000 Stück (10 OP)	100 Stück
59410882 – Zentralkanülen mit Applikationsrahmen	10,0 cm x 12,0 cm	0134 6315	200 Stück (4 OP)	50 Stück
Standard				
4973	10,0 cm x 14,0 cm	--	200 Stück (4 OP)	50 Stück
4649	10,0 cm x 20,0 cm	0049 5450	200 Stück (4 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.



APPLICA° I.V. 100

Vliesstoff-Kanülenfixierung mit integriertem Wundpad – steril.

- Hautfreundlicher Acrylatkleber
- Atmungsaktiv
- Einfach zu applizieren
- Zusätzliches Wundpad kann zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers genutzt werden



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66047717	8,0 cm x 6,0 cm	0439 3798	400 Stück (8 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*



OPSITE° VISIBLE DRAIN DRESSING

Das OPSITE° VISIBLE DRAIN DRESSING ist ein Folienverband zur Drainageversorgung. Er besteht aus einem einzigartigen wabenförmigen Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie.

Anzeichen einer Infektion der Drainage können durch den transparenten Verband schnell erkannt werden, ohne diesen entfernen zu müssen. Die Zahl der Verbandwechsel und das damit verbundene Infektionsrisiko können gesenkt werden – steril.

- Bakterien- und wasserundurchlässig, ermöglicht das Duschen
- Mit zwei zusätzlichen Folienstreifen zur Versiegelung des Schlitzes um die Einstichstelle
- Sicherheit durch Sichtbarkeit der Einstichstelle und gute Unterpolsterung der Drainage
- Hoch absorbierendes Wundkissen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Elastisch und anpassungsfähig



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800842	10,0 cm x 9,0 cm	0738 8740	160 Stück (8 OP)	20 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

+ Kompressionssysteme

Venenerkrankungen wie Ulcus cruris, auch „offenes Bein“ genannt, werden am besten mit Kompressionsverbänden behandelt, um das Ödem abzubauen und die Versorgung des Gewebes zu verbessern, sodass die Wunde heilen kann.

Die Mehrlagen-Kompressionssysteme bieten eine lang anhaltende Wirkung, wodurch die Verbände bis zu 7 Tage durchgehend getragen werden können.



PROFORE^o

4-Lagen-Kompressionsbandagensystem bestehend aus einer Wundauflage, einer Polsterbinde, einer Baumwollkrepfbinde und einer kohäsiven Binde.

- Für venöse Ulcera cruris mit Knöchel-Arm-Druckindex (ABPI) von über 0,8
- Sichere und dauerhafte Kompression (bis zu 1 Woche)
- Mehrlagensystem für graduelle Kompression (40 mmHg am Knöchel bis hin zu 17 mmHg unterhalb des Knies)
- Einfache, sichere Handhabung
- Hohe Heilungsrate von bis zu 84 % in 24 Wochen



PROFORE^o LITE

3-Lagen-Kompressionsbandagensystem zur Versorgung arteriovenöser Mischulcera. Die einfache Wickeltechnik von Profore^o Lite ist auch für Unerfahrene schnell und sicher erlernbar.

- Für arteriovenöse Mischulcera (Knöchel-Arm-Druckindex von 0,6 – 0,8)
- Reduzierter Kompressionsdruck
- Einfache, sichere Handhabung
- Kosten- und Zeitersparnis durch längere Verbandliegezeiten
- Sichere und dauerhafte Kompression (bis zu 1 Woche)

Artikelnummer	Optimale Wirkung bei einem Knöchelumfang von	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
PROFORE^o – für Ulcera venöser Ätiologie LATEXFREI				
66000770	18,0 – 25,0 cm	0186 6109 (OP) 0152 8602 (1 Set)**	8 Sets (1 OP)	8 Sets à 4 Binden
66807686	25,0 – 30,0 cm	0121 4559 (OP) 0121 4542 (1 Set)**	8 Sets (1 OP)	8 Sets à 3 Binden
66807687	> 30,0 cm	0121 4571 (OP) 0121 4565 (1 Set)**	8 Sets (1 OP)	8 Sets à 4 Binden
Wundkontaktschicht – steril				
66000701	14,0 cm x 20,0 cm	0368 2483	200 Stück (4 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

Artikelnummer	Optimale Wirkung bei einem Knöchelumfang von	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
PROFORE^o LITE – für Ulcera gemischter Ätiologie LATEXFREI¹				
66000771	18,0 – 25,0 cm	0186 6115 (OP) 0152 8542 (1 Set)**	8 Sets (1 OP)	8 Sets à 3 Binden

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.
 ** Mindestbestellmenge 4 Sets
 *** Mindestbestellmenge 8 Sets

Die erfolgreiche Kompressionstherapie spart Zeit und Kosten und führt schnell zurück in den Alltag.

+ Salbe

Monopräparat zur Wundreinigung



IRUXOL^o N*#

Enzymatische Reinigung – verschreibungspflichtiges Arzneimittel.

- Schnelle Wundreinigung
- Förderung der Granulation und Epithelisierung
- Gute Verträglichkeit
- Einfache Anwendung (1 x täglich eine 2 mm dicke Schicht auftragen)
- Zur Behandlung von Wunden wie Dekubitus, Ulcus cruris, diabetische Ulcera, Verbrennungen
- Löst durch sein spezifisches Enzym Kollagenase die Beläge aus dem Wundgrund und baut sie durch die Begleitproteasen weiter ab
- Körpereigene Wundheilungsprozesse werden durch die Kollagenbruchstücke aktiviert



Artikelnummer	Inhalt	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Sortiment für niedergelassene Ärzte und Apotheken				
66019025	1 x 25 g (N1)	0156 7708	–	1 Stück
66019050	1 x 50 g (N2)	0156 7714	–	1 Stück
66019100	2 x 50 g (N3)	0156 7720	–	1 Stück
Sortiment im Klinik-Bereich				
66019300	1 x 30 g	–	–	1 Stück

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)**

*solange der Restbestand reicht

** Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

IRUXOL^o N* | **Zusammensetzung:** Wirkstoff: Aufgearbeitetes Filtrat von Clostridium histolyticum mit Clostridiopeptidase A 1,2 I.E., andere Proteasen 0,24 I.E. pro 1 g Salbe. **Sonstige Bestandteile:** Dickflüssiges Paraffin, weißes Vaseline. **Anwendungsgebiete:** Zur enzymatischen Reinigung kutaner Ulzera von nekrotischem Gewebe. **Gegenanzeigen:** Absolute: Patienten mit Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. **Relative:** IRUXOL^o N bei Ulzera mit starken Infektionen nicht ohne eine begleitende systemische Antibiotikatherapie anwenden. Bei Verbrennungen sollte ohne Konsultation eines Verbrennungsspezialisten nicht mehr als 10 % der Körperoberfläche behandelt werden. **Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen:** Tyrothricin, Gramicidin und Tetrazykline nicht zusammen mit IRUXOL^o N lokal anwenden. Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Diabetikern trockene Gangrän vorsichtig befeuchten, um den Übergang zu feuchten Gangränen zu vermeiden. **Schwangerschaft:** Anwendung im 1. Trimenon nur bei strenger Indikationsstellung. **Stillzeit:** Übergang in die Muttermilch unwahrscheinlich. **Nebenwirkungen:** Häufig können Hautreizungen oder Kontaktdermatitis auftreten. Gelegentlich können Schmerzen, Erytheme oder Brennen im Wundgebiet auftreten. Verschreibungspflichtig. Weitere Informationen siehe Fachinformation bzw. Gebrauchsinformation. **Zulassungsinhaber:** Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 30, 22763 Hamburg, **Stand:** 04 / 2019



Zur enzymatischen Reinigung von abgestorbenem (nekrotischem) Gewebe bei oberflächlichen Geschwüren.

+ BIOBRANE[◊]

Temporärer Hautersatz aus einer äußeren Silikonmembran und einem darin verankerten Nylongewebe. Das der Wunde zugewandte Nylongewebe ist in einer komplexen 3-D-Struktur aufgebaut, an die Kollagenpeptide* kovalent gebunden sind. Blut und Serum verbinden sich mit der Nylonmatrix und fixieren den Hautersatz zusätzlich biologisch auf der Wunde.

Durch ein spezielles Trifilament-Nylon sorgt die 3-D-Matrix von BIOBRANE[◊] für eine sichere Haftung. Die Öffnungen in BIOBRANE[◊] erlauben den Austritt von Exsudat durch die Silikonmembran. Daher können die Hautersatzaufgaben auf der Wunde verbleiben, bis die Oberfläche neu epithelisiert ist. (Bitte lesen Sie hierzu auch die Gebrauchsinformation.)

+ Indikationen: BIOBRANE[◊] kann bei Verbrennungen zweiten Grades (IIa, IIb), Spalthaut-Entnahmestellen und toxischen epidermalen Nekrolysen (TENS) eingesetzt werden.

Artikelnummer	Produktabmessung	Inhalt pro Originalpackung (OP)
BIOBRANE[◊] – für Verbrennungen zweiten Grades (IIa, IIb), Spalthautentnahmestellen, TENS		
66800174	13,0 cm x 13,0 cm	5 Stück
66800175	13,0 cm x 38,0 cm	5 Stück
66800176	25,0 cm x 38,0 cm	5 Stück
66800177	38,0 cm x 51,0 cm	1 Stück
BIOBRANE[◊]-Handschuh – für Verbrennungen zweiten Grades der Hände		
66800181	Handschuh für Kinder	2 Stück
66800182	Handschuh klein	2 Stück
66800183	Handschuh mittel	2 Stück
66800184	Handschuh groß	2 Stück

Erstattungsfähig**



Funktion von BIOBRANE[◊]

- Silikonmembran verhindert einen weiteren Flüssigkeitsverlust und verringert die Gefahr von Infektionen
- Erhöhte Mobilität durch hohe Flexibilität des Hautersatzes
- Kosteneffektiv durch weniger Verbandwechsel
- Ermöglicht eine schnellere Rückkehr zu normalen Lebensgewohnheiten

Vorteile durch BIOBRANE[◊]

- Ermöglicht eine schnellere Wundheilung (Re-Epithelisierung)
- Die äußere Silikonmembran bildet eine Feuchtigkeitsbarriere
- Ermöglicht eine Beobachtung der Wunde
- Schmerzloser Heilungsverlauf durch Kollagenpeptide*

* Kollagenpeptide sind porcinen Ursprungs
 ** Abklärung mit Krankenkasse im Vorfeld der Verordnung.

+ EXU-DRY[◊] Spezialkompressen

+ CICA-CARE[◊] Minimiert bis zu 90 % aller Narben



EXU-DRY[◊]

Hochsaugfähige Spezialkompressen mit Antischerkraftwirkung – steril.

- Hohes Sekretaufnahmevermögen
- Verhinderung von Scherkräften auf die Wunde
- Atmungsaktiv
- Große Abmessungs- und Formenvielfalt
- Komfortable Trageigenschaften



CICA-CARE[◊]

Transparenter Silikongel-Verband zur Behandlung von Narben. Anwendbar bei frischen hypertrophierenden Narben und Keloiden, altem verhärtetem Narbengewebe, zur Prophylaxe auf geschlossenen postoperativen Wunden nach Nahtentfernung.

- Dünn und anschmiegsam
- Selbsthaftend
- Transparent für eine unauffällige Narbentherapie
- Hohe Erfolgsquote
- Kosteneffektiv, da bis zu 4 Wochen wiederverwendbar
- Einfach zuschneidbar für jede Narbengröße




Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
5999004120	10,0 cm x 15,0 cm	0431 5427	120 Stück (1 OP)	120 Stück
5999006	15,0 cm x 23,0 cm	0431 5433	48 Stück (1 OP)	48 Stück
5999009	23,0 cm x 38,0 cm	0109 4003	30 Stück (1 OP)	30 Stück
5999018	38,0 cm x 46,0 cm	0109 4026	30 Stück (1 OP)	30 Stück
5999M36	61,0 cm x 91,0 cm	0109 4084	15 Stück (1 OP)	15 Stück
5999L72	91,0 cm x 183,0 cm	0109 4049	15 Stück (1 OP)	15 Stück
5999024	38,0 cm x 61,0 cm	0109 4032	30 Stück (1 OP)	30 Stück
5999LPA	Arm	0109 4055	20 Stück (1 OP)	20 Stück
5999LPL	Bein	0109 4061	20 Stück (1 OP)	20 Stück
5999LV1	Weste	0109 4078	20 Stück (1 OP)	20 Stück

Erstattungsfähig

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66250704	6,0 cm x 12,0 cm	0131 8968	20 Stück (20 OP)	1 Stück
66250706	12,0 cm x 15,0 cm	0131 8945	5 Stück (5 OP)	1 Stück
66250707	12,0 cm x 15,0 cm	0131 8922	10 Stück (1 OP)	10 Stück

+ CICA-CARE[◊] gehört auch in der plastischen Chirurgie aufgrund seiner hohen Wirksamkeit und positiven klinischen Studien zu den beliebten Mitteln in der Nachbehandlung.

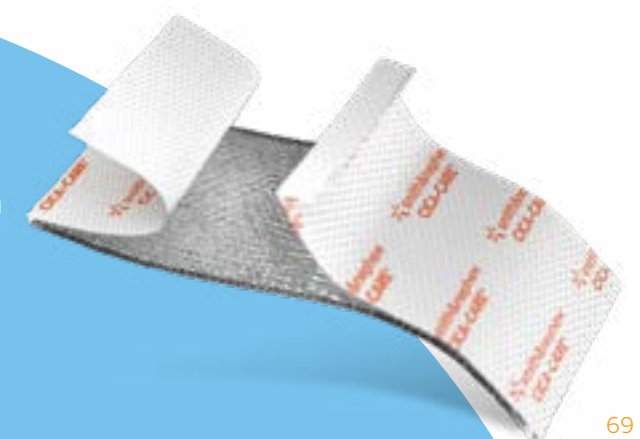

+ VERSAJET[®] II

Erleben Sie die innovative, moderne Hydrochirurgie

Das VERSAJET[®] II System sorgt schnell für ein saubereres, gleichmäßigeres Wundbett und nimmt dabei gleichzeitig mehrere Barrieren in Angriff, die dem Heilungsprozess entgegenstehen.

- Beim VERSAJET[®] II System kommt ein Hochgeschwindigkeitswasserstrahl mit steriler Kochsalzlösung zum Einsatz.
- Während sich das Handstück tangential zur Wundoberfläche bewegt, entfernt der hauchdünne Strahl des Geräts zügig nekrotisches Gewebe, Bakterien und Fremdkörper – und schont dabei das umliegende gesunde Gewebe.



Intuitiver Anschluss



- Schlüssel-Schloss-Prinzip
- Schnellere Einsatzvorbereitung
- Gleichbleibende Leistung

Leuchtring



- Verriegelungssymbole für eine intuitive Bedienung
- Leuchtet bei korrektem Handstückanschluss

Multifunktions-Fußpedal



- Einstellung der Leistungsstufe durch den Anwender möglich
- Verbesserte Kontrolle für eine effiziente Durchführung

Tangentiale Bewegung mit einem Hochgeschwindigkeitswasserstrahl mit steriler Kochsalzlösung



Selektion



Exzision



Absaugung

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66800039	VERSAJET II Konsole 220V / 50Hz mit Multifunktions-Fußpedal und Netzstromkabel	1
66800979	VERSAJET II Gerätewagen mit Infusionsständer, Halterung für Absaugbehälter, 6 Handstückfächer (Handstück und Schlauchset sind im Lieferumfang nicht enthalten)	1
66800472	Multifunktions-Fußpedal für VERSAJET II	1
VERSAJET[®] II EXACT		
66800040	Exact Handstück Schlauchset (15° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800041	Exact Handstück Schlauchset (45° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800042	Exact Handstück Schlauchset (45° Neigung / 8 mm Arbeitsfenster)	1
VERSAJET[®] II PLUS		
66800043	Plus Handstück Schlauchset (15° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800044	Plus Handstück Schlauchset (45° Neigung / 14 mm Arbeitsfenster)	1
66800045	Plus Handstück Schlauchset (45° Neigung / 8 mm Arbeitsfenster)	1

VERSAJET II EXACT Stufeneinstellung	Flussrate des Flüssigkeitsstrahls	Flüssigkeitsdruck	Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls
1	90 ml / min	1.787 psi, 123 bar	536 km / h
3	123 ml / min	3.799 psi, 262 bar	719 km / h
7	181 ml / min	8.180 psi, 564 bar	1.058 km / h
10	220 ml / min	11.535 psi, 795 bar	1.304 km / h
VERSAJET II PLUS Stufeneinstellung	Flussrate des Flüssigkeitsstrahls	Flüssigkeitsdruck	Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls
1	90 ml / min	2.100 psi, 145 bar	666 km / h
3	123 ml / min	4.300 psi, 267 bar	912 km / h
7	181 ml / min	9.200 psi, 634 bar	1.336 km / h
10	220 ml / min	12.800 psi, 883 bar	1.628 km / h

+ ALLEVYN[®] – Applikationstechniken


Fersenverband



Nehmen Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 12,0 cm x 13,0 cm. Schneiden Sie den Verband an jeder Seite ca. 3 cm tief ein.



Die Umgebungshaut muss trocken und fettfrei sein. Applizieren Sie eine Hälfte des Verbands an der Rückseite der Ferse. Die Einschnitte sollten auf Höhe der Fußsohle sitzen.

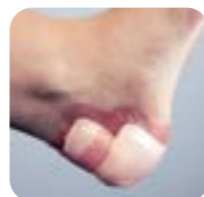

Kleben Sie den restlichen Verband auf der Unterseite der Ferse an. Achten Sie darauf, dass der Verband bündig mit der Ferse abschließt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Handschuhverband



Schneiden Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband Ferse nicht haftend** 4 mal im gleichen Abstand an der geschlossenen Seite ein. Die Schnitte sollten ca. 1,5 cm tief sein, je nach Fingergröße.



Schieben Sie den Verband über die Hand und führen Sie die Finger durch die vier Einschnitte. Achten Sie darauf, dass der Verband gut sitzt.




Fixieren Sie die Ränder des Verbands mit **OPSITE[®] FLEXIFIX** am Handgelenk. Dies schließt die Ober- und Unterseite mit ein. Fixieren Sie den Verband nicht vollflächig.

Verband für Zehenzwischenräume



Knicken Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband nicht haftend** 4,5 cm x 5,5 cm. Schneiden Sie den Verband an zwei Stellen im Abstand von 1 – 2 cm ein.

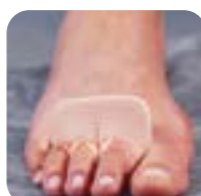

Führen Sie die Zehen durch die Einschnitte. Achten Sie darauf, dass ausreichend Verband zwischen den Zehen vorhanden ist.



Befestigen Sie den Verband mit **OPSITE[®] FLEXIFIX**. Achten Sie darauf, dass nur der Rand des Verbands fixiert wird, nicht vollflächig.

Fingerverband



Drehen Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 7,0 cm x 8,0 cm diagonal. Kleben Sie eine Ecke des Verbands an den Finger.



Heben Sie den Verband über die Fingerspitze. Drehen Sie den Finger und fixieren Sie die Ecken rund um den Finger.



Achten Sie darauf, dass der Verband gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Zehenverband



Drehen Sie **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 7,0 cm x 8,0 cm diagonal. Kleben Sie eine Ecke des Verbands an den Zeh.



Heben Sie den Verband über die Zehenspitze und fixieren Sie die Ecken rund um den Zeh.



Achten Sie darauf, dass der Verband gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

Brustverband



Schneiden Sie aus **ALLEVYN[®] Schaumverband haftend** 13,0 cm x 22,0 cm zwei schmale, etwa 4 cm tiefe Dreiecke aus der schmalen Seite aus.



Heben Sie die Brust zum Applizieren an. Die Einschnitte ermöglichen eine gute Anpassung an die Konturen. Machen Sie die Einschnitte tiefer, falls eine höhere Flexibilität erforderlich ist.



Achten Sie darauf, dass der Verband faltenfrei und gut auf der Haut sitzt. Drücken Sie den Verband rundum sanft an.

ALLEVYN[®] LIFE Applikationsschritte



Entfernen Sie die Schutzfolie und drücken Sie die obere Hälfte des Verbands sanft an.



Drücken Sie den unteren Teil sanft an, ohne den Verband dabei zu dehnen.



Streichen Sie den Verband glatt und lassen Sie in der Mitte den Hafrand etwas überlappen (nicht am Hafrand ziehen).

ALLEVYN[®] LIFE – vielfältig einsetzbar an verschiedenen Körperstellen



ALLEVYN[®] LIFE Sacrum Applikationsschritte



Entfernen Sie die mittlere Schutzfolie.



Fixieren Sie den Verband auf der Haut. Den schmalen Bereich des Verbandes mind. 2 cm über dem Anal-Sphinkter aufbringen, dann den Verband über dem Kreuzbein andrücken.



Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und streichen Sie den Verband glatt, ohne den Verband dabei zu dehnen.

ALLEVYN[®] LIFE Heel Applikationsschritte



Entfernen Sie eine Seite des Schutzpapiers und positionieren Sie den Fuß mittig.





Fixieren Sie zunächst den Knöchelbereich. Streichen Sie den Verband über der Wunde glatt.



Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und fixieren Sie die Ferse.

ALLEVYN[®] LIFE Heel – weitere Applikationsbeispiele

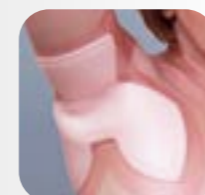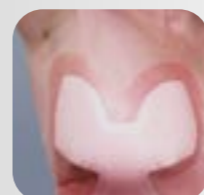


Applizieren Sie den Verband mit der Non-Touch-Technik. Durch Zuschneiden eines **ALLEVYN[®]** Verbandes können vermehrt Feuchtigkeit und Bakterien austreten und die Keimbarriere des Verbandes beeinträchtigen.

Bitte denken Sie daran, beim Zuschneiden Einmalhandschuhe zu tragen und eine sterile Schere zu verwenden.

+ IV3000^o – Applikationstechniken

Geeignet zur Fixierung von Jugularis-, zentralvenösen und mehrlumigen Kathetern

Standardtechnik mit IV3000^o 9,0 cm x 12,0 cm, geschlitzt

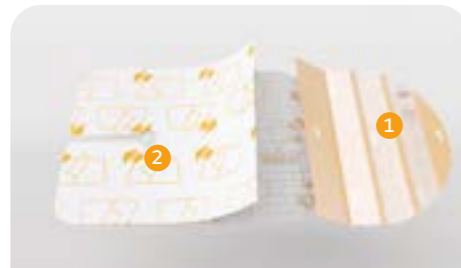

Schritt 1

Das Anwendungsgebiet, einschließlich möglicher Wundnähte gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.

Zuerst orangen Abschnitt 1 vom abgerundeten Ende des Verbandes entfernen.

Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln, auf dem Katheterkörper oder zur Stabilisierung des Katheterlumens angebracht werden.

Entfernen Sie anschließend das Abdeckpapier 2.



Schritt 3

Den Verband über der Punktionsstelle des Katheters positionieren und sicherstellen, dass der Verbandschlitz nach dem Katheterlumen ausgerichtet ist.

Die Ränder des Verbandes glätten.

Die obere Trägerfolie 3 an der markierten Stelle Richtung Portzugang abziehen.



Schritt 4

Den Verbandschlitz um die Lumen ausrichten.

Das mit 4 markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten des Verbandes entfernen.

Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Fixierung des Katheters sicherzustellen.



Schritt 5

Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.

Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt 1 eintragen. Kleben Sie das Datumsetikett auf die Haut oder den Verband (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung


Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.

Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.

Geeignet zur Fixierung von peripheren Kathetern

Standardtechnik mit IV3000^o 7,0 cm x 9,0 cm, geschlitzt

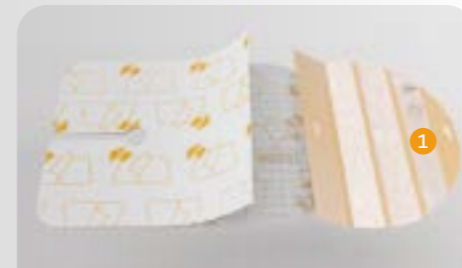

Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäß lokalen Protokollen einschließlich möglicher Wundnähte reinigen und gründlich trocknen.


Dann Abschnitt 1 vom gerundeten Ende des Verbandes entfernen.

Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können zur zusätzlichen Sicherheit auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper verwendet werden, z. B. zur Stabilisierung der Katheterlumen.

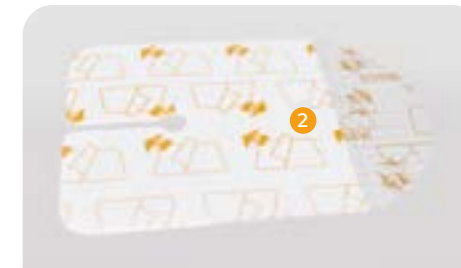

Schritt 3

Das mit 2 markierte Abdeckpapier abziehen.



Schritt 4

Den Verband über die Punktionsstelle legen und sicherstellen, dass sich der Port in der Mitte des Verbandes (transparente Folie) befindet.

Glätten Sie die Ecken des Verbandes.

Mit Hilfe der klebefreien Griffleiste die mit 3 markierte obere Trägerfolie abziehen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Entfernen Sie das mit 4 markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten.

Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Befestigung des Katheters sicherzustellen.



Schritt 6

Die Folie um den Katheter herum gut modellieren.

Dann die relevanten Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt 1 vermerken.

Das beschriftete Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband anbringen, ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken.



Entfernung

Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.

Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.

Tipp: Bitte beachten Sie bei der Applikation die aktuellen Hygieneanforderungen des Robert-Koch-Instituts. Die klebefreien Griffleisten von IV3000^o ermöglichen die Applikation auch mit Handschuhen. Ein vorheriges Anwärmen des Verbandes in den Handflächen aktiviert den Kleber schneller. Die Haut sollte immer trocken und fettfrei sein. Keine Bodylotion oder ähnliches vorher auftragen. Für schwierige Stellen, ist die Unterstützung von SECURA^o unserem sterilen, reizfreien Barrierefilmprodukt zu empfehlen. Modellieren Sie den Verband gut an. Fixierstreifen sind individuell aufbringbar, die Abbildung ist ein Beispiel.

+ IV3000^o – Applikationstechniken

Geeignet zur Fixierung von zentralvenösen, mehrlumigen (PICC- sowie Mid-Line-)Kathetern
Standardtechnik mit IV3000^o 10,0 cm x 12,0 cm



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet, einschließlich möglicher Wundnähte gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.
Dann orangen Abschnitt 1 vom Ende des Verbands entfernen, einschließlich der beiden sterilen Fixierstreifen und des Datumsetiketts.



Schritt 2

Die Streifen können auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z. B. Stabilisierung des Katheterlumens.



Schritt 3

Ziehen Sie das mit 2 markierte Abdeckpapier ab.



Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.
Den Verband auf den Katheterkörper platzieren und auf der Haut des Patienten fixieren.
Das mit 3 markierte Abdeckpapier entfernen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Das mit 4 markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.
Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.



Schritt 6


Nun das Datumsetikett auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.
Loslassen und Vorgang wiederholen.

Geeignet für periphere Katheter
Standardtechnik mit IV3000^o 6,0 cm x 7,0 cm

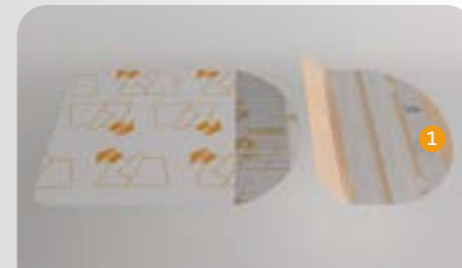

Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäß lokalen Protokollen reinigen und gründlich trocknen.
Dann orangen Abschnitt 1 vom abgerundeten Ende des Verbands entfernen.
Dieser enthält zwei Fixierstreifen und ein Datumsetikett.




Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln oder dem Katheterkörper zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden, z. B. zur Fixierung von Schläuchen oder Stabilisierung des Katheterlumens.



Schritt 3

Ziehen Sie das mit 2 markierte Abdeckpapier ab.

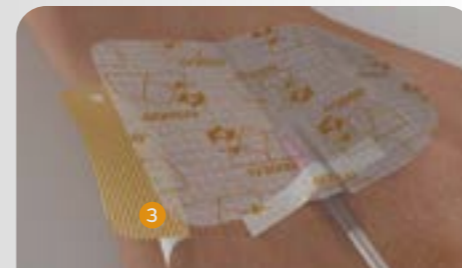

Schritt 4

Den Verband über der Punktionsstelle zentrieren.
Den Verband auf dem Katheterkörper platzieren und auf der Haut des Patienten fixieren.
Das mit 3 markierte Abdeckpapier entfernen.



Schritt 5 – Fortsetzung

Den Verband glätten.
Die mit 4 markierte obere Trägerfolie durch Anheben der nicht haftenden Ecke entfernen und diagonal abziehen.



Schritt 6

Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.
Nun das Datumsetikett aus Abschnitt 1 auf der Haut oder dem Verband des Patienten anbringen (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Heben Sie eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter des Patienten stabilisieren.
Loslassen und Vorgang wiederholen.

Entsprechende Applikationsfilme finden Sie unter: www.IV3000.de

+ OPSITE[®] POST-OP VISIBLE

Applikationstechnik

Folienverband mit wabenförmigen Schaumstoffwundkissen
Standardtechnik mit OPSITE[®] POST-OP VISIBLE 10,0 cm x 8,0 cm



Schritt 1

Nachdem Sie die Haut in Übereinstimmung mit Ihren lokalen Protokollen gesäubert und getrocknet haben, entfernen Sie das mit „1“ markierte Abdeckpapier.



Schritt 2

Halten Sie den Verband an den nicht klebenden Enden fest und platzieren Sie die Wundauflage über dem gewünschten Bereich.



Schritt 3

Modellieren Sie den Verband mit sanftem Druck gut an, insbesondere die Ecken.



Schritt 4

Entfernen Sie nun vorsichtig die Abdeckfolie „2“ mit Hilfe des Anfassers. Modellieren Sie ggf. nach.



Entfernen

Entfernen Sie den Verband, indem Sie eine Ecke lösen und die Folie dann parallel zur Haut des Patienten überdehnen.

Hilfreicher Verbandwechselindikator

Kein Wechsel notwendig



Jetzt wechseln



(Sättigung bis zum Wundkissenrand)

+ Index

A	Seite	I	Seite
ACTICOAT [®]	24	INTRASITE [®] CONFORMABLE	39
ACTICOAT [®] 7	24	INTRASITE [®] GEL	39
ACTICOAT [®] FLEX 3	23	IODOSORB [®] Dressing	28
ACTICOAT [®] FLEX 7	23	IODOSORB [®] Salbe	28
ALGISITE [®] M	21	IRUXOL [®] N	64
ALLEVYN [®] Ag GENTLE BORDER	24	IV3000 [®]	60
ALLEVYN [®] Ag SACRUM	26	J	
ALLEVYN [®] COMPLETE CARE	12	JELONET [®]	45
ALLEVYN [®] COMPLETE MULTISITE	12	L	
ALLEVYN [®] COMPLETE SACRUM	12	LEUKOSTRIP [®]	48
ALLEVYN [®] COMPLETE HEEL	12	LEUKOSTRIP [®] S	48
ALLEVYN [®] GENTLE	16	M	
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER	14	MELOLIN [®]	55
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER HEEL	15	O	
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER LITE	19	OPSITE [®] FLEXIFIX	57
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER MULTISITE	15	OPSITE [®] FLEXIFIX GENTLE	58
ALLEVYN [®] GENTLE BORDER SACRUM	15	OPSITE [®] FLEXIGRID [®]	57
ALLEVYN [®] LIFE	14	OPSITE [®] Inzisionsfolie	47
ALLEVYN [®] LIFE HEEL	14	OPSITE [®] POST-OP	51
ALLEVYN [®] LIFE SACRUM	14	OPSITE [®] POST-OP VISIBLE	52
ALLEVYN [®] SACRUM	18	OPSITE [®] SPRAY	58
ALLEVYN [®] Schaumverband Ferse nicht haftend	16	OPSITE [®] VISIBLE DRAIN DRESSING	61
ALLEVYN [®] Schaumverband haftend	18	P	
ALLEVYN [®] Schaumverband nicht haftend	17	PICO [®] 7	34
ALLEVYN [®] SILBER Schaumverband nicht haftend	25	PICO [®] 7Y	34
ALLEVYN [®] SILBER Schaumverband haftend	26	PICO [®] 14	33
ALLEVYN [®] SILBER Schaumverband nicht haftend	25	PICO [®] Multipacks	35
ALLEVYN [®] THIN	19	PICO [®] Wundfüllmaterialien	35
ALLEVYN [®] TRACHEOSTOMY	17	PRIMAPORE [®]	52
APPLICA [®] I.V. 100	61	PROFORE [®]	62
APPLICA [®] OP-Folie	47	PROFORE [®] LITE	63
B		PROSHIELD [®] Plus	43
BACTIGRAS [®]	44	PROSHIELD [®] Sprüh-Schaumreiniger	43
BIOBRANE [®]	67	R	
C		REMOVE [®]	42
CICA-CARE [®]	69	RENASYS [®] EDGE	37
CUTICERIN [®]	45	RENASYS [®] -F	37
CUTIFIX [®] STRETCH	54	RENASYS [®] -F/AB	37
CUTIPLAST [®] Meterware	53	RENASYS [®] -G Wundversorgungs-Kits	37
CUTIPLAST [®] PLUS STERIL	54	RENASYS [®] Soft Port	37
CUTIPLAST [®] STERIL	53	RENASYS [®] Therapieeinheiten	37
D		RENASYS [®] TOUCH	37
DURAFIBER [®]	21	RENASYS [®] Zubehör	37
DURAFIBER [®] Ag	27	S	
DURAMAX [®] N	20	SECURA [®]	41
DURAMAX [®] S	20	SKIN-PREP [®]	42
E		V	
EXU-DRY [®]	68	VERSAJET [®] II	71

Piktogramme und ihre Bedeutung für Medizinprodukte

	Nur zum Einmalgebrauch (Nicht aufbewahren)		Hinweis beachten		Verfalldatum (darf danach nicht mehr verwendet werden)		Nicht verwenden, wenn Packung beschädigt
	Steril produziert (in Kombination mit der Sterilisationsmethode)		Obere Lagertemperatur		Achtung, Packungsbeilage beachten		Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Herstellungsdatum		Untere Lagertemperatur		Chargenbezeichnung		

NEU

**Wundmanagement Deutschland
Smith & Nephew GmbH**
Van-der-Smissen-Straße 9
D-22767 Hamburg

T +49 (0) 40 8797 44-350
F +49 (0) 40 8797 44-375
www.smith-nephew.de
info@smith-nephew.com

© 07/2026 Smith+Nephew
◇ Markenzeichen von Smith+Nephew,
AWM-Miscellaneous-37774

ABGABE NUR AN FACHKREISANGEHÖRIGE

Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften
lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Hersteller: Smith+Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England

Der Inhalt ist Eigentum der Smith & Nephew GmbH und urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Vervielfältigung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sind nur
nach schriftlicher Genehmigung durch Smith+Nephew gestattet.

**Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für einen Gesamtüberblick über die
Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.**



MEHR WISSEN ALS ALLE ANDEREN?
Jetzt den Smith & Nephew
E-Mail Newsletter bestellen!