

お使いいただいている製品、使用部位（ ）




標準型	
☐	12.9 cm × 12.9 cm
☐	15.4 cm × 15.4 cm
☐	21 cm × 21 cm



仙骨用	
☐	17.2 cm × 17.5 cm
☐	21.6 cm × 23 cm



かかと用	
☐	25 cm × 25.2 cm

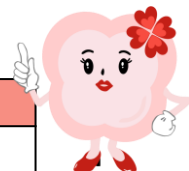


※医療従事者の方へ：使用製品に✓を入れてください
使用部位を記入してください


貼り方 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みください。



1 透明の背面フィルムを剥がして、左右の手で持ちます。

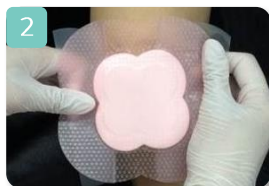

2 中心に創部がくるように貼付します。左右の背面フィルムを剥がします。

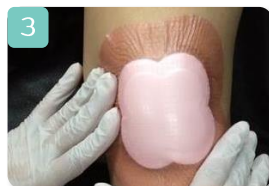

3 皮膚になじませたら貼付完了です。しわになった部分は、一度剥がして貼り直しが可能です。



仙骨用、かかと用の貼り方はこちらの

剥がし方



端をそっと持ち上げ、ゆっくり創傷部から剥がします。貼付面に対して180°逆方向に剥がします。

交換時期の目安

- 粘着が落ちたら交換してください。
- 1日1回は皮膚の観察をしてください。
- 仙骨部に貼付する場合は5日間を限度として交換してください。その他の部位に貼付する場合は7日間を限度として交換してください。

アレビン[◇] ライフ

皮膚を保護する5層構造のパッド
多層構造のポリウレタンフォーム保護パッド材です。


保護方法の一例



仙骨や尾骨が突出している 大転子部が突出している 座っている時間が長い 背骨が出ている



テープの幅が広い

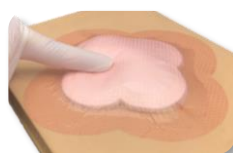

クッション性



シリコーンゲル粘着

ドレッシング材を交換する時は、貼付している部分の皮膚を洗浄しましょう。



低刺激性の石鹸（弱酸性）をよく泡立ってます。



泡立てた泡で周囲の皮膚をなでるように洗います。



人肌程度のお湯で石鹸成分が残らないように十分に洗い流します。



最後に創部をやさしく洗い流します。



やわらかいガーゼなどで、やさしく水分を拭き取ります。

よくあるご質問

Q. 貼付中にシャワー浴はできますか？

剥がれにくい防水フィルムのため、シャワー浴程度であれば可能です。

周囲のテープ部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。

パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換してください。

※シャワー浴時に皮膚を保護する必要がなければ、剥がしてシャワー浴を行うことをお勧めします。



Q. 切って使えますか？

アレビン ライフは切ると断面がばらついて繊維が飛び出しますので、切ることはお勧めしていません。



使用上の注意点

- キズや皮膚疾患、または皮膚疾患の疑いのある部位などには使用しないこと。
- クッション性がありますが、体圧分散を目的に使用する場合は、本品単体ではなく、他の適切な体圧分散器具と併用すること。
- 本品は使い捨てのため、使用は1回限りとし、再使用はしないこと。
- 1日1回は皮膚の観察をしてください。
- 発疹、発赤、かゆみなどが発生した場合や、皮膚状態が悪化した場合は、使用を中止し、医師に相談すること。

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部
〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号 TEL. 03-5403-8830
<http://www.smith-nephew.com/ja-jp>

※使用上の注意等の詳細は、取扱説明書をご参照ください。