


ハイドロサイト◇ ジェントル 銀をご使用される方へ

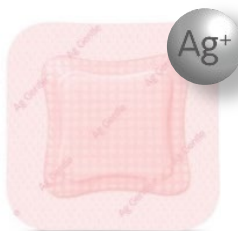

その他の
ハイドロサイト
シリーズ



ハイドロサイト
AD ジェントル



ハイドロサイト
AD プラス

お使いいただいている製品とサイズ ※ 医療従事者の方へ：使用製品に✓を入れてください

使用製品	<input type="checkbox"/> ハイドロサイトジェントル 銀	使用 サイズ	<input type="checkbox"/> 7.5 cm × 7.5 cm
	<input type="checkbox"/> ハイドロサイトAD ジェントル		<input type="checkbox"/> 10 cm × 10 cm
	<input type="checkbox"/> ハイドロサイトAD プラス		<input type="checkbox"/> 12.5 cm × 12.5 cm
			<input type="checkbox"/> 17.5 cm × 17.5 cm

貼り方 ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

- 必要に応じて貼付部位の除毛をしてください。
- 貼付部を洗浄、または必要に応じて消毒します。消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように十分洗浄し、余分な水分はよく拭き取ってください。



1 透明のフィルムを剥がします。



2 粘着剤がついているパッド部分を創傷部に貼付します。シワにならないように密着させます。

しわになった部分は、一度剥がして貼り直しが可能です。

剥がし方



隅をそっと持ち上げ、ゆっくり創傷部から剥がします。

交換時期の目安

- 少なくとも週1回は、新しいドレッシングと交換します。
- 初回使用時は、創と滲出液の状態を観察する目的で、通常より早めに交換することをお勧めします。
- 創傷の状態が心配な時は、適宜観察してください。



滲出液が漏れ出す前に、新しいドレッシングに交換してください。

創周囲の皮膚のスキンケア

ドレッシング材を交換する時は、創の周囲の皮膚を洗浄しましょう。



1 低刺激性の石鹸（弱酸性）をよく泡立てます。



2 泡立てた泡で周囲の皮膚をなでるように洗います。



3 人肌程度のお湯で石鹸成分が残らないように十分に洗い流します。



4 最後に創部をやさしく洗い流します。



5 やわらかいガーゼなどで、やさしく水分を拭き取ります。

よくあるご質問

Q. 貼付中にシャワー浴はできますか？

剥がれにくい防水フィルムのため、シャワー浴程度であれば可能です。



周囲のテープ部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換してください。

Q. 何日ごとに交換したら良いですか？

滲出液がパッドの端から0.5cmまで到達した場合や、漏れ出した場合は交換してください。

最長は7日間ですが、使用開始して初めの時期は、傷を観察する目的で早めの交換をお勧めします。

※ 吸収状態に関わらず7日間を限度に交換してください。

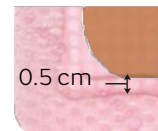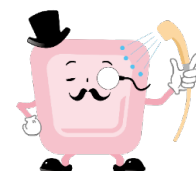

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部
〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号 TEL. 03-5403-8830
<http://www.smith-nephew.com/ja-jp>

※使用上の注意等の詳細は、製品添付文書をご参照ください。

販売名:ハイドロサイト ジェントル 銀
承認番号:22500BZX00409000

◇ Trademark of Smith+Nephew
© 2022 Smith+Nephew

販売名:ハイドロサイト AD ジェントル
承認番号:22100BZX00942000

販売名:ハイドロサイト AD プラス
承認番号:22100BZX01096000

ハイドロサイト◇ ライフをご使用される方へ




お使いいただいているサイズ

使用 サイズ	<input type="checkbox"/> 12.9 cm × 12.9 cm
	<input type="checkbox"/> 15.4 cm × 15.4 cm
	<input type="checkbox"/> 21 cm × 21 cm

※医療従事者の方へ：使用製品に✓を入れてください

貼り方 ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

- 必要に応じて貼付部位の除毛をしてください。
- 貼付部を洗浄、または必要に応じて消毒します。消毒液を用いた場合は、消毒液が残らないように十分洗浄し、余分な水分はよく拭き取ってください。

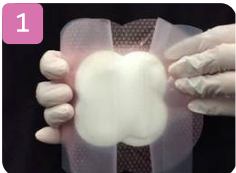

1 透明の背面フィルムを剥がして、左右の手で持ちます。



2 中心に創部がくるように貼付します。左右の背面フィルムを剥がします。



3 皮膚になじませたら貼付完了です。しわになった部分は、一度剥がして貼り直しが可能です。

剥がし方



隅をそっと持ち上げ、ゆっくり創傷部から剥がします。

形の異なる ハイドロサイト ライフ 仙骨用・ヒール用の貼り方はこちら




仙骨用
殿裂部にフィット

ヒール用
踵や踝にフィット



交換時期の目安

滲出液が**花びら3つつ**広がった場合は、新しいものと交換します。

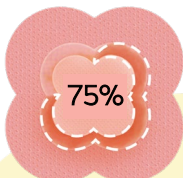

75%

交換時期



滲出液は花びらの端の部分から観察ができます。

- 使い始めの時期は頻りに観察してください。
- 滲出液の量に関わらず最長7日間、坐骨部や仙骨部などは5日間を限度として交換してください。

創周囲の皮膚のスキンケア

ドレッシング材を交換する時は、創の周囲の皮膚を洗浄しましょう。



1 低刺激性の石鹸（弱酸性）をよく泡立てます。



2 泡立てた泡で周囲の皮膚をなでるように洗います。



3 人肌程度のお湯で石鹸成分が残らないように十分に洗い流します。



4 最後に創部をやさしく洗い流します。



5 やわらかいガーゼなどで、やさしく水分を拭き取ります。

よくあるご質問

Q. 貼付中にシャワー浴はできますか？

剥がれにくい防水フィルムのため、シャワー浴程度であれば可能です。

周囲のテープ部分にしわがある場合、水が浸入しやすくなります。パッド内に水が浸入した場合は、新しいものに交換してください。

Q. 切って使えますか？

ハイドロサイト ライフは切ると断面がばらついて繊維が飛び出しますので、切ることはお勧めしていません。



スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部
〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号 TEL. 03-5403-8830
<http://www.smith-nephew.com/ja-jp>

※使用上の注意等の詳細は、製品添付文書をご参照ください。

◇ Trademark of Smith+Nephew
© 2022 Smith+Nephew

販売名:ハイドロサイト ライフ
承認番号:22600BZX00209000