



ULTRABUTTON と ULTRATAPE を使用した BTB グラフト作製


1. BTB 骨片ジャンクション側 1/3 の位置に 1.5mm ワイヤードリルで孔を作製します。

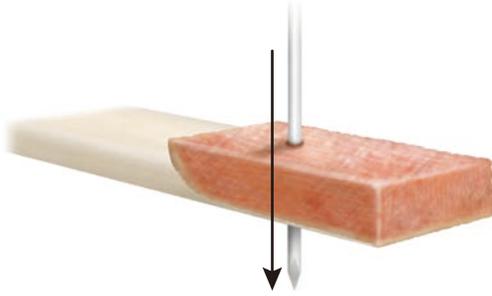


2. #1 モノフィラメントを用いて、ULTRATAPE を BTB 骨片に通します。

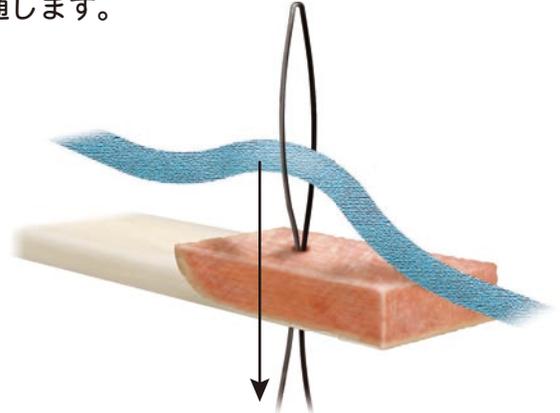


3. ULTRABUTTON のアジャスタブルループへ ULTRATAPE を通します。

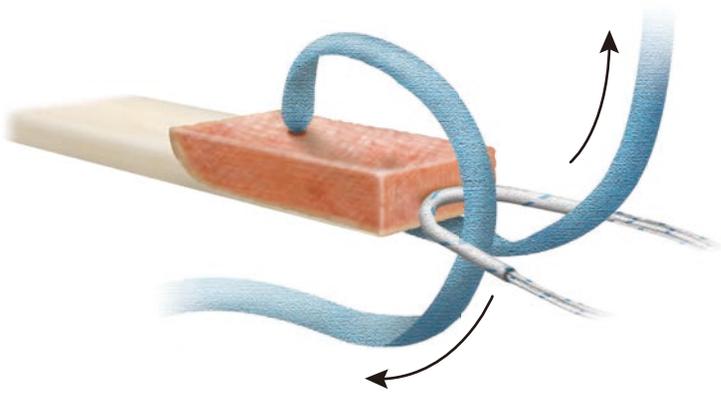


4. #1 モノフィラメントを用いて、片方の ULTRATAPE を BTB 骨片に通します。

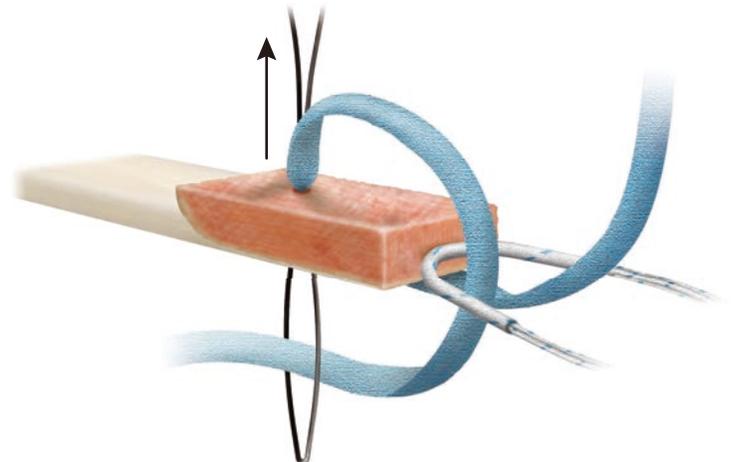

5. #1 モノフィラメントを用いて、もう片方の ULTRATAPE を BTB 骨片に通します。

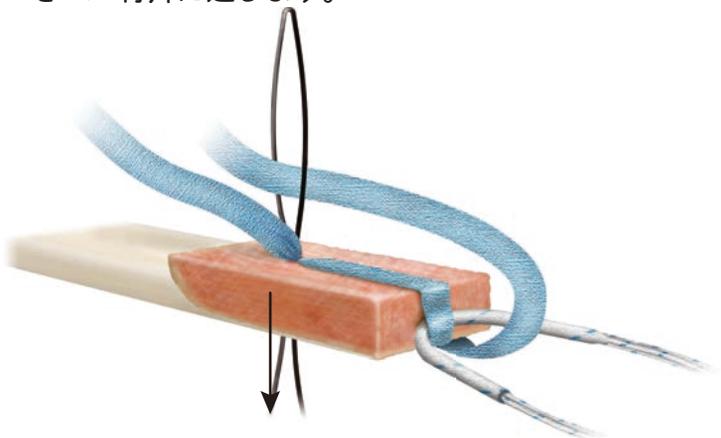

6. ULTRATAPE を BTB 骨片の断端でしっかりと結び、BTB グラフト完成になります。*1

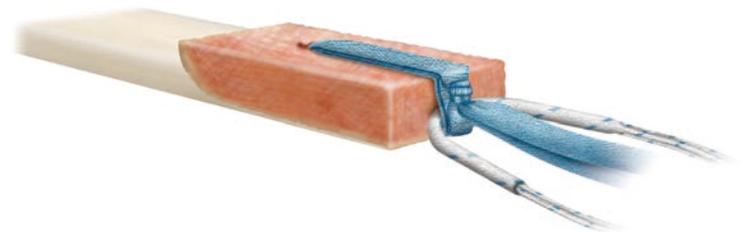

*1 結んだ ULTRATAPE は BTB グラフト完成時に切るか、グラフト引き上げの際グラフトコントロールに使用します。

72203896 ウルトラテープ 青 96.5cm
72203897 ウルトラテープ 白青 96.5cm
72201361 #1 モノフィラメント*2

*2 10 本入/箱 (滅菌済み)