

Smith+Nephew

療養中の方や ご家族のみなさまへ

キズのケアにご使用いただける製品をご紹介します



肌にやさしい粘着剤のふんわりパッド絆創膏

ハイドロ ジェントルエイド[◇]

高齢の方や
肌の弱い方

体液が
出るキズ

キズと周囲の
皮ふの保護

など、浅いキズ全般に使用できます。

使用例

肘



腕



足



膝



尻



※ お尻モデルに貼っています



最長
7日間
貼れる

表面は防水・通気性の
ある医療用フィルム

厚みのあるパッドは
ポリウレタンフォームを採用
ふんわりパッドでキズと肌を保護し、キズから出る液をしっかりと吸収。最長7日間貼ることができる(キズの状態に応じて適宜交換してください)。



粘着剤は
シリコーンゲルを採用
はがす時の痛みが少なく、
肌にやさしい。

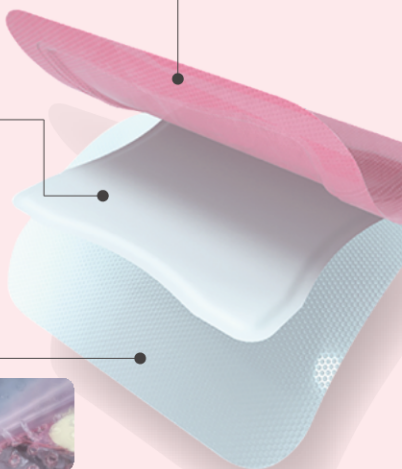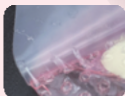

使い方



1 使用前後に手を洗ってください。
キズとその周囲の皮膚を水道水等で洗浄し清潔にした後、乾燥させてください。



2 片方のうら紙をはがし、粘着剤がついているパッド面をキズに直接貼ってください。
端がしわにならないように本品をキズに密着させ、もう片方のうら紙もはがして貼ってください。



3 キズ全体に確実に貼られているか確認してください。使用開始して初めの時期は頻繁にキズを観察してください。少しはがしてキズを確認しまた貼ることもできます。本品の外側からキズから出る液の吸収状態が黒っぽい模様のように観察できるので、パッドの端から約0.5cmのところまでキズから出る液が広がった時を目安に交換してください。

※キズから出る液の吸収状態に関わらず7日間を限度として交換してください。

はがし方

絆創膏の角を持ち上げ、ゆっくりと上に引っ張るようにキズからはがしてください。



5×5cm (3枚入り)
定価840円
(税込924円)



7.5×7.5cm (3枚入り)
定価1,000円
(税込1,100円)



10×10cm (3枚入り)
定価1,300円
(税込1,430円)

原寸大

10×10cm
(パッド部 7.5×7.5cm)

7.5×7.5cm
(パッド部 5×5cm)

5×5cm
(パッド部 3×3cm)

— MEMO —

関節にフィットするはがれにくい絆創膏

オプサイト◇ポスト-オプ

濡らしたく
ないキズ

切りキズ
すりキズ

術後のキズ

など、浅いキズ全般に使用できます。

使用例

手



腕



膝




足



最長

7日間

貼れる

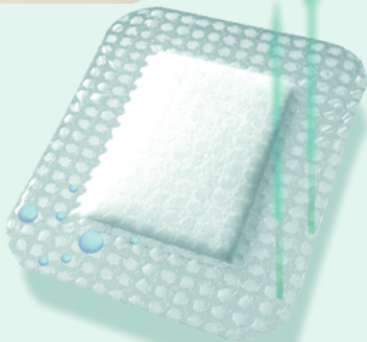

医療で使用の極薄フィルム

防水性、かつ通気性がありふやけにくい。関節にもフィットし最長7日間貼ることができる(キズの状態に応じて適宜交換してください)。


キズに当てる部分はツルツル

キズにくっつきにくく、はがす時の痛みが少ない。

低刺激の粘着剤

粘着剤を網目状に塗布した低刺激性で皮膚にやさしい。


アレルギー性のかぶれがおきにくい。

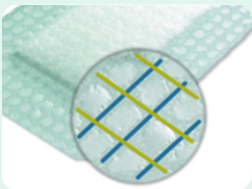

使い方



1 使用前後に手を洗ってください。
キズ及びその周辺皮膚を必要に応じて水道水等で洗浄し、十分に清潔にしたのち乾燥させてください。

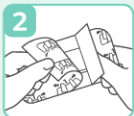

2 うら紙(1)をはがし、軽く押さえながら、キズに貼り付け、周囲となじませてください。



3 背面のシート(2)をはがしてください。

はがし方

フィルムの端を少しはがし、他方の手で貼付面を軽く押さえながら、フィルムを貼っている面とほぼ平行に引っ張りながらはがしてください。すべての角を同じように引っ張りながらはがすと容易にはがせます。



6.5×5cm
(5枚入り)
定価540円
(税込594円)



9.5×8.5cm
(3枚入り)
定価710円
(税込781円)

原寸大

6.5×5cm
(パッド部 4×2.5cm)

9.5×8.5cm
(パッド部 7.3×3.7cm)

— MEMO —

粘着剤なしの高機能傷あて材

メロリン◇

ガーゼの
代わりに

軽い
やけどに

キズ薬と
一緒にも

など、浅いキズ全般に使用できます。

使用例

手



腕



膝



尻



※ お尻モデルに貼っています



キズに当てる部分はツルツル面

※裏表があります、ご注意ください。
キズにくっつきにくくはがす時の痛みが
少ない(粘着力はありません)。

ボリュームのある吸収パッド

キズから出る液の吸収力が高く、
貼替え回数を減らすことができる。



表面ははっ水性不織布

外部からの水分や汚れがしみこみにくく、
内側からの水分がしみ出しにくい。

使い方

1



キズに当てる部分はツルツル面

[貼る前]

キズ及びその周辺を生理食塩水、水道水等で洗浄し、十分に清潔にしたのち乾燥させてください。

2



[貼り方]

- 1) キズの大きさに適したサイズを選択してください。
- 2) つるつるした透明なフィルム面をキズにあててください。
- 3) 医療用テープ、医療用フィルム等で固定してください。

3



[交換及び交換頻度]

キズの状態に応じ、一日に一回以上交換してください。



5×5cm(5枚入り)
定価420円(税込462円)



10×10cm(3枚入り)
定価510円(税込561円)

原寸大

5×5cm

10×10cm

— MEMO —

ハイドロ ジェントルエイド

一般医療機器:救急絆創膏

医療機器届出番号:13B1X10222WC0016

オプサイト ポスト-オブ

一般医療機器:救急絆創膏

医療機器届出番号:13B1X10222WC0018

メロリン Home care

一般医療機器:医療用不織布

医療機器届出番号:13B1X10222WC0017



お問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-127-019**

(9:00-17:00 土・日・祝日を除く)

製造販売業者

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-5114 東京都港区浜松町二丁目4番1号

TEL.03-5403-8830

<https://www.smith-nephew.com/ja-jp>

◊Trademark of Smith+Nephew

© 2025 Smith+Nephew

GS-27

202601-02

世界の医療で使われて150年
高機能・確かな品質で早めの手あて よりよい暮らし

キズのケア あなたのケア

Smith+Nephew