

+ Guida all'applicazione - Multisite

Smith+Nephew

Grazie alla loro struttura esclusiva, le medicazioni in schiuma ALLEVYN COMPLETE CARE aiutano a **ridurre al minimo le perdite***¹⁻³ e a **prevenire i fattori** che contribuiscono alle lesioni da pressione^{†4-7}

ALLEVYN[®]
COMPLETE CARE
Medicazione in schiuma

Fasi di applicazione della medicazione in schiuma ALLEVYN COMPLETE CARE Multisite



Selezionare la medicazione della misura appropriata, assicurandosi che il tampone assorbente copra interamente la ferita o l'area da proteggere.



Staccare il primo supporto protettivo e applicare il lato adesivo della medicazione alla cute.




Staccare il supporto protettivo rimanente. Lasciare la medicazione. Accertarsi che il tampone assorbente copra la ferita.

Non tendere la medicazione.




Far aderire bene i bordi. **Verificare che non vi siano pieghe che potrebbero compromettere la tenuta.** La medicazione può essere riposizionata secondo necessità.

Medicazione a riposo

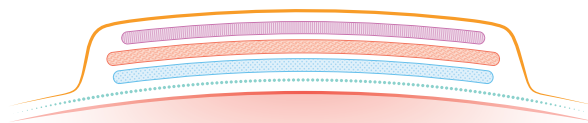

Medicazione sottoposta a forze di taglio

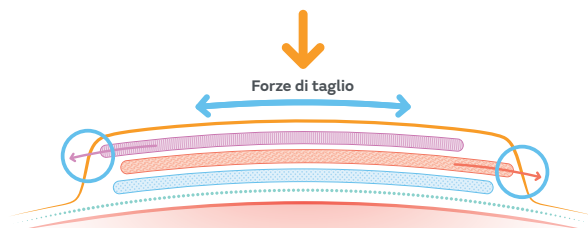


Tecnologia ShearDEFENSE[®] a strati indipendenti


- Il design brevettato a strati indipendenti consente agli strati di scorrere creando attrito all'interno della medicazione*⁴

La medicazione ALLEVYN COMPLETE CARE maschera visivamente l'essudato assorbito, mantenendo un aspetto più gradevole per un periodo più lungo^{2,3,8-12} e indicando al contempo efficacemente il momento della sostituzione⁸


Ecco un diagramma utile per capire quando sostituire la medicazione

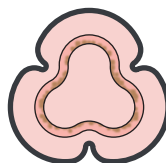

Sostituzione
non necessaria

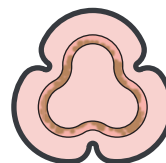

Considerare
il cambio

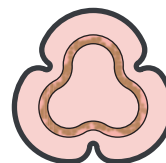

Sostituire



Rimozione

- Sollevare la medicazione da un angolo e staccarla delicatamente fino a rimuoverla del tutto.
- Smaltire secondo i protocolli clinici locali o gettare in modo igienico dopo l'uso.



Osservazione

In caso di utilizzo per la prevenzione di lesioni da pressione, esaminare frequentemente la cute alla ricerca di eventuali danni da pressione. Sollevare un angolo all'indietro, ispezionare e riposizionare quindi la medicazione.

Dal momento che la disponibilità è soggetta alle pratiche mediche e/o normative dei singoli Paesi, i prodotti potrebbero non essere reperibili in tutti i mercati. Contattare il rappresentante o il distributore Smith+Nephew in caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Smith+Nephew nella propria zona. Per informazioni dettagliate sul prodotto, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'impiego.

*Come dimostrato in vitro. †Come dimostrato in silico e in vitro.

Riferimenti bibliografici: 1. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. 2. Tiscar-González V, et al. *Adv Skin Wound Care*. 2021;34(1):23-30. 3. Rossington A, et al. *Wounds UK*. 2013;9(4):91-95. 4. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. 5. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. 6. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. 7. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. 8. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. 9. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. 10. Simon D, Bielby A. *Wounds UK*. 2014;10(3):80-87. 11. Joy H, et al. *J Wound Care*. 2015;24(7):312, 314-317. 12. Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023.