


Kurzübersicht

DYONICS[°] 25 System zur Flüssigkeitsverwaltung von Smith & Nephew

1. Drücken Sie auf die Einschalttaste, um die Steuereinheit einzuschalten.
2. Laden Sie einen DYONICS 25 Schlauchsatz von Smith & Nephew in den Kassetten-Port der Steuereinheit.
3. Schließen Sie alle Schlauchklemmen und stechen Sie den Irrigationsbeutel an.
4. Öffnen Sie alle Klemmen und drücken Sie die Starttaste.
5. Lassen Sie die Pumpe laufen, bis sich keine Luftblasen mehr in der Kassette und in der Leitung befinden; schließen Sie dann die blaue Klemme.
6. Bestimmen Sie anhand der untenstehenden Tabelle die entsprechende Kanüleneinstellung.

VORSICHT: Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen in der Bedienungs-/Wartungsanleitung des DYONICS 25 Systems zur Flüssigkeitsverwaltung von Smith & Nephew (Bestell-Nr. 1061600).

⚠️ WARNHINWEIS: Bei falscher Kanüleneinstellung können ungenaue Druckmesswerte sowie Druck- und Flussratenfluktuationen auftreten.

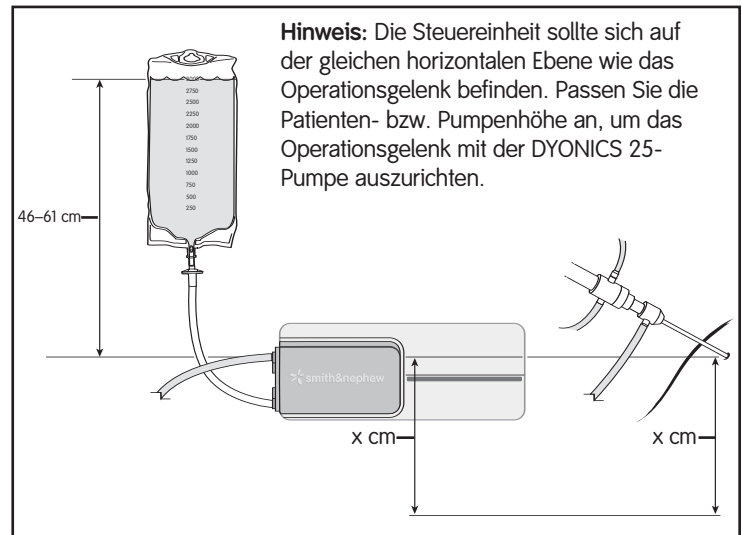

Hinweis: Die Steuereinheit sollte sich auf der gleichen horizontalen Ebene wie das Operationsgelenk befinden. Passen Sie die Patienten- bzw. Pumpenhöhe an, um das Operationsgelenk mit der DYONICS 25-Pumpe auszurichten.

Abbildung 1. Ausrichtung von Pumpe/Gelenk

Hinweis: Falls Druckeinstellungsprobleme weiterhin bestehen, siehe den Abschnitt „Fehlersuche und -behebung“ in der Bedienungs-/Wartungsanleitung für das DYONICS 25 System zur Flüssigkeitsverwaltung von Smith & Nephew (Bestell-Nr. 1061600).

		Arthroskopgröße			
		Kein Arthroskop – Nur Zuflusskanüle	1,9 mm	2,7 mm	4,0 mm
Zuflusskanüleneingröße	<2,5 mm	Starker Fluss	Schwacher Fluss	---	---
	2,5–3,0 mm	Starker Fluss	Mittlerer Fluss	Schwacher Fluss	---
	3,1–4,0 mm	Nicht empfohlen	Mittlerer Fluss	Mittlerer Fluss	---
	4,1–4,5 mm	Nicht empfohlen	Starker Fluss	Starker Fluss	Schwacher Fluss
	4,6–5,0 mm	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen	Starker Fluss	Mittlerer Fluss
	>5,0 mm	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen	Starker Fluss *

DYONICS 25 Kanüleneinstellungen je nach Kanüle und Arthroskopiegröße.

* Ausnahmen: Manche Kanülen, die größer als 5,00 mm sind, haben eine niedrigere Flussrate und benötigen die Einstellung „Mittlerer Fluss“.

[°]Marken von Smith & Nephew. Bestimmte Marken sind eingetragen beim Amt für Patente und Marken (USA).