

+ IV3000[◇] 9 x 12 cm, geschlitzt

Smith+Nephew

IV3000[◇]

Kanülen- und Katheter-Fixierverband

Geeignet zur Fixierung von Jugularis-, zentralvenösen und mehrlumigen Kathetern



Schritt 1

Das Anwendungsgebiet gemäß lokaler Protokolle reinigen und gründlich trocknen.

Zuerst orangen Abschnitt **1** vom abgerundeten Ende des Verbandes entfernen.

Dieser enthält 2 Fixierstreifen und ein Datumsetikett.



Schritt 2

Die Fixierstreifen können auf den Katheterflügeln, auf dem Katheterkörper oder zur Stabilisierung des Katheterlumens angebracht werden.

Entfernen Sie anschließend das Abdeckpapier **2**



Schritt 3

Den Verband über der Punktionsstelle des Katheters positionieren und sicherstellen, dass der Verbandsschlitz nach dem Katheterlumen ausgerichtet ist.

Die Ränder des Verbandes glätten.

Die obere Trägerfolie **3** an der markierten Stelle Richtung Portzugang abziehen.



Schritt 4

Den Verbandsschlitz um die Lumen ausrichten.

Das mit **4** markierte Abdeckpapier von den Vliesabschnitten des Verbandes entfernen.

Die Vliesabschnitte können sanft zusammengezogen werden und teilweise überlappen, um eine gute Fixierung des Katheters sicherzustellen.



Schritt 5

Den Verband glätten und fixieren. Die Folie am Katheterkörper und Katheter anmodellieren, um das Risiko einer „Tunnelbildung“ und somit des Eindringens von Bakterien zu vermeiden.

Informationen auf dem Datumsetikett von Abschnitt **1** eintragen. Kleben Sie das Datumsetikett auf die Haut oder den Verband (ohne dabei den Blick auf die Punktionsstelle zu verdecken).



Entfernung

Ziehen Sie die Vliesflügel vorsichtig bis zum Anfang des Folienbereichs zurück.

Heben Sie dann eine Ecke der Folie an und überdehnen Sie diese parallel zur Haut des Patienten, während Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut und den Katheter stabilisieren.

Loslassen und Vorgang wiederholen.



Tipp: Bitte beachten Sie bei der Applikation die aktuellen Hygieneanforderungen des Robert-Koch-Instituts. Die klebefreien Griffleisten von IV3000[◇] ermöglichen die Applikation auch mit Handschuhen. Ein vorheriges Anwärmen des Verbandes in den Handflächen aktiviert den Kleber schneller. Die Haut sollte immer trocken und fettfrei sein. Keine Bodylotion oder ähnliches vorher auftragen. Für schwierige Stellen, ist die Unterstützung von SECURA[®] unseres sterilen, reizfreien Hautschutzprodukt zu empfehlen. Modellieren Sie den Verband gut an.

Dieses Poster ist hygienisch abwischbar

Bestellinformation

Abbildung	Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)	Empfohlene Indikation
Verband geschlitzt						
	66800512	11cm x 14cm	0777 6459	125 Stück (5 OP)	25 Stück	(PICC) Zentrale Katheter
	66004009	9cm x 12cm (oval)	0023 2615	500 Stück (10 OP)	50 Stück	Periphere / Zentrale Katheter

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)*

* Angaben ohne Gewähr. Die unter den Sprechstundenbedarf fallenden Produkte variieren je nach KV-Bezirk. Bitte prüfen Sie daher Ihre aktuell gültige Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

Wundmanagement Deutschland
Smith & Nephew GmbH.
Friesenweg 4 / Haus 21
D-22763 Hamburg

T +49 (0) 40 87 97 44 350
F +49 (0) 40 87 97 44 375
www.smith-nephew.de
info@smith-nephew.com

© 2021 Smith & Nephew GmbH, [◇] Markenzeichen von Smith+Nephew
AWM-AWC-18876; Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.