



ハイドロサイト[◇] 薄型

自着性ポリウレタンドレッシング

 **smith&nephew**
HYDROSITE[◇]

Self-adhesive
Polyurethane Dressing

しなやかに、こちち良く そっと、手を添えるように。

ハイドロサイトシリーズにフィット感に優れた「薄型」が登場。

ポリウレタンの2層構造で実現する"Clean Moist Healing"と、寄り添うような柔軟さ、ユニークな自着特性。患者さまのQOLを守り、治癒に適する環境を創造する製品です。


特長

やさしい粘着性

吸収層自体が自着性を持つため、適用部への貼付を容易にし、剥離時ものり残りがしません。また自着性は水分により低下するため、創部に固着せず、交換時の損傷を防ぎます。

優れた滲出液管理

高吸収性と、適度な蒸散性・水蒸気透過性を併せ持つため、液体処理能に優れています。少量～中等量まで対応でき、交換回数低減と創部周辺皮膚の浸軟防止に有効です。

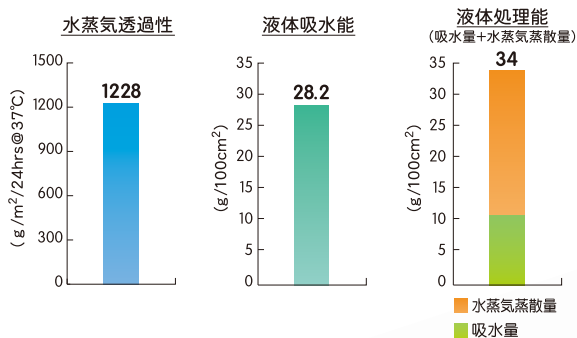

Data on Smith & Nephew

「ハイドロサイト」薄型の2層構造

ポリウレタン背面フィルム
(防水性/バクテリアバリア性)

ポリウレタンフォームマトリックス
(吸収層/創部接触層)

高吸収性の親水性ポリマー(吸収層内に分散)

柔軟性と伸縮性で、身体の曲線になじむ

薄く、柔軟で伸縮性が高いため、身体の曲線によくなじみます。屈曲部等の可動部位でも動作の妨げにならず、患者さまのQOL向上に貢献します。



仙骨部褥瘡



足趾先端部の皮膚損傷

ゲル化しない

創部へ溶解物を残さず、ドレッシング材交換時の創部洗浄等を簡便に行うことができます。

豊富な サイズバリエーション

創部の状態に合わせて
様々な用途に
使い分けることが
できます。

10×10

15×1

15×20

Clean Moist Healing


「Moist Wound Healing」と、スミス・アンド・ネフューが開発した
 ハイドロサイト®の融合により、新たな理念が確立しました。
 創を湿潤状態に、クリーンに保つことで、治癒を促進し、
 より快適な創傷治療を可能にする。
 それが私達スミス・アンド・ネフューの提唱する
 「Clean Moist Healing」です。

創部を
清潔に保つ

水、細菌などの
侵入をカット

クリーン
モイスト
ヒーリング

適度な
湿潤環境を
保持

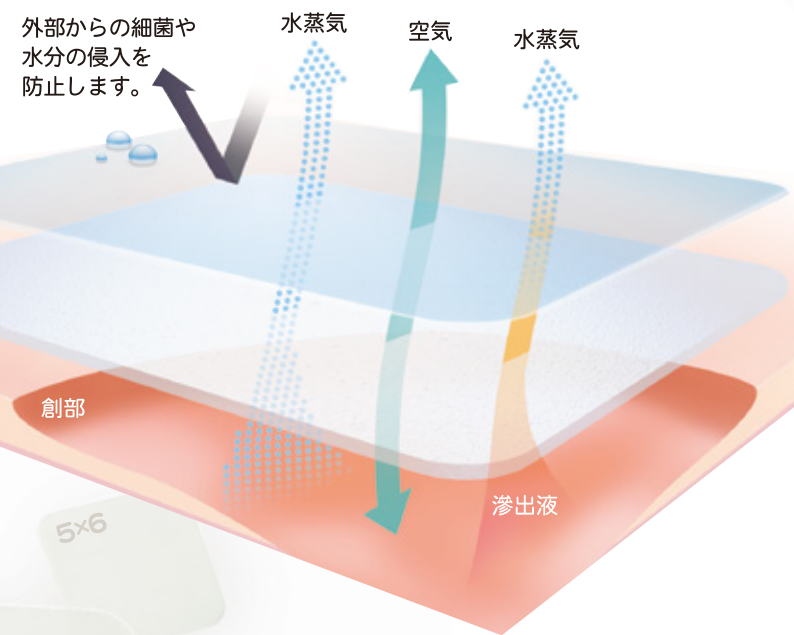

適用例

ハイドロサイト 薄型は、以下の例をはじめ、
 真皮までの急性・慢性創傷への使用に適しています。



真皮までの褥瘡



表皮剥離



外傷性皮膚欠損症



下腿潰瘍

写真提供:
 大阪府済生会吹田病院

その他: 採皮創、Ⅱ度熱傷

使用方法



①

周辺の健康な皮膚を十分に被覆
 できる、適切なサイズのドレッシ
 ング*を選択します。

※創の外縁部より2cmほど大きいもの



②

剥離紙をはがし、粘着面で創部を
 直接覆います。



③

ドレッシングの端がしわにならない
 ように創部に密着させ、必要な
 場合は周囲をテープで固定します。

注)ドレッシング上にマジックインクで、
 直接、日付等を記入すると、インクが
 滲む場合があります。



交換の目安

背面層から滲出液の吸収状態を
 観察し、漏れが起こる前に交換
 してください。
 滲出液が多く、下に貯留があり、
 漏れが予想される場合は早めに
 交換してください。

交換時の注意

創面や周囲の皮膚に負担が
 かからないよう、角からゆっ
 くりと剥がしてください。

除去が困難な場合

本品の粘着力は水分により
 低下します。角を持ち、貼付
 面に対して180°逆方向に
 そっとめくり上げ、皮膚との接触面を生理食塩液等でぬらし
 ながら、少しずつ剥がしてください。



ハイドロサイト[®] 薄型

警告

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。
 [感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行之、慎重に使用すること。]

■ 保険適用

種 類: 特定保険医療材料
 保 険 請 求 名: 皮膚欠損用創傷被覆材 ハイドロサイト 薄型
 保 険 適 用 範 囲: 真皮に至る創傷用
 適 用 期 間: 2週間を標準として特に必要と認められた場合については3週間を限度とする。
 保 険 請 求: 償還価格による。

■ 使用目的・効能効果

真皮までの創傷に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

禁忌・禁止: 再使用禁止



「使用方法」及び「使用上の注意」等の詳細については添付文書をご参照ください。

製品番号	サイズ(cm)	算定面積(cm ²)	枚/箱
66390877	5×6	30	3
66390872	5×6	30	10
66390876	10×10	100	3
66390873	10×10	100	5
66390875	15×15	225	3
66390874	15×20	300	3



管理医療機器
 承認番号: 21900BZX00491000
 局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
 JMDNコード: 11323002
 ガンマ線滅菌済

ハイドロサイト[®] シリーズ

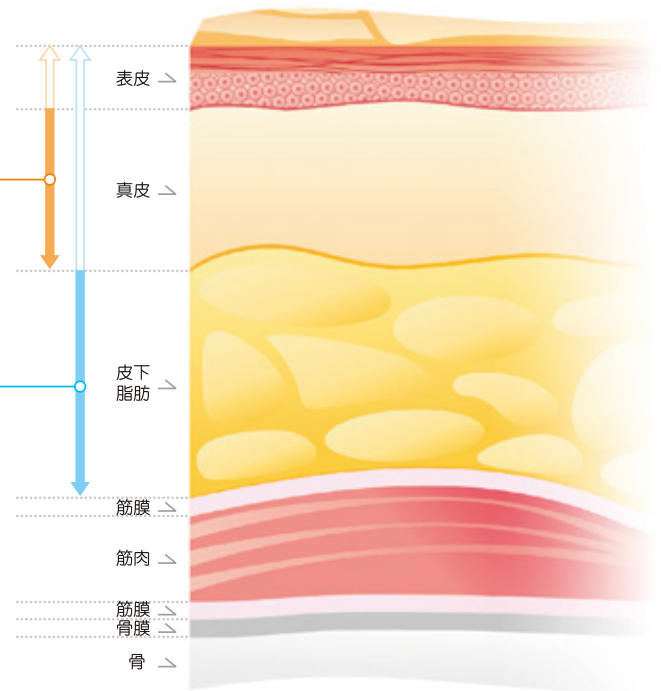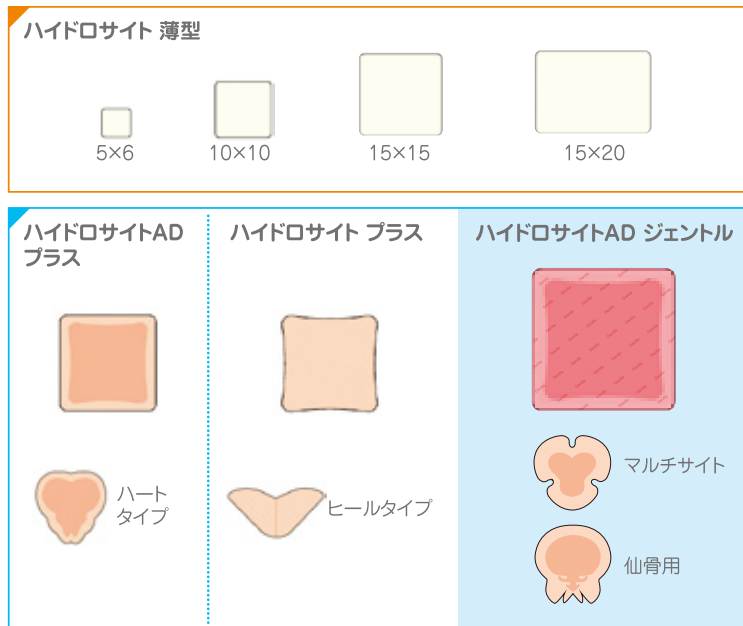

← 保険適用範囲 ← → 薬事法上の適用範囲

スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号
 TEL.03-5403-8830

- 札幌営業所 TEL.011-736-9596 FAX.011-736-9755
- 仙台営業所 TEL.022-276-6726 FAX.022-276-6652
- 東京営業所 TEL.03-5403-8915 FAX.03-5403-8916
- 名古屋営業所 TEL.052-221-1407 FAX.052-221-1420
- 大阪営業所 TEL.06-6399-3303 FAX.06-6399-3993
- 広島営業所 TEL.082-502-7322 FAX.082-502-7325
- 福岡営業所 TEL.092-452-0142 FAX.092-452-0146

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

販売店