



# 在宅でのより良い褥瘡管理に向けた、 創傷の状態による適切な湿潤環境の提案

創の滲出液の量 ○○○○～●●●●  
無し 多量

創傷の状態	目的	在宅保険適用
壊死組織がある	壊死組織の除去	適用
感染創	感染の制御	
出血	止血作用	
ポケット・深さがある創	滲出液の管理	
クリティカルコロナイゼーション	細菌負荷低減	
肉芽形成から上皮形成	滲出液の管理	適用
		適用 ※方法①の場合

その他	目的	適用外
発赤・癢痕	保護と防水	適用外
脆弱皮膚・ドライスキン	スキンケア	

### 製品群

**イントラサイトジェル システム** ○○○○  
アプリバック

ハイドロジェルドレッシング (皮下組織に至る創傷)

**カデックス外用散0.9%** ●●●●

カデックス軟膏0.9%

カデックス軟膏分包 45mg、153mg

医薬品

**メロリン** ●●●●

軟膏処置時や二次ドレッシングとして

医療用不織布 手術用被覆・保護材 (保険適用外)

**アルゴダーム トリオニック** ●●●●

シートタイプ

ローブタイプ

ドレッシング材 (皮下組織に至る創傷)

**ハイドロサイト ジェントル 銀** ●●●●

ドレッシング材 (皮下組織に至る創傷)

**ハイドロサイト ライフ** ●●●●

ドレッシング材 (皮下組織に至る創傷)

**PICO創傷治療システム**

単回使用陰圧創傷治療システム

**ハイドロサイト AD プラス** ●●●●

ドレッシング材 (皮下組織に至る創傷)

**ハイドロサイト AD ジェントル** ●●●●

ドレッシング材 (皮下組織に至る創傷)

**レプリケア ウルトラ** ●●●●

ドレッシング材 (真皮に至る創傷)

**ハイドロサイト 薄型** ●●●●

ドレッシング材 (真皮に至る創傷)

**レプリケア ET** ●●●●

ドレッシング材 (真皮に至る創傷)

**オブサイト ジェントルロール**

フィルム材

**オブサイト クイックロール 2way**

フィルム材

**セキュラ シリーズ**

化粧品

**セキュラ CL**

**セキュラ PO**

**セキュラ DC**

**セキュラ ML**

## 在宅で特定保険医療材料を 保険請求する方法

**方法①** 処置料+材料 (2週間基本、最大3週間)  
例) 重度褥瘡なら、  
重度褥瘡処置料+ハイドロサイト  
ハイドロサイトなどの創傷被覆材を医師が  
外来、在宅で直接貼付

褥瘡・熱傷・  
スキんケア  
他

「皮膚欠損創傷被覆材」が使用される処置及び処置料の例示 (参考掲載)

	範囲 包帯などで被覆すべき創傷面の広さ 又は軟膏処置を行うべき広さ (共通)	J000 創傷処置	J001 熱傷処置	J001-4 重度褥瘡処置 (1日につき)
1	100cm <sup>2</sup> 未満	52点	135点	90点
2	100cm <sup>2</sup> 以上～500cm <sup>2</sup> 未満	60点	147点	98点
3	500cm <sup>2</sup> 以上～3,000cm <sup>2</sup> 未満	90点	270点	150点

**方法②** (医療施設から供給)  
在宅療養指導管理料 (原則3週間+α)  
ハイドロサイトなどの  
創傷被覆材を  
医療施設から供給

重度褥瘡  
のみ適用  
D3-D5

**方法③** (院外処方せんで供給: 平成26年改定)  
院外  
処方せんで供給  
ハイドロサイトなどの  
創傷被覆材を  
保険薬局から供給  
材料費の保険請求も  
保険薬局から  
在宅療養指導管理料

重度褥瘡  
のみ適用  
D3-D5

## 在宅でPICO創傷治療システム※を 保険請求できる症例と保険点数

※単回使用陰圧創傷治療システム

**適応**  
既存治療に奏効しない、  
或いは奏効しないと考えられる  
難治性創傷

**保険適用となる症例**

- 外傷性裂開創(一時閉鎖が不可能なもの)
- 外科手術後離開創・開放創
- 四肢切断端開放創
- デブリードマン後の皮膚欠損創

**診療報酬と特定保険医療材料**

●処置および処置料

	範囲 局所陰圧閉鎖処置用材料で 被覆すべき創傷面の広さ	J003-2 局所陰圧閉鎖処置 (入院外)	
		初回加算点数 (初回貼付時のみ)	処置点数 (1日につき)
1	100cm <sup>2</sup> 未満	1,690点	240点
2	100cm <sup>2</sup> 以上～200cm <sup>2</sup> 未満	2,650点	270点
3	200cm <sup>2</sup> 以下	3,300点	330点

※入院の場合には点数が異なりますのでお問合せください

●対象となる特定保険医療材料と償還価格

陰圧創傷治療用カートリッジ	19,800円
局所陰圧閉鎖処置用材料	18円/cm <sup>2</sup>

陰圧創傷治療用  
カートリッジ  
PICO陰圧維持管理装置

局所陰圧閉鎖処置用  
材料  
PICOドレッシング

上記は令和4年度診療報酬改訂の情報に基づき作成しています。該当製品のご使用にあたっては最新の情報をご確認ください。参考:厚生労働省 診療報酬関連情報  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iryuuhoken/newpage\\_21053.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuuhoken/newpage_21053.html)

# 保険適用または薬価基準収載品 ※保険適用には条件がございます。

製品番号	サイズ (cm)	タイプ	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66929362	5×5	シートタイプ	25	10	2,500		
66929361	9.5×9.5	シートタイプ	90.25	10	9,025		
66929360	10×20	シートタイプ	200	10	20,000		
66929363	30cm,2g	ロープタイプ	158	6	9,480		

製品番号	サイズ (g)	個 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
7308	8	10	2,800		
7311	15	10	5,250		
7313	25	10	8,750		

製品番号	容量 (g)	本・瓶 / 箱	薬価基準収載
66390186	40	1本	
66800127	100	1瓶	
66800128	500	1瓶	

製品番号	容量	1枚のサイズ (cm)	枚 / 箱
66800053	45mg	5g(4×6)	10
66800055	153mg	17g(8×10)	3

製品番号	容量 (g)	本・瓶 / 箱
66800014	50	1瓶

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66390877	5×6	30	3	540		
66390872	5×6	30	10	1,800		
66390876	10×10	100	3	1,800		
66390873	10×10	100	5	3,000		
66390875	15×15	225	3	4,050		
66390874	15×20	300	3	5,400		

製品番号	サイズ (cm)	パッド部サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66800538	7.5×7.5	5×5	25	10	2,500		
66800539	10×10	7.5×7.5	56.25	10	5,625		
66800540	12.5×12.5	10×10	100	10	10,000		
66800541	17.5×17.5	15×15	225	10	22,500		
66800900	10×20	7×17	119	10	11,900		

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66800959	17.1×17.9 (マルチサイト)	99.94	10	9,994		

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66800898	17.1×16.8 (仙骨用小)	96.33	10	9,633		
66801031	21.6×23 (仙骨用大)	182	10	18,200		

製品番号	サイズ (cm)	パッド部サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66800674	7.5×7.5	5×5	25	10	2,500		
66800675	12.5×12.5	10×10	100	10	10,000		
66800688	7.5×7.5	5×5	25	3	750		
66800689	12.5×12.5	10×10	100	3	3,000		

製品番号	サイズ (cm)	パッド部サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66801380	7.5×7.5	5×5	25	10	2,500		
66801381	10×10	7.5×7.5	56.25	10	5,625		
66801382	12.5×12.5	10×10	100	10	10,000		
66801383	17.5×17.5	15×15	225	10	22,500		

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 (巻) / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66800678	5×5	25	10	2,500		
66800679	10×10	100	10	10,000		
66800681	10×20	200	10	20,000		
66800682	20×20	400	10	40,000		
66800686	5×5	25	3	750		
66800687	10×10	100	3	3,000		
66000663JA	40×70	2,800	1	28,000		

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66800684	13.5×10.5※	141.75	5	7,088		
66800691	13.5×10.5※	141.75	3	4,253		

製品番号	サイズ (cm)	パッド部サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66391068	12.9×12.9	7.6×7.6	57.76	10	5,776		
66391069	15.4×15.4	10.2×10.2	104.04	10	10,404		
66391070	21×21	15.4×15.4	237.16	10	23,716		

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66391304	25×25	242.73	5	12,137		

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66391306	17.2×17.5	96.33	10	9,633		
66391307	21.6×23	182.25	10	18,225		

製品番号	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	標準価格	価格:円	保険適用
66802000	マルチサイト小 (15×20)	122c㎡	39,140		
66802001	マルチサイト大 (20×25)	248c㎡	43,750		
66802002	10×20	5.6×15	33,240		
66802003	10×30	5.6×25	39,140		
66802004	10×40	5.6×35	39,140		
66802005	15×15	10×10	39,140		
66802006	15×20	10×15	39,140		
66802007	15×30	10×25	43,750		
66802008	20×20	15×15	43,750		
66802009	25×25	20×20	43,750		

※陰圧維持管理装置1個、PICOドレッシング2枚、単三アルカリ電池2本、固定フィルムが入っています。

製品番号	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	標準価格	価格:円	保険適用
66802020	マルチサイト小 (15×20)	122c㎡	12,200		
66802021	マルチサイト大 (20×25)	248c㎡	24,800		
66802022	10×20	5.6×15	8,400		
66802023	10×30	5.6×25	14,000		
66802024	10×40	5.6×35	19,600		
66802025	15×15	10×10	10,000		
66802026	15×20	10×15	15,000		
66802027	15×30	10×25	25,000		
66802028	20×20	15×15	22,500		
66802029	25×25	20×20	40,000		

※PICOドレッシングの5枚パックです。

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66801612	5×7	35	10	2,100		
66801615	10×10	100	10	6,000		

製品番号	サイズ (cm)	保険算定面積 (c㎡)	枚 / 箱	標準価格	価格:円	保険適用
66000434	10×10	100	10	10,000		

ヨウ素含有軟膏、ヨウ素含有外用散、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器のご利用にあたっては、添付文書をよく読み、使用方法・使用上の注意を守って正しくお使いください。

薬価及び償還価格を除く標準価格には別途消費税が加算されます。

在宅における褥瘡・創傷の治療に携わるみなさまのための情報を弊社ホームページに掲載しています。下記より、ご確認ください。  
診療報酬・保険などに関する詳しい情報や資材、患者ガイドブックなどもございます。


償還や保険について



在宅医療における創傷被覆材



在宅医療における局所陰圧閉鎖療法

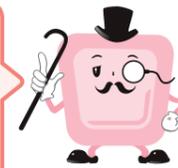

## 患者様でもご購入いただける製品 ※保険適用はございません

### 軟膏処置時や二次ドレッシングとして使用する三層構造の高機能ガーゼ

創部に固着しにくい吸収性ガーゼ

#### メロリン<sup>◇</sup>


一般医療機器  
医療用不織布  
JMDNコード:34655000  
一般医療機器  
手術用被覆・保護材  
JMDNコード:34654000  
届出番号  
メロリン  
13B1X10222WC0006  
メロリン(未滅菌)  
13B1X10222WC0005

ガーゼより吸収量が高い  
コットン/  
ポリエステル繊維

創部に固着しにくい  
非固着性  
ポリエステルフィルム



水分や汚れが染み込みにくい  
撥水不織布

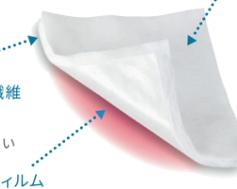

製品番号	サイズ (cm)	枚 / 箱	標準価格	価格:円
66974932	5×5	25	820	
66974933	10×10	10	690	
66974940	5×5	100	2,550	
66974941	10×10	100	5,100	
66974939	10×20	100	8,670	

製品番号	サイズ (cm)	枚 / 箱	標準価格	価格:円
66974942	10×10	150	5,360	
66974943	10×20	75	5,360	
66974944	20×30	25	5,100	

製品番号	サイズ (cm)	巻 / 箱	標準価格
66974930	50×700 (ロールタイプ)	1	8,980

### 皮膚が脆弱な方のケアに

シリコーンゲル粘着剤を採用したロールフィルム

#### オプサイト<sup>◇</sup> ジェントルロール

シリコーンゲル粘着剤が皮膚に密着するので、交換時の剥離刺激による疼痛やスキントラブルを軽減します。

衛生材料

製品番号	サイズ	巻 / 箱	標準価格	価格:円
66801195	2.5cm×5m	1	1,700	
66801196	5cm×5m	1	3,300	
66801197	10cm×5m	1	3,900	

### 固定フィルムに最適

手袋装着時も操作しやすいロールフィルム

#### オプサイト クイックロール2way

外部からの水や排泄物、バクテリアの侵入を防ぎ、優れた水蒸気透過性で皮膚のムレを予防します。

衛生材料

製品番号	サイズ	巻 / 箱	標準価格	価格:円
66800339	5cm×12m	1	3,060	
66800340	10cm×12m	1	5,310	
66800341	15cm×12m	1	7,140	


### 失禁等からの汚染予防や保湿によるスキンケア

#### セキュラ<sup>◇</sup> シリーズ

<p>洗淨</p> <p>肌と同じ弱酸性</p> <p>汚れをやさしく手早く落とすスプレー式。</p> <p>弱酸性洗浄料</p> <p><b>セキュラ CL</b></p> <p>化粧品</p> <p>容量 (mL)</p> <p>本 / 箱</p> <p>標準価格</p> <p>59430800 118 1 1,230</p> <p>59430900 236 1 1,640</p>	<p>保護 保湿</p> <p>撥水性の被膜により皮膚をまもります。</p> <p>撥水性ジェル</p> <p><b>セキュラ PO</b></p> <p>化粧品</p> <p>容量 (g)</p> <p>本 / 箱</p> <p>標準価格</p> <p>59431500 70 1 1,640</p> <p>59431600 159 1 2,150</p>	<p>保湿 保護</p> <p>うるおいを与えて皮膚を保護。撥水効果も備えます。</p> <p>保湿クリーム</p> <p><b>セキュラ DC</b></p> <p>化粧品</p> <p>容量 (g)</p> <p>本 / 箱</p> <p>標準価格</p> <p>59432200 114 1 2,350</p>	<p>保湿</p> <p>無香料 塗った上からテープも貼付可能</p> <p>全身の皮膚を乾燥からまもります。</p> <p>保湿ローション</p> <p><b>セキュラ ML</b></p> <p>化粧品</p> <p>容量 (mL)</p> <p>本 / 箱</p> <p>標準価格</p> <p>59433400 236 1 1,230</p> <p>66800015 60 1 500</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



患者様がご購入いただける製品(保険適用外)とその購入先をご案内しています。

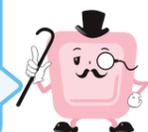

スミス・アンド・ニューフェーズ株式会社 ウンドマネジメント事業部

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号 TEL.03-5403-8830

<http://www.smith-nephew.com/japan/>

◇Trademark of Smith+Nephew DESIGN-R®は日本褥瘡学会の登録商標です © 2016-2022 Smith+Nephew